

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИИ
ООО «Полимертест» СПб

Генеральный директор
ООО «АКТИВ МЕДИКАЛ ГРУПП»

Тихомирова Т.И.

Костин С.Г.

« » 2011 г.

2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Светоотверждаемый герметик для запечатывания фиссур Seal.it

Seal.it – это светоотверждаемый герметик для фиссур, предназначенный для предотвращения кариеса. Имеет отличные характеристики прочности адгезии, низкой полимерной усадки, высокую стойкость к истиранию и подходящую вязкость благодаря нано частицам.

Область применения.

Герметик для запечатывания фиссур с целью предотвращения кариеса.

Методика использования.

1. Подготовка полости, чистка и сушка.
2. Нанесение соответствующего количества геля для травления FineEtch на эмалевую поверхность, предназначенную для запечатывания.
3. После промывания водой и сушки зубов, нанести Seal.it.
4. Полимеризация 20 сек.

Упаковка.

Seal.it : 1.2 мл x 2 шпр. насадки.

Меры предосторожности :

1. Seal.it. Используется только для работы во рту.
2. Избегать контакта с глазами.
3. В случае контакта с кожей или глазами, промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу.
4. Не используйте Seal.it с истекшим сроком годности.
5. Только для использования в стоматологической практике.

Хранение.

1. Избегать высокой температуры и яркого света.
2. Закрывать колпачок сразу после использования.
3. Хранить в сухом и прохладном месте.
4. Срок годности – 2 года с даты производства.

Побочные эффекты.

В редких случаях Seal.it может вызвать сенсibilизацию у гиперчувствительных пациентов к какому-либо из компонентов материала. В этом случае прекратить использование материала Seal.it у данного пациента.