

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Диакомс»



М.И. Сигалова

« 29 » июля 2022 г.

СТОЛ МАНИПУЛЯТОРНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ

СМП – «Диакомс»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.061 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	взаим. №	подп. и дата

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Лист
1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Технические характеристики.....	5
5. Условия эксплуатации.....	5
6. Техническое обслуживание.....	6
7. Транспортирование и хранение.....	6
8. Свидетельство о приемке.....	7
9. Свидетельство об упаковке.....	7
10. Гарантии изготовителя.....	8

					АУКС.942819.061 ПС						
	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	Стол манипуляторный перевязочный СМП – «Диаконс» Паспорт			<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	
<i>Разработал</i>	Никитина									2	8
<i>Проверил</i>	Зуенков										
<i>Нач. отдела</i>											
<i>Утвердил</i>	Зуенков										

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние стола манипуляторного перевязочного СМП – «Диакомс» (в дальнейшем – стол) зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Настоящие технические условия распространяются на стол манипуляторный перевязочный СМП – «ДИАКОМС» (Рис.1) (в дальнейшем – стол).

Показания:

- предназначен для проведения первичной диагностики и проведения широкого спектра процедур терапевтического и хирургического профиля.

Область применения:

- оснащение врачебных, смотровых кабинетов, перевязочных в лечебных лечебно-профилактических учреждениях терапевтического и хирургического профиля.

Возможные побочные действия при использовании:

- чрезмерно высокая нагрузка на медицинское изделие может привести к его поломки и нанесению ущерба здоровью. Нагрузка на медицинское изделие не более 200 кг.

Условия применения медицинского изделия:

- применяется для использования в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

2.2 Конструктивно стол представляет собой ложе, установленное на четыре колесные опоры. Две колесные опоры по диагонали имеют тормозные устройства.

2.3 Ложе стола имеет подголовник с изменяемым углом наклона, два подлокотника, которые имеют регулировку по высоте, перемещаются вдоль ложа, и вращаются вокруг своей оси.

2.4 В столе установлен покупной гидравлический подъемник с двумя боковыми педалями.

					АУКС.942819.061 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в стол приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АУКС.942819.061	Стол манипуляторный перевязочный СМП – «ДИАКОМС»	1
АУКС.301560.020	Подлокотник	2
АУКС.301.600.001	Кронштейн	2
АУКС.943221.010	Зажим	4
АУКС.942819.061 ПС	Паспорт	1



Рис.1

					АУКС.942819.061 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры стола в мм: длина – 2000, ширина – 600, высота – 450...930.
- 4.2 Масса изделия – 80 кг.
- 4.3 Допустимая равномерная нагрузка – до 200 кг.
- 4.4 Угол наклона подголовника: 0°, 15°, 30°, 45°.
- 4.5 Высота подъема подлокотников 0...180 мм
- 4.6 Длина перемещения подлокотников в горизонтالي 400 мм
- 4.7 Колеса стола имеют диаметром 100 мм. Два колеса по диагонали имеют тормозные устройства. Все колеса стола должны быть ориентирующиеся.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Транспортировка стола может осуществляться одним человеком.
- 5.2 Для фиксации положения стола следует поставить на тормоз обе колесные опоры с тормозным устройством.
- 5.3 Угол наклона подголовника изменяется вручную, при помощи двух растоматов. Для осуществления изменения угла наклона подголовника необходимо рукой повернуть подголовник на нужный угол и отпустить руку. Для возвращения подголовника в исходное положение необходимо рукой повернуть подголовник на максимальный угол и отпустить его.
- 5.4 Для перемещении подлокотников в горизонтали необходимо отвернуть винт-фиксатор, переместить подлокотник и зафиксировать его винтом-фиксатором.
- 5.5 Для регулировки высоты подлокотников необходимо отвернуть винт-фиксатор, установить ручку на необходимую высоту и зафиксировать в этом положении.
- 5.6. Для подъема стола необходимо поступательным движением с верху вниз нажимать на педаль гидравлического подъемника, а для опускания необходимо нажать педаль в направлении – верх и удерживать ее до опускания стола на необходимую высоту.

					АУКС.942819.061 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Стол должен подвергаться регулярному внешнему осмотру.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности, устранение неисправности должно проводиться представителями специализированной организации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Стол допускается транспортировать в эксплуатационном положении всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.3 Хранение стола должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.061 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол манипуляторный перевязочный СМП – «Диаконс»
зав. № _____,
признан годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол манипуляторный перевязочный СМП – «Диаконс»
зав. № _____,
упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
Подпись

М.П.

Стол манипуляторный перевязочный СМП – «Диаконс»
после упаковки принял _____
Подпись

					АУКС.942819.061 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в стол.

					АУКС.942819.061 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

Пронумеровано и

прошито 8 лист

Ген. директор ООО «Диакомс»

М.И. Сигалова

