

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО ТПК «ДИОН»

 Ишунина Н.А.

«14» октября 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых
материалов по ТУ 14.12.30-003-21547820-2021**

наименование медицинского изделия

(Редакция 2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов по ТУ 14.12.30-003-21547820-2021

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов по ТУ 14.12.30-003-21547820-2021.

2 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

См. Приложение №1 настоящей инструкции.

3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекты предназначены для применения в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

4 НАЗНАЧЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначен для применения в целях предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и медицинским персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи.

5 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия предназначены для применения взамен хлопчатобумажной одежды и белья, в целях предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентом и медицинским персоналом, во время осмотра пациента и/или проведения медицинских процедур.

6 КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия однократного применения.

7 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Медицинские работники, пациенты.

8 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие при эксплуатации должно быть устойчиво к воздействию температуры от + 10°C до + 35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

9 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений;
- индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия;
- упаковка находится во влажном состоянии;
- упаковка не герметична.

10 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Не допускается:

- повторное использование изделий;
- подвергать комплекты процедуре стерилизации перед применением;
- применять комплекты в ходе хирургических и других инвазивных процедур.

11 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

12 ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ И ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вид контакта с организмом человека: кратковременный контакт с неповрежденной кожей. Дополнительно трусы-шорты процедурные (с отверстием), трусы процедурные женские, трусы процедурные мужские имеют кратковременный контакт с неповрежденными

слизистыми оболочками прямой кишки, влагалища и/или пениса.

Время использования: в течение времени выполнения манипуляций/процедур или раньше до загрязнения.

13 ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

13.1 Перед использованием по назначению комплекты освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки.

13.2 При отсутствии нарушений (п.9 настоящей инструкции), потребительскую упаковку вскрывают, изделия извлекаются и расправляются для дальнейшего применения.

13.3 Порядок применения изделия см. в таблице ниже.

№	Наименование изделия	Порядок применения изделия
1.	Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки); Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки); Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки); Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки); Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки); Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)	Надеть изделие на рабочую одежду медицинского персонала в следующем порядке: 1.Продеть руки в рукава, расправить изделие по фигуре. 2.Зафиксировать изделие при помощи завязок, кнопок или липучек в местах их расположения.
2.	Куртка защитная (рукава на резинке или манжете); Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете).	Надеть изделие на рабочую одежду медицинского персонала в следующем порядке: 1.Продеть руки в рукава, расправить изделие по фигуре и надеть капюшон. 2.Застегнуть изделие спереди на молнию.
3.	Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с пайетой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроенными бахилами или собран на резинку)); Комбинезон ламинированный (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку); Комбинезон медицинский (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)	Надеть изделие на рабочую одежду медицинского персонала в следующем порядке: 1.По очереди поместить ноги в штанины нижней части изделия. 2.Продеть руки в рукава, расправить изделие по фигуре и надеть капюшон. 3.Застегнуть изделие спереди на молнию или липучку.
4.	Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без); Фартук ламинированный 2 (с усиленной	Надеть изделие на рабочую одежду медицинского персонала в следующем

№	Наименование изделия	Порядок применения изделия
	защитой или без); Фартук ламинированный с рукавами	порядке: 1.Просунуть голову через отверстие для головы. 2.Завести поочередно руки в рукава (для варианта исполнения с рукавами). 3.Зафиксировать изделие на завязки.
5.	Нарукавники медицинские	Надеть по очереди поверх рукавов рабочей одежды медицинского персонала.
6.	Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки); Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки)	Изделие должно закрывать волосистую часть головы медицинского персонала. Для плотного прилегания к голове фиксируется на резинку или завязку.
7.	Шапочка-берет (тип 1); Шапочка-берет (тип 2)	Изделие должно закрывать волосистую часть головы медицинского персонала или пациента. Для плотного прилегания к голове фиксируется на резинку.
8.	Накидка для посетителей	Накинуть накидку на спину поверх верхней одежды, завязки должны быть спереди. Завязать /зафиксировать завязки в области горловины между собой.
9.	Халат для пациента	Изделие надевается пациентом взамен одежды в следующем порядке: 1.Завести поочередно руки в рукава, надеть изделие и расправить его по фигуре. 2.Зафиксировать изделие на запах при помощи завязок в области талии.
10.	Рубашка для пациентов (тип 1); Рубашка для пациентов (тип 2); Туника смотровая, тип 1; Туника смотровая, тип 2; Туника процедурная	Завести поочередно руки в рукава, затем через горловину надеть само изделие на тело и расправить его по фигуре.
11.	Брюки процедурные; Брюки смотровые;	Изделие надевается пациентом взамен одежды в следующем порядке: 1.Завести ногу, аккуратно отпуская брючину так, так чтобы она не касалась пола. 2.Зафиксировать изделие на резинку в области талии.
12.	Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете); Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете)	Изделие надевается медицинским персоналом взамен одежды или на рабочую одежду в следующем порядке: 1.Завести ногу, аккуратно отпуская брючину так, так чтобы она не касалась пола. 2.Зафиксировать изделие на резинку в области талии.
13.	Трусы-шорты процедурные (с отверстием); Трусы процедурные женские; Трусы процедурные мужские	Надеть поверх и/или взамен нижнего белья (в зависимости от рекомендаций медицинского персонала пациенту).
14.	Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку); Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки); Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки); Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку); Бахилы	Взять бахилы, развернуть и по очереди надеть на ноги поверх обуви. Для предотвращения сползания бахилы фиксируются завязками сверху и/или резинкой.

№	Наименование изделия	Порядок применения изделия
	изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки)	
15.	Наволочка; Пододеяльник	Надеть изделия на постельные принадлежности через технологические отверстия.
16.	Простыня медицинская; Простыня медицинская ламинированная; Простыня малая; Простыня малая ламинированная; Простыня с липким краем; Простыня малая впитывающая	Изделия предназначены для покрытия матраса кровати, кушетки, и/или участка тела пациента.
17.	Салфетка медицинская впитывающая	Применяется для обтирания или высушивания неповрежденной кожи пациентов (изделие не используется для обработки ран), очищения предметов в помещении (например, в случае разлива жидкости).
18.	Чехол процедурный	Применяется для покрытия матраса кровати, кушетки.

14 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14.1 В состав комплектов входят изделия контурной и прямоугольной формы, изготовленные из нетканых полотен типа Спанбонд, СМС, СММС, Спанлейс, Ламинированный спанбонд, АМ ламинированный. Общий вид изделий, входящих в Комплекты, представлен в **Приложении Б (рис.Б.1 – рис.Б.48)**.

14.2 Конструктивное исполнение изделий

14.2.1 *Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки)* представляет собой изделие из нетканого материала, с центральной застёжкой на четырёх кнопках или на контактную ленту велкро (липучку). Тип рукава: реглан, длинный, собранный на манжету или резинку. Горловина обработана отложным воротником с цельнокросной стойкой.

14.2.2 *Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)* представляет собой изделие из нетканого материала, распахной со стороны спинки, с усиленной защитной зоной рукавов и переда. По линии талии халат фиксируется на 2 или 4 завязки. Тип рукава: реглан, длинный цельный, собранный на манжету или резинку. Горловина обработана кантом – фиксируется на контактную ленту велкро (липучку) или две завязки.

14.2.3 *Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава ¾ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)* представляет собой изделие из нетканого материала, распахной со стороны спинки, с усиленной защитной зоной рукава ¾ и переда. По линии талии халат фиксируется на 2 или 4 завязки. Тип рукава: реглан, длинный со вставкой три четверти, собранный на манжету или резинку. Горловина обработана кантом – фиксируется на контактную ленту велкро (липучку) или две завязки.

14.2.4 *Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки)* представляет собой изделие из нетканого материала, распахной со стороны спинки, с усиленной защитной зоной переда и спинки. По линии талии халат фиксируется на 4 завязки. Тип рукава: реглан, длинный цельный, собранный на манжету. Горловина обработана кантом – фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).

14.2.5 *Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки)* представляет собой изделие из нетканого материала, распахной со стороны спинки, с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете. По линии талии халат фиксируется на 4 завязки. Тип рукава: реглан, длинный цельный, собранный на манжету. Горловина обработана кантом – фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).

14.2.6 *Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)* представляет собой изделие из нетканого материала, распахной со стороны спинки. По линии талии халат фиксируется на 2 или 4 завязки. Тип рукава: реглан, длинный, собранный на манжету или резинку. Обработка горловины:

- горловина обработана кантом, фиксируется на контактную ленту (велкро), или
- горловина обработана кантом, фиксируется на две завязки, или
- горловина обработана воротником-стойкой с кантом, фиксируется на две завязки, или
- горловина обработана воротником-стойкой, фиксируется на контактную ленту (велкро).

14.2.7 *Комбинезон изолирующий (застёжка на молнию спереди (с планкой-пластроном с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроенными бахилами или собран на резинку))* представляет собой изделие из нетканого полотна, с застёжкой на тесьму - молнию в центральной части переда, закрытой проклеенной планкой-пластроном без (или с) проклеенной патой, для дополнительной фиксации планки. Тип рукава: цельнокроеный длинный, собранный на резинку или манжету. Комбинезон имеет втачной капюшон из двух деталей, собранный на резинку по лицевому вырезу. Комбинезон на уровне талии (со спины) фиксируется на резинку. Низ брюк со встроенными бахилами или собран на резинку. Все швы проклеены изоляционной лентой.

14.2.8 *Комбинезон ламинированный (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)* представляет собой изделие из ламинированного нетканого полотна, с застёжкой на тесьму - молнию в центральной части переда закрытой отлетной или фиксирующейся на контактную ленту велкро (липучку) планкой-пластроном. Тип рукава: длинный, цельнокроеный собранный на резинку или манжету. Комбинезон имеет втачной капюшон из трёх деталей, собранный на резинку по лицевому вырезу. Комбинезон на уровне талии (со спины) фиксируется на резинку. Низ брюк собран на резинку.

14.2.9 *Комбинезон медицинский (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)* представляет собой изделие из нетканого полотна, с застёжкой на тесьму - молнию в центральной части переда, закрытой отлетной или фиксирующейся на контактную ленту велкро (липучку) планкой-пластроном. Тип рукава: длинный втачной, собранный на резинку или манжету. Комбинезон имеет втачной капюшон из двух деталей, собранный на резинку по лицевому вырезу. Комбинезон на уровне талии (со спины) фиксируется на резинку. Низ брюк собран на резинку.

14.2.10 *Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки)* представляет собой изделие с (или без) впитывающей полосой, с пелериной (или без), фиксируется за счёт резинки или завязки.

14.2.11 *Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки)* представляет собой изделие без отворота с фиксацией за счёт резинки или завязок, или с отворотом с (или без) впитывающей полосы с фиксацией на завязках.

14.2.12 *Шапочка-берет (тип 1)* представляет собой изделие, состоящее из одной детали, собрано на резинку по краю вдоль окружности. Края обработаны краёобмёточной строчкой.

14.2.13 *Шапочка-берет (тип 2)* представляет собой изделие, состоящее из двух деталей (тулье-дно), собрано на резинку по краю вдоль окружности. Края обработаны краёобмёточной строчкой.

14.2.14 *Трусы-шорты процедурные (с отверстием)* на уровне талии собраны на резинку. Низ трусов не обработан. Отверстие (разрез) не обработано.

14.2.15 *Трусы процедурные женские* на уровне талии собраны на резинку. Отверстие для ног собрано на резинку.

14.2.16 *Трусы процедурные мужские* на уровне талии собраны на резинку. Отверстие для ног собрано на резинку.

14.2.17 *Нарукавники медицинские* должны быть одношовными, верх и низ собран на резинку. Края не обработаны.

14.2.18 *Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку)* представляют собой изделия из нетканого материала, низкие, из двух цельнокроеных боковых деталей. Подошва цельнокроеная с боковыми частями или отрезная двойная. Бахила фиксируется на ноге за счёт стягивания резинки по верхнему срезу бахилы.

14.2.19 *Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки)* представляют собой изделия из нетканого материала, высокие, из двух цельнокроеных деталей, включающих боковые части. Подошва цельнокроеная с боковыми частями или отрезная двойная. Тип фиксации бахил на ноге:

- за счёт стягивания резинки по верхнему срезу бахилы;
- за счёт 2 завязок у верхнего среза бахилы;
- за счёт стягивания резинки по верхнему срезу бахилы и 2 завязок (для высоких бахил);
- за счёт 2 завязок у верхнего среза бахилы и 2 завязок на уровне щиколотки.

14.2.20 *Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки)* представляют собой изделия из нетканого или ламинированного нетканого

материала, высокие, из двух цельнокроёных деталей, включающих боковые части. Подошва цельнокроёная с боковыми частями или отрезная двойная. Тип фиксации бахил на ноге:

– за счёт стягивания резинки по верхнему срезу бахилы;

– за счёт 2 завязок у верхнего среза бахилы;

– за счёт стягивания резинки по верхнему срезу бахилы и 2 завязок;

– за счёт 2 завязок у верхнего среза бахилы и 2 завязок на уровне шиколотки.

14.2.21 *Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку)* представляют собой изделия из нетканого материала, низкие, из двух цельнокроёных деталей, включающих боковые части, с цельнокроёной подошвой, фиксируются на ноге за счёт стягивания резинки по верхнему срезу. Все швы проклеены изоляционной лентой.

14.2.22 *Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки)* представляют собой изделия из нетканого материала, высокие, из двух цельнокроёных деталей, включающих боковые части, с отрезной двойной подошвой, фиксируются на ноге за счёт стягивания резинки по верхнему срезу и 2-х завязок. Все швы проклеены изоляционной лентой.

14.2.23 *Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без)* представляет собой изделие из ламинированного нетканого материала. Цельнокроёный, с отверстием для головы и двумя завязками.

14.2.24 *Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без)* представляет собой изделие из ламинированного нетканого материала. Цельнокроёный, обтачной кантом с двумя завязками на уровне талии и петлей, фиксирующейся на шее.

14.2.25 *Фартук ламинированный с рукавами* представляет собой изделие из ламинированного нетканого материала. Цельнокроёный, с отверстием для головы и двумя завязками. Тип рукава: длинный цельнокроёный, одношовный, низ рукава собран на резинку с (или без) дополнительной фиксацией рукава в виде эластичной петли.

14.2.26 *Туника смотровая, тип 1* представляет собой изделие из нетканого полотна, с отрезным передом на уровне груди, без плечевых швов, без застёжки, с V-образной горловиной на запах. Тип рукава втачной, короткий.

14.2.27 *Туника смотровая, тип 2* представляет собой изделие из нетканого полотна, с отрезным передом на уровне груди, без плечевых швов, без застёжки, с V-образной горловиной на запах. Тип рукава втачной, длинный с (или без) сборки на резинку по низу.

14.2.28 *Брюки смотровые* представляют собой изделие из нетканого полотна, прямой формы, по линии талии собранные на резинку.

14.2.29 *Туника процедурная* представляет собой изделие из нетканого полотна, без застёжки, отрезная по линии груди, с фигурным вырезом горловины на запах. Тип рукава: длинный, цельнокроёный.

14.2.30 *Брюки процедурные* представляют собой изделие из нетканого полотна, с цельнокроёными бахилами, по линии талии собранные на резинку.

14.2.31 *Куртка защитная (рукава на резинке или манжете)* представляет собой изделие из нетканого полотна, с застёжкой на тесьму молния в центральной части переда, закрытой отлетной или фиксирующейся на контактную ленту (велкро) планкой-пластроном. Тип рукава: длинный втачной, собранный на резинку или манжету. Куртка имеет втачной капюшон из двух деталей, собранный на резинку по лицевому вырезу. Низ куртки собран на резинку.

14.2.32 *Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете)* представляют собой изделие из нетканого полотна, по линии талии собранные на резинку. Низ брюк собран на резинку или манжету.

14.2.33 *Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете)* представляет собой изделие из нетканого полотна, с застёжкой на тесьму молнию в центральной части переда, закрытой проклеенной планкой-пластроном без (или с) проклеенной патой, для дополнительной фиксации планки. Тип рукава: цельнокроёный длинный, собранный на резинку или манжету. Куртка имеет втачной капюшон из двух деталей, собранный на резинку по лицевому вырезу. Низ куртки собран на резинку. Все швы проклеены водоотталкивающей лентой для герметизации швов.

14.2.34 *Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете)* представляют собой изделие из нетканого полотна, по линии талии собранные на резинку. Низ брюк собран на резинку или манжету. Все швы проклеены водоотталкивающей лентой для герметизации швов.

14.2.35 *Накидка для посетителей* представляет собой изделие из двух деталей (передней и задней части) из нетканого материала, распахное со стороны переда, без застёжки, без рукавов. Горловина обработана кантом, со стороны переда фиксируется на завязки.

14.2.36 *Халат для пациента* представляет собой изделие из нетканого материала, распахной со стороны переда, без застёжки, без рукавов. По линии талии халат фиксируется на запах за счёт завязок. Горловина V-образной формы.

14.2.37 *Рубашка для пациентов (тип 1)* представляет собой цельнокросное изделие из нетканого материала. Рубашка с завязками распашная по левой стороне, фиксируется на завязки по линии плеча и левой боковой линии. По правой стороне плечевой шов. Без рукавов, горловина О-образной формы.

14.2.38 *Рубашка для пациентов (тип 2)* представляет собой цельнокросное изделие из нетканого материала. Рубашка без завязок не распашная, без застёжки, с плечевыми швами и со средним швом на спинке. Без рукавов, горловина О-образной формы.

14.2.39 *Простыня медицинская* представляет собой изделие прямоугольной формы из нетканого материала, цельнокросное, края не обработаны.

14.2.40 *Простыня медицинская ламинированная* представляет собой изделие прямоугольной формы из нетканого материала, цельнокросное, края не обработаны.

14.2.41 *Простыня малая* представляет собой изделие прямоугольной или квадратной формы из нетканого материала, цельнокросное, края не обработаны.

14.2.42 *Простыня малая ламинированная* представляет собой изделие прямоугольной или квадратной формы из нетканого материала, цельнокросное, края не обработаны.

14.2.43 *Простыня малая впитывающая* представляет собой изделие прямоугольной или квадратной формы из нетканого материала, цельнокросное, края не обработаны.

14.2.44 *Простыня с липким краем* представляет собой изделие прямоугольной формы с липким краем по длине простыни. Липкий край покрыт защитной полоской бумаги.

14.2.45 *Наволочка* представляет собой цельнокросный кусок нижнего и верхнего полотна из нетканого материала, с переходом нижнего полотна на внешнюю сторону наволочки для образования клапана.

14.2.46 *Пододельник* представляет собой цельнокросный кусок нижнего и верхнего полотна из нетканого материала, с боковыми швами и прорезью в верхнем полотне для образования отверстия для одеяла.

14.2.47 *Чехол процедурный* представляет собой цельнокросный кусок из нетканого материала, по широкому краю собранный на резинку.

14.2.48 *Салфетка медицинская впитывающая* представляет собой изделие квадратной формы из нетканого материала, цельнокросное, края не обработаны.

14.3 Скорость впитывания для простыни малой впитывающей и салфетки медицинской впитывающей должна быть не более 10 сек.

14.4 Поглонительная способность простыни малой впитывающей и салфетки медицинской впитывающей, при одностороннем и ограниченном контакте с жидкостью, должна быть не менее 5 г/г.

14.5 Сопротивление отслаиванию адгезивного края для простыни с липким краем от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

14.6 Изделия и части изделий из ламинированных материалов должны быть водонепроницаемыми.

14.7 Сшивание деталей изделий Комплекта осуществляется нитками хлопчатобумажными или синтетическими по ГОСТ 6309, либо ультразвуковой, либо термической сваркой (ширина шва 4 - 8 мм).

14.8 Масса брутто одного места должна быть не более 20 кг.

14.9 Основные линейные размеры изделий, входящие в состав комплектов, приведены в Приложении Б настоящей инструкции.

14.10 Общий вид изделий, входящих в состав комплектов, приведен в Приложении Б настоящей инструкции.

14.11 Масса изделий, входящих в состав комплектов, см. в Приложении В.

15 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделия поставляются в комплектах. Варианты исполнений комплектов и их состав (комплектность), согласно конструкторской документации, представлены в Приложении А.

16 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

16.1 Комплекты должны быть упакованы в потребительскую упаковку, представляющую собой герметичные полиэтиленовые пакеты, выполненные из полиэтилена марки «ПВД» по ГОСТ 32736.

16.2 Потребительские упаковки с Комплектами должны быть уложены в транспортную тару (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Транспортная тара с комплектами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Маркировка транспортной упаковки содержит следующие манипуляционные символы:

Хрупкое, обращаться осторожно	Не допускать воздействия солнечных лучей	Беречь от влаги
		

17 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества Комплектов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

17.2 Гарантийный срок годности Комплектов 5 лет со дня изготовления продукции.

18 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Комплекты выпускаются нестерильными. Стерилизация перед применением не требуется.

19 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

20 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

20.1 Изделия в упакованном виде транспортируются транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте каждого вида, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков.

20.2 Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

20.3 Хранение Комплектов у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C.

20.4 Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

21 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

21.1 Утилизация изделий в медицинских учреждениях должно осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

21.2 Использованные по назначению изделия утилизируются как отходы класса Б.

21.3 Изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются как отходы класса А.

22 СТАНДАРТЫ СООТВЕТСТВИЯ

ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023; стандарты серии ГОСТ Р 10993.

23 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговая производственная компания «ДИОН» (ООО ТПК «ДИОН»)
ИНН 7460006580

Адрес места нахождения: Россия, 454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.29, корп.МСК, лит. А7, комн. 25

Тел.: +7 (982) 347-81-74, +7 (912) 082-30-04

E-mail: dion-manager1@yandex.ru

Место производства: ООО ТПК «ДИОН», Россия, 454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.29, корп. МСК, 1 этаж (пом. №5, 6, 7, 8), 3 этаж (пом. № 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты исполнения медицинского изделия

Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов по ТУ 14.12.30-003-21547820-2021. Варианты исполнения:

1. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №1, в составе:

- 1.Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 2.Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 5 шт.
- 3.Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 4.Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 5.Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 6.Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 7.Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроенными бахилами или собран на резинку)), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 8.Комбинезон ламинированный (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 9.Комбинезон медицинский (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 10.Шапочка-шлем (с вплывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 11.Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с вплывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 12.Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный – от 1 до 5 шт.
- 13.Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 14.Трусы-шорты процедурные (с отверстием), размер: 44-60 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 15.Трусы процедурные женские, размер: 44-60 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 16.Трусы процедурные мужские, размер: 44-60 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 17.Нарукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 18.Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 5 пары (при необходимости)
- 19.Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 5 шт.
- 20.Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
- 21.Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 5 пары (при необходимости)
- 22.Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 5 пары (при необходимости)

23. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
24. Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
25. Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
26. Туника смотровая, тип 1, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
27. Туника смотровая, тип 2, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
28. Брюки смотровые, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
29. Туника процедурная, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
30. Брюки процедурные, размер: 46-50, 54-56, 58-60 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
31. Куртка защитная (рукава на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
32. Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
33. Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
34. Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
35. Накидка для посетителей, размер: универсальный – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
36. Халат для пациента, размер: 42-68 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
37. Рубашка для пациентов (тип 1), размер: 42-68 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
38. Рубашка для пациентов (тип 2), размер: 42-68 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
39. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
40. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
41. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
42. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
43. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
44. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
45. Наволочка, размер (длина x ширина), см: 70x70, 50x70, 60x60, 40x60, 50x50, 40x40 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
46. Пододеяльник, размер (длина x ширина), см: 210x180, 210x150, 200x140, 180x150, 150x120, 140x110 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
47. Чехол процедурный, размер (длина x ширина), см: 210x90, 220x100 – от 1 до 5 шт. (при необходимости)
48. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

II. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №2, в составе:

1. Туника процедурная, в следующих размерах: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 50 шт.
2. Брюки процедурные, в следующих размерах: 46-50, 54-56, 58-60 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
7. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на

резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

III. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №3, в составе:

1. Туника процедурная, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт..

3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

IV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №4, в составе:

1. Брюки процедурные, в следующих размерах: 46-50, 54-56, 58-60 — от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

V. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №5, в составе:

1. Туника смотровая, тип 1, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, или Туника смотровая, тип 2, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 50 шт.

2. Брюки смотровые, в следующих размерах: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 — от 1 до 50 шт.

3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат

изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат

изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

6. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

7. Нарукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

8. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

10. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

11. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160,

210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

12. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

13. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

14. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

15. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

16. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

VI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №6, в составе:

1. Туника смотровая, тип 1, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, или Туника смотровая, тип 2, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 50 шт.

2. Брюки смотровые, в следующих размерах: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 — от 1 до 50 шт.

3. Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроеными бахилами или собран на резинку)), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Комбинезон ламинированный (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Комбинезон медицинский (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пар. (при необходимости)

9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пар. (при необходимости)

10. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пар. (при необходимости)

11. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелеринной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

12. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук

- ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
14. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
15. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
16. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
17. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
18. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
19. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

VII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №7, в составе:

1. Туника смотровая, тип 1, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, или Туника смотровая, тип 2, размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

VIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №8, в составе:

1. Брюки смотровые, в следующих размерах: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

IX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №9, в составе:

1. Куртка защитная (рукава на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
4. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелеринной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-козырек (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер:

универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

8. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

9. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

10. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

11. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

12. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

13. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

14. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

15. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

16. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

X.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №10, в составе:

1. Куртка защитная (рукава на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XI.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №11, в составе:

1. Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XII.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №12, в составе:

1. Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XIII.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №13, в составе:

1. Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XIV.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №14, в составе:

1. Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
3. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
4. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XV.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №15, в составе:

1. Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 100 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XVI.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №16, в составе:

1. Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 100 шт
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
3. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
4. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XVII.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №17, в составе:

1. Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 100 шт.
2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой,

- тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
3. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
5. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XVIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №18, в составе:

1. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 100 шт.
2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 100 пары.
3. Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 100 шт. (при необходимости)
4. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XIX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №19, в составе:

1. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
7. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
10. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
12. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XX.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №20, в составе:

1. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт.
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
3. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
4. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Рукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
10. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
12. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXI.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №21, в составе:

1. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт.
2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
3. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с

- впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
10. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
12. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №22, в составе:

1. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
3. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
4. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелеринной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

10. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
12. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXIII.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №23, в составе:

1. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт.
2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
3. Шапочка-шлем (с впивывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впивывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Нарукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
10. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая впивывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впивывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
12. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXIV.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №24, в составе:

1. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной,

- рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт.
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
3. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
4. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
5. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
10. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
12. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXV.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №25, в составе:

1. Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроеными бахилами или собран на резинку)), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXVI.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №26, в составе:

1. Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроеными бахилами или собран на резинку)), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXVII.Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №27, в составе:

1. Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроеными бахилами или собран на резинку)), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер:

универсальный – от 1 до 50 шт.

3. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

4. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

5. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XVIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №28, в составе:

1. Комбинезон медицинский (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

7. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

8. Нарукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

9. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

10. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

11. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

12. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

13. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

14. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70,

70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

15. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXIX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №29, в составе:

1. Комбинезон медицинский (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
6. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
7. Парукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
8. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой (или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой (или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
10. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.
12. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
14. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
15. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №30, в составе:

1. Комбинезон медицинский (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от

1 до 50 шт.

2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.

3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

7. Нарукавники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

8. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

10. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

11. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

12. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

13. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

14. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

15. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №31, в составе:

1. Комбинезон ламинированный (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
7. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
8. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
9. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
10. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
11. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
12. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
13. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
14. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
15. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №32, в составе:

1. Комбинезон ламинированный (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат

изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

6. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

7. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

8. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

10. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

11. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

12. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

13. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

14. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

15. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №33, в составе:

1. Комбинезон ламинированный (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку), размер: 40-46, 48-54, 56-62, 64-70, 72-78 – от 1 до 50 шт.

2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.

3. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава $\frac{3}{4}$ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, или Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки), размер: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелерной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-копчик (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или

Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

7. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

8. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

10. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

11. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

12. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

13. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

14. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

15. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXIV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №34, в составе:

1. Халат для пациента, размер: 42-68 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №35, в составе:

1. Халат для пациента, размер: 42-68 – от 1 до 50 шт.

2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.

3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXVI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №36, в составе:

1. Халат для пациента, размер: 42-68 – от 1 до 50 шт.
2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXVII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №37, в составе:

1. Рубашка для пациентов (тип 1), размер: 42-68, или Рубашка для пациентов (тип 2), размер: 42-68 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер:

универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXVIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №38, в составе:

1. Рубашка для пациентов (тип 1), размер: 42-68, или Рубашка для пациентов (тип 2), размер: 42-68 – от 1 до 50 шт.

2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.

3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)

10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XXXIX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №39, в составе:

1. Рубашка для пациентов (тип 1), размер: 42-68, или Рубашка для пациентов (тип 2), размер: 42-68 – от 1 до 50 шт.

2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.

3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.

9. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XL. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №40, в составе:

1. Накидка для посетителей, размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

ХЛІ. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №41, в составе:

1. Накидка для посетителей, размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
2. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
9. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары. (при необходимости)
10. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

ХЛІІ. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №42, в составе:

1. Накидка для посетителей, размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
2. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
9. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №43, в составе:

1. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLIV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №44, в составе:

1. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №45, в составе:

1. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20,

10х10 – от 1 до 50 шт.

7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLVI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №46, в составе:

1. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLVII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №47, в составе:

1. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLVIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №48, в составе:

1. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

XLIX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №49, в составе:

1. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

Л. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №50, в составе:

1. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

ЛІ. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №51, в составе:

1. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

ЛІІ. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №52, в составе:

1. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №53, в составе:

1. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LIV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №54, в составе:

1. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №55, в составе:

1. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня с липким краем, размер (длина х ширина), см: 240х140, 140х110, 90х70, 80х70, 70х70 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LVI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №56, в составе:

1. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
4. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
5. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160,

210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LVII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №57, в составе:

1. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт.

3. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LVIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №58, в составе:

1. Трусы-шорты процедурные (с отверстием), размер: 44-60, или Трусы процедурные женские, размер: 44-60, или Трусы процедурные мужские, размер: 44-60 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LIX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №59, в составе:

1. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без), размер: 1, 2, 3, или Фартук ламинированный с рукавами, размер: 44-54, 56-66 – от 1 до 50 шт.

2. Простыня малая впитывающая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина x ширина), см: 20x20, 10x10 – от 1 до 50 шт.

3. Простыня малая, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

4. Простыня с липким краем, размер (длина x ширина), см: 240x140, 140x110, 90x70, 80x70, 70x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

5. Простыня малая ламинированная, размер (длина x ширина), см: 100x95, 90x70, 80x70, 70x70, 60x40, 40x40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

6. Простыня медицинская, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

7. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина x ширина), см: 330x180, 240x160, 210x150, 200x140, 200x70, 200x53, 140x110, 140x80, 110x70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)

8. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LX. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №60, в составе:

1. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №61, в составе:

1. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку), размер: 36-39, 40-46, или Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки), размер: 36-39, 40-46 – от 1 до 50 пары.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №62, в составе:

1. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки), размер: 54-62, или Шапочка-берет (тип 1), размер: универсальный, или Шапочка-берет (тип 2), размер: универсальный – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXIII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №63, в составе:

1. Наручники медицинские, размер: универсальный – от 1 до 50 пары.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXIV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №64, в составе:

1. Пододеяльник, размер (длина х ширина), см: 210х180, 210х150, 200х140, 180х150, 150х120, 140х110 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXV. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №65, в составе:

1. Наволочка, размер (длина х ширина), см: 70х70, 50х70, 60х60, 40х60, 50х50, 40х40 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXVI. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №66, в составе:

1. Чехол процедурный, размер (длина х ширина), см: 210х90, 220х100 – от 1 до 50 шт.


2. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

LXVII. Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов №67, в составе:

1. Пододульник, размер (длина х ширина), см: 210х180, 210х150, 200х140, 180х150, 150х120, 140х110 – от 1 до 50 шт.
2. Простыня медицинская, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт.
3. Наволочка, размер (длина х ширина), см: 70х70, 50х70, 60х60, 40х60, 50х50, 40х40 – от 1 до 50 шт.
4. Простыня малая впитывающая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40, или Салфетка медицинская впитывающая, размер (длина х ширина), см: 20х20, 10х10 – от 1 до 50 шт.
5. Простыня малая, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
6. Простыня малая ламинированная, размер (длина х ширина), см: 100х95, 90х70, 80х70, 70х70, 60х40, 40х40 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
7. Простыня медицинская ламинированная, размер (длина х ширина), см: 330х180, 240х160, 210х150, 200х140, 200х70, 200х53, 140х110, 140х80, 110х70 – от 1 до 50 шт. (при необходимости)
8. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Общий вид изделий, входящих в состав комплектов

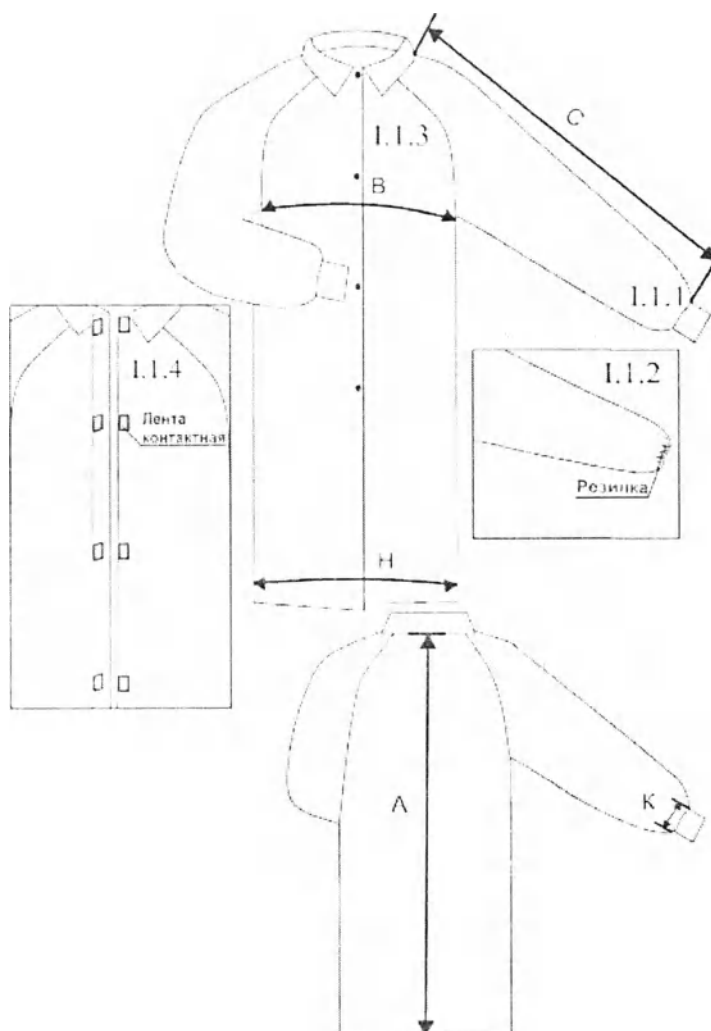

Условные обозначения:

I.1.1 – Низ рукава, собранный на манжету.

I.1.2 – Низ рукава, собранный на резинку.


I.1.3 – Застёжка на кнопки.

I.1.4 – Застёжка на контактную ленту велькро (липучка).

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Ширина внизу (Н), см
40-42	130,0±20,0	56,0±2,0	82,0±3,0	18,0±2,0	59,0±2,0
44-46		60,0±2,0			63,0±2,0
48-50		64,0±2,0			67,0±2,0
52-54		68,0±2,0			71,0±2,0
56-58		72,0±2,0			75,0±2,0
60-62		76,0±2,0			79,0±2,0
64-66		80,0±2,0			83,0±2,0
68-70		84,0±2,0			87,0±2,0

Длина манжеты (I.1.1), см	Ширина манжеты (I.1.1), см	Длина горловины воротника, см	Высота воротника, см
7,0±1,0	14,0±2,0	50,5±2,5	9,0±0,5

Рисунок Б.1. Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки)

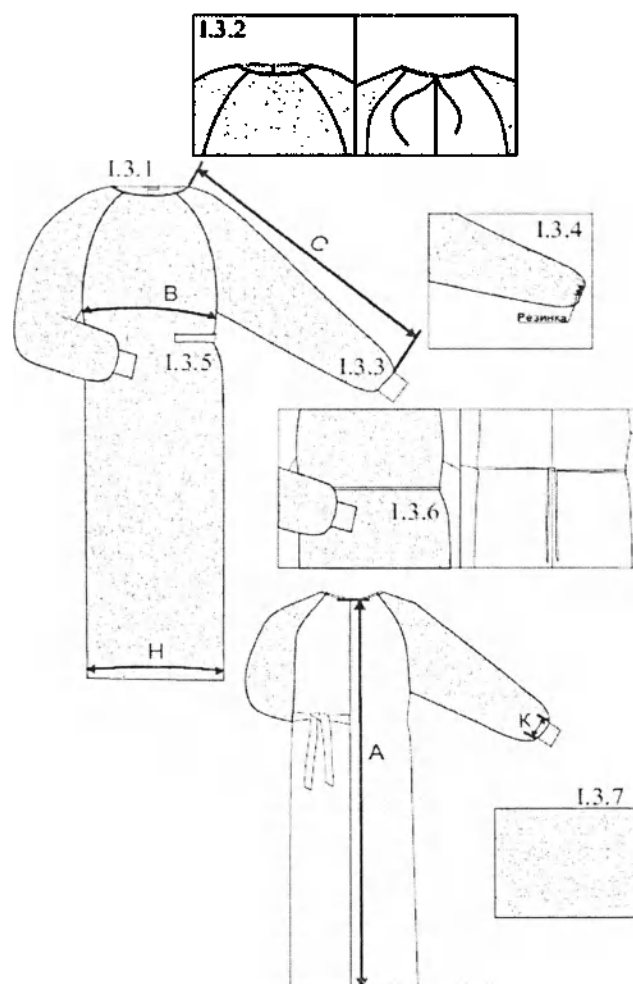

Условные обозначения:

I.3.1 – Горловина обработана кантом, фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).

I.3.2 – Горловина обработана кантом, фиксируется на две завязки.

I.3.3 – Низ рукава, собранный на манжету.

I.3.4 – Низ рукава, собранный на резинку.

I.3.5 – По линии талии фиксация на 4 завязки.


I.3.6 – По линии талии фиксация на 2 завязки.

I.3.7 – Ламинированный материал.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Ширина внизу (Н), см	Длина манжеты (I.3.3), см	Ширина манжеты (I.3.3), см
40-42	130,0±20,0	59,7±2,0	79,0±3,0	18,0±2,0	59,7±2,0	7,0±1,0	14,0±2,0
44-46		63,7±2,0			63,7±2,0		
48-50		67,7±1,0			67,7±1,0		
52-54		71,7±1,0			71,7±1,0		
56-58		75,7±1,0			75,7±1,0		
60-62		79,7±1,0			79,7±1,0		
64-66		83,7±1,0			83,7±1,0		
68-70		87,7±1,0			87,7±1,0		

Длина завязки пояса (на 2 зав., кант) (I.3.6), см	Ширина завязки пояса (кант) (I.3.6), см	Длина завязки пояса (на 4 зав.) (I.3.5), см	Ширина завязки пояса (на 4 зав.) (I.3.5), см	Длина завязки у горловины (кант) (I.3.2), см	Ширина завязки у горловины (кант) (I.3.2), см
195,0±3,0	0,8±0,2	60,5±1,0	4,0±0,5	23,0±3,0	0,8±0,2

Рисунок Б.2. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)

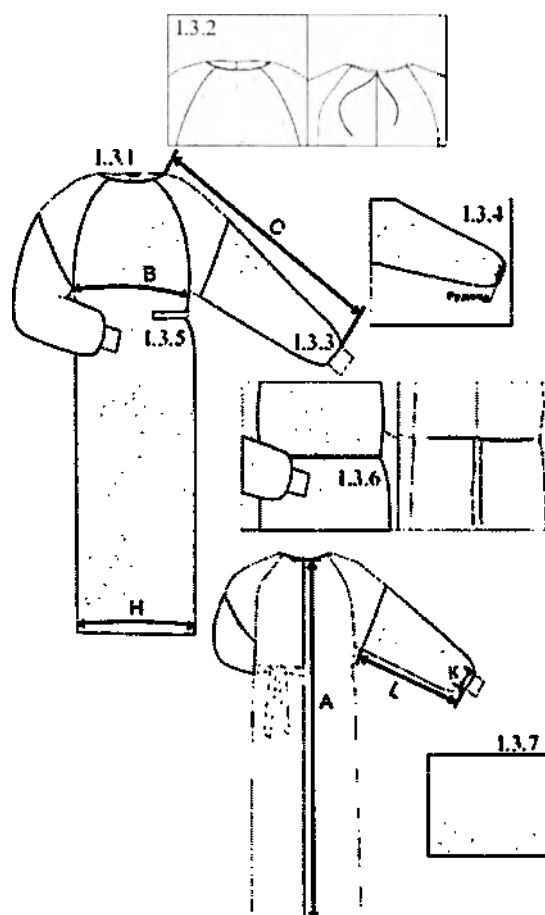

Условные обозначения:

1.3.1 – Горловина обработана кантом, фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).

1.3.2 – Горловина обработана кантом, фиксируется на две завязки.

1.3.3 – Низ рукава, собранный на манжету.

1.3.4 – Низ рукава, собранный на резинку.

1.3.5 – По линии талии фиксация на 4 завязки.


1.3.6 – По линии талии фиксация на 2 завязки.

1.3.7 – Ламинированный материал.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Ширина внизу (Н), см	Длина ламинированной части рукава ¼ (L), см
40-42	130,0±20,0	59,7±2,0	79,0±3,0	18,0±2,0	59,7±2,0	37,5±1,0
44-46		63,7±2,0			63,7±2,0	
48-50		67,7±1,0			67,7±1,0	
52-54		71,7±1,0			71,7±1,0	
56-58		75,7±1,0			75,7±1,0	
60-62		79,7±1,0			79,7±1,0	
64-66		83,7±1,0			83,7±1,0	
68-70		87,7±1,0			87,7±1,0	

Длина манжеты (1.3.3), см	Ширина манжеты (1.3.3), см	Длина завязки пояса (на 2 зав., кант) (1.3.6), см	Ширина завязки пояса (кант) (1.3.6), см	Длина завязки пояса (на 4 зав.) (1.3.5), см	Ширина завязки пояса (на 4 зав.) (1.3.5), см	Длина завязки у горловины (кант) (1.3.2), см	Ширина завязки у горловины (кант) (1.3.2), см
7,0±1,0	14,0±2,0	195,0±3,0	0,8±0,2	60,5±1,0	4,0±0,5	23,0±3,0	0,8±0,2

Рисунок Б.3. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава ¼ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)

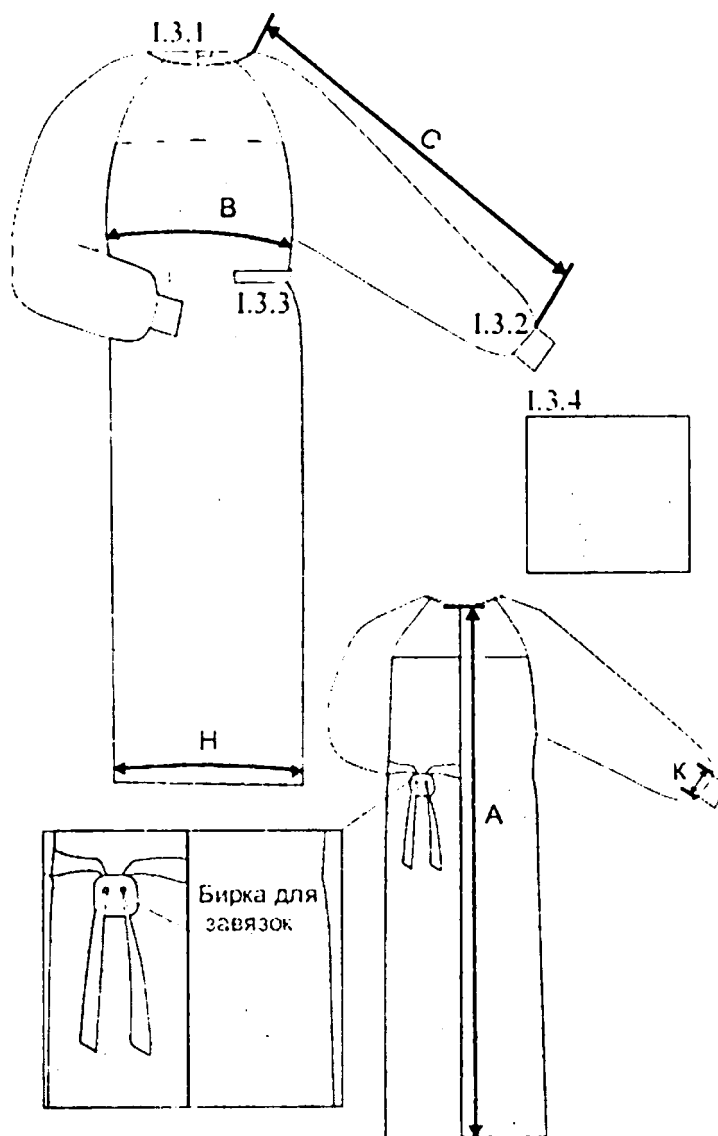

Условные обозначения:

I.3.1 – Горловина обработана кантом, фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).


I.3.2 – Низ рукава собранный на манжету.

I.3.3 – По линии талии фиксация на 4 завязки.

I.3.4 – Ламинированный материал

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Ширина внизу (Н), см	Длина манжеты (I.3.2), см	Ширина манжеты (I.3.2), см	Длина завязки пояса (на 4 зав.) (I.3.3), см	Ширина завязки пояса (на 4 зав.) (I.3.3), см
40-42	130,0±20,0	59,7±2,0	79,0±3,0	18,0±2,0	59,7±2,0	7,0±1,0	14,0±2,0	60,5±1,0	4,0±0,5
44-46		63,7±2,0			63,7±2,0				
48-50		67,7±1,0			67,7±1,0				
52-54		71,7±1,0			71,7±1,0				
56-58		75,7±1,0			75,7±1,0				
60-62		79,7±1,0			79,7±1,0				
64-66		83,7±1,0			83,7±1,0				
68-70		87,7±1,0			87,7±1,0				

Рисунок Б.4. Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки)

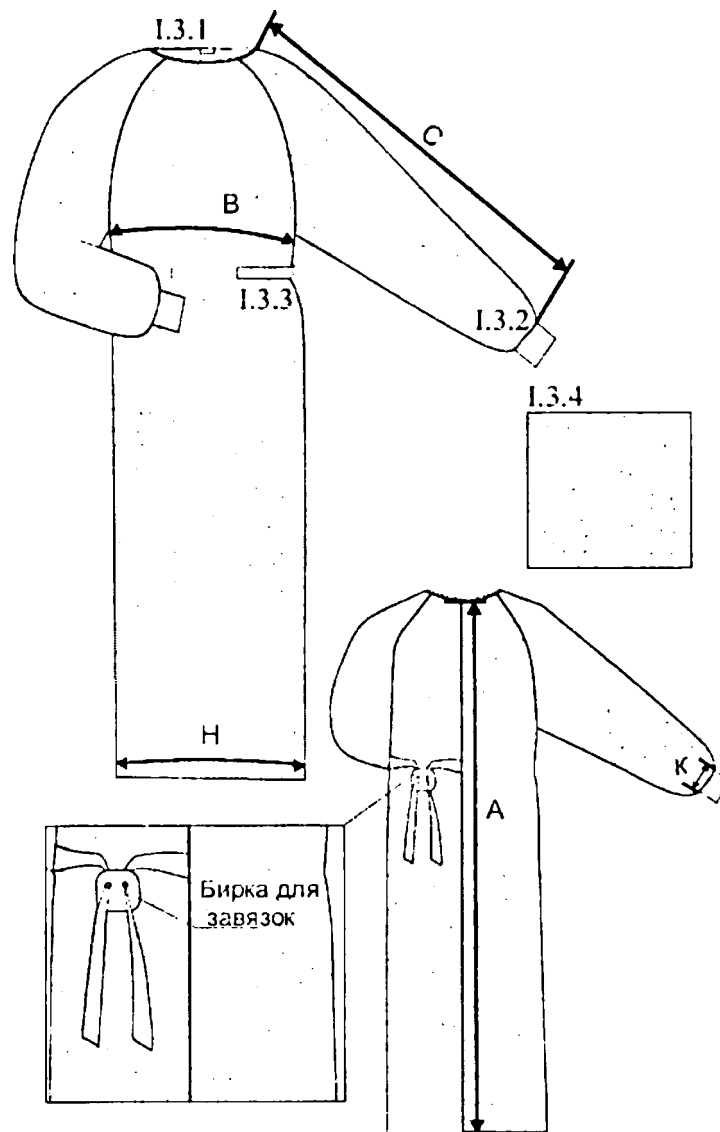

Условные обозначения:

I.3.1 – Горловина обработана кантом, фиксируется на контактную ленту (велкро).


I.3.2 – Низ рукава, собранный на манжету.

I.3.3 – По линии талии фиксация на 4 завязки.

I.3.4 – Дополнительная защита.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина внизу (Н), см	Длина манжеты (I.3.2), см	Ширина манжеты (I.3.2), см	Длина завязки пояса (на 4 зав.) (I.3.3), см	Ширина завязки пояса (на 4 зав.) (I.3.3), см
40-42	130,0±20,0	59,7±2,0	79,0±3,0	59,7±2,0	7,0±1,0	14,0±2,0	60,5±1,0	4,0±0,5
44-46		63,7±2,0		63,7±2,0				
48-50		67,7±1,0		67,7±1,0				
52-54		71,7±1,0		71,7±1,0				
56-58		75,7±1,0		75,7±1,0				
60-62		79,7±1,0		79,7±1,0				
64-66		83,7±1,0		83,7±1,0				
68-70		87,7±1,0		87,7±1,0				

Рисунок Б.5. Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки)

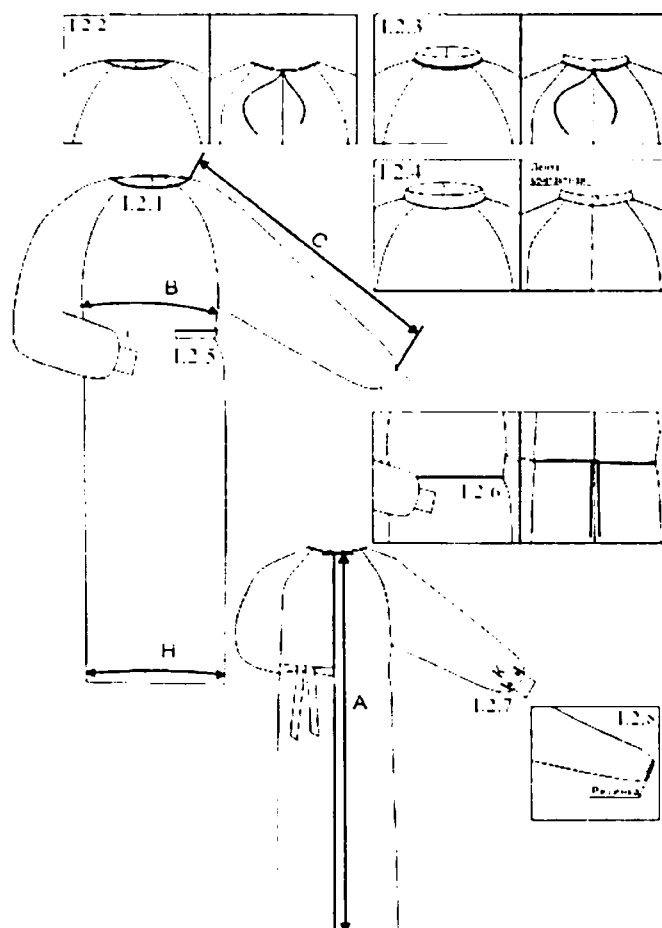

Условные обозначения:

1.2.1 – Горловина обработана кантом, фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).

1.2.2 – Горловина обработана кантом, фиксируется на две завязки.

1.2.3 – Горловина обработана воротником-стойкой с кантом, фиксируется на две завязки.

1.2.4 – Горловина обработана воротником-стойкой, фиксируется на контактную ленту велкро (липучку).

1.2.5 – По линии талии фиксация на 4 завязки;

1.2.6 – По линии талии фиксация на 2 завязки.


1.2.7 – Низ рукава, собранный на манжету.

1.2.8 – Низ рукава, собранный на резинку.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Ширина внизу (Н), см	Длина манжеты (1.2.7), см	Ширина манжеты (1.2.7), см	Длина завязки пояса (на 2 зав., кант) (1.2.6), см
40-42	130,0±2,0	56,3±1,0	79,0±3,0	18,0±2,0	56,3±1,0	7,0±1,0	14,0±2,0	195,0±3,0
44-46		60,3±1,0			60,3±1,0			
48-50		64,3±1,0			64,3±1,0			
52-54		68,3±1,0			68,3±1,0			
56-58		72,3±1,0			72,3±1,0			
60-62		76,3±1,0			76,3±1,0			
64-66		80,3±1,0			80,3±1,0			
68-70		84,3±1,0			84,3±1,0			

Ширина завязки пояса (кант) (1.2.6), см	Длина завязки пояса (на 4 зав.) (1.2.5), см	Ширина завязки пояса (на 4 зав.) (1.2.5), см	Длина завязки у горловины (кант) (1.2.2), см	Ширина завязки у горловины (кант) (1.2.2), см	Длина стойки воротника на липучке (1.2.3, 1.2.4), см	Длина стойки воротника на завязках (1.2.3, 1.2.4), см	Высота стойки (1.2.3, 1.2.4), см
0,8±0,2	60,5±1,0	4,0±0,5	23,0±3,0	0,8±0,2	63,5±0,5	51,5±0,5	3,7±0,5

Рисунок Б.6. Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)

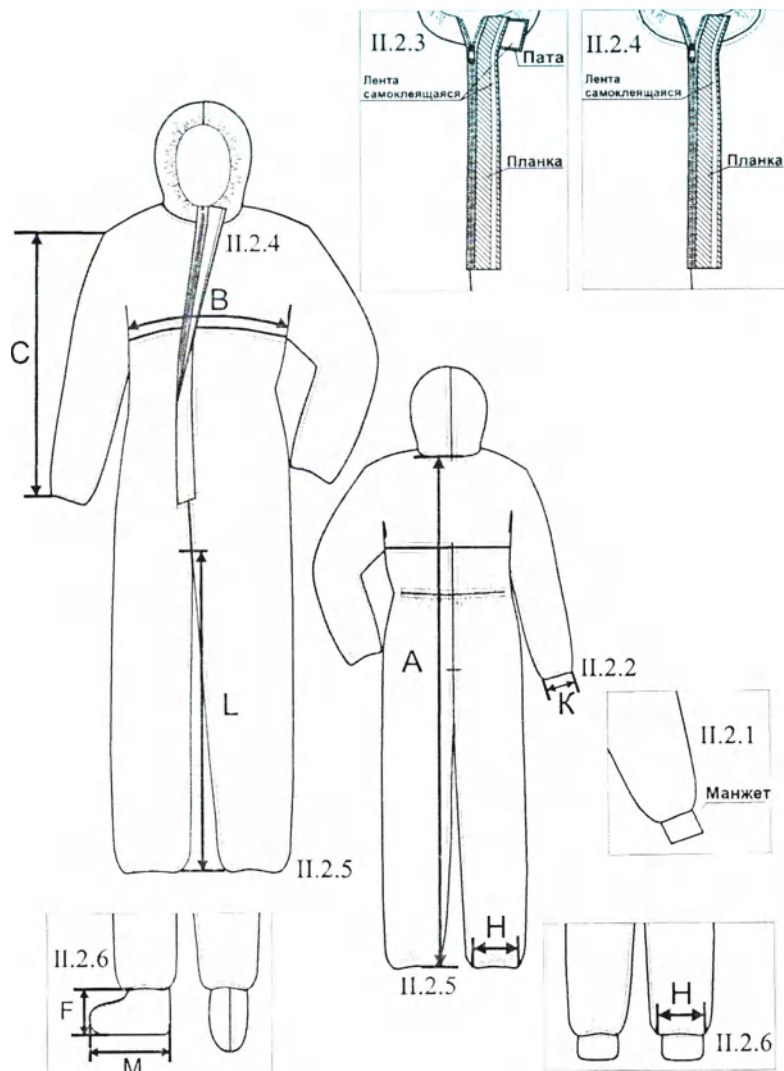

Условные обозначения:

II.2.1 – Низ рукава собранный на манжету.

II.2.2 – Низ рукава собранный на резинку.

II.2.3 – Планка-пластрон с патой.

II.2.4 – Планка пластрон без паты.

II.2.5 – Низ брюк собранный на резинку.


II.2.6 – Низ брюк со встроеными бахилами.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (резинка) (Н), см
40-46	160,0±10,0 190,0±10,0	55,0±5,0	62,0±5,0 70,0±5,0	20,0±2,0	85,0±5,0 78,0±5,0	28,0±3,0
48-54		60,0±5,0				
56-62		70,0±5,0				
64-70		78,0±5,0				
72-78		84,0±5,0				

Длина манжеты (II.2.1), см	Ширина манжеты (II.2.1), см	Длина паты (II.2.3), см	Ширина паты (II.2.3), см	Высота капюшона, см
7,0±1,0	14,0±2,0	14,0±0,2	7,0±0,5	33,5±1,5

Размер	Высота бахил (F), см	Длина подошвы (M), см
36-39	21,4±2,0	38,0±1,5
40-46		41,0±1,5

Рисунок Б.7. Комбинезон изолирующий (застёжка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроеными бахилами или собран на резинку))

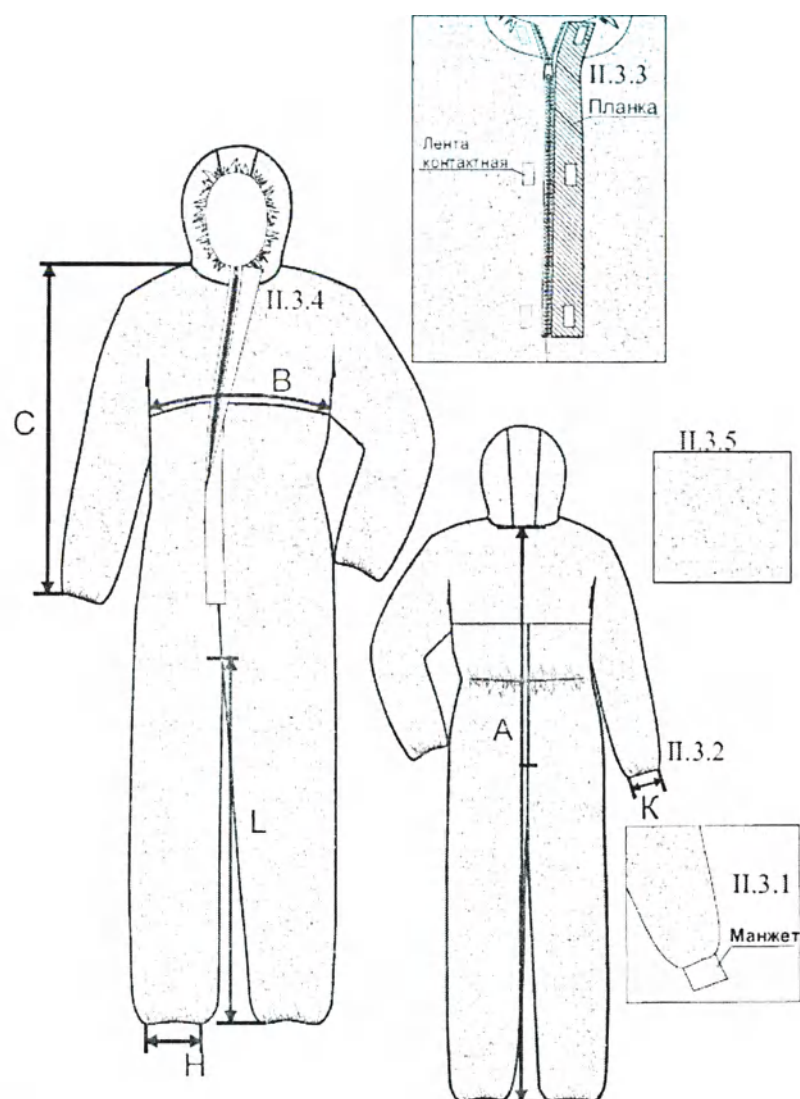


Условные
обозначения:

- П.3.1 – Низ рукава, собранный на манжету.
 П.3.2 – Низ рукава, собранный на резинку.
 П.3.3 – Планка-пластрон на контактной ленте (велкро).
 П.3.4 – Планка-пластрон отлетная.
 П.3.5 – Ламинированный материал.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (резинка) (Н) см
40-46	160,0±10,0 190,0±10,0	55,0±5,0	62,0±5,0 70,0±5,0	20,0±2,0	85,0±5,0 78,0±5,0	28,0±3,0
48-54		60,0±5,0				
56-62		70,0±5,0				
64-70		78,0±5,0				
72-78		84,0±5,0				

Длина манжеты, см (П.3.1)	Ширина манжеты, см (П.3.1)	Высота капюшона, см
7,0±1,0	14,0±2,0	33,5±1,0

Рисунок Б.8. Комбинезон ламинированный (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)

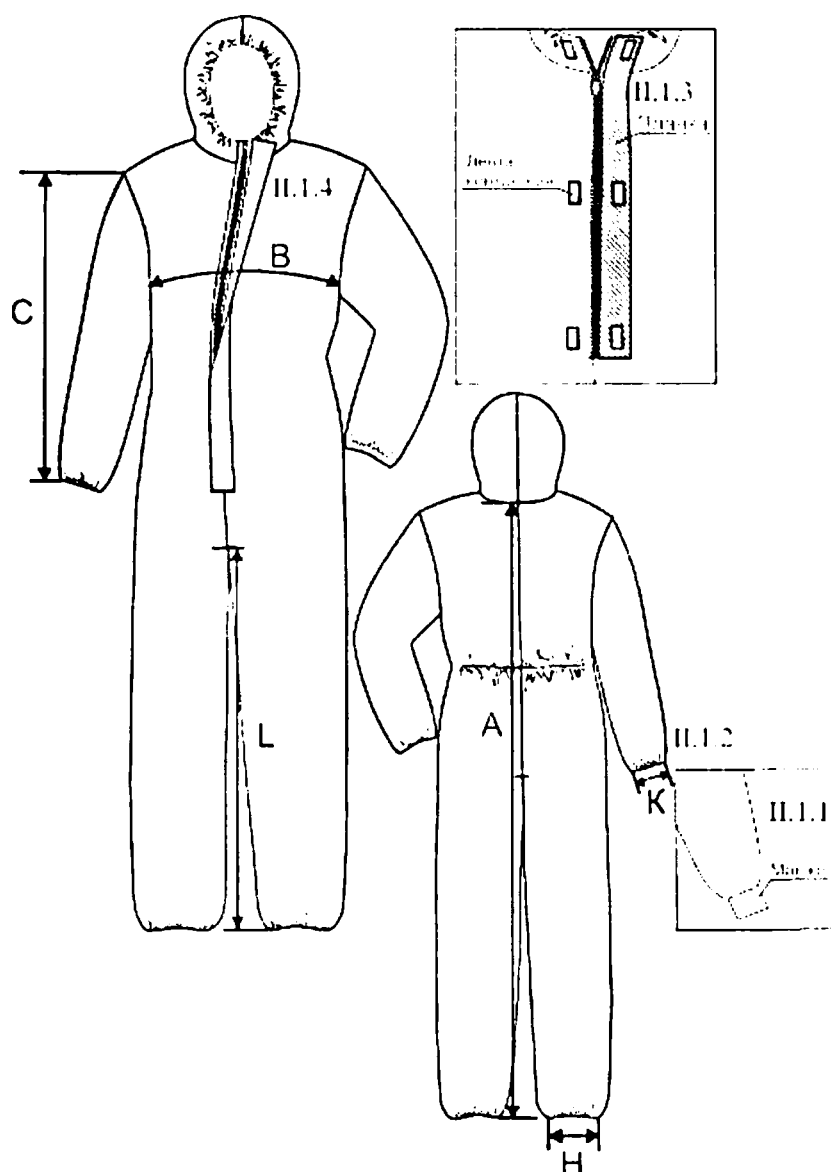

Условные обозначения:

II.1.1 – Низ рукава, собранный на манжету.

II.1.2 – Низ рукава, собранный на резинку.


II.1.3 – Планка-пластрон на контактной ленте (велкро).

II.1.4 – Планка-пластрон отлетная.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (резинка) (Н), см
40-46	160,0±10,0 190,0±10,0	55,0±5,0	62,0±5,0 70,0±5,0	20,0±2,0	85,0±5,0 78,0±5,0	28,0±3,0
48-54		60,0±5,0				
56-62		70,0±5,0				
64-70		78,0±5,0				
72-78		84,0±5,0				

Длина манжеты (II.1.1), см	Ширина манжеты (II.1.1), см	Высота капюшона, см
7,0±1,0	14,0±2,0	33,5±1,0

Рисунок Б.9. Комбинезон медицинский (застёжка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)

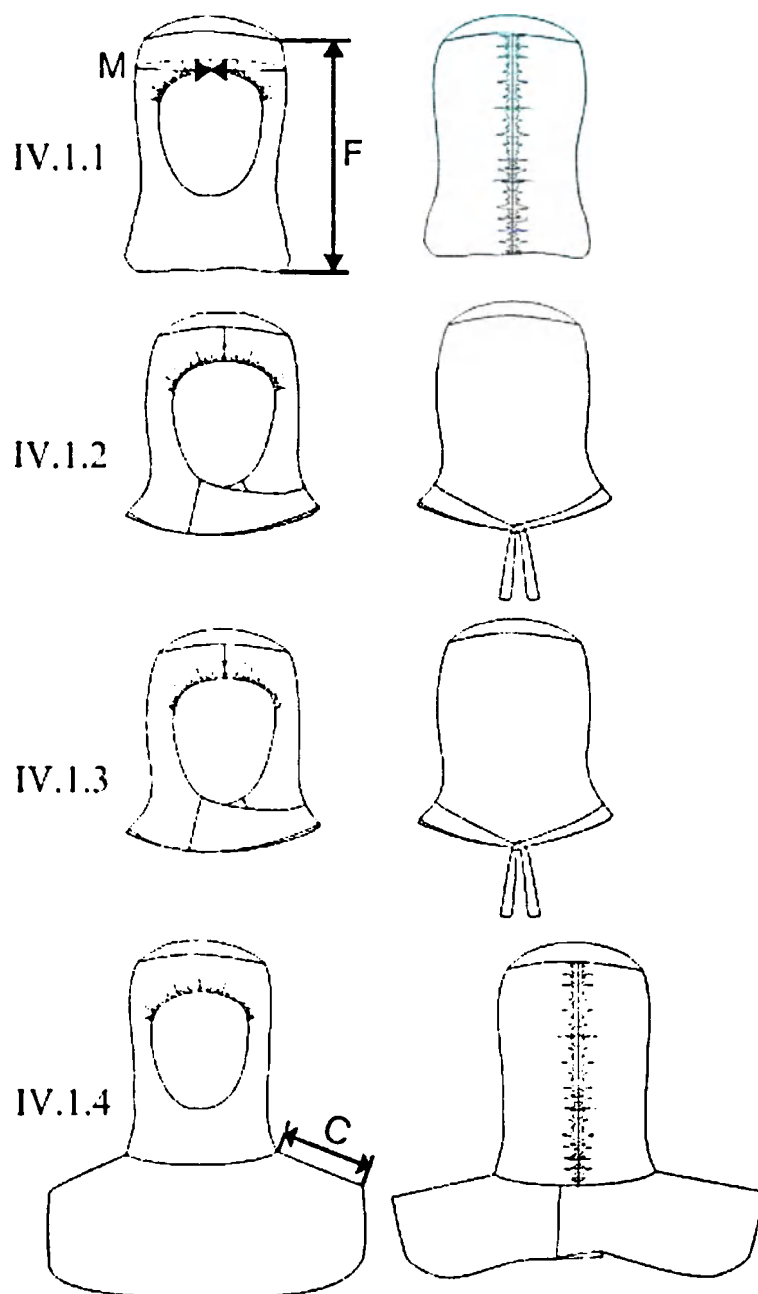

Условные обозначения:

IV.1.1 – Шлем без впитывающей полосы, фиксация за счёт резинки.


IV.1.2 – Шлем без впитывающей полосы, фиксация за счёт завязок.

IV.1.3 – Шлем с впитывающей полосы, фиксация за счёт завязок.

IV.1.4 – Шлем, фиксация за счёт резинки, с пелериной.

Размер	Высота шапки (F), см	Диаметр доньшка шапки (M), см	Длина завязки (IV.1.2, IV.1.3), см	Ширина завязки (IV.1.2, IV.1.3), см	Высота впитывающей полосы (IV.1.3), см	Длина впитывающей полосы (IV.1.3), см	Ширина пелерины (C), см
54-62	30,0±15,0	40,0±18,0	37,0±0,5	8,5±0,2	4,0±1,0	38,0±1,0	12,0±1,0

Рисунок Б.10. Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с пелериной или без, фиксация на резинку или завязки)

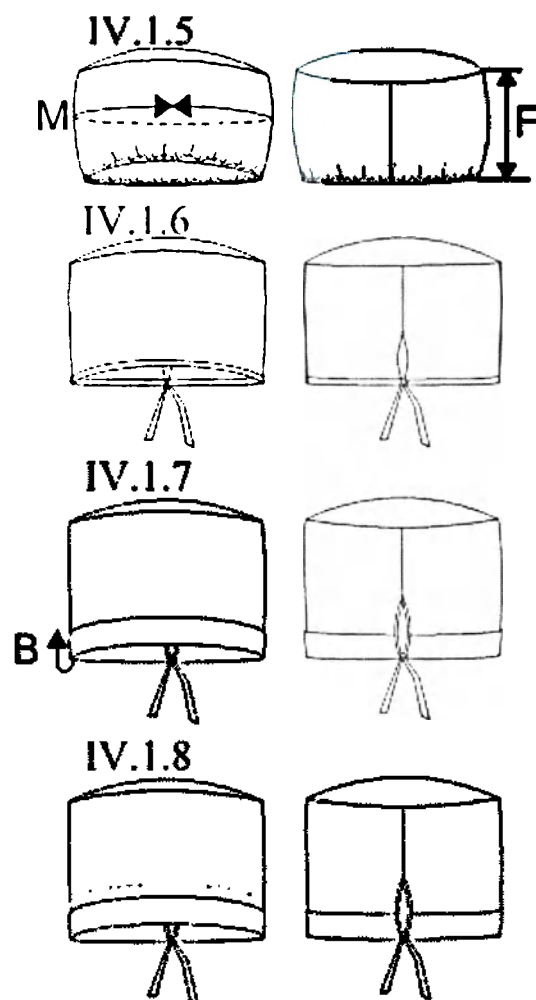

Условные обозначения:

IV.1.5 – Колпак без отверстия, фиксация за счёт резинки.

IV.1.6 – Колпак без отверстия, фиксация за счёт завязок.


IV.1.7 – Колпак с отверстием, фиксация за счёт завязок.

IV.1.8 – Колпак с отверстием с впитывающей полосой, фиксация за счёт завязок

Размер	Высота шапки (F), см	Диаметр доньшка шапки (M), см	Длина завязки (кант) (IV.1.6, IV.1.7, IV.1.8), см	Ширина завязки (кант) (IV.1.6, IV.1.7, IV.1.8), см	Высота впитывающей полосы (IV.1.8), см	Длина впитывающей полосы (IV.1.8), см	Высота отверстия (B), см
54-62	30,0±15,0	40,0±18,0	23,0±3,0	0,8±0,2	4,0±1,0	38,0±1,0	3,0±0,5

Рисунок Б.11. Шапочка-колпак (с отверстием (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки)

IV.1.9

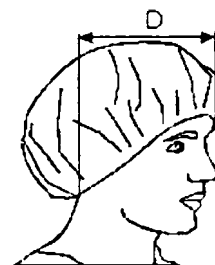


Условные обозначения:

IV.1.9 – Берет, фиксация за счёт резинки.

Размер	Диаметр при растянутой резинке (D), см
Универсальный	48,0±3,5

Рисунок Б.12. Шапочка-берет (тип 1)

IV.1.10


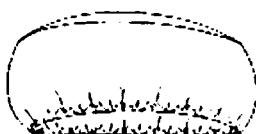


Условные обозначения:

IV.1.10 – Берет, тулье-дно.


Размер	Диаметр при растянутой резинке (D), см
Универсальный	48,0±3,5

Рисунок Б.13. Шапочка-берет (тип 2)

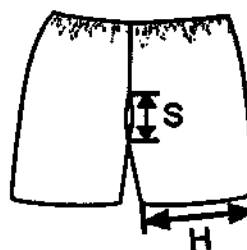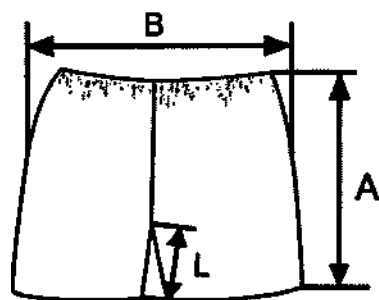


Размер	Длина изделия (A), см	Ширина изделия (B), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина трусов внизу (H), см	Длина отверстия (S), см
44-60	40,0±15,0	64,0±4,0	14,5±1,0	42,0±1,5	12,5±2,5

Рисунок Б.14. Трусы-шорты процедурные (с отверстием)

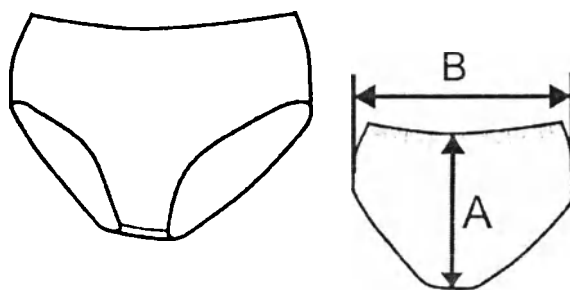


Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
44-60	40,0±15,0	64,0±4,0

Рисунок Б.15. Трусы процедурные женские

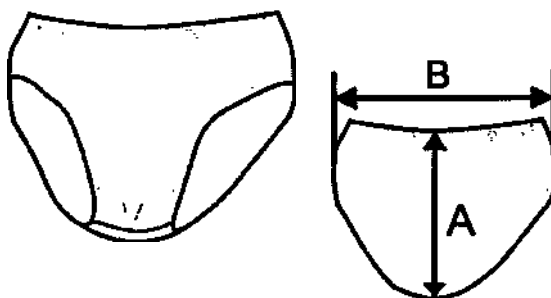

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
44-60	40,0±15,0	64,0±4,0

Рисунок Б.16. Трусы процедурные мужские

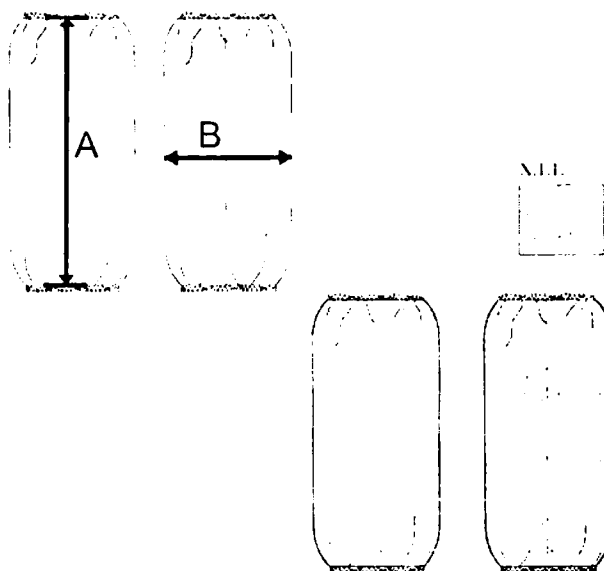

Условные обозначения:
X.1.1 – Ламинированный материал.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
Универсальный	45,0±5,0	21,0±3,0

Рисунок Б.17. Наручники медицинские


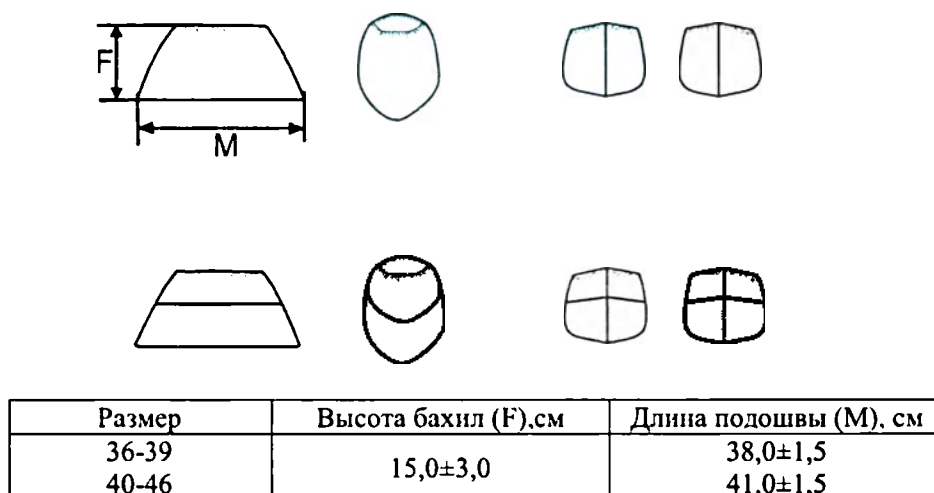


Рисунок Б.18. Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку)

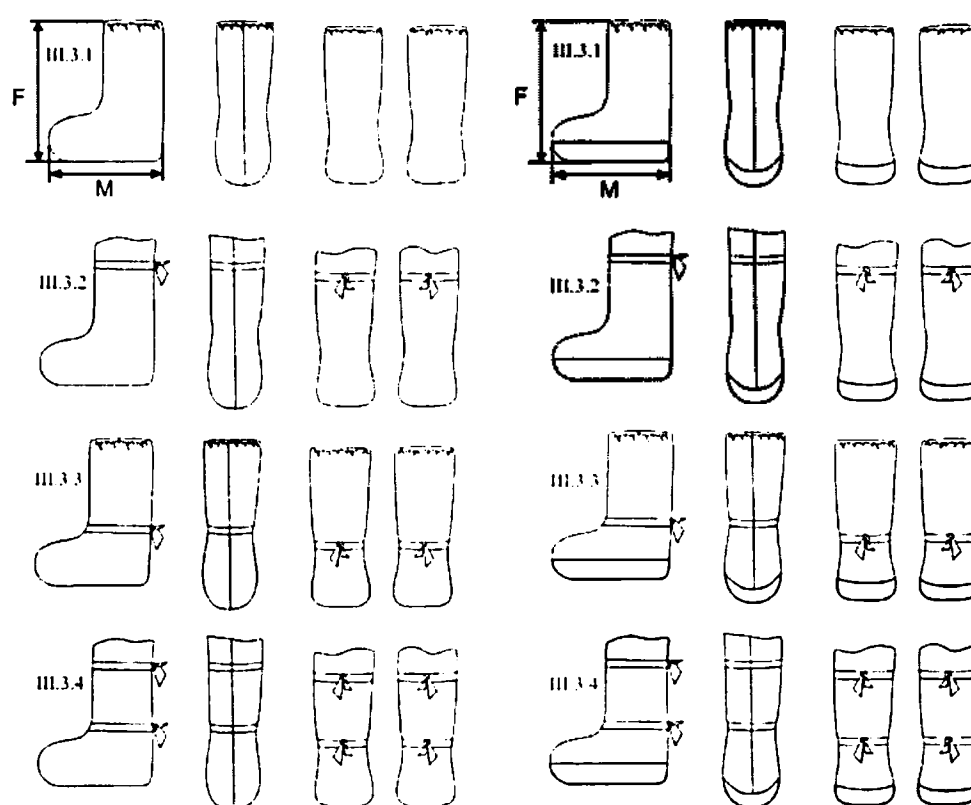

Условные обозначения:

III.3.1 – Резинка по верхнему срезу бахилы.


III.3.2 – 2 завязки у верхнего среза бахилы.

III.3.3 – Резинка по верхнему срезу бахилы и 2 завязки.

III.3.4 – 2 завязки у верхнего среза бахилы и 2 на уровне щиколотки.

Размер	Высота бахил (F), см	Длина подошвы (M), см	Длина завязки (III.3.2, III.3.3, III.3.4), см	Ширина завязки (III.3.2, III.3.3, III.3.4), см
36-39	40±15,0	38,0±1,5	44,5±2,0	4,0±0,5
40-46		41,0±1,5		

Рисунок Б.19. Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки)

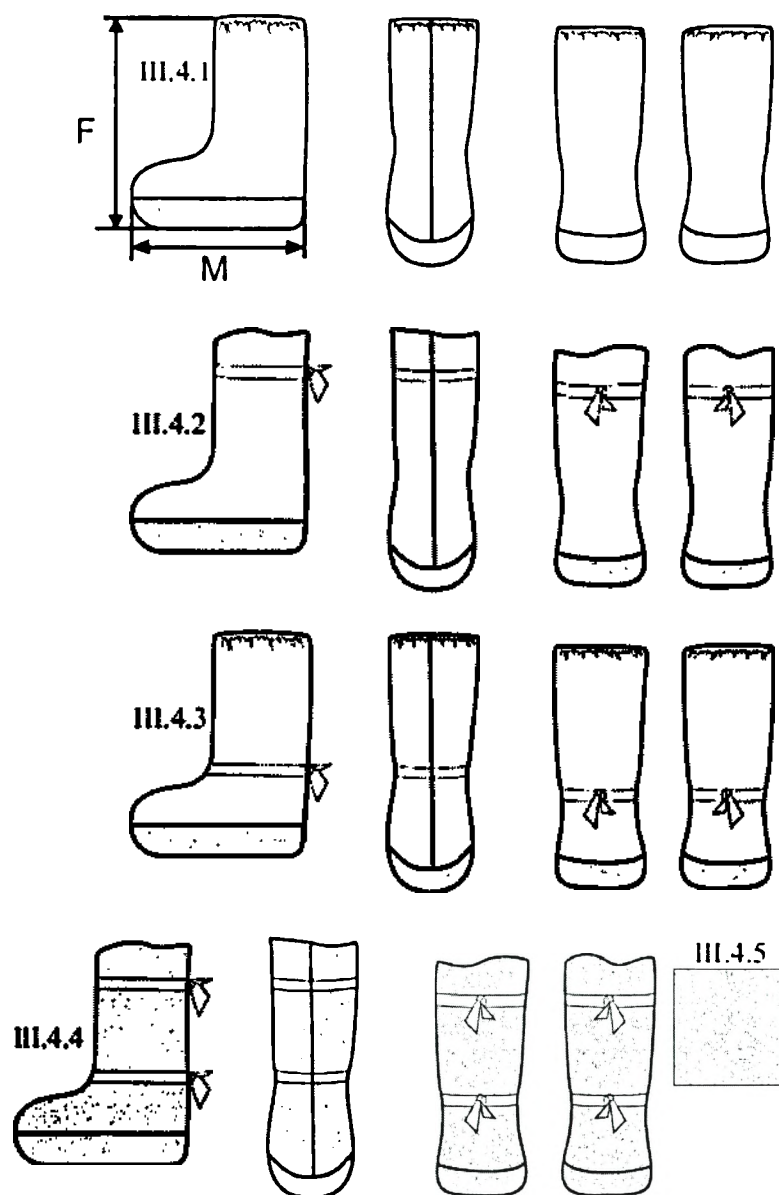

Условные обозначения:

III.4.1 – Резинка по верхнему срезу бахилы.

III.4.2 – 2 завязки у верхнего среза бахилы.


III.4.3 – Резинка по верхнему срезу бахилы и 2 завязки.

III.4.4 – 2 завязки у верхнего среза бахилы и 2 на уровне щиколотки.

III.4.5 – ламинированный материал.


Размер	Высота бахил (F), см	Длина подошвы (M), см	Длина завязки (III.4.2, III.4.3, III.4.4), см	Ширина завязки (III.4.2, III.4.3, III.4.4), см
36-39 40-46	55,0±15,0	38,0±1,5 41,0±1,5	44,5±2,0	4,0±0,5

Рисунок Б.20. Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки)

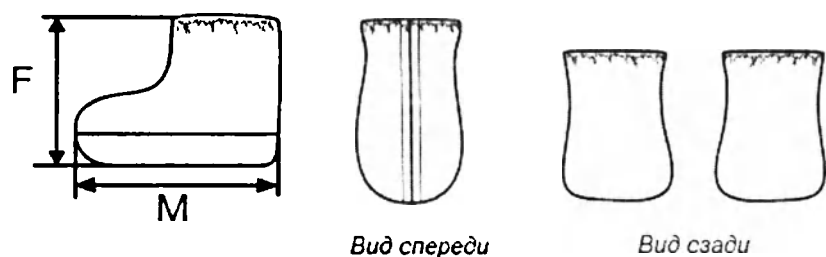


Размер	Высота бахил (F), см	Длина подошвы (M), см
36-39	15,0±3,0	38,0±1,5
40-46		41,0±1,5

Рисунок Б.21. Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку)

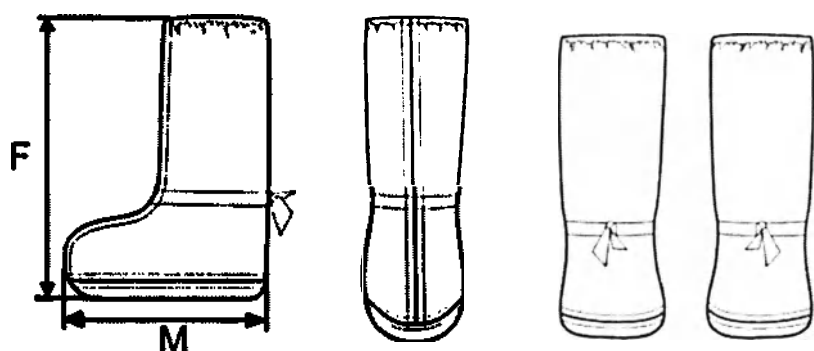

Размер	Высота бахил (F), см	Длина подошвы (M), см	Длина завязки, см	Ширина завязки, см
36-39	40±15,0	38,0±1,5	44,5±2,0	4,0±0,5
40-46		41,0±1,5		

Рисунок Б.22. Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки)

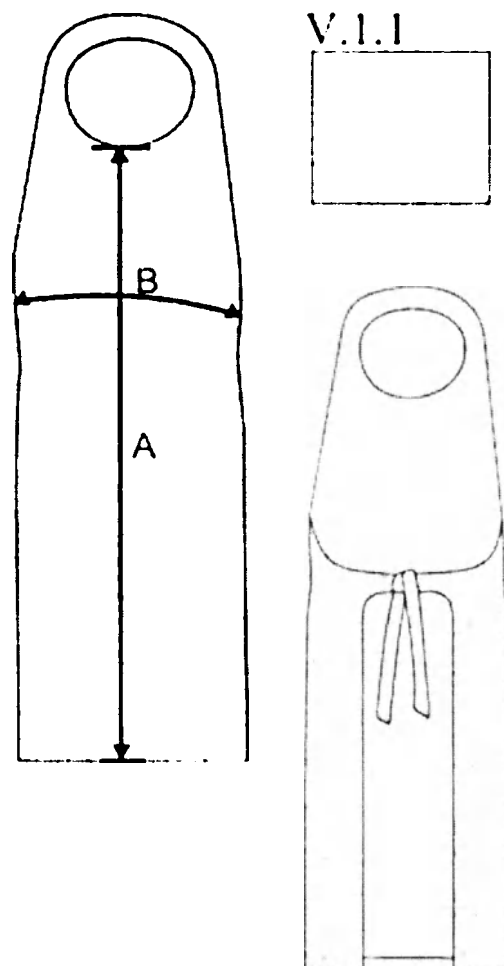


Условные обозначения:

V.1.1 – Ламинированный материал.

Размер фартука	Длина изделия, (A), см	Длина изделия до отверстия (C), см	Ширина изделия (B), см	Длина завязок, см
1			75,0±5,0	
2	125,0±25,0	98,0±25,0	85,0±5,0	55,0±5,0
3			95,0±5,0	

Рисунок Б.23. Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без)

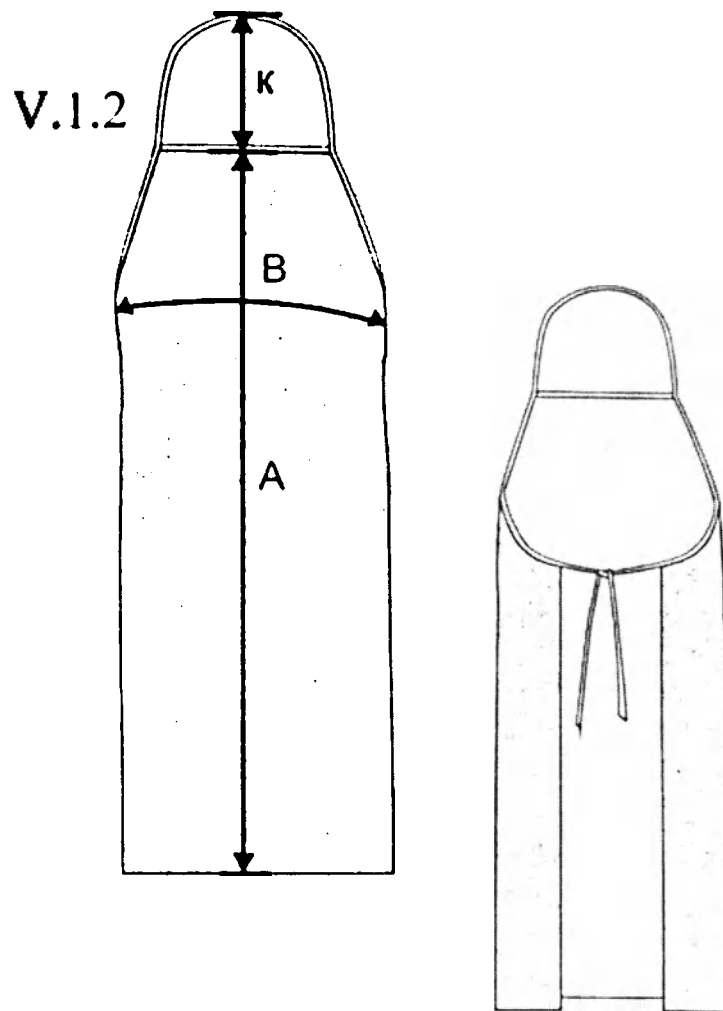


Условные обозначения:

V.1.2 – Фартук на 2-х завязках.

Размер фартука	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Высота петли (К), см	Длина завязок, см
1	125,0±25,0	75,0±5,0	27,0±1,0	55,0±5,0
2		85,0±5,0		
3		95,0±5,0		

Рисунок Б.24. Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без)

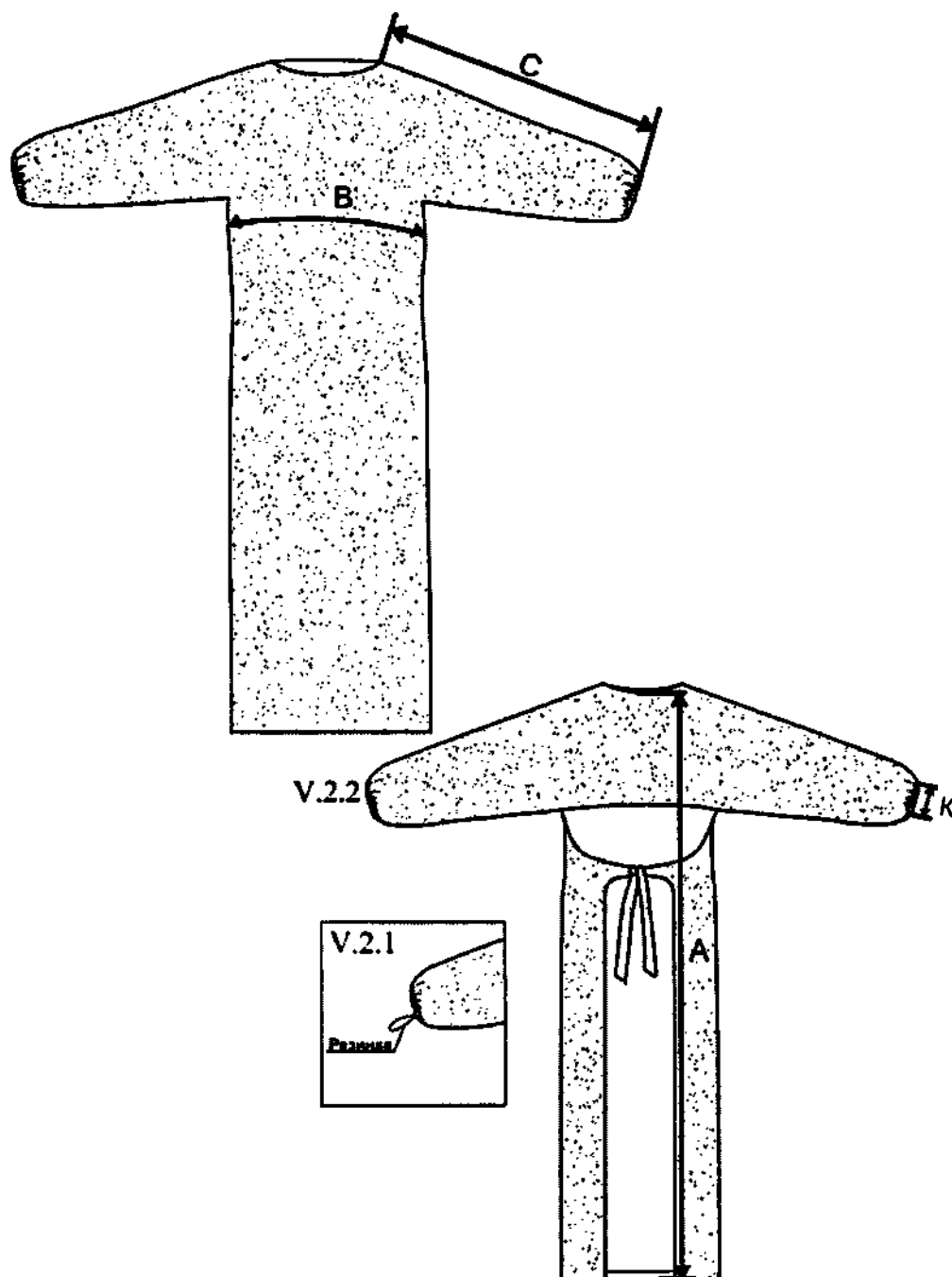


Условные обозначения:

V.2.1 – Низ рукава с дополнительной фиксацией рукава в виде эластичной петли.

V.2.1 – Низ рукава без дополнительной фиксации рукава.


Размер	Длина изделия (A), см	Ширина изделия (B), см	Длина рукава (C), см	Ширина рукава внизу (резинка) (K), см	Ширина внизу (H), см	Длина завязок, см	Длина эластичной петли (доп. фиксация), см
44-54	125,0±25,0	76,5±6,0	82,5±3,0	18,0±2,0	100,5±6,0	45,0±5,0	8,0±0,5
56-66		88,5±6,0			112,5±6,0		

Рисунок Б.25. Фартук ламинированный с рукавами

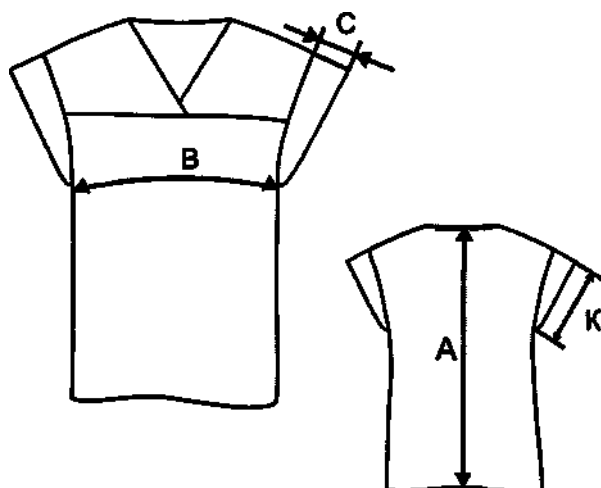


Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия под проймой (С), см	Короткий рукав	
			Длина рукава (короткого) (С), см	Ширина рукава внизу (К), см
40-46	75,0±2,0	59,2±4,0	13,0±1,0	58,0±4,0
48-54		67,2±4,0		
56-62		75,2±4,0		
64-70		83,2±5,0		

Рисунок Б.26. Туника смотровая, тип 1

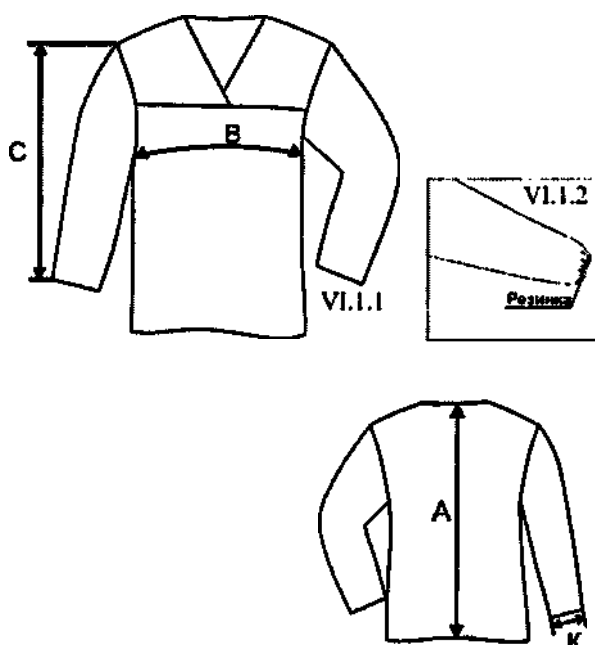


Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия под проймой (С), см	Длинный рукав	
			Длина рукава (длинного) (С), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см
40-46	75,0±2,0	59,2±4,0	55,0±5,0 65,0±5,0	14,0±2,0
48-54		67,2±4,0		
56-62		75,2±4,0		
64-70		83,2±5,0		

Рисунок Б.27. Туника смотровая, тип 2

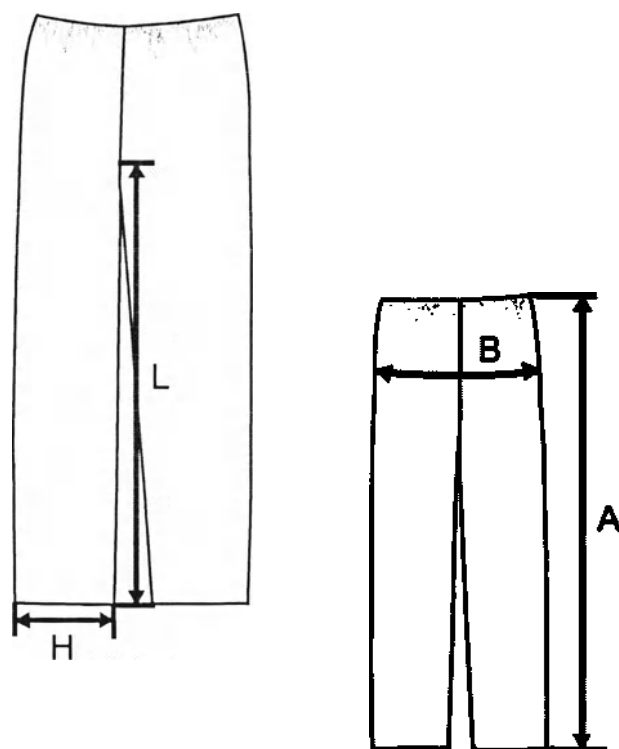


Размер	Длина изделия (В), см	Ширина изделия по бёдрам (С), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина изделия внизу (Н), см
40-46	115,5±2,0	50,5±3,0	80,1±3,0	50,8±3,0
48-54		58,5±3,0		
56-62		66,5±3,0		
64-70		74,5±3,0		

Рисунок Б.28. Брюки смотровые

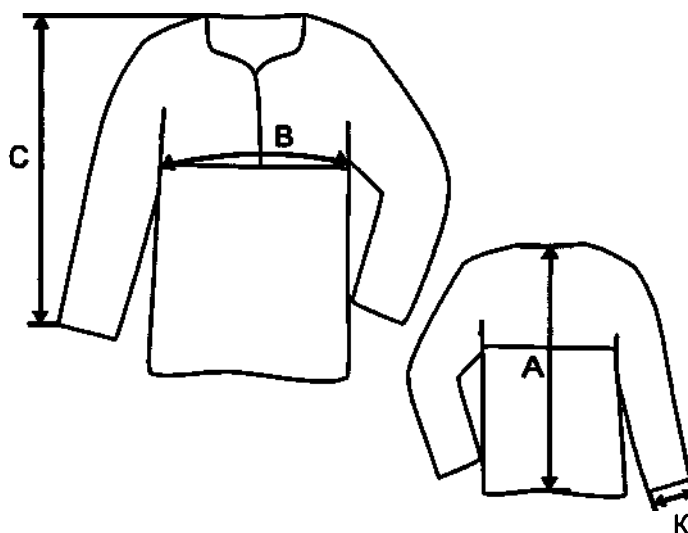


Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия под проймой (С), см	Длина рукава (Е), см	Ширина рукава внизу (К), см
40-46	75,0±3,5	59,2±4,0	70,0±5,0 80,0±5,0	36,0±4,0
48-54		67,2±4,0		
56-62		75,2±4,0		
64-70		83,2±5,0		

Рисунок Б.29. Туника процедурная

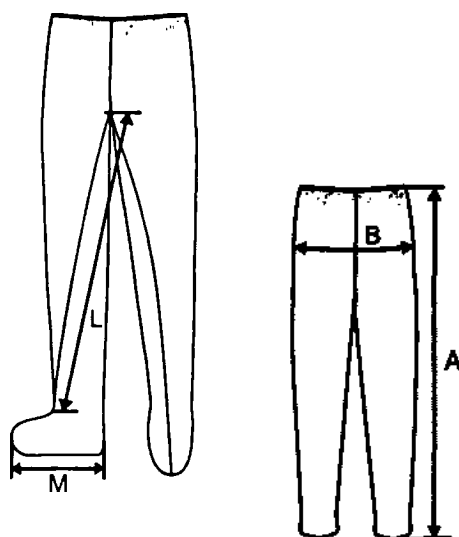

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия по бёдрам (В), см	Длина шагового шва (L), см	Длина подошвы (М), см
46-50	130,0±10,0	58,5±3,0	90,0±5,0	31,0±2,0
54-56		68,5±3,0		41,0±2,0
58-60		78,5±3,0		

Рисунок Б.30. Брюки процедурные

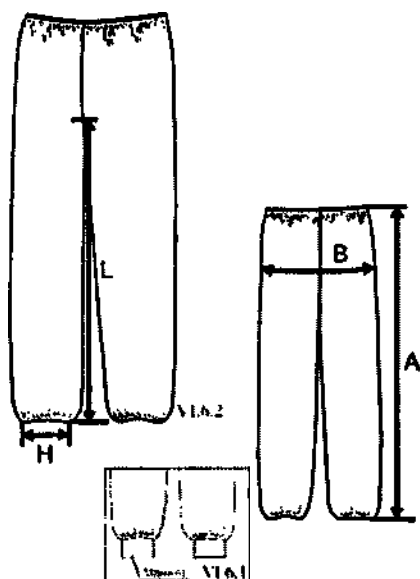


Условные обозначения:

VI.6.1 – Низ брюк, собранный на манжету.

VI.6.2 – Низ брюк, собранный на резинку

Размер	Длина изделия (В), см	Ширина изделия по бёдрам (С), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина изделия внизу (резинка) (Н), см	Длина манжета (VI.6.1), см	Ширина манжета (VI.6.1), см
40-46	120,0±10,0	60,0±5,0	70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0	28,0±3,0	7,0±1,0	14,0±2,0
48-54		68,0±5,0				
56-62		76,0±5,0				
64-70		84,0±5,0				
72-78		92,0±5,0				

Рисунок Б.31. Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете)

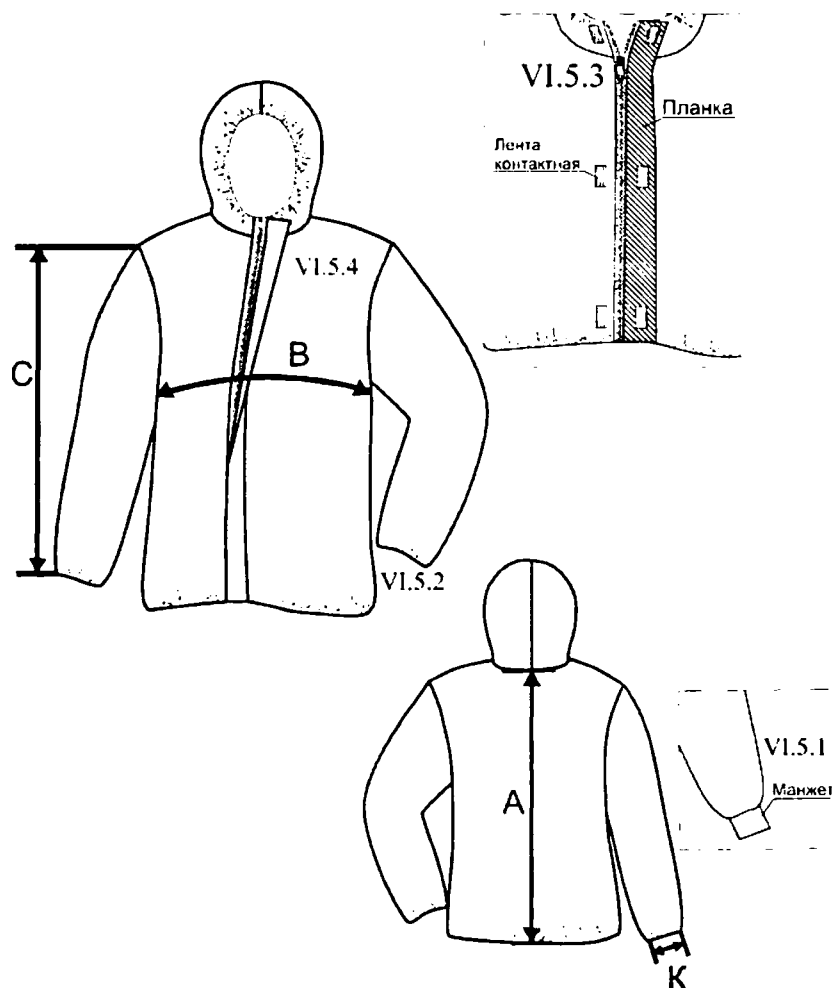

Условные обозначения:

VI.5.1 – Низ рукава, собранный на манжету.


VI.5.2 – Низ рукава, собранный на резинку.

VI.5.3 – Планка-пластрон на контактной ленте (вслкпро).

VI.5.4 – Планка-пластрон отлетная.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия под проймой (С), см	Длина рукава (Е), см	Ширина рукава внизу (резинка) (К), см	Длина манжета (VI.5.1), см	Ширина манжета (VI.5.1), см	Высота капюшона, см
40-46	79,5±3,5	60,0±5,0	66,0±3,0 70,0±3,0	20,0±2,0	7,0±1,0	14,0±2,0	33,5±1,5
48-54		68,0±5,0					
56-62		76,0±5,0					
64-70		84,0±5,0					
72-78		92,0±5,0					

Рисунок Б.32. Куртка защитная (рукава на резинке или манжете)

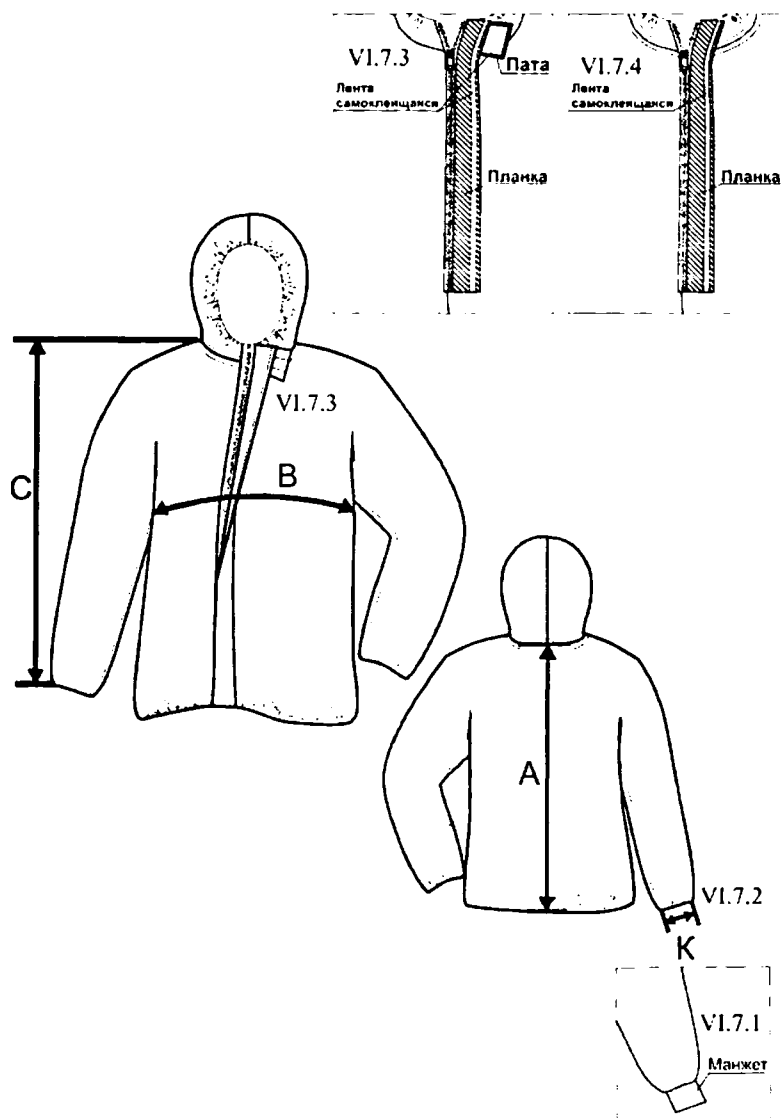

Условные обозначения:

VI.7.1 – Низ рукава, собранный на манжете.


VI.7.2 – Низ рукава, собранный на резинку.

VI.7.3 – Планка-пластрон с патой.

VI.7.4 – Планка-пластрон без паты.

Размер	Длина изделия (A), см	Ширина изделия под проймой (C), см	Длина рукава (E), см	Ширина рукава внизу (резинка) (K), см	Длина манжеты (VI.7.1), см	Ширина манжеты (VI.7.1), см	Длина паты (VI.7.3), см	Ширина паты (VI.7.3), см	Высота капюшона, см
40-46	79,5±3,5	60,0±5,0	66,0±3,0 70,0±3,0	20,0±2,0	7,0±1,0	14,0±2,0	14,0±0,2	7,0±0,5	33,5±1,5
48-54		68,0±5,0							
56-62		76,0±5,0							
64-70		84,0±5,0							
72-78		92,0±5,0							

Рисунок Б.33. Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете)

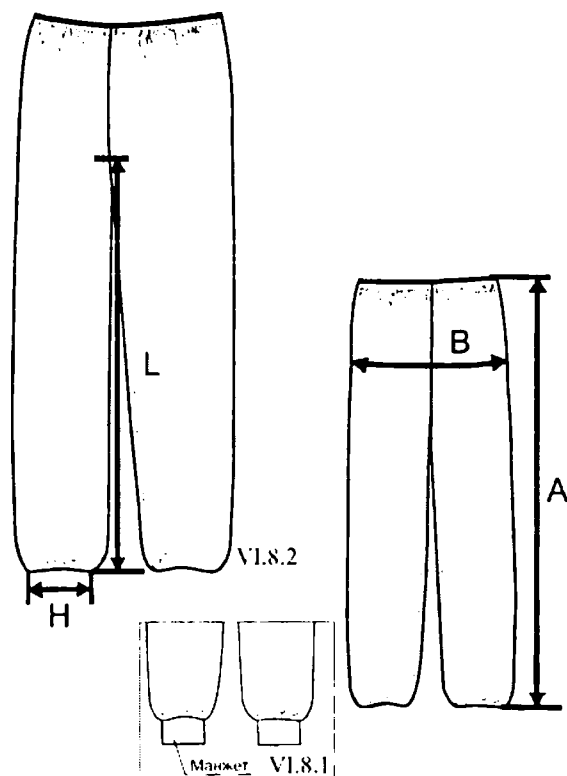


Условные обозначения:

VI.8.1 – Низ брюк, собранный на манжету.

VI.8.2 – Низ брюк, собранный на резинку.


Размер	Длина изделия (В), см	Ширина изделия по бедрам (С), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина изделия внизу (резинка) (Н), см	Длина манжета (VI.8.1), см	Ширина манжета (VI.8.1), см
40-46	120,0±10,0	60,0±5,0	70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0	28,0±3,0	7,0±1,0	14,0±2,0
48-54		68,0±5,0				
56-62		76,0±5,0				
64-70		84,0±5,0				
72-78		92,0±5,0				

Рисунок Б.34. Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете)

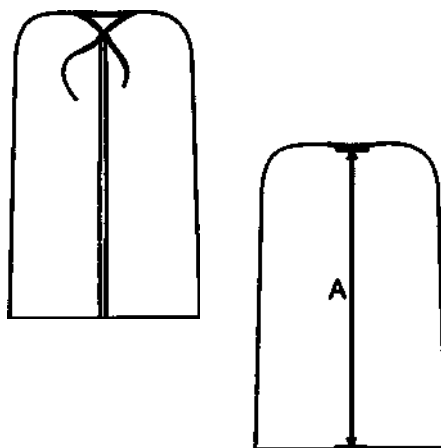


Размер	Длина изделия (А), см	Длина завязки, см	Ширина завязки, см
Универсальный	110,0±20,0	23,0±3,0	0,8±0,2

Рисунок Б.35. Накидка для посетителей

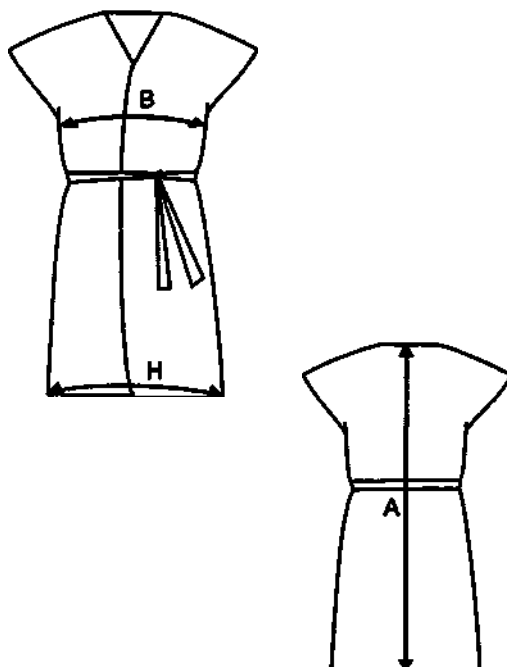

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Ширина внизу (Н), см	Длина завязки, см	Ширина завязки, см
42-68	110,0±20,0	75,0±2,5	75,0±2,5	149,0±1,0	5,7±0,3


Рисунок Б.36. Халат для пациента

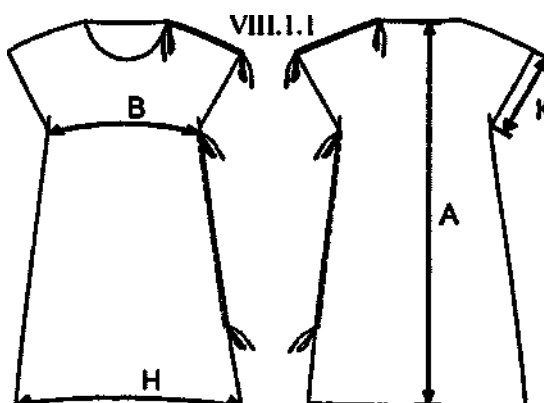

Условные обозначения:
VIII.1.1 – Рубашка с завязками.

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Ширина внизу (Н), см	Высота проймы (К), см	Длина завязки (VIII.1.1), см	Ширина завязки (VIII.1.1), см
42-68	110,0±20,0	68,0±1,5	80,0±1,5	27,5±0,5	23,0±3,0	0,8±0,2

Рисунок Б.37. Рубашка для пациентов (тип 1)

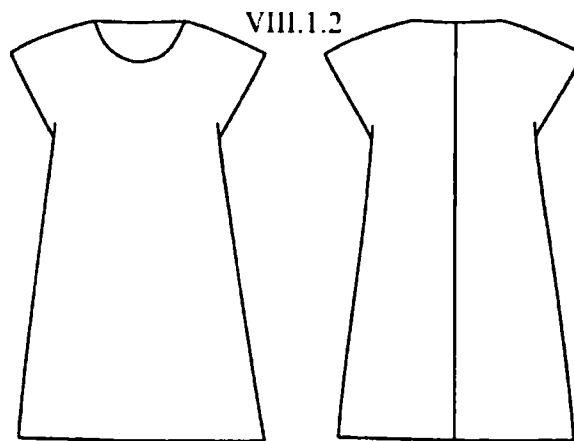


Условные обозначения:

VIII.1.2 – Рубашка без завязок.


Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Ширина внизу (Н), см	Высота проймы (К), см
42-68	110,0±20,0	68,0±1,5	80,0±1,5	27,5±0,5

Рисунок Б.38. Рубашка для пациентов (тип 2)

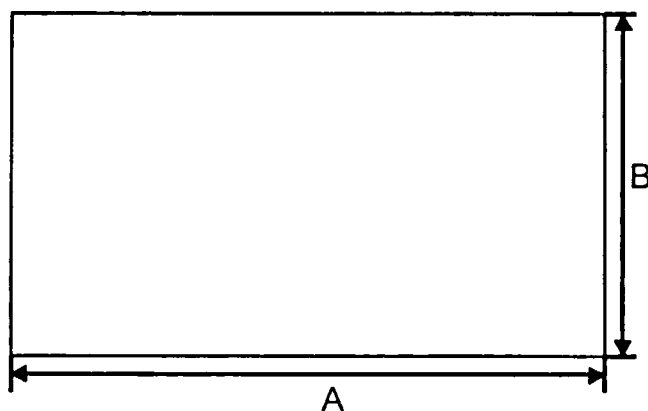

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
330 ±10,0	180 ±10,0
240 ±10,0	160 ±10,0
210 ±10,0	150 ±10,0
200 ±10,0	140 ±10,0
200 ±10,0	70 ±5,0
200 ±10,0	53±5,0
140 ±10,0	110±10,0
140 ±10,0	80±5,0
110 ±10,0	70±5,0

Рисунок Б.39. Простыня медицинская

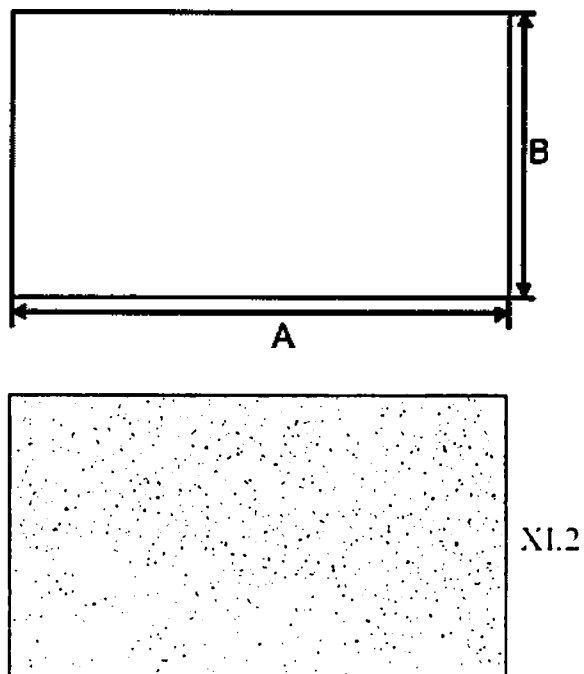


Условные обозначения:

XI.2 – Ламинированный материал.


Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
$330 \pm 10,0$	$180 \pm 10,0$
$240 \pm 10,0$	$160 \pm 10,0$
$210 \pm 10,0$	$150 \pm 10,0$
$200 \pm 10,0$	$140 \pm 10,0$
$200 \pm 10,0$	$70 \pm 5,0$
$200 \pm 10,0$	$53 \pm 5,0$
$140 \pm 10,0$	$110 \pm 10,0$
$140 \pm 10,0$	$80 \pm 5,0$
$110 \pm 10,0$	$70 \pm 5,0$

Рисунок Б.40. Простыня медицинская ламинированная

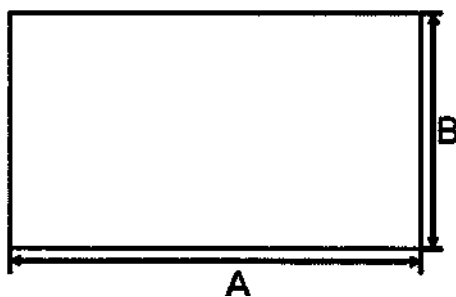

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
$100 \pm 5,0$	$95 \pm 5,0$
$90 \pm 5,0$	$70 \pm 5,0$
$80 \pm 5,0$	$70 \pm 5,0$
$70 \pm 5,0$	$70 \pm 5,0$
$60 \pm 5,0$	$40 \pm 3,0$
$40 \pm 3,0$	$40 \pm 3,0$

Рисунок Б.41. Простыня малая


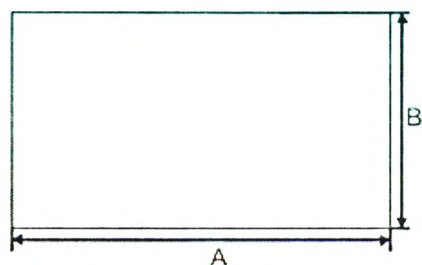


Условные обозначения:

XI.4 – Простыня из ламинированного материала.

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
100±5,0	95±5,0
90±5,0	70±5,0
80±5,0	70±5,0
70±5,0	70±5,0
60±5,0	40±3,0
40±3,0	40±3,0

Рисунок Б.42. Простыня малая ламинированная

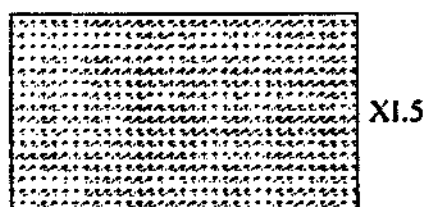
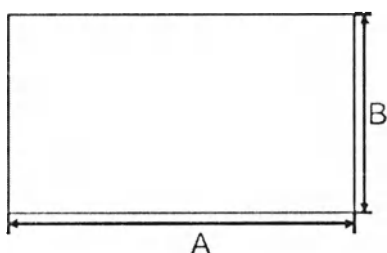


Условные обозначения:

XI.5 – Простыня из впитывающего материала



Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
100±5,0	95±5,0
90±5,0	70±5,0
80±5,0	70±5,0
70±5,0	70±5,0
60±5,0	40±3,0
40±3,0	40±3,0

Рисунок Б.43. Простыня малая впитывающая

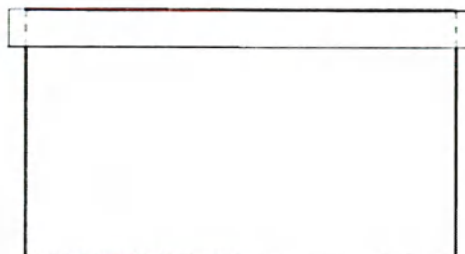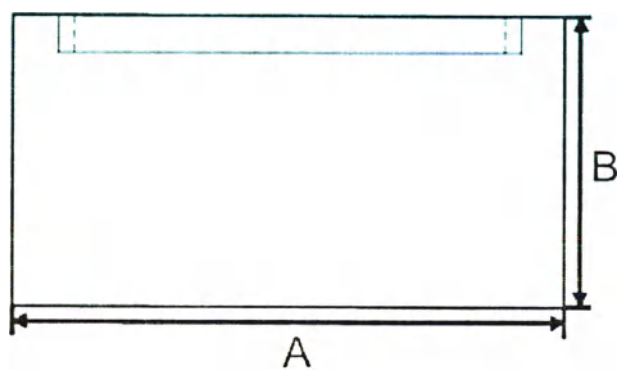


Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина липкого края	Ширина липкого края
240±10,0	140±10,0	240±10,0	5±1,0
140±10,0	110±10,0	140±10,0	5±1,0
90±5,0	70±5,0	90±5,0	5±1,0
80±5,0	70±5,0	80±5,0	5±1,0
70±5,0	70±5,0	70±5,0	5±1,0

Рисунок Б.44. Простыня с липким краем

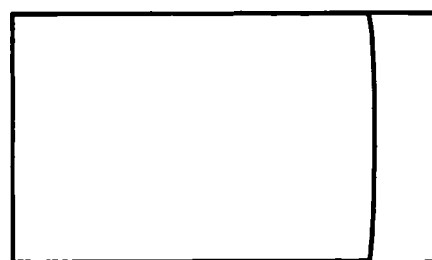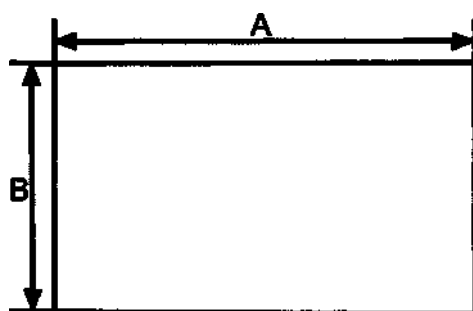


Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
70±5,0	70±5,0
50±5,0	70±5,0
60±5,0	60±5,0
40±5,0	60±5,0
50±5,0	50±5,0
40±5,0	40±5,0

Рисунок Б.45. Наволочка

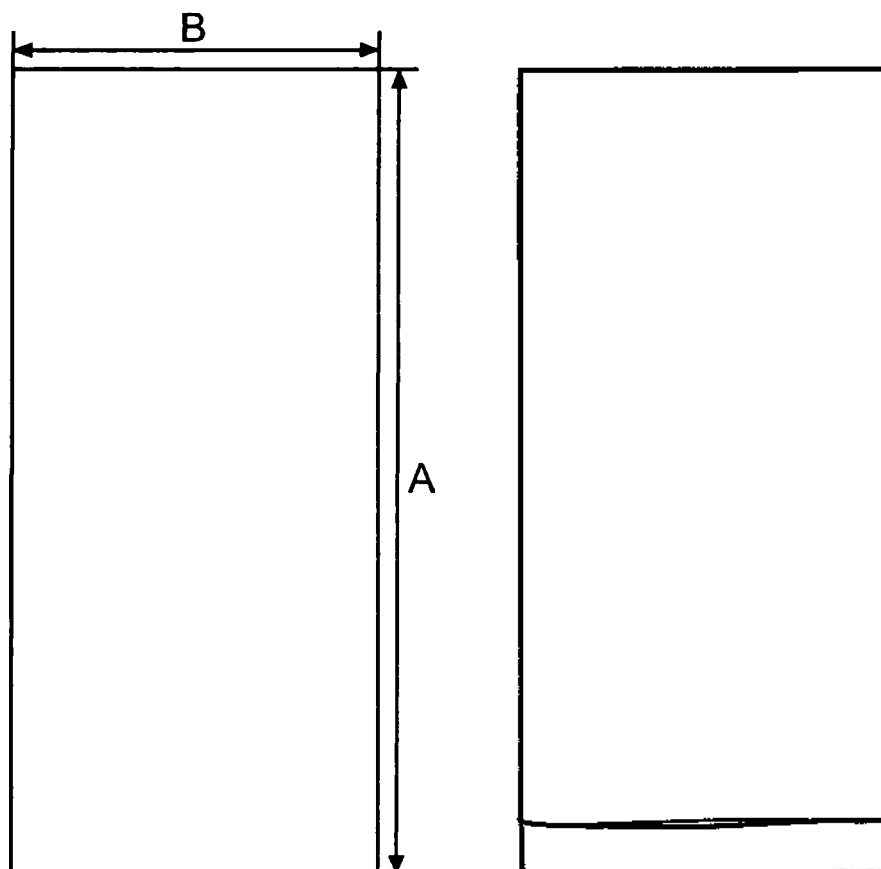


Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
210±10,0	180±10,0
210±10,0	150±10,0
200±10,0	140±10,0
180±10,0	150±10,0
150±10,0	120±10,0
140±10,0	110±10,0

Рисунок Б.46. Пододеяльник

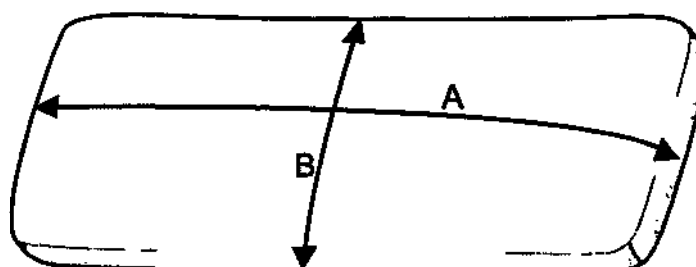

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
210±10,0	90±5,0
220±10,0	100±5,0

Рисунок Б.47. Чехол процедурный

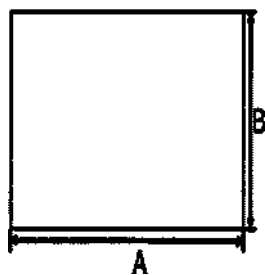

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см
20±2,0	20±2,0
10±1,0	10±1,0

Рисунок Б.48. Салфетка медицинская впитывающая

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Масса изделий, входящих в состав комплектов

№	Наименование изделия	Размер	Масса, г	
			мин.	макс.
1.	Халат процедурный (с отложным воротником, рукава на резинке или манжете, центральная застежка на кнопки или липучки)	40-42	31	88
		44-46	37	97
		48-50	43	106
		52-54	49	115
		56-58	55	124
		60-62	61	133
		64-66	67	142
		68-70	73	150
2.	Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукавов и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучке или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)	40-42	69	166
		44-46	74	170
		48-50	79	175
		52-54	84	179
		56-58	89	184
		60-62	94	188
		64-66	99	192
		68-70	104	197
3.	Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной рукава ¾ и переда, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)	40-42	69	166
		44-46	74	170
		48-50	79	175
		52-54	84	179
		56-58	89	184
		60-62	94	188
		64-66	99	192
		68-70	104	197
4.	Халат изолирующий (с усиленной защитной зоной переда и спинки, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки)	40-42	69	166
		44-46	74	170
		48-50	79	175
		52-54	84	179
		56-58	89	184
		60-62	94	188
		64-66	99	192
		68-70	104	197
5.	Халат изолирующий (с полной усиленной защитной зоной, рукава на манжете, горловина с фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 4 завязки)	40-42	69	166
		44-46	74	170
		48-50	79	175
		52-54	84	179
		56-58	89	184
		60-62	94	188
		64-66	99	192
		68-70	104	197
6.	Халат медицинский (без дополнительной защиты, рукава на резинке или манжете, горловина с фиксацией на липучку или 2 завязки, или с воротником-стойкой и фиксацией на 2 завязки или с воротником-стойкой и фиксацией на липучку, по линии талии фиксация на 2 или 4 завязки)	40-42	43	168,6
		44-46	45	169
		48-50	47	169,6
		52-54	49	170
		56-58	51	170,6
		60-62	53	171
		64-66	55	171,6
		68-70	57	172
7.	Комбинезон изолирующий (застежка на молнию спереди (с планкой-пластрон с патой или без), рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк со встроенными бахилами или собран на резинку)	40-46	160	275
		48-54	163	284
		56-62	166	293
		64-70	169	302
		72-78	172	310
8.	Комбинезон ламинированный (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)	40-46	62	198
		48-54	69	210
		56-62	76	222
		64-70	83	234
		72-78	90	245
9.	Комбинезон медицинский (застежка на молнию спереди с закрытой отлетной или фиксирующейся на липучку планкой-пластроном, рукава на резинке или манжете, капюшон с резинкой по краю, низ брюк собран на резинку)	40-46	58	198,5
		48-54	67	223
		56-62	76	247,5

№	Наименование изделия	Размер	Масса, г	
			мин.	макс.
		64-70	85	272
		72-78	94	296,5
10.	Шапочка-шлем (с впитывающей полосой или без, с перелиной или без, фиксация на резинку или завязки)	54-62	7,8	23
11.	Шапочка-колпак (с отворотом (или без) с впитывающей полосой (или без), фиксация на резинку или завязки)	54-62	4,8	10,5
12.	Шапочка-берет (тип 1)	универсальный	5	11
13.	Шапочка-берет (тип 2)	универсальный	7	15,4
14.	Трусы-шорты процедурные (с отверстием)	44-60	14	31
15.	Трусы процедурные женские	44-60	8,8	19,4
16.	Трусы процедурные мужские	44-60	8,8	19,4
19.	Нарукавники медицинские	универсальный	12	39
20.	Бахилы низкие (с двойной подошвой (или без), тип фиксации на резинку)	36-39	2,5	10
		40-46	9	35
21.	Бахилы высокие (с двойной подошвой или без, тип фиксации на резинку и/или завязки)	36-39	3,4	14
		40-46	15,4	57
22.	Бахилы высокие (с двойной ламинированной подошвой, тип фиксации на резинку и/или завязки)	36-39	16,5	41
		40-46	33	67
23.	Бахилы изолирующие низкие (тип фиксации на резинку)	36-39	13	28,5
		40-46	17,5	49
24.	Бахилы изолирующие высокие (с двойной подошвой, тип фиксации на резинку и завязки)	36-39	8	63
		40-46	15	70
25.	Фартук ламинированный 1 (с усиленной защитой или без)	1	25,5	71
		2	36,5	101,5
		3	47,5	132
26.	Фартук ламинированный 2 (с усиленной защитой или без)	1	25,5	71
		2	36,5	101,5
		3	47,5	132
27.	Фартук ламинированный с рукавами	44-54	25,5	51
		56-66	66,5	132
28.	Туника смотровая, тип 1	40-46	14,5	37
		48-54	21,5	55,6
		56-62	28,5	74,2
		64-70	35,5	93
29.	Туника смотровая, тип 2	40-46	14,5	37
		48-54	21,5	55,6
		56-62	28,5	74,2
		64-70	35,5	93
30.	Брюки смотровые	40-46	30	60
		48-54	34	68
		56-62	38	75
		64-70	42	83
31.	Туника процедурная	40-46	28	56
		48-54	32	62
		56-62	36	67
		64-70	40	73
32.	Брюки процедурные	46-50	28	60
		54-56	35	72
		58-60	42	83
33.	Куртка защитная (рукава на резинке или манжете)	40-46	129	152
		48-54	130,2	155,5
		56-62	131,4	159
		64-70	132,6	162,5
		72-78	133,8	165,5
34.	Брюки защитные (низ брюк на резинке или манжете)	40-46	87,5	120
		48-54	89,5	123
		56-62	91,5	126
		64-70	93,5	129
		72-78	95,5	132
35.	Куртка изолирующая (рукава на резинке или манжете)	40-46	156	180
		48-54	158	181
		56-62	160	182
		64-70	162	183
		72-78	164	184
36.	Брюки изолирующие (низ брюк на резинке или манжете)	40-46	87,5	136

№	Наименование изделия	Размер	Масса, г	
			мин.	макс.
		48-54	89,5	137
		56-62	91,5	138
		64-70	93,5	139
		72-78	95,5	140
37.	Накидка для посетителей	универсальный	23	92
38.	Халат для пациента	42-68	23	92
39.	Рубашка для пациентов (тип 1)	42-68	23	92
40.	Рубашка для пациентов (тип 2)	42-68	23	92
41.	Простыня медицинская	330x180 см	104	358
		240x160 см	66	232
		210x150 см	52	194
		200x140 см	47	169
		200x70 см	21	85
		200x53 см	15	64
		140x110 см	25	96
		140x80 см	16	71
		110x70 см	10	50
42.	Простыня медицинская ламинированная	330x180 см	176	364
		240x160 см	112	238
		210x150 см	92	194
		200x140 см	92	162
		200x70 см	41	83
		200x53 см	30	64
		140x110 см	43	97
		140x80 см	30	72
		110x70 см	20	52
43.	Простыня малая	100x95 см	13	60
		90x70 см	7	40
		80x70 см	6	38
		70x70 см	4	34
		60x40 см	4	12
		40x40 см	4	11,2
44.	Простыня малая ламинированная	100x95 см	25	61
		90x70 см	15	41
		80x70 см	13	38
		70x70 см	11	33
		60x40 см	8	18
		40x40 см	5	10
45.	Простыня малая впитывающая	100x95 см	35	54
		90x70 см	21	38
		80x70 см	19	34
		70x70 см	16	31
		60x40 см	10	17
		40x40 см	6,5	13
46.	Салфетка медицинская впитывающая	20x20 см	1,5	4,2
		10x10 см	0,5	1,4
47.	Простыня с липким краем	240x140 см	118	221
		140x110 см	59	107
		90x70 см	26	49
		80x70 см	23	46
		70x70 см	20	43
48.	Наволочка	70x70 см	20	53
		50x70 см	15	38
		60x60 см	11	27
		40x60 см	10	26
		50x50 см	8	21
		40x40 см	7	19
49.	Пододушечник	210x180 см	128	432
		210x150 см	113	424
		200x140 см	99	367
		180x150 см	98	337
		150x120 см	64	225
50.	Чехол процедурный	140x110 см	54	195
		210x90 см	41	117
		220x100 см	44	131

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
72 (сорок два) листов

Генеральный директор ООО ТПК "ДИОН"
Ишунина Н.А. Ишун

