

БУМАГА (ЛЕНТА) РЕГИСТРИРУЮЩАЯ В РУЛОНАХ И ПАЧКАХ ДЛЯ ЭКГ, ЭЭГ, АНАЛИЗАТОРОВ, ФЕТАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ, ВИДЕОПРИНТЕРОВ И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:
В РУЛОНАХ С НАНЕСЕНИЕМ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ;
В РУЛОНАХ БЕЗ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ;
В РУЛОНАХ С ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКОЙ;
В РУЛОНАХ БЕЗ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКИ;
В ПАЧКАХ С НАНЕСЕНИЕМ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ;
В ПАЧКАХ БЕЗ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ;
В ПАЧКАХ С ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКОЙ;
В ПАЧКАХ БЕЗ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКИ;

Наименование: БУМАГА (ЛЕНТА) РЕГИСТРИРУЮЩАЯ В РУЛОНАХ И ПАЧКАХ ДЛЯ ЭКГ, ЭЭГ, АНАЛИЗАТОРОВ, ФЕТАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ, ВИДЕОПРИНТЕРОВ И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ (далее "бумага регистрирующая").

Область применения: терапевтические, кардиологические и другие отделения клиник, больниц, поликлиник, а также при оказании экстренной медицинской помощи в машинах скорой помощи и на дому.

Назначение: Применяется для регистрации в автоматическом режиме показаний ЭКГ, ЭЭГ, спироанализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских регистрирующих приборов.

Варианты исполнений:

В РУЛОНАХ С НАНЕСЕНИЕМ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ

Тип ленты по перфорации: III без перфорационных отверстий

Обозначение ленты: ЛПГБП

В РУЛОНАХ БЕЗ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ

Тип ленты по перфорации: III без перфорационных отверстий

Обозначение ленты : ЛБПС

В РУЛОНАХ С ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКОЙ

Тип ленты по перфорации: не предусмотрено

Обозначение ленты : не предусмотрено

В РУЛОНАХ БЕЗ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКИ

Тип ленты по перфорации: не предусмотрено

Обозначение ленты : не предусмотрено

В ПАЧКАХ С НАНЕСЕНИЕМ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ

Тип ленты по перфорации: III без перфорационных отверстий

Обозначение ленты: ЛПГСБП

В ПАЧКАХ БЕЗ ДИАГРАММНОЙ СЕТКИ

Тип ленты по перфорации: не предусмотрено

Обозначение ленты : не предусмотрено

В ПАЧКАХ С ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКОЙ

Тип ленты по перфорации: не предусмотрено

Обозначение ленты : не предусмотрено

В ПАЧКАХ БЕЗ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТКИ

Тип ленты по перфорации: не предусмотрено

Обозначение ленты : не предусмотрено

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применению): Вскройте индивидуальную упаковку и достаньте бумагу регистрирующую в рулонах (далее «рулон») или бумагу регистрирующую в пачках (далее «пачка»). Сорвите защитную бумажную полосу. Установите рулон или пачку в регистрирующий прибор, (используемый вид и размер бумаги регистрирующей определяется инструкцией по эксплуатации регистрирующей медицинской техники). По завершении использования рулона, удалите шпулю и утилизируйте как обычные бытовые отходы. По завершению использования пачки дополнительных манипуляций не требуется.

Меры предосторожности при эксплуатации: Не использовать изделие повторно (только для одноразового использования). Не использовать при нарушении целостности упаковки, а также при нарушении условий хранения.

Запрещается использовать изделие, если: истёк установленный срок хранения изделия, указанный на упаковке, либо отсутствует информация о конечном сроке хранения, нарушена целостность упаковки, упаковка находится во влажном состоянии (подмочена). Категорически запрещается вторичное использование изделия.

Побочные действия/Противопоказания: не выявлены.

Состав: Бумага регистрирующая должна быть изготовлена на термобумаге с оптической плотностью не ниже 1,0.

Размеры/технические характеристики: см. приложение А.

Комплект поставки: Комплект поставки (количество упакованных изделий) должно соответствовать заказу-наряду, договору, спецификации или другому документу по их поставке, согласованному и утвержденному потребителем и поставщиком в установленном порядке. Каждый комплект поставки должен сопровождаться документом, удостоверяющим качество изделий, утвержденным в установленном порядке.

Комплектность: бумага регистрирующая - 1 шт. (бумага регистрирующая в рулонах или бумага регистрирующая в пачках), потребительская тара - 1 шт., этикетка -1шт. (вложенная в потребительскую тару).

Утилизация или уничтожение: После использования, истечения срока годности, а также в случае повреждения упаковки и невозможности использовать изделие по назначению, бумага должна быть утилизирована. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующих Санитарных Правил и Норм Российской Федерации по обращению с медицинскими отходами, Методических указания по дезинфекции, предстерилизационной подготовке и стерилизации медицинских изделий.

Маркировка: Потребительская маркировка содержит следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, реестровый номер по единой регистрации предприятия-изготовителя, наименование продукции с указанием исполнения, класс потенциального риска, ширина по обрезу, шаг фальцовки (для бумаги регистрирующей в пачках), ширина по обрезу, длина рулона (для бумаги регистрирующей в рулонах), номер и дату регистрационного удостоверения, количество листов в потребительской таре (для бумаги регистрирующей в пачках), плотность в г/м², обозначение ТУ и ГОСТ 7826-93, дату изготовления, предупредительная надпись: "Не бросать", предупреждающую надпись: «не использовать при нарушении целостности упаковки». Примечание - Допускается нанесение дополнительной информации, не противоречащей вышеуказанной Транспортная маркировка

соответствует требованиям ГОСТ 14192, и содержат следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак (при его наличии), адрес предприятия-изготовителя, наименование продукции с указанием исполнения, плотность в г/м^2 , класс потенциального риска, ширина бумаги, шаг фальцовки (для бумаги регистрирующей в пачках), ширина по обрезу, длина рулона (для бумаги регистрирующей в рулонах), количество листов (для бумаги регистрирующей в пачках), информация об упаковщике и операторе, номер и дату регистрационного удостоверения, дату изготовления, обозначение настоящих технических условий, обозначение ГОСТ 7826, для однократного применения (знак), предупреждающую надпись: «не использовать при нарушении целостности упаковки», предупреждающую надпись: «Не бросать!», «Крюками не брать», (знак), «Не подвергать нагреву свыше 50°C », (знак), «Беречь от влаги» (знак), «Беречь от солнечных лучей», (знак), а также иную информацию, включая информацию рекламного характера.

Хранение и транспортировка: изделия транспортируют всеми видами транспорта, крытого исполнения или в контейнерах на любые расстояния, с любой скоростью в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Изделия хранят в упакованном виде в крытых сухих складских помещениях при температуре не выше 40°C , относительной влажности воздуха 50-70% вне зоны попадания прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий на стеллажах. При хранении бумаги регистрирующей следует обеспечивать ее защиту от воздействия влаги, нагревательных приборов и химических агрессивных веществ. Транспортирование и хранение по ГОСТ 20259 и ГОСТ 12997.

Срок годности: средний срок годности должен быть не менее 3-х лет. В течении гарантийного срока бумага сохраняет надежность по всем своим качествам.

Гарантийные обязательства: предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи потребителю в пределах гарантийного срока хранения. При отсутствии документа, подтверждающего дату продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем. За критерий предельного состояния несоответствия принимается уменьшение оптической плотности термоотпечатка более 8 % от исходного значения.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтПапир»
191180 г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.80/2, лит. А, пом. 1Н
Тел: +7(812) 640-04-37 Fax: +7(812) 305-35-90

Генеральный директор ООО «БалтПапир» _____

Зварун Н.Г.



Перечень бумаги регистрирующей в рулонах

№ п/п	Основные параметры и характеристики					
	Ширина по обрезу, мм	Длина в рулоне, м	Поле	Контрольное поле, мм	Расстояние	Диаметр шпули, мм (±0,5 мм)
1	37-0,5	8	-	-	-	12
2	95-0,5	50	85±0,2	5±0,3	-	18
3	95-0,5	50	85±0,2	5±0,3	-	12
4	95-0,5	30	-	-	-	18
5	95-0,5	40	-	-	-	12
6	190-1,0	50	180±0,5	5±0,3	-	18
7	190-1,0	25	180±0,5	5±0,3	-	12
8	190-1,0	30	-	-	-	12
9	190-1,0	40	-	-	-	18
10	285-0,6	50	275±0,5	5±0,3	-	18
11	285-0,6	40	275±0,5	5±0,3	-	12
12	285-0,6	30	-	-	-	18
13	180-1,0	25	175±0,5	2,5±0,3	-	18
14	180-1,0	30	175±0,5	2,5±0,3	-	12
15	180-1,0	40	175±0,5	2,5±0,3	-	18
16	180-1,0	25	175±0,5	2,5±0,3	-	12
17	180-1,0	25	-	-	-	18
18	180-1,0	30	-	-	-	12
19	150-1,0	15	120±0,5	15±0,3	-	18
20	150-1,0	25	129±0,5	11±0,2	-	18
21	150-1,0	30	120±0,5	15±0,3	-	12
22	150-1,0	40	129±0,5	11±0,2	-	18
23	150-1,0	30	-	-	-	12
24	150-1,0	50	-	-	-	18
25	145-1,0	30	125±0,5	10±0,2	-	12
26	145-1,0	40	125±0,5	10±0,2	-	18
27	145-1,0	15	125±0,5	10±0,2	-	12
28	145-1,0	50	125±0,5	10±0,2	-	18
29	145-1,0	30	-	-	-	12
30	145-1,0	50	-	-	-	18
31	50-0,5	15	40±0,2	5±0,3	-	12
32	50-0,5	50	-	-	-	18
33	50-0,5	30	-	-	-	12
34	120-1,0	40	108±0,5	6±0,3	-	12
35	120-1,0	50	108±0,5	6±0,3	-	18
36	120-1,0	15	108±0,5	6±0,3	-	12
37	120-1,0	30	108±0,5	6±0,3	-	18
38	120-1,0	40	108±0,5	6±0,3	-	18
39	120-1,0	30	108±0,5	6±0,3	-	18
40	120-1,0	30	-	-	-	18
41	120-1,0	45	-	-	-	18
42	45-0,5	50	-	-	-	18

44	45-0,5	30	-	-	-	12
45	45-0,5	15	-	-	-	12
46	45-0,5	25	-	-	-	12
47	50-0,5	30	40±0,2	5±0,3	-	18
48	50-1,0	25	40±0,2	4±0,3	100±0,4	18
49	50-0,5	30	40±0,2	5±0,3	100±0,4	18
50	50-0,5	25	40±0,5	5±0,3	100±0,4	18
51	50-1,0	30	40±0,5	5±0,3	100±0,4	18
52	50-0,5	50	40±0,2	5±0,3	-	18
53	57-1,0	20	-	-	-	12
54	57-1,0	23	50±0,5	3,5±0,3	-	12
55	57-1,0	30	50±0,5	3,5±0,3	-	12
56	57-1,0	40	50±0,5	3,5±0,3	-	12
57	57-1,0	23	-	-	-	12
58	57-1,0	50	50±0,5	3,5±0,3	-	12
59	60-1,0	75	-	-	-	18
60	60-1,0	50	-	-	-	12
61	60-1,0	30	-	-	-	12
62	60-1,0	15	-	-	-	18
63	63-1,0	30	55±0,5	4±0,3	-	18
64	63-1,0	50	55±0,5	4±0,3	-	18
65	63-1,0	15	55±0,5	4±0,3	-	12
66	63-1,0	40	55±0,5	4±0,3	-	18
67	63-1,0	30	-	-	-	18
68	63-1,0	75	-	-	-	12
69	80-1,0	25	-	-	-	12
70	80-1,0	30	70±0,5	5±0,3	-	18
71	80-1,0	30	-	-	-	18
72	80-1,0	15	-	-	-	12
73	80-1,0	50	70±0,5	5±0,3	-	18
74	80-1,0	40	70±0,5	5±0,3	-	18
75	90-1,0	40	80±0,5	5±0,3	-	12
76	90-1,0	30	80±0,5	5±0,3	-	18
77	90-1,0	15	80±0,5	5±0,3	-	18
78	90-1,0	50	-	-	-	18
79	90-1,0	45	-	-	-	12
80	90-1,0	25	-	-	-	18
81	90-1,0	50	80±0,5	5±0,3	-	18
82	110-1,0	30	100±0,5	5±0,3	-	12
83	110-1,0	30	100±0,5	5±0,3	-	18
84	110-1,0	30	-	-	-	12
85	110-1,0	50	100±0,5	5±0,3	-	18
86	110-1,0	15	100±0,5	5±0,3	-	12
87	110-1,0	40	-	-	-	18
88	112-1,0	50	102±0,5	4±0,3	-	12
89	112-1,0	30	102±0,5	4±0,3	-	12
90	112-1,0	40	-	-	-	12

136	170-1,0	30	160±0,5	5±0,3	-	18
135	170-1,0	50	160±0,5	5±0,3	-	18
134	145-1,0	15	120±0,5	10±0,3	-	18
133	145-1,0	50	135±0,5	5±0,3	-	12
132	145-1,0	30			-	18
131	145-0,5	40	135±0,5	3±0,3	-	12
130	145-1,0	30	135±0,5	5±0,3	-	18
129	140-1,0	30	-	-	-	18
128	140-1,0	15	-	-	130±0,3	12
127	140-0,5	15	110±0,5	8±0,3	130±0,3	18
126	140-1,0	15	120±0,5	10±0,3	130±0,3	18
125	48-0,5	40	-	-	-	12
124	48-0,5	15	-	-	-	18
123	48-1,0	75	-	-	-	12
122	48-1,0	30	-	-	-	18
121	104-1,0	50	-	-	140±0,5	18
120	104-1,0	30	-	-	-	12
119	104-0,5	40	-	-	150±0,5	12
118	104-1,0	25	94±0,5	3±0,3	150±0,5	18
117	104-1,0	25	94±0,5	5±0,3	150±0,5	12
116	70-1,0	40	-	-	--	12
115	70-0,5	50	-	-	--	12
114	70-0,5	30	-	-	--	18
113	240-1,0	50	-	-	-	12
112	240-1,0	30	-	-	-	18
111	240-1,0	15	230±0,5	5±0,3		12
110	240-1,0	30	230±0,5	5±0,3		18
109	240-1,0	40	230±0,5	9±0,3		18
108	44-0,5	50	-	-	-	18
107	44-1,0	45	-	-	-	12
106	44-0,5	27	-	-	-	12
105	130-1,0	50	-	-	-	18
104	130-1,0	25	115±0,5	9±0,3	150±0,5	12
103	130-1,0	30	120±0,5	5±0,3	-	18
102	130-1,0	25	115±0,5	5±0,3	150±0,5	12
101	130-1,0	40	115±0,5	9±0,3	140±0,5	12
100	130-1,0	30	120±0,5	5±0,3	-	18
99	130-1,0	25	115±0,5	9±0,3	150±0,5	12
98	120-1,0	50	-	-	-	12
97	120-1,0	40	-	-	-	18
96	120-1,0	25	-	-	130±0,5	18
95	120-1,0	30	-	-	100±0,5	12
94	120-1,0	25	110±0,5	5±0,3	130±0,5	18
93	120-1,0	50	100±0,5	5±0,3	100±0,5	12
92	120-1,0	15	110±0,5	5±0,3	140±0,5	18
91	120-1,0	30	110±0,5	5±0,3	150±0,5	18
112-1,0		30	-	-	-	12

138	170-1,0	25	160±0,5	5±0,3	-	12
139	170-1,0	30	-	-	-	18
140	183-1,0	15	173±0,5	5±0,3	-	18
141	183-1,0	30	173±0,5	5±0,3	-	18
142	183-1,0	25	173±0,5	-	-	12
143	183-1,0	50	173±0,5	5±0,3	-	18
144	183-1,0	30	-	-	-	12
145	210-1,0	45	200±0,5	5±0,3	150±0,5	18
146	210-1,0	30	200±0,5	5±0,3	-	12
147	210-1,0	30	200±0,5	5±0,3	-	18
148	210-1,0	30	190±0,5	5±0,3	150±0,5	18
149	210-1,0	60	-	-	-	12
150	250-1,0	50	240±0,5	5±0,3	-	18
151	250-0,5	30	240±0,5	8±0,3	-	12
152	250-1,0	40	245±0,5	5±0,3	-	18
153	250-1,0	15	-	-	-	18
154	64-1,0	30	60±0,5	2±0,3	-	18
155	64-1,0	15	60±0,5	2±0,3	-	12
156	64-1,0	40	-	-	-	12
157	64-1,0	75	-	-	-	18
158	220-1,0	40	220±0,5	-	-	18
159	210-1,0	40	210±0,5	-	-	12
160	55-1,0	40	55±0,5	-	-	18
161	55-1,0	35	45±0,5	5±0,3	-	18
162	55-1,0	15	55±0,5	-	-	12
163	55-1,0	40	-	-	-	18
164	180-1,0	15	170±0,5	5±0,3	-	12
165	300-1,0	70	-	-	-	18
166	246-0,5	30	236±0,5	-	-	18
167	216-1,0	40	205±0,5	5,5±0,3	-	12
168	216-1,0	30	205±0,5	5,5±0,3	-	12
169	216-0,5	40	205±0,5	5,0±0,3	-	12
170	216-1,0	25	200±0,5	5,5±0,3	-	18
171	210-1,0	25	200±0,5	5±0,3	150±0,5	12
172	118-1,0	15	108±0,5	5±0,3	150±0,5	18
173	118-1,0	30	110±0,5	5±0,3	150±0,5	18
174	118-1,0	30	110±0,5	5±0,3	-	12
175	118-1,0	30	-	-	-	12
176	118-1,0	30	-	-	150±0,5	18
177	60-1,0	15	50±0,5	5±0,3	75±0,2	18
178	110-1,0	30	100±0,5	5±0,3	150±0,5	12
179	120-1,0	23	-	-	-	12
180	250-1,0	25	240±0,5	5±0,3	-	12
181	150-1,0	50	-	-	-	12
182	108-1,0	25	-	-	-	12
183	108-1,0	30	-	-	75±0,2	12
184	108-1,0	40	98±0,5	5±0,3	-	15

185	120-1,0	30	110±0,5	5±0,3	115±0,5	22
186	130-1,0	30	120±0,5	5±0,3	-	24
187	48-0,5	27	-	-	-	12
188	48-0,5	35	-	-	-	18
189	48-1,0	47	-	-	-	12
190	105-1,0	5	95±0,5	-	-	12
191	105-1,0	20	95±0,5	5±0,3	-	18
192	105-1,0	30	-	-	-	12
193	160-1,0	40	150±0,5	5±0,3	150±0,5	18
194	160-0,5	30	150±0,5	4±0,3	110±0,5	18
195	160-1,0	30	-	-	150±0,5	18
196	160-1,0	40	-	-	-	18
197	83-0,5	15	70±0,5	10±0,3	-	18
198	83-0,5	30	80±0,5	3±0,3	-	18
199	83-0,5	40	70±0,5	10±0,3	-	12
200	83-0,5	27	-	-	-	18
201	150-1,0	50	-	-	-	23
202	250-1,0	50	-	-	-	14
203	55-1,0	30	-	-	-	20
204	90-1,0	35	-	-	-	20
205	200-1,0	40	190±0,5	3±0,3	-	18
206	200-1,0	30	190±0,5	5±0,3	-	12
207	200-1,0	40	-	-	-	18
208	297-1,0	70	-	-	-	18
209	297-1,0	30	-	-	-	12
210	88-0,5	40	78±0,5	5±0,3	70±0,5	12
211	88-0,5	30	78±0,5	3±0,3	70±0,5	18
212	88-0,5	15	78±0,5	5±0,3	-	12
213	88-0,5	40	-	-	70±0,5	12
214	88-0,5	50	-	-	-	12
215	125-1,0	30	115±0,5	5±0,3	-	12
216	125-1,0	40	115±0,5	10±0,3	-	18
217	125-1,0	53	115±0,5	-	-	12
218	125-1,0	15	-	-	-	12
219	151-0,5	30	140±0,5	-	-	12
220	151-1,0	25	140±0,5	5±0,3	-	12
221	151-1,0	40	140±0,5	-	-	18
222	151-1,0	27	110±0,5	5±0,3	-	12
223	151-1,0	30	-	-	-	12
224	270-1,0	50	260±0,5	5±0,3	-	18
225	270-1,0	50	240±0,5	5±0,3	-	18
226	270-1,0	50	260±0,5	-	-	18
227	270-1,0	30	260±0,5	5±0,3	200±0,5	18
228	270-1,0	30	-	-	200±0,5	18
229	270-1,0	30	260±0,5	-	-	18
230	134-0,5	15	-	-	-	12
231	134-0,5	30	-	-	40±0,5	18

134-1,0	15	-	-	-	18
134-0,5	40	-	-	-	12
93-0,5	30	83±0,5	5±0,3	90±0,5	12
93-0,5	40	83±0,5	5±0,3	90±0,5	18
93-0,5	40	-	-	90±0,5	12
93-0,5	30	73±0,5	10±0,3	90±0,5	12
93-0,5	30	-	-	-	12
148-1,0	40	138±0,5	5±0,3	-	18
148-1,0	40	138±0,5	-	-	18
148-1,0	40	138±0,5	-	-	18
148-1,0	30	138±0,5	5±0,3	-	12
148-1,0	40	138±0,5	5±0,3	-	18
148-1,0	40	138±0,5	-	-	18
148-1,0	25	-	-	-	18
220-1,0	15	210±0,5	-	-	12
220-1,0	40	210±0,5	3±0,3	-	18
95-1,0	30	-	-	-	18
95-1,0	15	85±0,5	5±0,3	-	18
95-0,5	40	85±0,5	5±0,3	70±0,5	12
95-1,0	30	85±0,5	5±0,3	70±0,5	18
209-1,0	35	195±0,5	-	-	18
209-1,0	27	195±0,5	5±0,3	-	18
209-1,0	40	195±0,5	5±0,3	-	18
209-1,0	30	-	-	-	18
95-1,0	30	-	-	-	18
152-1,0	30	142±0,5	5±0,3	-	12
152-1,0	40	142±0,5	-	-	18
152-0,5	30	142±0,5	5±0,3	-	18
152-1,0	30	-	-	-	12
143-1,0	15	133±0,5	5±0,3	100±0,5	12
143-1,0	50	133±0,5	5±0,3	-	18
143-1,0	30	133±0,5	-	100±0,5	18
143-1,0	30	-	-	100±0,5	12
143-1,0	30	-	-	-	12
100-0,5	25	90±0,5	-	-	18
100-0,5	25	90±0,5	5±0,3	-	18
100-0,5	40	90±0,5	7,5±0,3	-	18
100-1,0	40	90±0,5	7,5±0,3	-	12
215-1,0	50	-	-	-	18
215-1,0	38	-	-	-	18
215-1,0	15	-	-	150±0,5	18
175-1,0	27	165±0,5	5±0,3	-	12
175-1,0	40	165±0,5	-	-	12

175-1,0	27	165±0,5	5±0,3	-	18
227-1,0	65	-	-	-	18
227-1,0	30	-	-	-	12
227-0,5	40	-	-	-	18
245-1,0	20	235±0,5	10±0,3	200±0,5	18
245-1,0	35	235±0,5	5±0,3	200±0,5	18
245-1,0	40	235±0,5	6±0,3	200±0,5	18
40-0,5	27	-	-	-	12
62-0,5	30	52±0,5	3±0,3	-	18
120-1,0	20	108±0,5	6±0,3	-	19
110-1,0	5	-	-	-	12
60-1,0	15	-	-	-	16
58-1,0	30	50±0,5	3,5±0,3	-	12
60-1,0	30	-	-	-	18
80-1,0	30	70±0,5	5±0,3	-	12
90-1,0	35	80±0,5	5±0,3	-	18
108-1,0	30	100±0,5	3±0,3	-	16
112-1,0	27	100±0,5	5±0,3	-	12
112-1,0	22	100±0,5	5±0,3	-	12
55-1,0	30	55±0,5	-	-	12
130-1,0	25	115±0,5	9±0,3	150±0,5	16
183-1,0	30	173±0,5	-	-	19
210-1,0	20	190±0,5	5,0±0,3	-	20
216-1,0	40	200±0,5	5,5±0,3	-	18
200-1,0	50	-	-	-	18
40-0,5	30	-	-	-	18
50-0,5	20	-	-	-	12
50-0,5	25	-	-	-	12
110-1,0	21	-	-	-	12
110-1,0	20	-	-	-	12
110-1,0	18	-	-	-	12
210-1,0	25	-	-	-	25
84-1,0	12,5	-	-	-	12
84-1,0	13,5	-	-	-	12
210-1,0	12,5	-	-	-	25
216-1,0	20	205±0,5	55±0,3	-	18
216-1,0	20	200±0,5	55±0,3	-	12
216-1,0	20	200±0,5	55±0,3	-	25
216-1,0	21	-	-	-	18
216-1,0	21	-	-	-	12
216-1,0	21	-	-	-	25
110-1,0	22	-	-	-	12
80-1,0	60	-	-	-	12
57-1,0	14	-	-	-	12
112-1,0	30	105±0,5	6±0,3	-	18
215-1,0	20	-	-	-	16
215-1,0	25	200±0,5	6±0,3	-	18

326	150-1,0	25	140±0,5	5±0,3	-	18
327	80-1,0	20	-	-	-	12
328	57-0,5	4	-	-	-	12
329	57-0,5	6	-	-	-	12
330	215-1,0	20	200±0,5	55±0,3	-	18
331	63-1,0	30	55±0,5	4±0,3	-	12
332	57-1,0	25	-	-	-	12
333	57-1,0	25	50±0,5	3,5±0,3	-	18
334	110-1,0	25	100±0,5	5±0,3	-	12
335	112-1,0	25	-	-	-	12
336	57-1,0	60	-	-	-	12
337	55-1,0	30	40±0,5	5±0,3	-	12
338	112-1,0	10	-	-	-	12
339	57-1,0	25	-	-	-	12
340	44-0,5	30	-	-	-	12
341	112-1,0	30	100±0,5	5,0±0,5	-	18
342	110-1,0	10	-	-	-	12
343	80-1,0	80	-	-	-	12

Перечень бумаги регистрирующей в пачках

№ п/п	Основные параметры и характеристики							
	Ширина по обрезу, мм	Длина в пачке, м (±1м)	Поле записи, мм (±0,5мм)	Контрольное поле, мм	Расстояние между метками (перфорационными отверстиями), мм	Шаг фальцовки, мм	Расстояние от линии фальцовки до метки (перфорационных отверстий), мм	Размер метки (пуансона), мм
1	70-1,0	20	60	5±0,3	100±0,4	100±0,4	21±0,3	5x5
2	70-1,0	20	60	5±0,3	-	100±0,4	21±0,3	-
3	70-1,0	20	-	-	100±0,4	100±0,4	21±0,3	5x5
4	90-1,0	28	80	5±0,3	70±0,2	70±0,2	25±0,3	5x5
5	90-1,0	36	80	5±0,3	90±0,4	90±0,4	28±0,3	5x5
6	90-1,0	36	-	-	-	90±0,4	-	-
7	90-1,0	36	80	5±0,3	-	90±0,4	28±0,3	-
8	100-1,0	15	85	8±0,3	-	100±0,4	-	-
9	100-1,0	30	-	-	-	100±0,4	-	-
10	100-1,0	30	85	8±0,3	-	100±0,4	-	-
11	107-1,0	28	90	9±0,3	140±0,5	140±0,5	135±0,5	6x4
12	107-1,0	28	90	9±0,3	140±0,5	140±0,5	135±0,5	6x8
13	107-1,0	28	-	-	140±0,5	140±0,5	135±0,5	6x4
14	110-1,0	20	100	5±0,3	100±0,4	100±0,4	70±0,4	6x10
15	110-1,0	20	-	-	140±0,5	140±0,5	135±0,5	5x5
16	110-1,0	45	-	-	150±0,5	150±0,5	146±0,5	5x4
17	110-1,0	30	105	3,5±0,3	100±0,4	100±0,4	97±0,4	6x4
18	116-1,0	20	100	10±0,3	-	120±0,4	-	-
19	116-0,5	20	100	7,5±0,3	-	120±0,4	-	-
20	116-1,0	40	100	10±0,3	-	120±0,4	-	-
21	120-1,0	15	104	10±0,3	-	100±0,4	-	5x5
22	120-1,0	20	-	-	-	100±0,4	-	5x5
23	120-1,0	45	104	13±0,3	-	100±0,4	-	5x5
24	126-1,0	25,5	100	15±0,3	150±0,5	150±0,5	5±0,15	8x4
25	126-1,0	30	100	15±0,3	150±0,5	150±0,5	5±0,15	7x5
26	126-1,0	30	-	-	-	150±0,5	-	-
27	130-1,0	50	125	2,5±0,3	135±0,5	135±0,5	111±0,4	7,5x9
28	130-0,5	30	125	2,5±0,3	135±0,5	135±0,5	111±0,4	7,5x9
29	130-1,0	30	125	5,0±0,3	135±0,5	135±0,5	111±0,4	7,5x9
30	130-1,0	50	125	2,5±0,3	135±0,5	135±0,5	111±0,4	9x9
31	135-1,0	21	125	5±0,3	140±0,5	140±0,5	26±0,3	5x5
32	135-1,0	40	125	5±0,3	140±0,5	140±0,5	26±0,3	5x5
33	135-1,0	35	125	5±0,3	-	140±0,5	-	-
34	145-1,0	35	135	5±0,3	100±0,4	100±0,4	10±0,2	5x5
35	145-1,0	25	135	5±0,3	100±0,4	100±0,4	-	10x6 об.
36	145-1,0	40	135	10±0,3	100±0,4	100±0,4	10±0,2	5x5
37	145-1,0	25	135	5±0,3	90±0,4	100±0,4	-	6x6
38	145-1,0	25	-	-	-	100±0,4	-	-
39	148-1,0	30	138	5±0,3	100±0,4	100±0,4	85±0,4	5x8

	148-1,0	40	135	-	100±0,4	100±0,4	85±0,4	5x5
	148-1,0	45	135	5±0,3	-	100±0,4	-	-
42	148-1,0	40	-	-	100±0,4	100±0,4	85±0,4	5x5
43	148-1,0	40	135	5±0,3	100±0,4	100±0,4	85±0,4	5x5
44	150-1,0	15	126,5	12±0,3	100±0,4	100±0,4	60±0,4	6x6
45	150-1,0	45	120,5	12±0,3	100±0,4	100±0,4	60±0,4	6x8
46	150-1,0	15	-	-	100±0,4	100±0,4	60±0,4	6x6
47	152-1,0	30	-	-	-	150±0,4	-	-
48	152-1,0	30	131	10±0,3	-	150±0,4	-	-
49	112-1,0	30	100	5±0,3	-	120±0,4	-	-
50	112-1,0	14	100	5±0,3	-	90±0,4	-	-
51	112-1,0	40	100	5±0,3	-	100±0,4	-	-
52	210-1,0	35	200	5±0,3	140±0,5	140±0,5	29±0,3	5x5
53	210-1,0	30	200	5±0,3	150±0,5	150±0,5	25±0,3	5x5
54	210-1,0	25,5	150	52±0,3	150±0,5	150±0,5	141±0,5	8x4
55	112-1,0	15	100	5±0,3	-	100±0,4	-	-
56	112-1,0	30	-	-	-	100±0,4	-	-
57	112-1,0	27	92	5±0,3	--	100±0,4	-	-
58	32-0,5	18	22	5±0,3	50±0,5	75±0,4	23±0,3	2x4
59	80-1,0	21	70	5±0,3	-	70±0,4	-	-
60	80-1,0	14	60	10±0,3	-	70±0,4	-	-
61	80-1,0	25,2	-	-	-	70±0,4	-	-
62	100-1,0	21,6	90	5±0,3	90±0,5	90±0,4	25±0,3	6x8 ..
63	144-1,0	20	134	5±0,3	-	100±0,4	-	- -
64	203-1,0	32	193	10±0,3	-	254±0,5	-	- ..
65	354-1,0	54	-	-	-	430±0,5	-	- ..
66	200-1,0	31,5	190	5±0,3	-	250±0,5	-	-
67	250-1,0	37,5	240	-	-	300±0,5	-	-
68	250-1,0	150	240	5±0,3	-	300±0,5	-	-
69	420-1,0	300	-	-	-	300±0,5	-	-
70	245-1,0	300	235	5±0,3	300±0,5	300±0,5	111±0,4	5x5
71	400-1,0	300	-	-	-	300±0,5	-	-
72	210-1,0	42	-	-	150±0,5	150±0,4	105±0,4	10x5
73	210-1,0	20	200	4±0,3	140±0,5	140±0,5	136±0,5	5x3
74	210-1,0	30	200	4±0,3	150±0,5	150±0,5	146±0,5	5x3
75	210-1,0	60	200	5±0,3	280±0,7	280±0,7	3±0,12	6x6 -
76	210-1,0	60	200	5±0,3	300±0,7	300±0,7	5±0,15	6x 4 8x6
77	210-1,0	60	195	7±0,3	300±0,7	300±0,7	275±0,7	7x7
78	210-1,0	60	-	-	300±0,7	300±0,7	292±0,7	9x3
79	210-1,0	60	140	67±0,3	300±0,7	300±0,7	288±0,7	12x6
80	210-1,0	100	200	7±0,3	295±0,7	295±0,7	275±0,7	7x7
81	145-1,0	60	130	7±0,3	150±0,5	150±0,4	122±0,4	7x14
82	63-1,0	50	50	7±0,3	100±0,4	100±0,4	84±0,4	7x4 -
83	210-1,0	56	200	5±0,3	280±0,7	280±0,7	269±0,7	6x7
84	147-1,0	40	140	4±0,3	100±0,4	100±0,4	62±0,4	10x6 об.
85	210-1,0	42	-	-	140±0,5	140±0,4	-	6x7
86	210-1,0	60	205	2±0,3	300±0,7	300±0,7	277±0,7	8x7

	152-1,0	13,5	127,5	12±0,3	-	90±0,4	-	-
	110-1,0	20	100	5±0,3	140±0,5	140±0,5	117±0,4	11x8
9	110-1,0	13,5	100	5±0,3	-	90±0,5	-	-
90	60-1,0	19	50	5±0,3	75±0,2	75±0,2	68±0,4	6x7
91	210-1,0	60	185	6±0,3	300±0,7	300±0,7	292±0,7	6x6
92	210-1,0	37,5	200	5±0,3	150±0,5	150±0,4	124±0,4	5x5
93	90-1,0	32,4	80	5±0,3	90±0,4	90±0,4	67±0,4	7x5
94	104-1,0	30	95	4±0,3	100±0,4	100±0,4	78±0,5	6x6
95	110-1,0	40	-	-	-	100±0,4	-	-
96	279-1,0	44	269	5±0,3	-	354±0,7	-	-
97	240-1,0	60	230	5±0,3	-	300±0,7	-	-
98	240-1,0	600	-	-	-	300±0,7	-	-
99	215-1,0	56	205	2±0,3	-	280±0,5	-	-
100	215-1,0	56	205	2±0,3	280±0,4	280±0,4	23±0,5	6x8
101	215-1,0	150	-	-	-	280±0,5	-	-
102	145-1,0	30	140	4±0,3	100±0,4	75±0,4	62±0,4	10x6
103	106-1,0	28	96	5±0,3	-	140±0,4	-	-
104	50-0,5	30	-	-	-	-	-	-
105	145-1,0	20	140	4±0,3	-	75±0,4	-	-
106	214-1,0	84	204	5±0,3	140±0,5	140±0,4	124±0,4	5x9
107	120-1,0	18	110	5±0,3	-	120±0,5	-	-
108	120-1,0	18	-	-	-	120±0,5	-	-
109	110-1,0	30	104	3±0,3	100±0,4	100±0,4	97±0,4	6x6
110	120-1,0	18	120	7±0,3	-	120±0,4	-	-
111	120-1,0	75	110	5±0,3	150±0,4	150±0,4	103±0,4	10x8
112	120-1,0	18	-	-	-	150±0,4	-	-
113	120-1,0	30	100	5±0,3	-	120±0,4	-	-
114	130-1,0	50	120	5±0,3	-	200±0,5	-	-
115	143-1,0	45	-	-	-	150±0,4	115±0,4	3x5
116	145-1,0	60	130	7±0,3	150±0,4	150±0,4	110±0,4	7x7, 7x13
117	150-1,0	27	126	12±0,2	90±0,4	90±0,4	85±0,4	5x5
118	151-1,0	27	125	12±0,2	150±0,4	150±0,4	85±0,4	6x6
119	151-1,0	30	125	5±0,2	-	150±0,4	-	-
120	151-1,0	13,5	125	5±0,2	90±0,4	90±0,4	85±0,4	5x5
121	183-1,0	50	175	3±0,3	250±0,5	250±0,5	55±0,4	5x6
122	207-1,0	50	199	3±0,3	135±0,4	135±0,4	14±0,4	5x8
123	207-1,0	112	-	-	280±0,5	280±0,5	14±0,4	5x8
124	210-1,0	30	-	-	150±0,4	150±0,4	0,5±0,1	6x6
125	210-1,0	84	195	5±0,3	280±0,5	280±0,5	24±0,4	6x13
126	210-1,0	100,8	200	5±0,3	280±0,5	280±0,5	246±0,7	5x6
127	210-1,0	44,25	205	3±0,3	295±0,5	295±0,5	15±0,4	8x8
128	210-1,0	60	199	4±0,3	300±0,5	300±0,5	1±0,1	7x4
129	210-1,0	60	204	3±0,3	300±0,5	300±0,5	8±0,4	6x13
130	216-1,0	56	150	5±0,3	280±0,5	280±0,5	6±0,4	6x13
131	300-1,0	60	-	-	-	300±0,5	-	-
132	250-1,0	150	240	5±0,3	200±0,5	200±0,5	17 5±0,5	6x9
133	50-1,0	18	40	5±0,3	70±0,4	70±0,4	5±0,4	5x9

180	110-1,0	25	100	5±0,3	100±0,4	100±0,4	70±0,4	6x10
179	120-1,0	30	-	-	-	-	-	-
178	210-1,0	28	195	5±0,3	280±0,5	280±0,5	24±0,4	6x13
177	210-1,0	45	200	5±0,3	300±0,7	300±0,7	5±0,15	8x6
176	210-1,0	75	200	5±0,3	300±0,7	300±0,7	5±0,15	8x6
175	80-1,0	25	70	5±0,3	-	90±0,4	-	-
174	90-1,0	24	80	5±0,3	70±0,2	70±0,2	25±0,5	5x5
173	210-1,0	30	200	4±0,3	140±0,5	140±0,5	136±0,5	6x3
172	80-1,0	19	70	5±0,3	70±0,4	70±0,4	-	-
171	210-1,0	45	200	4±0,3	300±0,5	300±0,5	15±0,4	8x8
170	210-1,0	60	200	4±0,3	150±0,5	150±0,5	146±0,5	5x3
169	210-1,0	50	200	4±0,3	150±0,5	150±0,5	146±0,5	5x3
168	210-1,0	48	-	-	150±0,5	150±0,4	105±0,4	10x5
167	210-1,0	35	200	4±0,3	140±0,5	140±0,4	136±0,5	5x6
166	210-1,0	22	-	-	140±0,5	140±0,5	-	-
165	210-1,0	30	200	4±0,3	140±0,5	140±0,5	136±0,5	5x3
164	112-1,0	45	100	5±0,3	-	150±0,5	-	-
163	112-1,0	27	100	5±0,3	-	90±0,4	-	-
162	110-1,0	28	-	-	140±0,5	140±0,5	135±0,5	5x5
161	108-1,0	36	90	9±0,3	140±0,4	140±0,4	135±0,5	6x8
160	80-1,0	22	70	5±0,3	-	70±0,4	-	-
159	80-1,0	22,5	70	5±0,3	-	90±0,4	-	-
158	420-1,0	300	-	-	-	150±0,4	-	-
157	420-1,0	600	-	-	-	300±0,4	-	-
156	240-1,0	300	-	-	-	150±0,4	-	-
155	240-1,0	600	-	-	-	300±0,4	-	-
154	245-1,0	300	-	-	-	300±0,4	-	-
153	330-1,0	150	-	-	-	150±0,4	-	-
152	400-1,0	150	-	-	-	150±0,4	-	-
151	215-1,0	75	-	-	-	150±0,4	-	-
150	345-1,0	150	-	-	-	150±0,4	-	-
149	300-1,0	150	-	-	-	150±0,4	-	-
148	245-1,0	150	-	-	-	150±0,4	-	-
147	330-1,0	300	-	-	-	300±0,4	-	-
146	345-1,0	300	-	-	-	300±0,4	-	-
145	250-1,0	100	-	-	-	200±0,4	-	-
144	297-1,0	100	-	-	-	200±0,4	-	-
143	152-1,0	30	142	5±0,3	-	150±0,4	-	-
142	140-1,0	42	130	5±0,3	150±0,4	150±0,4	110±0,4	7x13
141	152-1,0	15	-	-	-	90±0,4	-	-
140	145-1,0	30	135	5±0,3	-	125±0,4	-	-
139	63-1,0	30	50	6±0,3	75±0,4	75±0,4	15±0,4	5x7
138	63-1,0	40	50	6±0,3	100±0,4	100±0,4	14±0,4	4x6
137	183-1,0	50	173	7±0,3	-	250±0,5	-	-
136	183-1,0	42	173	7±0,3	130±0,4	130±0,4	15±0,4	6x6
-	50-1,0	30	40	5±0,3	-	100±0,4	-	-
5x6	50-1,0	30	40	5±0,3	70±0,4	70±0,4	5±0,5	5x6

181	210-1,0	40	200	5±0,3	280±0,5	280±0,5	5±0,15	8x6
182	108-1,0	28	100	4±0,3	140±0,5	140±0,5	38±0,5	7x4
183	210-1,0	50,4	200	5±0,3	280±0,5	280±0,5	7±0,15	6*5
184	90-1,0	24,3	80	4,5±0,3	90±0,4	90±0,4	7±0,15	6*5
185	90-1,0	22,5	80	4,5±0,3	90±0,4	90±0,4	7±0,15	6*5
186	210-1,0	31,1	200	5±0,3	280±0,5	280±0,5	9±0,4	6x6
187	120-1,0	30	110	5±0,3	100±0,4	100±0,4	2±0,1	6x7
188	210-1,0	36	200	4±0,3	150±0,5	150±0,4	42±0,4	5x5
189	210-1,0	26,6	200	5±0,3	140±0,5	140±0,4	18±0,3	5x6

Прошито, пронумеровано
и скреплено

16 листов

подпись ЗН

