

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный

Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный

ОПИСАНИЕ

Пессарий силиконовый: чашечный и пессарий силиконовый: чашечный перфорированный имеет форму чаши с большим центральным отверстием. Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный по периферии выполнен с отверстиями меньшего диаметра.

Используются пессарии из эластичного биологического материала.

Пессарии силиконовые: чашечный и чашечный перфорированный поставляются следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм.

Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза, восстанавливает топографо-анатомическое взаимоотношение таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

Серия: 140715

Годен до: 2019-07

-4022-

4 811379 000920

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7-101558 от 16.06.2014 г.

ТУ BY 300046934-015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»

пр-т Любимкова, д.13, оф.413, г. Витебск,

Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный

Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный

ОПИСАНИЕ

Пессарий силиконовый: чашечный и пессарий силиконовый: чашечный перфорированный имеет форму чаши с большим центральным отверстием. Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный по периферии выполнен с отверстиями меньшего диаметра.

Используются пессарии из эластичного биологического материала.

Пессарии силиконовые: чашечный и чашечный перфорированный поставляются следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм.

Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза, восстанавливает топографо-анатомическое взаимоотношение таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

Серия: 140715

Годен до: 2019-07

-4022-

4 811379 000951

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7-101558 от 16.06.2014 г.

ТУ BY 300046934-015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»

пр-т Любимкова, д.13, оф.413, г. Витебск,

Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный

Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный

ОПИСАНИЕ

Пессарий силиконовый: чашечный и пессарий силиконовый: чашечный перфорированный имеет форму чаши с большим центральным отверстием. Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный по периферии выполнен с отверстиями меньшего диаметра.

Используются пессарии из эластичного биологического материала.

Пессарии силиконовые: чашечный и чашечный перфорированный поставляются следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм.

Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза, восстанавливает топографо-анатомическое взаимоотношение таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

Серия: 140715

Годен до: 2019-07

-4022-

4 811379 000968

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7-101558 от 16.06.2014 г.

ТУ BY 300046934-015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»

пр-т Любимкова, д.13, оф.413, г. Витебск,

Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный

Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный

ОПИСАНИЕ

Пессарий силиконовый: чашечный и пессарий силиконовый: чашечный перфорированный имеет форму чаши с большим центральным отверстием. В пессарий чашечный перфорированный по периферии выполнены отверстия меньшего диаметра. Используются пессарии из эластичного биологически инертного силикона.

Пессарии силиконовые: чашечный и чашечный перфорированный поставляются следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм.

Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомическое взаимоотношение между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

ПОКАЗАНИЯ

Консервативная (нехирургическая) коррекция выпадения женских половых органов (N 81.1 – 81.9 согласно МКБ-10), в том числе выпадения свода влагалища после экстремации матки (N 86.3 согласно МКБ-10), профилактика послеоперационных свищей влагалища (N 99.2 согласно МКБ-10).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ/ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Изделие не должно использоваться другими пациентами и должно храниться при комнатной температуре. Запрещено использовать изделие после истечения срока годности.

Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

Серия: 140715

Годен до: 2019-07

-4022-

4 811379 000944

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7-101558 от 16.06.2014 г.


ТУ BY 300046934-015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»

пр-т Любимкова, д.13, оф.413, г. Витебск,

Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

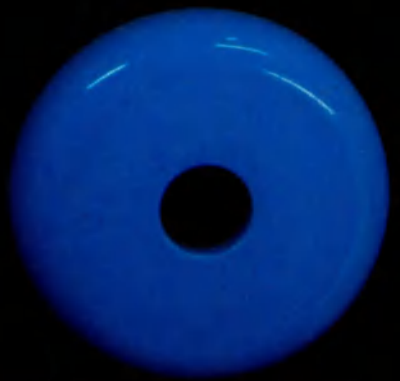

Пессарии силиконовые по ТУ BY 300046934.015-2013:

Чашечный (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95)

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный
Пессарий силиконовый:
чашечный перфорированный



Пессарий силиконовый:
www.simurg-mp.com



Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-3831-

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный
Пессарий силиконовый:
чашечный перфорированный



Пессарий силиконовый:
www.simurg-mp.com

Пессарий силиконовый:
www.simurg-mp.com

чашечный- перфорированный 65

Рег. пат. МЗ РБ № ИАТ 101558 от 16.06.2014 г.
ТУ БУ 300046934.015-2013

Истертирлы
осторожно! ОБРАТИТЕСЬ К
сопроводительной документации
Изготовитель:
ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
г.п-1 Педикова, д.13, оф.413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com



Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-4051-

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный



Пессарий силиконовый:
www.simurg-mp.com



Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-4051-

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: чашечный
Пессарий силиконовый:
чашечный перфорированный

ОПИСАНИЕ
Пессарий (силиконовый, чашечный) - пессарий силиконовый чашечный перфорированный имеет форму чаши с большим центральным отверстием. В пессарий чашечном перфорированном по периферии выполнены отверстия меньшего диаметра. Изготавливаются пессарии из эластичного биологического материала. Пессарии силиконовые: чашечный и чашечный перфорированный поставляются следующих размеров (внутренний диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм. Размер указан на изделии или этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет тупые болевые ощущения.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция выпадения венных половых органов (N 81.1 - 81.9 согласно МКБ-10), в том числе выпадения свода влагалища после экстрипации матки (N 98.3 согласно МКБ-10), профилактики послеоперационных спаек влагалища (N 99.2 согласно МКБ-10).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.


ОСЛОЖНЕНИЯ/ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных заболеваний женских тазовых органов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Предостережения



Пессарии силиконовые по ТУ БУ
300046934.015-2013:

Чашечный перфорированный (55, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95)

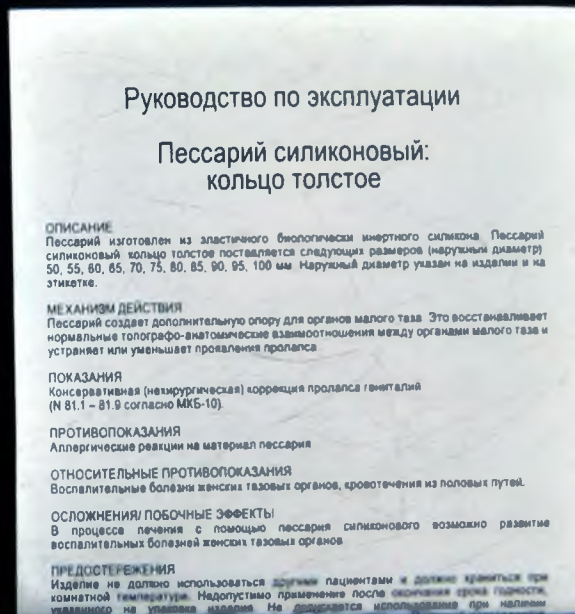


Руководство по эксплуатации
Пессарий силиконовый: кольцо



Пессарий силиконовый: Симвург
www.simgurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-4051-

Руководство по эксплуатации
Пессарий силиконовый: кольцо

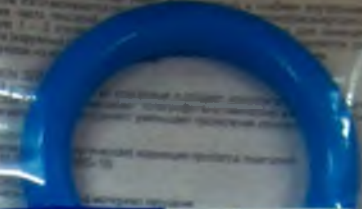

Пессарий силиконовый: Симвург
www.simgurg-mp.com

кольцо 65

Reg. ул. МЗ РБ № 101568 от 16.06.2014 г.
ТУ BY 300046934.015-2013

НЕСТЕРИЛЬНО
ОСТОРОЖНО ОБРАТИТЕСЬ К
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Изготовитель:
ЗАО «Медицинское предприятие Симвург»
пр-т Подпикова, д.13, оф.413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023, www.simgurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-4051-

Руководство по эксплуатации
Пессарий силиконовый: кольцо



Пессарий силиконовый: Симвург
www.simgurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-4051-

Руководство по эксплуатации
Пессарий силиконовый: кольцо

ОПИСАНИЕ
Пессарий силиконовый: кольцо имеет форму кольца и снабжен внутренним упругим элементом. Изготавливаются пессарии из эластичного биологически инертного силикона. Наиболее часто пессарий силиконовый: кольцо используется для лечения цистита в ретроцеле 1 – 2 степени. Пессарий силиконовый: кольцо поставляется следующих размеров (наружный диаметр) 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм. Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий (N 81.0 – 81.9 согласно МКБ-10).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ/ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Изделие не должно использоваться другими пациентами и должно храниться при комнатной температуре. Недопустимо применение после окончания срока годности, указанного на упаковке изделия. Не допускается использование при наличии повреждений (надрывы, трещины и т.д.) поверхности изделия. Пессарий поставляется

Пессарий силиконовый: Симвург
www.simgurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07
-4022-



Пессарии силиконовые по ТУ BY
300046934.015-2013:
Кольцо (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,
100)



Руководство по эксплуатации
Пессарии силиконовые примерочные:
малые; средние; большие

ОПИСАНИЕ.
Комплект пессарий силиконовых примерочных состоит из 4 пессарий силиконовых: кольца равного диаметра. Изготавливаются пессарии из эластичного биологического инертного силикона.
В комплект пессарий силиконовых примерочных малых входят пессарии силиконовые: кольца диаметром 50, 55, 60, 65 мм.
В комплект пессарий силиконовых примерочных средних входят пессарии силиконовые: кольца диаметром 65, 70, 75, 80 мм.
В комплект пессарий силиконовых примерочных больших входят пессарии силиконовые: кольца диаметром 85, 90, 95, 100 мм.
Размер кольца указан на изделии.

ПОКАЗАНИЯ
Индивидуальный подбор размера пессарии для коррекции пролапса гениталий.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессарии.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные заболевания женских половых органов, кровотечения из половых путей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Изделие не должно использоваться другими пациентами и должно храниться при комнатной температуре. Недопустимо применение после окончания срока годности, указанного на упаковке изделия. Не допускается использование при наличии повреждений (царапины, трещины и т.п.) поверхности изделия. Пессарий поставляется в стерильной упаковке, перед использованием требуется дезинфекция. Пессарий можно мыть теплой мыльной водой или с использованием мыла и без использования моющих средств. Изделие может быть очищено и дезинфицировано предпочтительно с использованием альдегидсодержащих растворов. Пессарий может также стерилизоваться паром (124°C/2,8 бар) или паром в вакууме (SIPD). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие.

ВВЕДЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕССАРИИ
После дезинфекции кольцо примерочное смазывают небольшим количеством масла.

Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:

Примерочные малые (50, 55, 60, 65), средние
(65, 70, 75, 80), большие (85, 90, 95, 100)

СИЛИКОНОВЫЙ

Симург
www.simurg-mp.com

Рег. №: МЗ РБ № ИМ.Г. 101558 от 16.06.2014 г.
ТУ BY 300046934.015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Лодыжская, д.13, оф.413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4022

Пессарий силиконовый:

грибовидный 65

Симург
www.simurg-mp.com

Рег. №: МЗ РБ № ИМ.Г. 101558 от 16.06.2014 г.
ТУ BY 300046934.015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Лодыжская, д.13, оф.413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4022

СИЛИКОНОВЫЙ:

Симург
www.simurg-mp.com

Рег. №: МЗ РБ № ИМ.Г. 101558 от 16.06.2014 г.
ТУ BY 300046934.015-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Лодыжская, д.13, оф.413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4022

Руководство по эксплуатации Пессарий силиконовый: грибовидный

Описание

Пессарий силиконовый, грибовидный имеет форму чаши на ножке, на основании которой выполнено утолщение. Изготавливаются пессарии из эластичного биологически инертного силикона. Ножка пессария предназначена для его удержания максимально глубоко во влагалище. Лечение с использованием пессария силиконового грибовидного предусмотрено в случаях, когда другие типы пессариев не эффективны.

Пессарий силиконовый, грибовидный поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм. Размер указан на изделии и на этикетке.

Механизм действия

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Показания

Консервативная (нехирургическая) коррекция выпадения женских половых органов (N 81.1 – 81.9 согласно МКБ-10), в том числе выпадение свода влагалища после экстирпации матки (N99.3 согласно МКБ-10).

Противопоказания

Аллергические реакции на материал пессария.

Пессарии силиконовые по ТУ BY
300046934.015-2013:

[illegible]

Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:

Кубический перфорированный (25, 29, 32, 37)



Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:

Кубический перфорированный (25, 29, 32, 37,
41. 45)

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

кубический 41

Рег. № МЗ РБ № 084.7.101558 от 16.08.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

 **ОСТОРОЖНО!** Обратитесь к
сертифицированной документации
изготовителя.

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
р-т Подпорожский, д. 13, оф. 413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023. www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Год изд.: 2019-07
-4022-

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

кубический 32

Рег. № МЗ РБ № 084.7.101558 от 16.08.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

 **ОСТОРОЖНО!** Обратитесь к
сертифицированной документации
изготовителя.

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
р-т Подпорожский, д. 13, оф. 413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023. www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Год изд.: 2019-07
-4022-

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

кубический 37

Рег. № МЗ РБ № 084.7.101558 от 16.08.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

 **ОСТОРОЖНО!** Обратитесь к
сертифицированной документации
изготовителя.

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
р-т Подпорожский, д. 13, оф. 413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023. www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Год изд.: 2019-07
-4022-

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

кубический 45

Рег. № МЗ РБ № 084.7.101558 от 16.08.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

 **ОСТОРОЖНО!** Обратитесь к
сертифицированной документации
изготовителя.

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
р-т Подпорожский, д. 13, оф. 413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023. www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Год изд.: 2019-07
-4022-

Пессарий силиконовый: кубический
Пессарий силиконовый: кубический перфорированный

Описание
Пессарий силиконовый: кубический и пессарий силиконовый: кубический перфорированный имеет форму куба с выгнутыми сторонами. В модели пессарий силиконовый: кубический перфорированный на сторонах выполнены отверстия для оттока влагалищного содержимого. Для удобства введения кубические пессарии снабжены нитью. Изготавливаются пессарии из инертного биологически инертного силикона.

Пессарий силиконовый: кубический и кубический перфорированный поставляется следующего размера: 25, 29, 32, 37, 41, 45 мм.

Размер указан на модели и на этикетке.

Механизм действия
Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Показания
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий (N 8.1.1 – 8.1.9) согласно МКБ-10). Кубические модели следует применять в случаях, когда другие типы пессариев не эффективны.

Противопоказания
Аллергические реакции на материал пессария.

Относительные противопоказания
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из влагалища, опухоли.

Осложнения/нежелательные эффекты
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможны следующие осложнения: болевая реакция женских тазовых органов.

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый:
цервикальный перфорированный



силиконовый:
перфорированный 70/17/32

Медицинское предприятие
Симург
www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4052-

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый:
цервикальный перфорированный



Пессарий силиконовый:
цервикальный перфорированный 65/17/32

Медицинское предприятие
Симург
www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4052-

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый:
цервикальный перфорированный



силиконовый:
перфорированный 70/25/32

Медицинское предприятие
Симург
www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4052-

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый:
цервикальный перфорированный

ОПИСАНИЕ
Пессарий силиконовый, цервикальный перфорированный имеет форму губчатой чаши с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями меньшего диаметра по периферии. Изготавливаются пессарии из эластичного биологического инертного силикона. Пессарий перфорированный устанавливается следующих размеров:

Исполнение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наружный диаметр, мм	65	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70
Высота, мм	17	17	21	21	21	25	25	30	17	17	21	21	25
Внутренний диаметр, мм	32	35	32	35	32	35	35	32	35	32	35	32	35

Размер указан на изделии и на этикетке

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция выпадения женских половых органов (N 811 – 819 согласно МКБ-10), в том числе выпадение свода влагалища после экстирпации матки (N99.3 согласно МКБ-10), профилактика послеоперационных спаек влагалища (N 99.2 согласно МКБ-10). Возможно применение во время беременности.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ/ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Изделие не должно использоваться другими пациентами и должно храниться при комнатной температуре. Недопустимо применение после окончания срока годности, указанного на упаковке изделия. Не допускается использование при наличии повреждений (надрезы, трещины и т.п.) поверхности изделия. Пессарий поставляется нестерильным, перед использованием требуется дезинфекция. Пессарий можно мыть теплой водопроводной водой с использованием, так и без использования моющих средств. Изделие может быть очищено и дезинфицировано предпочтительно с использованием альдегидсодержащих растворов. Пессарий может также стерилизоваться паром (134°C/3,8 бар) или горячим воздухом (250°C). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие.

ВЫБОР РАЗМЕРА ПЕССАРИЯ

силиконовый:
перфорированный 65/21/35

Медицинское предприятие
Симург
www.simurg-mp.com

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4052-



Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:
Цервикальный перфорированный (65/17/32,
65/21/32, 65/21/35, 65/25/32,
65/25/35, 65/30/35, 70/17/32, 70/17/35,

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: Ходжа

ОПИСАНИЕ
Пессарий силиконовый Ходжа представляет собой кольцо из эластичного биологического инертного силикона, армированного деформируемыми элементами. Это позволяет придавать изделию любую форму в зависимости от клинической ситуации. Пессарий силиконовый Ходжа поставляется следующих размеров: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм. Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет уменьшение пролапса.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий, осложненного стрессовым недержанием мочи (N 81.1 - 81.8, R 32 согласно МКБ-10). Пессарий Ходжа используется только в тех случаях, когда использование других методов пессария неэффективно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

Рег. №: 30.06.15 от 16.06.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

4 811379 001293

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-3822-

Медицинское предприятие Симург
г. Витебск, д.13, оф.413, г. Витебск, Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый:

ОПИСАНИЕ
Пессарий силиконовый Ходжа представляет собой кольцо из эластичного биологического инертного силикона, армированного деформируемыми элементами. Это позволяет придавать изделию любую форму в зависимости от клинической ситуации. Пессарий силиконовый Ходжа поставляется следующих размеров: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм. Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет уменьшение пролапса.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий, осложненного стрессовым недержанием мочи (N 81.1 - 81.8, R 32 согласно МКБ-10). Пессарий Ходжа используется только в тех случаях, когда использование других методов пессария неэффективно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

Рег. №: 30.06.15 от 16.06.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

4 811379 001350

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4052-

Медицинское предприятие Симург
г. Витебск, д.13, оф.413, г. Витебск, Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Руководство по эксплуатации

Ходжа

ОПИСАНИЕ
Пессарий силиконовый Ходжа представляет собой кольцо из эластичного биологического инертного силикона, армированного деформируемыми элементами. Это позволяет придавать изделию любую форму в зависимости от клинической ситуации. Пессарий силиконовый Ходжа поставляется следующих размеров: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм. Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет уменьшение пролапса.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий, осложненного стрессовым недержанием мочи (N 81.1 - 81.8, R 32 согласно МКБ-10). Пессарий Ходжа используется только в тех случаях, когда использование других методов пессария неэффективно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

Рег. №: 30.06.15 от 16.06.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013

4 811379 001378

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4052-

Медицинское предприятие Симург
г. Витебск, д.13, оф.413, г. Витебск, Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com

Руководство по эксплуатации

Пессарий силиконовый: Ходжа

ОПИСАНИЕ
Пессарий силиконовый Ходжа представляет собой кольцо из эластичного биологического инертного силикона, армированного деформируемыми элементами. Это позволяет придавать изделию любую форму в зависимости от клинической ситуации. Пессарий силиконовый Ходжа поставляется следующих размеров: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм. Размер указан на изделии и на этикетке.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет уменьшение пролапса.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий, осложненного стрессовым недержанием мочи (N 81.1 - 81.8, R 32 согласно МКБ-10). Пессарий Ходжа используется только в тех случаях, когда использование других методов пессария неэффективно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

ПОКАЗАНИЯ
Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий, осложненного стрессовым недержанием мочи (N 81.1 - 81.8, R 32 согласно МКБ-10). Пессарий Ходжа используется только в тех случаях, когда использование других методов пессария неэффективно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспалительные болезни женских тазовых органов, кровотечения из половых путей.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В процессе лечения с помощью пессария силиконового возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов.

Пессарий силиконовый:  **Симург**
www.simurg-mp.com

Рег. №: 30.06.15 от 16.06.2014 г.
ТУ ВУ 300046934.015-2013



4 811379 001316

Серия: 140715
Годен до: 2019-07-4022-

Медицинское предприятие Симург
г. Витебск, д.13, оф.413, г. Витебск, Республика Беларусь, 210023, www.simurg-mp.com




Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:

Ходжа (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95)

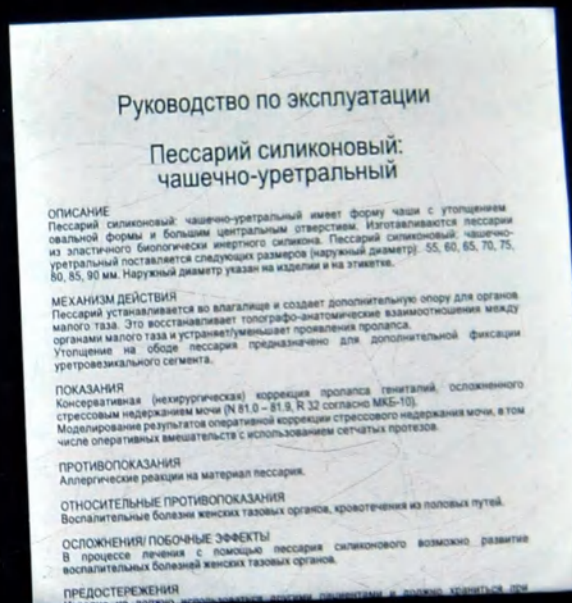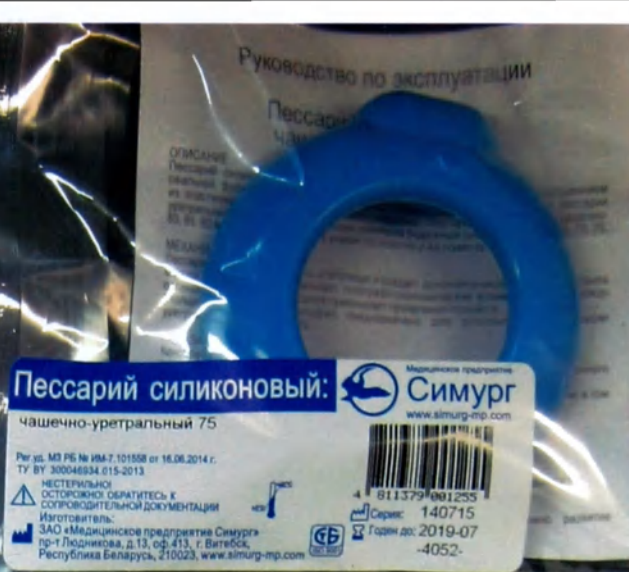

Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:

Чашечно-уретральный (55, 60, 65, 70, 75, 80,
85, 90)

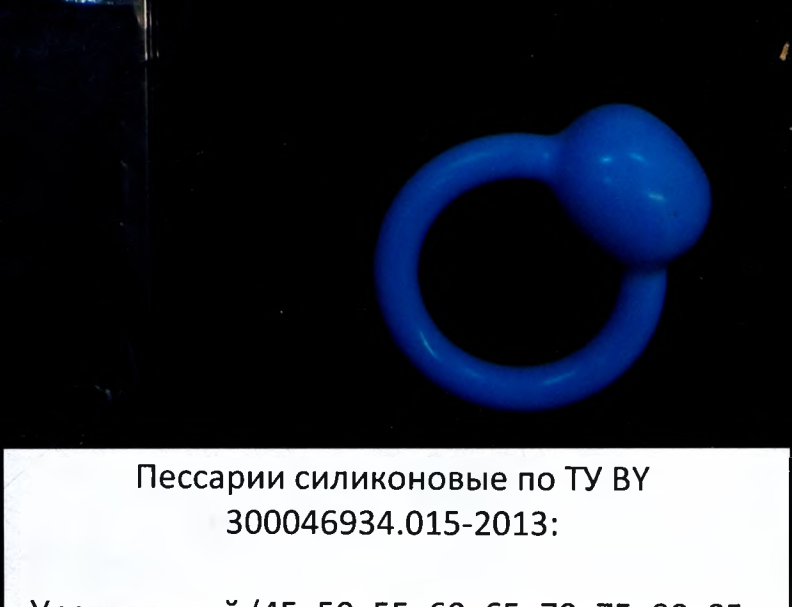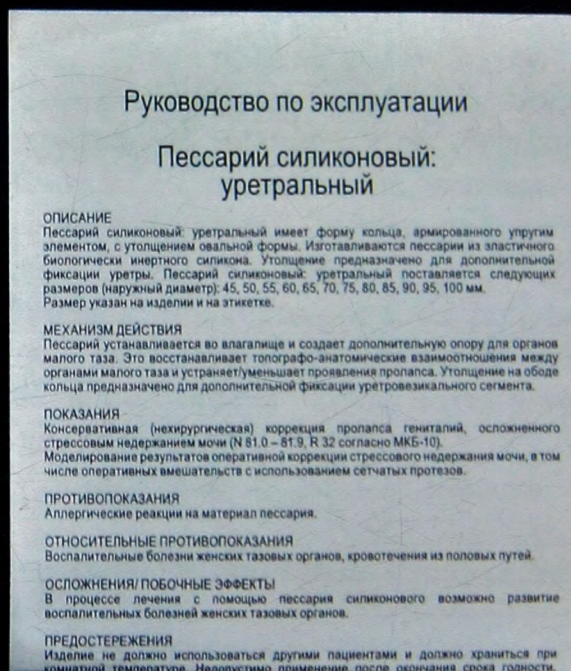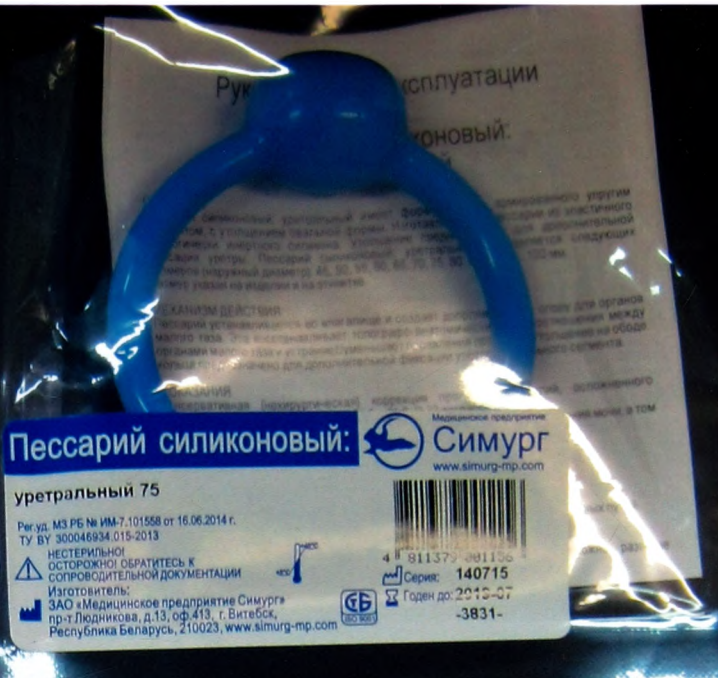

Пессарии силиконовые по ТУ ВУ
300046934.015-2013:

Уретральный (45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100)