


## Инструкция по применению

**Мочеприемник трехкамерный стерильный «Уримед Трибэг Плюс»,  
мочеприемник трехкамерный нестерильный «Уримед Трибэг Плюс»,  
производства «Б.Браун Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.),  
Франция**

- 1. Наименование:** Мочеприемник «Уримед Трибэг Плюс» стерильный и нестерильный

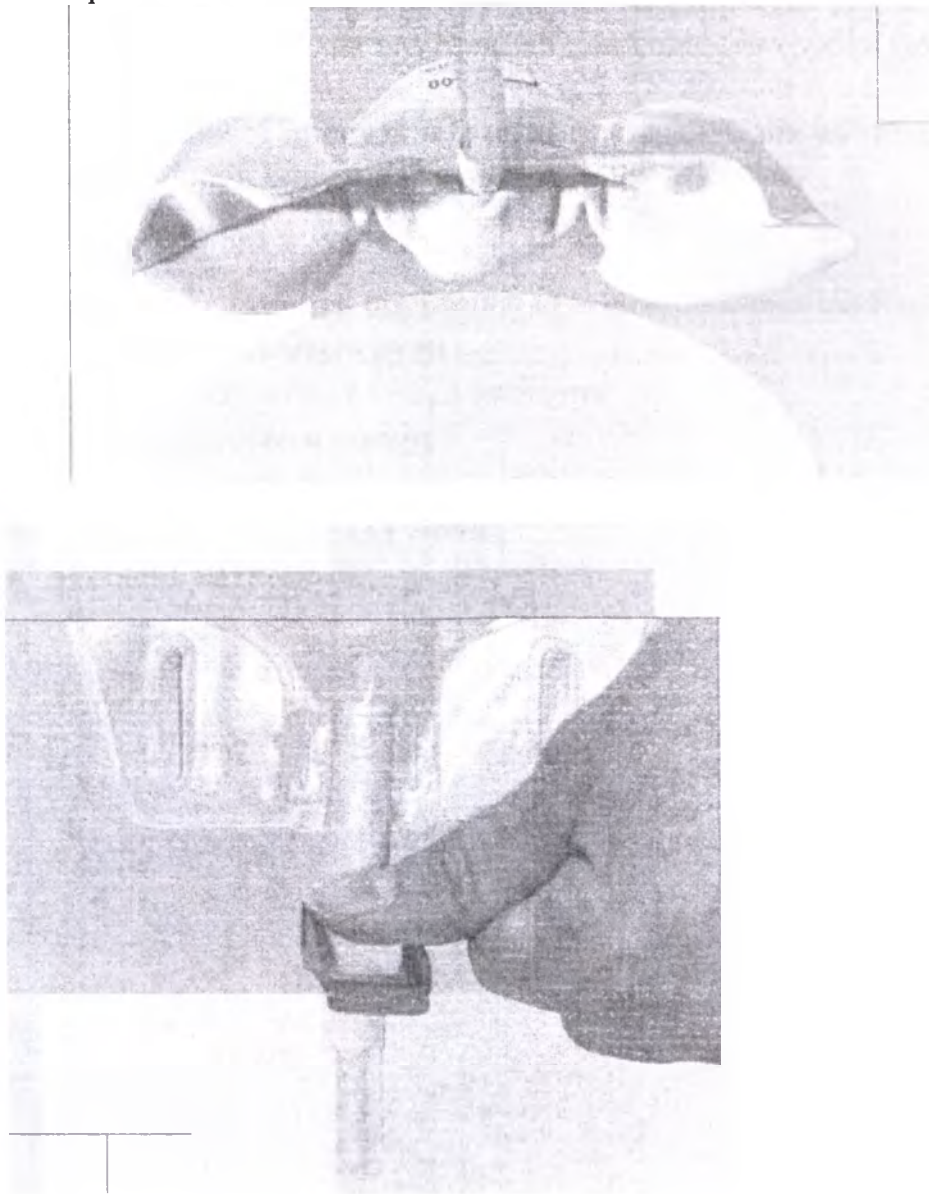

- 2. Назначение, сфера применения:** Мочеприемник трехкамерный стерильный «Уримед Трибэг Плюс», мочеприемник трехкамерный нестерильный «Уримед Трибэг Плюс» для сбора мочи у катетеризированных больных для применения днем и ночью.

Не требует специальных условий хранения.



### 3. Характеристики изделия:

- Объем 800 мл каждого мешка, бесшумный.
- В наборе 10 мешков.
- Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток мочи.
- Безопасный и эластичный крестообразный выпуск снижает риск протечки.
- Мешок покрыт тканевым материалом для обеспечения комфорта пациента.
- Регулируемая выводная трубка (60 см), диаметр трубки – 8 мм.
- Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи
- Обеспечивает простой и быстрый дренаж мочи из мочеприемника только лишь одним нажатием пальца на рычаг.

### 4. Последовательность операций при использовании изделия:

- Тщательно вымыть руки
- Вскрыть защитный чехол катетера
- Ввести катетер в уретру
- Присоединить мочеприемник к катетеру
- Дождаться отделения мочи
- Извлечь катетер



**Инструкция по применению**  
**Мочеприемник «Уримед Бэг», «Уримед Бэг Плюс», производства**  
**«Б.Браун Медиал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.), Франция**

- 1. Наименование:** Мочеприемник «Уримед Бэг», «Уримед Бэг Плюс»
- 2. Назначение, сфера применения:** Мочеприемник «Уримед Бэг», «Уримед Бэг Плюс» служит для сбора мочи у катетеризированных больных.  
Не требует специальных условий хранения.
- 3. Сведения о сроках разработки:** Разработка и промышленное производство началось в 1996 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.
- 4. Последовательность операций при применении изделия:**
  - Тщательно вымыть руки
  - Вскрыть защитный чехол катетера
  - Ввести катетер в уретру
  - Присоединить мочеприемник к катетеру
  - Дождаться отделения мочи
  - Извлечь катетер



**Инструкция по применению  
Мочеприемник «Уримед Бэг», «Уримед SP»,  
производства «Б.Браун Медиал С.А.С.» (B.Braun Medical  
S.A.S.), Франция**

- 1. Наименование:** Мочеприемник «Уримед Бэг», «Уримед SP».
- 2. Назначение, сфера применения:** Мочеприемник «Уримед Бэг», «Уримед SP» представляют собой калиброванные мешки большой емкости – 2 литра, для ночного сбора мочи у катетеризированных больных.  
Не требует специальных условий хранения.
- 3. Характеристики изделия:**
  - Объем 2 литра.
  - В наборе 30 мешков.
  - Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток мочи.
  - Безопасный и эластичный крестообразный выпуск снижает риск протечки.
  - Мешок покрыт тканевым материалом для обеспечения комфорта пациента.
  - Регулируемая выводная трубка (100 см).
  - Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи.
  - Возможность закрепить мешок у кровати или кресле-каталке.
- 4. Сведения о сроках разработки.** Разработка и промышленное производство началось в 2000 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.
- 5. Последовательность операций при использовании изделия:**
  - Тщательно вымыть руки
  - Вскрыть защитный чехол катетера
  - Ввести катетер в уретру
  - Присоединить мочеприемник к катетеру
  - Дождаться отделения мочи
  - Извлечь катетер



**Инструкция по применению**  
**Мочеприемник дренируемый открытый для мальчиков «Уринокол»,**  
**мочеприемник недренируемый закрытый для мальчиков «Уринокол»,**  
**мочеприемник дренируемый открытый для девочек «Уринокол»,**  
**мочеприемник недренируемый закрытый для девочек «Уринокол»,**  
**производства «Б.Браун Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.),**  
**Франция**

**1. Наименование:** Мочеприемник дренируемый открытый для мальчиков «Уринокол», мочеприемник недренируемый закрытый для мальчиков «Уринокол», мочеприемник дренируемый открытый для девочек «Уринокол», мочеприемник недренируемый закрытый для девочек «Уринокол»

**2. Характеристики изделия:**

В настоящее время модельный ряд мочеприемников был расширен. Появились мочеприемники под названием «Уринокол» открытые и закрытые для мальчиков и девочек. Новые модели «Уринокол» достаточно просты в использовании, не содержат ПВХ и латекс.

Поэтому в связи с перерегистрацией было решено уточнить название новых моделей изделий: Мочеприемник дренируемый открытый для мальчиков «Уринокол», мочеприемник недренируемый закрытый для мальчиков «Уринокол», мочеприемник дренируемый открытый для девочек «Уринокол», мочеприемник недренируемый закрытый для девочек «Уринокол», что значительно расширит возможность использования мочеприемников, в том числе и в детской практике.



*Мочеприемник недренируемый закрытый для девочек и мальчиков  
«Уринокол»*



Мочеприемники закрытые для мальчиков и девочек «Уринокол» используются для забора образца мочи детей для биохимических, цитологических или бактериологических исследований. Представляют собой данные мочеприемники прозрачный мешок для сбора мочи, что обеспечивает непосредственный визуальный контроль по мере заполнения мочеприемника, не содержит ПВХ. Не имеет дренажного выпускного устройства.

Адгезивный слой не содержит латекс, что приемлемо для кожи с высокой толерантностью. Адгезив имеет анатомическую форму.

Данные мочеприемники хорошо адаптированы для мальчиков и девочек. Легки в использовании и при их удалении.

Отличаются простой использования: необходимо обеспечить разделение бумажной части на две части по пунктирной линии.



*Мочеприемники дренируемые открытые для мальчиков и девочек  
«Уринокол»*

**3. Назначение, сфера применения:** Мочеприемник «Уринокол» применяются для сбора мочи у детей с целью проведения последующих бактериологических, биохимических и цитологических испытаний, а также используются для сбора мочи для управления диурезом.

**4. Характеристики изделия:**

- Не содержат ПВХ, прозрачность мочеприемников позволяет визуально видеть степень заполнения изделия.



- В наборе 50 мешков в коробке – открытых мочеприемников «Уринокол» для девочек и мальчиков и по 100 или 20 мешков в коробке – для закрытых мочеприемников «Уринокол».
- Стерильны.
- Анатомически подобранный адгезивный слой, не содержащий латекса, наиболее хорошо адаптирован для особенностей строения детского организма.
- Просты в использовании.
- Открытые модели имеют отверстие для дренажа, закрытые мочеприемники не имеют сливное отверстие.
- Предназначены для использования у детей весом более 2500 г.



## Инструкция по применению

### Мочеприемники «Алмарис Твин + Уро», «Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем»



2-компонентные мочеприемники для пациентов со стомами:

- Базовая пластина с защитным для кожи слоем и держащим кольцом для мешка с закрывающим замком.
- Мешки: с мягким, защитным материалом для защиты кожи от раздражения,
- эргономичная форма,
- бесшумная пластиковая пленка, предотвращающая проникновение запаха,
- встроенный ламинарный фильтр (для закрытых и открытых мешков), позволяющий свободно выходить газам и предотвращающим проникновение запаха.

#### 1. Использование.

Измерьте диаметр своей стомы и выберите пластину с соответствующим размером. Вырежьте отверстие по диаметру своей стомы, прибавив примерно 5 мм.

| Диаметр фланца | Максимальный размер кольца |
|----------------|----------------------------|
| 40 мм          | 30мм                       |
| 50мм           | 40мм                       |
| 60мм           | 50мм                       |
| 80мм           | 70мм                       |

#### 2. Подготовка кожи:

- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой. и протрите мягкой тканью. Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии мочеприемника.
- Протрите мягкой тканью кожу вокруг стомы.

#### 3. Использование пластины

- Отделите защитную пленку на базовой пластине от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать пластину снизу вверх (от основания стомы). Аккуратно прижмите пластину к коже.

#### 4. Использование мешка.

- Убедитесь, что закрывающий замок находится в открытом положении, приподнимите рычаг фланца вверх без усилий (В)



- Прижмите кольцо мешка к кольцу пластины снизу вверх и соедините с пластиной. Щелчок при присоединении означает, что мешок надежно соединен с пластиной. (С)
- Опустите рычаг фланца. (D)
- Убедитесь, что мешок надежно соединен с пластиной.

#### 5. Удаление мешка.

- Убедитесь, что пластиковая петля мешка находится на уровне пластины. (E)
- Откройте закрывающий механизм путем поднятия пластикового рычага вверх. (F)
- Отсоедините мешок от кольца сверху вниз. (G)

#### **Открытые мешки со встроенным клапаном Флоу Контрол («Алмарис Твин + Флоу Коллектро Систем»)**

- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией к применению.
- При необходимости опорожнить мешок, отсоедините язычок клапана и аккуратно опорожните мешок.
- Аккуратно опорожните мешок.
- После освобождения мешка оставшееся содержимое удалите надавливая на мешок сверху вниз.
- При повторном использовании, затяните язычок как можно выше и протрите мешок.
- Закройте клапан в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

#### 7. Мешки для уростом (опорожнение мешка) («Алмарис Твин + Уро»)

- Поместите мешок над туалетом и поверните закрывающий клапан.
- Поворачивайте клапан до полного открытия.
- Для дальнейшего использования мешка поверните клапан в обратную сторону.
- 

#### 8. Использование коннектора для ночного мочеприемника.

- Присоедините коннектор к мочеприемнику, поверните закрывающий клапан мочеприемника. Трубка коннектора не должна перекручиваться для свободного попадания мочи в ночной мочеприемник.
- Поверните закрывающий клапан мочеприемника в начальную позицию и отсоедините от коннектора.

#### 9. Использование пластыря для блокирования фильтра.

- Если необходимо инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте специальный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом заблокировав фильтр. (К)



## Инструкция по применению

**Мочеприемники: «Флексима Ки Уро», «Флексима Уро», «Флексима Уро Силк Конвекс», «Флексима (Софтима) Уро Силк».**

- Базовая пластина с протектором кожи и мягким фланцем для присоединения мешка.
- Мешок для сбора отделяемого:
  - Мягкий материал, позволяющий избежать контакта кожи с пластиковой пленкой и обеспечивающий незаметность.
  - Эргономичная форма, обеспечивающая сочетание максимальной вместимости и незаметности.
  - Бесшумная пластиковая пленка, обеспечивающая защиту от запаха.
  - Встроенный ламинарный фильтр (для закрытых и дренируемых мешков). Обеспечивающий эвакуацию газов и устраняющий запах.

Отличительной особенностью системы является простое присоединение мешка с адгезивным слоем к гибкой базовой пластине.

### 1) Перед присоединением

- Отсоедините картон от базовой пластины
- Необходимо вырезать кольцо в базовой пластине по размеру стомы, прибавив дополнительно 5 мм- стома не должна перекрываться протектором кожи. (А).

### 2) Подготовка кожи

- Промойте кожу вокруг стомы прохладной водой. Не используйте спиртосодержащие растворы для обработки кожи. Это может повлиять на адгезивные свойства мешка.
- Аккуратно высушите кожу с помощью мягкой ткани.

### 3) Приклеивание базовой пластины

- Удалите защитную пленку с базовой пластины.
- Приклейте базовую пластину вокруг стомы, начиная с основания.
- Аккуратно прижмите пластину к коже и разгладьте, избегая формирования складок.

### 4) Присоединение мешка

- Разъедините стенки мешка.
- Удалите пленку, защищающую адгезивный слой.
- Поместите петлю мешка в прорезь на базовой пластине до упора (D) и (E). Избегайте контакта с адгезивным слоем.
- Приклейте мешок к пластине, избегая формирования складок (F) и (G).
- Прижмите мешок к пластине для более надежного соединения (H).
- Убедитесь. Что мешок надежно прикреплен.

Заметки:



- Возможен визуальный контроль положения мешка. Белая отметка должна быть видна при правильном положении мешка на базовой пластине (см. F).
- В случае, если необходимо другое положение мешка- возможно его присоединение без соблюдения вышеуказанных инструкций.

#### 5) Удаление мешка.

- Придерживая одной рукой базовую пластину, второй рукой осторожно отсоединить мешок, начиная с верха. После полного отсоединения мешка, вытащить петлю мешка из прорези на пластине.
- При присоединении к данной базовой пластине другого мешка, необходимо полностью очистить пластину.

#### 6) Мешок со встроенной системой Flow Control.

- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией.
- При необходимости эвакуировать содержимое мешка, откройте мешок, потянув за клапан.
- Очистите мешок.
- Убедитесь в полной эвакуации содержимого мешка.
- Очистите клапан мешка.
- Закройте мешок в соответствии с инструкцией.

#### 7) Используйте специальный пластырь для защиты фильтра.

Если необходима инактивация фильтра (в ванной, душе), необходимо наклеить защитный адгезивный пластырь для защиты фильтра.



**Инструкция по применению**  
**Базовые пластины липкие «Алмарис Твин + Микст», базовые пластины липкие**  
**«Конвекс Алмарис Твин + Микст»**

Широкий выбор базовых пластин Алмарис Твин + обеспечивает надежную защиту кожи пациента:

Базовые пластины «Алмарис Твин + Микст» – представлены толстым слоем гидроколлоида в центре с акриловым слоем по всему диаметру базового устройства для немедленной адгезии. Диаметр: 40, 60 и 80 мм.



Рис. 1

Базовые пластины «Конвекс Алмарис Твин + Микст» (рис. 2) – состоят из двойного гидроколлоида с держащим выпуклым кольцом для стомы с углублением. Диаметр: 40, 50, 60 и 80 мм.



Рис. 2

Базовые пластины имеют превосходный закрывающий замок, способствующий минимальному приложению давления на брюшную полость пациента.

Состав 2-компонентных мочеприемников для пациентов со стомами:

- Базовая пластина с защитным для кожи слоем и держащим кольцом для мешка с закрывающим замком.
- Мешки: с мягким, защитным материалом для защиты кожи от раздражения,
- эргономичная форма,
- бесшумная пластиковая пленка, предотвращающая проникновение запаха,
- встроенный ламинарный фильтр (для закрытых и открытых мешков), позволяющий свободно выходить газам и предотвращающим проникновение запаха.

**1. Использование.**

- Измерьте диаметр своей стомы и выберите пластину с соответствующим размером.
- Вырежьте отверстие по диаметру своей стомы, прибавив примерно 5 мм.

Диаметр фланца

40 мм

50мм

60мм

80мм

Максимальный размер кольца

30мм

40мм

50мм

70мм

**2. Подготовка кожи:**



**КОПИЯ ВЕРНА**

Генеральный директор

/Петухов М.М./

- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой. и протрите мягкой тканью. Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии мочеприемника.
- Протрите мягкой тканью кожу вокруг стомы.

### 3. Использование пластины

- Отделите защитную пленку на базовой пластине от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать пластину снизу вверх (от основания стомы). Аккуратно прижмите пластину к коже.

### 4. Использование мешка.

- Убедитесь, что закрывающий замок находится в открытом положении, приподнимите рычаг фланца вверх без усилий (B)
- Прижмите кольцо мешка к кольцу пластины снизу вверх и соедините с пластиной. Щелчок при присоединении означает, что мешок надежно соединен с пластиной. (C)
- Опустите рычаг фланца. (D)
- Убедитесь, что мешок надежно соединен с пластиной.

### 5. Удаление мешка.

- Убедитесь, что пластиковая петля мешка находится на уровне пластины. (E)
- Откройте закрывающий механизм путем поднятия пластикового рычага вверх. (F)
- Отсоедините мешок от кольца сверху вниз. (G)

### 6. Открытые мешки со стандартным зажимом или с системой High Flow.

- Перед присоединением мешка к пластине, закройте мешок с помощью зажима. (H-I-J).
- Если необходимо опорожнить мешок, поместите мешок над туалетом и откройте зажим. После этого протрите мешок и снова используйте зажим.

### Открытые мешки со встроенным клапаном Flow control .

- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией к применению.
- При необходимости опорожнить мешок, отсоедините язычок клапана. и аккуратно опорожните мешок.
- Аккуратно опорожните мешок.
- После освобождения мешка оставшееся содержимое удалите надавливая на мешок сверху вниз.
- При повторном использовании, затяните язычок как можно выше и протрите мешок.
- Закройте клапан в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

### 7. Мешки для уростом. (опорожнение мешка).

- Поместите мешок над туалетом и поверните закрывающий клапан.
- Поворачивайте клапан до полного открытия.
- Для дальнейшего использования мешка поверните клапан в обратную сторону.

### 8. Использование коннектора для ночного мочеприемника.



- Присоедините коннектор к мочеприемнику, поверните закрывающий клапан мочеприемника. Трубка коннектора не должна перекручиваться для свободного попадания мочи в ночной мочеприемник.
  - Поверните закрывающий клапан мочеприемника в начальную позицию и отсоедините от коннектора.
9. использование пластыря для блокирования фильтра.
- Если необходимо инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте специальный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом заблокировав фильтр.(К)



**Инструкция по применению  
на базовые пластины липкие «Проксима 2» для мочеприемников «Проксима 2» и  
«Проксима 2 Уро»**

2-компонентные мочеприемники для пациентов со стомами:

- Базовая пластина с защитным для кожи слоем и держащим кольцом для мешка с закрывающим замком.
- Мешки: с мягким, защитным материалом для защиты кожи от раздражения, эргономичной формы, бесшумная пластиковая пленка, предотвращающая проникновение запаха, встроенный ламинарный фильтр (для закрытых и открытых мешков), позволяющий свободно выходить газам и предотвращающим проникновение запаха.

1. Использование.

- Измерьте диаметр своей стомы и выберите пластину с соответствующим размером.
- Вырежьте отверстие по диаметру своей стомы, прибавив примерно 5 мм.

Диаметр фланца

Максимальный размер кольца

40 мм

30мм

50мм

40мм

60мм

50мм

80мм

70мм

2. подготовка кожи:

- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии мочеприемника.

3. Использование пластины

- Отделите защитную пленку на базовой пластине от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать пластину снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите пластину к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии пластины.

4. Использование мешка.

- Убедитесь, что закрывающий замок находится в открытом положении.
- Прижмите кольцо мешка к кольцу пластины снизу вверх и соедините до щелчка.
- Убедитесь, что мешок надежно прикреплен к пластине.

5. Удаление мешка.

- Откройте закрывающий механизм путем поднятия пластикового рычага вверх.
- Отсоедините мешок от кольца сверху вниз.

6. Мешки для уростом.

- Для опорожнения мешка. Поместите его над туалетом и поверните закрывающую головку.
- Для дальнейшего использования мешка поверните головку в обратную сторону.



7. Использование коннектора для ночного мочеприемника.

- Присоедините коннектор к мочеприемнику, поверните закрывающую головку мочеприемника.
- Поверните закрывающую головку в начальную позицию и отсоедините от коннектора.

8. использование пластыря для блокирования фильтра.

- Если необходимо инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте специальный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом, заблокировав фильтр.

9. Условия хранения: хранить при комнатной температуре в сухом месте.

10. Срок хранения 5 лет.



## Инструкция по применению

Фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс маленький», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс средний», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс большой», ремешки для фиксации мочеприемника «Уримед Фикс», производства «Б.Браун Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.), Франция

1. **Наименование:** Фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс маленький», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс средний», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс большой», ремешки для фиксации мочеприемника «Уримед Фикс».
2. **Назначение, сфера применения:** Фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс маленький», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс средний», фиксатор для мочеприемника «Уримед Фикс большой», ремешки для фиксации мочеприемника «Уримед Фикс» - надежные и удобные фиксаторы мешка для сбора мочи. Позволяют прикрепить мешок к ноге пациента.
3. **Характеристики изделия:**
  - Представляет из себя эластичную тканевую повязку, одеваемую на ногу. Мешок для сбора мочи крепится между ногой и повязкой.
  - Выпускается в трех размерных модификациях: маленькой, средней и большой.
  - В упаковке находится два фиксатора.
4. **Сведения о сроках разработки:** Разработка и промышленное производство началось в 2001 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.
5. **Последовательность операций при применении изделия:**
  - Присоединить фиксатор к мочеприемнику
  - Зафиксировать мочеприемник на ноге пациента



**Инструкция по применению**  
**Держатель для мочеприемника «Уримед Холдер», производства**  
**«Б.Браун Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.), Франция**

- 1. Наименование:** Держатель для мочеприемника «Уримед Холдер»
- 2. Назначение, сфера применения:** Держатель для мочеприемника «Уримед Холдер» позволяет прикрепить мешок к ноге пациента.
- 3. Сведения о сроках разработки:** Разработка и промышленное производство началось в 2001 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.
- 4. Государства, на рынки которых поставляется данное изделие:**  
Держатель для мочеприемника «Уримед Холдер» поставляется во все страны Европейского союза, Африки, Канаду и США.
- 5. Последовательность операций при применении изделия:**
  - Присоединить держатель к мочеприемнику
  - Зафиксировать мочеприемник на ноге пациента



**Инструкция по применению**  
**Держатель для мочеприемника «Уримед Хэндл», производства «Б.Браун**  
**Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.), Франция**

- 1. Наименование:** Держатель для мочеприемника «Уримед Хэндл»
- 2. Назначение, сфера применения:** Держатель для мочеприемника «Уримед Хэндл» позволяет закрепить мешок на кровати или на кресле-каталке.
- 3. Характеристики изделия:**
  - В наборе один держатель.
  - Для предотвращения перегиба трубки от мешка для сбора мочи в держателе имеются два отверстия.
  - Мешок держится на двух крючках.
- 4. Сведения о сроках разработки:** Разработка и промышленное производство началось в 2001 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.
- 5. Последовательность операций при использовании:**
  - Тщательно вымыть руки
  - Вскрыть защитный чехол катетера
  - Ввести катетер в уретру
  - Присоединить мочеприемник к катетеру
  - Дождаться отделения мочи
  - Извлечь катетер

