

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Альфа-Медика»

П.В. Козлов

«08» октября 2012г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Изделия протезно-ортопедические:
бандажи грыжевые, бандажи на нижние конечности

производства B. Well Swiss AG (Би.Велл Свисс АГ), Швейцария.

2012

Содержание

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Производитель:

B. Well Swiss AG, Gartenstrasse 9a, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

Би.Велл Свисс АГ, Гартенштрассе 9а, СН-9435 Хеербругг, Швейцария

Заводы-изготовители:

1. Vega Technologies Inc., 11F-13, No. 100, Chang Chun Road, Taipei, Taiwan
(Вега Технолоджис Инк., 11F-13, №100, Чанг Чун Роуд, Тайбэй, Тайвань)
2. Rehan (Shanghai) Health Care Co., Ltd., No.58 1385 Lane, Jihe Rd, Huaxin Town, Qingpu Dist., Shanghai, China
(Рехан (Шанхай) Хелс Каре Ко., Лтд., №58 1385 Лейн, Джихе Роуд, Хуаксин Таун, Квингпу Дистрикт, Шанхай, Китай)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия протезно-ортопедические: бандажи грыжевые, бандажи на нижние конечности (далее – изделия, бандажи) применяются для компрессии и фиксации органов и конечностей человека.

Бандажи используются как средство восстановления утраченных форм и функций опорно-двигательной системы и предназначены для компрессии тканей в сочетании с фиксацией поврежденных суставов, для создания утягивающего эффекта.

Изделия протезно-ортопедические выпускаются в следующем ассортименте:

1. Бандажи для удержания грыжевого дефекта: W-441 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-442 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-443 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-444 P (размер: S/M, L/XL), W-445 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL);
2. Бандажи на коленный сустав: W-331 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-332 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-333 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-334 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-335 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-336 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-337 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-338 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-339 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3310 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3311 (размер: S/M, L/XL), W-3312 (размер: S/M,

- L/XL), W-3313 (размер: S/M, L/XL), W-3314 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3315 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3316 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3317 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3318 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3319 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3320 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3321 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3322 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3323 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3324 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3325 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3326 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-3327 (размер: S/M, L/XL);
3. Бандажи на голень: W-351 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-352 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL);
 4. Бандажи на тазобедренный сустав: W-311 (размер: S, M, L, XL, XXL), W-312 (размер: S, M, L, XL, XXL), W-313 (размер: S, M, L, XL, XXL), W-314 (размер: S, M, L, XL, XXL), W-315 P (размер: S, M, L), W-316 P (размер: S, M, L), W-317 P (размер: S, M, L), W-318 (размер: S, M, L, XL, XXL);
 5. Бандажи на бедро: W-321 (размер: S, M, L, XL, XXL), W-322 (размер: S, M, L, XL, XXL);
 6. Бандажи на голеностопный сустав: W-341 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-342 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-343 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-344 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-345 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-346 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-347 (размер: универсальный), W-348 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-349 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-3410 (размер: универсальный), W-3411 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-3412 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-3413 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL).

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики отдельных моделей представлены в таблице 1:

Таблица 1

Вариант исполнения	Модель	Краткая характеристика.
Бандажи для удержания грыжевого дефекта		
Бандаж для удержания грыжевого дефекта	W-441	Бандаж грыжевой для фиксации/закрытия грыжевых ворот при паховой грыже. Двусторонний со съёмными пелотами.
Бандаж для удержания грыжевого дефекта	W-442	Бандаж для удержания грыжевого дефекта для фиксации/закрытия грыжевых ворот при паховой грыже. Односторонний.
Бандаж для удержания грыжевого дефекта	W-443	Бандаж для удержания грыжевого дефекта для фиксации/закрытия грыжевых ворот при пупочной грыже. Высота бандажа 23 см.
Бандаж для удержания грыжевого дефекта	W-444 P	Бандаж для удержания грыжевого дефекта для фиксации/закрытия грыжевых ворот при пупочной грыже. Модель для детей.
Бандаж для удержания грыжевого дефекта	W-445	Бандаж для удержания грыжевого дефекта для фиксации/закрытия грыжевых ворот при пупочной грыже. Высота бандажа 30 см.
Бандажи на коленный сустав		
Бандаж на коленный сустав	W-331	Бандаж для легкой фиксации и компрессии коленного сустава. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и улучшению чувства стабильности сустава.
Бандаж на коленный сустав	W-332	Бандаж для легкой фиксации и компрессии коленного сустава. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и улучшению чувства стабильности сустава. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе.
Бандаж на коленный сустав	W-333	Бандаж для фиксации и компрессии коленного сустава. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и улучшению чувства стабильности сустава. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе. Мягкая вставка в области

		коленной чашечки усиливает проприоцептивную чувствительность.
Бандаж на коленный сустав	W-334	Бандаж для легкой фиксации, согревания и компрессии коленного сустава. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и улучшению чувства стабильности сустава.
Бандаж на коленный сустав	W-335	Бандаж для легкой фиксации, согревания и компрессии коленного сустава. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и улучшению чувства стабильности сустава. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе.
Бандаж на коленный сустав	W-336	Бандаж для фиксации и компрессии коленного сустава. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и улучшению чувства стабильности сустава. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе. Мягкая вставка в области коленной чашечки стабилизирует надколенник и усиливает проприоцептивную чувствительность.
Бандаж на коленный сустав	W-337	Бандаж для фиксации и компрессии коленного сустава. Ребра жесткости с шарнирами стабилизируют коленный сустав, способствуют устранению варусных/вальгусных установок. Мягкая вставка в области коленной чашечки стабилизирует надколенник и усиливает проприоцептивную чувствительность. Дополнительные фиксирующие ремни обеспечивают лучшее прилегание бандажа к суставу.
Бандаж на коленный сустав	W-338	Бандаж для средней фиксации коленного сустава с отверстием и фиксирующей подушкой. Обладает выраженным согревающим эффектом, способствуя улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.
Бандаж на коленный сустав	W-339	Бандаж для средней фиксации коленного сустава с отверстием и фиксирующей подушкой. Обладает

		выраженным согревающим эффектом, способствуя улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе и предупреждают смещение бандажа.
Бандаж на коленный сустав	W-3310	Бандаж разъемный для средней фиксации коленного сустава с отверстием и фиксирующими ремнями. Стабилизирует коленный сустав. Ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе и предупреждают смещение бандажа.
Бандаж на коленный сустав	W-3311	Бандаж разъемный для средней фиксации коленного сустава с отверстием и фиксирующими ремнями. Согревает, стабилизирует коленный сустав, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Фиксирующие ремни предупреждают смещение бандажа.
Бандаж на коленный сустав	W-3312	Бандаж ленточный, для фиксации коленного сустава. Стабилизирует коленный сустав, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе и уменьшению отека.
Бандаж на коленный сустав	W-3313	Бандаж на коленный сустав, фиксирует собственную связку наколенника.
Бандаж на коленный сустав	W-3314	Бандаж для средней фиксации коленного сустава с отверстием и фиксирующей подушкой. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Фиксирующие ремни обеспечивают лучшее прилегание бандажа к коленному суставу.
Бандаж на коленный сустав	W-3315	Бандаж для средней фиксации коленного сустава с отверстием и фиксирующими ремнями. Способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе и предупреждают смещение бандажа.

Бандаж на коленный сустав	W-3316	Бандаж разъемный для средней фиксации коленного сустава с фиксирующими ремнями. Обладает выраженным согревающим эффектом, способствуя улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.
Бандаж на коленный сустав	W-3317	Бандаж разъемный для средней фиксации коленного сустава с фиксирующими ремнями. Обладает выраженным согревающим эффектом, способствуя улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Гибкие ребра жесткости способствуют уменьшению ударных нагрузок при ходьбе и предупреждают смещение бандажа.
Бандаж на коленный сустав	W-3318	Бандаж для средней фиксации коленного сустава с фиксирующими ремнями и специальной вставкой для стабилизации наколенника. Стабилизирует коленный сустав, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.
Бандаж на коленный сустав	W-3319	Бандаж разъемный для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и фиксирующими ремнями. Стабилизирует коленный сустав, способствует устранению боковой нестабильности коленного сустава. Обладает согревающим эффектом, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.
Бандаж на коленный сустав	W-3320	Бандаж для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и фиксирующими ремнями. Стабилизирует коленный сустав, способствует устранению боковой нестабильности коленного сустава. Обладает согревающим эффектом, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Мягкая вставка в области надколенника усиливает

		проприоцептивную чувствительность.
Бандаж на коленный сустав	W-3321	Бандаж разъемный для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и фиксирующими ремнями. Стабилизирует коленный сустав, способствует устранению боковой нестабильности коленного сустава. Комфортный материал обладает компрессионным воздействием, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.
Бандаж на коленный сустав	W-3322	Бандаж для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и фиксирующими ремнями. Стабилизирует коленный сустав, способствует устранению боковой нестабильности коленного сустава. Комфортный материал обладает компрессионным воздействием, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Мягкая вставка в области надколенника усиливает проприоцептивную чувствительность.
Бандаж на коленный сустав	W-3323	Бандаж для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и специальной вставкой для стабилизации наколенника. Стабилизирует коленный сустав, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.
Бандаж на коленный сустав	W-3324	Бандаж для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и специальными ремнями, мягко корректирующими боковые нефиксированные деформации коленного сустава. Стабилизирует коленный сустав, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц.

Бандаж на коленный сустав	W-3325	Бандаж для сильной фиксации коленного сустава с боковыми шинами с шарнирами и специальными ремнями, мягко корректирующими боковые нефиксированные деформации коленного сустава. Стабилизирует коленный сустав, способствует улучшению кровообращения в коленном суставе. Способствует нормализации тонуса мышц. Позволяет регулировать объем движения в коленном суставе.
Бандаж на коленный сустав	W-3326	Бандаж для фиксации/иммобилизации коленного сустава с шинами и специальными ремнями. Длинный бандаж, стабилизирует коленный сустав.
Бандаж на коленный сустав	W-3327	Бандаж для фиксации/иммобилизации коленного сустава с шинами с шарнирами и специальными ремнями. Длинный бандаж, стабилизирует коленный сустав. Позволяет регулировать объем движения в коленном суставе.
Бандажи на голень		
Бандаж на голень	W-351	Бандаж на голень фиксирует, оказывает компрессионное воздействие на мышцы голени, способствует усилению проприоцепции и улучшению кровообращения.
Бандаж на голень	W-352	Бандаж на голень фиксирует, согревает, оказывает компрессионное воздействие на мышцы голени, способствует усилению проприоцепции и улучшению кровообращения.
Бандажи на тазобедренный сустав		
Бандаж на тазобедренный сустав	W-311	Обеспечивает фиксацию и компрессию мягких тканей тазобедренного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава. Массажный эффект и мягкие вставки увеличивают проприоцепцию и способствуют стабилизации сустава.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-312	Обеспечивает легкую фиксацию и компрессию мягких тканей тазобедренного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава.

		Разгружает тазобедренный сустав. Способствуют стабилизации сустава. Женская модель.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-313	Обеспечивает легкую фиксацию и компрессию мягких тканей тазобедренного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава. Разгружает тазобедренный сустав. Способствуют стабилизации сустава. Мужская модель.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-314	Обеспечивает легкую фиксацию и компрессию мягких тканей тазобедренного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава. Разгружает тазобедренный сустав. Способствуют стабилизации сустава. Универсальная модель.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-315 P	Обеспечивает фиксацию тазобедренных суставов в нужном положении отведения за счет фиксации бедра в муфтах. Способствуют правильному развитию сустава. Модель для детей.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-316 P	Обеспечивает фиксацию тазобедренных суставов в нужном положении отведения. Способствуют правильному развитию сустава. Модель для детей.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-317 P	Обеспечивает фиксацию тазобедренных суставов в нужном положении отведения. Способствуют правильному развитию сустава. Модель для детей.
Бандаж на тазобедренный сустав	W-318	Обеспечивает фиксацию тазобедренных суставов в нужном положении отведения. Способствуют стабилизации сустава. Модель для взрослых.
Бандажи на бедро		
Бандаж на бедро	W-321	Обеспечивает легкую фиксацию и компрессию мышц бедра. Улучшает тонус мышц, способствуя стабилизации тазобедренного сустава.
Бандаж на бедро	W-322	Обеспечивает легкую фиксацию и компрессию мышц бедра. Обладает теплосберегающим эффектом, улучшая кровообращение мягких тканей. Улучшает тонус мышц, способствуя стабилизации тазобедренного сустава.

Бандажи на голеностопный сустав		
Бандаж на голеностопный сустав	W-341	Эластичный бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Спиральные ребра жесткости позволяют уменьшить ударные нагрузки при ходьбе. Способствует улучшению кровообращения.
Бандаж на голеностопный сустав	W-342	Эластичный бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Способствует улучшению кровообращения.
Бандаж на голеностопный сустав	W-343	Эластичный бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Обладает согревающим эффектом. Способствует улучшению кровообращения.
Бандаж на голеностопный сустав	W-344	Эластичный бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Способствует улучшению кровообращения. Мягкие вставки в области костных выступов способствуют усилению проприоцептивной чувствительности.
Бандаж на голеностопный сустав	W-345	Эластичный бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Способствует улучшению кровообращения. Дополнительные фиксирующие ремни мягко корректируют нефиксированные деформации и неправильные установки голеностопного сустава.
Бандаж на голеностопный сустав	W-346	Эластичный бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Способствует улучшению кровообращения. Мягкая вставка в области ахиллова сухожилия способствует усилению проприоцептивной чувствительности и восстановлению после травм ахиллова сухожилия.
Бандаж на голеностопный сустав	W-347	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Ленточная конструкция позволяет регулировать компрессию на мягкие ткани сустава, способствует улучшению кровообращения и уменьшению отека.

Бандаж на голеностопный сустав	W-348	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Ребра жесткости и фиксирующие ремни позволяют мягко корригировать положение сустава при нефиксированных деформациях, устранять боковую нестабильность, регулировать компрессию на мягкие ткани сустава, способствуют улучшению кровообращения и уменьшению отека.
Бандаж на голеностопный сустав	W-349	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Мягкие вставки и фиксирующие ремни позволяют мягко корригировать положение сустава при нефиксированных деформациях, усиливать проприоцептивную чувствительность, регулировать компрессию на мягкие ткани сустава, способствуют улучшению кровообращения и уменьшению отека.
Бандаж на голеностопный сустав	W-3410	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Фиксирующие ремни позволяют мягко корригировать положение сустава при нефиксированных деформациях, регулировать компрессию на мягкие ткани сустава, способствуют улучшению кровообращения и уменьшению отека.
Бандаж на голеностопный сустав	W-3411	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав. Ребра жесткости позволяют устранять боковую нестабильность. Шнуровка позволяет регулировать компрессию на мягкие ткани сустава, способствуют улучшению кровообращения и уменьшению отека.
Бандаж на голеностопный сустав	W-3412	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет стабилизировать сустав, поддерживать стопу при отвисании, способствует формированию стереотипа ходьбы.
Бандаж на голеностопный сустав	W-3413	Бандаж на голеностопный сустав, позволяет зафиксировать сустав, в нужном положении, устраняет ротационные движения.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаниями к применению изделий являются:

1. Индивидуальная непереносимость материалов
2. Для изделий, содержащих в составе неопрен/азропрен, не рекомендуется применение первые 3 суток после острой травмы.

Предупреждения:

при нарушении кожных покровов (дерматозы, гнойные инфекционные воспаления в области применения) перед применением необходима консультация врача.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Для подбора типа и модели биндажа следует руководствоваться данными, представленными в таблице 1, а также рекомендациями врача. Рекомендуется, чтобы подбор модели изделия и степени (класса) компрессии осуществлял врач, исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Перед применением следует измерить параметры тела больного и определить подходящий типоразмер биндажа, в соответствии с таблицами в Приложении 1. Следует выбрать интересующую Вас модель биндажа и измерить параметры тела, указанные в таблице. После найти интервал значений параметра, которому соответствует измеренный Вами параметр, и определить подходящий типоразмер в соответствующем столбце.

При подборе модели рекомендуется примерка изделия, особенно в пограничных случаях.

Применение биндажей может осуществляться в стационарных, поликлинических и домашних условиях.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

После подбора модели и типоразмера изделия, его следует надеть на пациента (самостоятельно или с посторонней помощью) таким образом, как представлено на фотографии изделия в Приложении 2., зафиксировав при необходимости

дополнительными ремнями/лентами. Важно избегать при ношении слишком сильной компрессии тканей, чтобы не вызвать нарушение кровообращения или нарушения функций находящихся поблизости нервов.

Дополнительные рекомендации по ношению бандажей при необходимости можно получить у лечащего врача.

Если иного не предписано врачом, в начале времени ношения бандажа следует ограничиться двумя часами, постепенно доводя длительность применения до шестнадцати часов в сутки (для изделий из неопрена/аэропрепа до 4-6 часов в сутки).

На ночь бандаж следует снимать.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ и УХОДА

Бандажи должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -20 до $+50$ °C;
- относительная влажность, не более 70%;

Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

Гарантийный срок сохранения медицинских свойств изделий – 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В комплект поставки входят:

- бандаж одного вида (одной модели);
- инструкция;
- упаковка.

Правила ухода:

Стирать изделие следует вручную в воде с температурой до 30 °C с добавлением моющих средств, не содержащие хлор и химически активные добавки. Не применять машинную сушку. Сушить изделия следует не отжимая, разложив их на полотенце, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей

Изделие выдерживает не менее 40 стирок.

Не следует носить бандажи влажными или мокрыми, а также мочить во время хранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблицы размеров продукции «Изделия протезно-ортопедические: бандажи грыжевые, бандажи на нижние конечности»:

Бандажи для удержания грыжевого дефекта						
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность между талией и бедрами, см	До 85	85-95	95-105	105-115	115-125	Более 125
Модель W-444 P						
	S/M	L/XL				
Окружность талии, см	До 65	Более 65				

Бандажи на коленный сустав							
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхват под коленом, см	До 27	27-30	30-33	33-36	36-40	40-44	Более 44
Модели W-3311, W-3312, W-3313, W-3327							
	S/M	L/XL					
Обхват под коленом	До 35	Более 35					

Бандажи на голень						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружность голени посередине, см	До 33	33-36	36-39	39-42	42-45	Более 45

Бандажи на тазобедренный сустав					
	S	M	L	XL	XXL
Окружность талии, см	66-81	81-96	96-112	112-127	Более 127
Окружность бедра, см	43-53	50-61	55-69	55-69	Более 69
Модели W-315 P, W-316 P					
	S	M	L		
Окружность бедра, см	До 18	18-22	Более 22		
Модели W-317 P					
	S	M	L		
Окружность бедра, см	До 26	26-32	Более 32		

Бандажи на бедро					
	S	M	L	XL	XXL
Окружность бедра, см	43-53	50-61	55-69	55-69	Более 69

Бандажи на голеностопный сустав						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват подъема стопы, см	До 26	26-29	29-32	32-35	35-38	38-41
Модели W-347 и W3410 – размер универсальный						

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

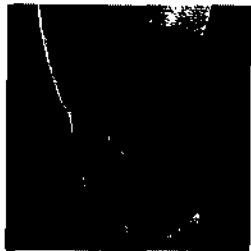
Внешний вид изделия медицинского назначения «Изделия протезно-ортопедические: бандажи грыжевые, бандажи на нижние конечности» представлен в таблице:

Наименование	Артикул	Фотография
Бандажи для удержания грыжевого дефекта		
Бандажи для удержания грыжевого дефекта	W-441	
Бандажи для удержания грыжевого дефекта	W-442	
Бандажи для удержания грыжевого дефекта	W-443	
Бандажи для удержания грыжевого дефекта	W-444 P	

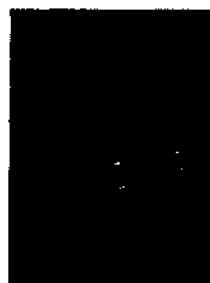
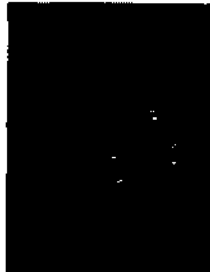
Бандажи для удержания грыжевого дефекта	W-445	
Бандажи на коленный сустав		
Бандажи на коленный сустав	W-331	
Бандажи на коленный сустав	W-332	
Бандажи на коленный сустав	W-333	
Бандажи на коленный сустав	W-334	
Бандажи на коленный сустав	W-335	

Бандажи на коленный сустав	W-336	
Бандажи на коленный сустав	W-337	
Бандажи на коленный сустав	W-338	
Бандажи на коленный сустав	W-339	
Бандажи на коленный сустав	W-3310	
Бандажи на коленный сустав	W-3311	

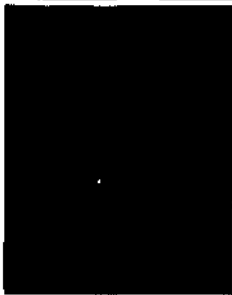
Бандажи на коленный сустав	W-3312	
Бандажи на коленный сустав	W-3313	
Бандажи на коленный сустав	W-3314	
Бандажи на коленный сустав	W-3315	
Бандажи на коленный сустав	W-3316	
Бандажи на коленный сустав	W-3317	

Бандажи на коленный сустав	W-3318	
Бандажи на коленный сустав	W-3319	
Бандажи на коленный сустав	W-3320	
Бандажи на коленный сустав	W-3321	
Бандажи на коленный сустав	W-3322	
Бандажи на коленный сустав	W-3323	

Бандажи на коленный сустав	W-3324	
Бандажи на коленный сустав	W-3325	
Бандажи на коленный сустав	W-3326	
Бандажи на коленный сустав	W-3327	
Бандажи на голень		
Бандажи на голень	W-351	
Бандажи на голень	W-352	

Бандажи на тазобедренный сустав		
Бандажи на тазобедренный сустав	W-311	
Бандажи на тазобедренный сустав	W-312	
Бандажи на тазобедренный сустав	W-313	
Бандажи на тазобедренный сустав	W-314	
Бандажи на тазобедренный сустав	W-315 P	
Бандажи на тазобедренный сустав	W-316 P	

Бандажи на тазобедренный сустав	W-317 P	
Бандажи на тазобедренный сустав	W-318	
Бандажи на бедро		
Бандажи на бедро	W-321	
Бандажи на бедро	W-322	
Бандажи на голеностопный сустав		
Бандажи на голеностопный сустав	W-341	

Бандажи на голеностопный сустав	W-342	
Бандажи на голеностопный сустав	W-343	
Бандажи на голеностопный сустав	W-344	
Бандажи на голеностопный сустав	W-345	
Бандажи на голеностопный сустав	W-346	
Бандажи на голеностопный сустав	W-347	

Бандажи на голеностопный сустав	W-348	
Бандажи на голеностопный сустав	W-349	
Бандажи на голеностопный сустав	W-3410	
Бандажи на голеностопный сустав	W-3411	
Бандажи на голеностопный сустав	W-3412	
Бандажи на голеностопный сустав	W-3413	

Сшито и скреплено печатью «26» листа
Генеральный директор
ЗАО «Альфа-Медика»
П.В. Козлов
Дата: «08.02.2012»