

Световая чувствительность	Минимальная освещенность 0.1 Люкс при F2.0
Температура для измерения	От 10 до 35 °C
Влажность для измерения	Менее 80%RH
Электропитание	DC 12V±10%,1.5A Max, входное напряжение 220
Размеры	86(W) X 99.5 (H) X 245(L) мм

Методы использования:

Линза X1

Линза предназначена для ведения базы данных клиента

Линза X60 (увеличение в 60 раз) 3 режима

С помощью линзы X60 (Режим 1) Вы можете посмотреть поверхность кожи (выделение кожного сала, размер пор, рельеф кожи)

С линзой X60 (Режим 2) Вы можете посмотреть более глубокие слои кожи (на этом режиме хорошо видно гиперкератоз, пушковые и стержневые волосы)

С линзой X60 (Режим с поляризацией) Вы можете посмотреть более глубокие слои кожи головы (пигментация, капиллярные сосуды)

Линза X10 (увеличение в 10 раз)

Линза предназначена для определения глубины и ширины морщин

Линза X200 (увеличение в 200 раз)

Линза предназначена для оценки состояния кожи головы и определения диаметра стержня волоса

Линза X1000 (увеличение в 1000 раз)

Линза предназначена для оценки состояния стержня волоса.

Положение камеры, если в данный момент Вы не работаете с камерой, то камера с установленной на ней линзой всегда должна находиться в подставке держателя. Не оставляйте камеру с линзой на рабочем столе. Не оставляйте камеру без линзы на рабочем столе или в на подставке со стерилизатором.

Настройка линз, линзы с увеличением x10, x60, x200 не нуждаются в дополнительной настройке. Они готовы к работе, у линз x1 и x1000 можно настраивать четкость изображения. Для этого объектив у этих линз можно подкручивать в одну или

другую сторону.

Настройку изображения на линзе X1000 удобнее проверять просматривая кожу лица или рук. Т.к у линзы X1000 самой большое увеличение, рекомендуется настраивать ее один раз в день.

Вкл/Откл, если в данный момент вы не работаете с камерой, отключите ее нажав на черную кнопку на подставке ВКЛ/ОТКЛ. Это продлит срок службы оборудования

Стерилизация линз, в держателе под камеру встроен UV стерилизатор. Чтобы простерилизовать линзу поместите камеру с линзой в стерилизатор. При этом кнопка ВКЛ/ОТКЛ на подставке должна быть в положении ВКЛ. UV лампа включится автоматически и автоматически отключится через пять минут.

Стерилизовать необходимо линзы, которые касаются кожи лица : x10, x60, x200, x1000.

На линзах x10, x60, x200, x1000 при соприкосновении с кожей на поверхности остается жир. Удалите их очищающей салфеткой или салфеткой, пропитанной спиртом.

Основные функции:

Диагностика кожи

Тест на влажность – с измерителем влажности кожи
 Тест на эластичность – тест опрос
 Тест на жирность (тип кожи) – X60 Линза (Режим 1)
 Определения гладкости (Рельеф кожи) – X60 Линза (Режим 1)
 Определение размера пор – X60 Линза (Режим 1)
 Определение уровня пигментации - X60 Линза (Режим с поляризацией)
 Чувствительность кожи - X60 Линза (Режим с поляризацией)
 Глубина и ширина морщин – X10 Линза

Диагностика волос

Определение состояния кожи головы – X60 Линза (Режим 1 и 2), X200 Линза
 Плотность волос на 1 см² - X60 Линза (Режим 1 и 2)
 Определение диаметра стержня волоса, мм – X200 Линза
 Определение состояния стержня волоса – X1000 Линза

Условия эксплуатации

Камера «Aramo SG» и линзы к ней, предназначены для эксплуатации в помещениях при температуре от + 10 до + 35С и относительной влажности до 80 %

Предохраняйте Камеру «Aramo SG» и линзы к ней, блок питания 12 В от механического и теплового воздействия., ударов, падений и попадания влаги внутрь камеры «Aramo SG», линз, блока питания 12 В.

При хранении и эксплуатации камеры «Aramo SG», блока питания 12 В не перегибайте соединительных кабелей.

При транспортировании и хранении каждая линза должна быть упакована в упаковочную пленку, предохраняющую ее от ударного воздействия.

Линза х 1 предназначена для общего снимка клиента.

Линза х 60 предназначена, только для наружного наблюдения и фотографирования кожи лица человека.

Линза х 200 предназначена только для наружного наблюдения и фотографирования кожи головы человека.

Линза х 1000 предназначена, только для наружного наблюдения и фотографирования волос человека.

Запрещается использовать линзы и камеру «Aramo SG» для других целей.

Требования по технике безопасности

Запрещается использовать:

Соединительные провода или кабель питания с поврежденной изоляцией.

Самодельные соединительные провода.

После окончания работы отключите камеру от сети, вынув вилку кабеля блока питания из розетки.

Запрещается при включенной камере и подсоединенной камере к сети и/или к компьютеру/ телевизору разбирать корпус и производить ремонт камеры.

При работе на компьютере:

Запрещается при работе компьютера и устройства отсоединять камеру от компьютера, отсоединять камеру от сети.

При работе на телевизоре:

Запрещается при работе телевизора и устройства вынимать или отсоединять камеру от телевизора, отсоединять камеру от сети.

Принадлежности к аппарату для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос под увеличением Aramo SG :

1. Подставка под аппарат Aramo SG с UV (ультрафиолетовой) лампой
2. Линза 1X
3. Линза 10X
4. Линза 60X
5. Линза 200X
6. Линза 1000X

- 7.Измеритель влажности
- 8.Держатель для спонжа
- 9.Внешний блок питания на 12 В
- 10.USB кабель
- 11.RCA кабель
- 12.Программное обеспечение SkinXPPRO
- 13.Программное обеспечение HairXPPRO
- 14.Подставка под измеритель влажности и держатель для спонжа
- 15.Подставка под линзы
- 16.Спонжи для определения жирности 10 упаковок (10 шт. в одной упаковке)
- 17.Воздушная помпа для очистки аппарата Aramo SG
- 18.Салфетка из микрофибры
- 19.Руководство по эксплуатации

Производитель:

Aram Nuvis Co., LTD, Арам Хьювис Ко.,Лтд

Адрес:801, 434-6, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Адрес: 801, 434-6, Сандэвон-дон, Чунвон-гу г. Соннам, Кёнги-до, Корея

Руководитель предприятия

ООО «Нэтрия»



Герасимова Н.А.

