

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ –
Медицинские Технологии»



Н.А. Шестернин
2012 г.

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на
железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам
пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного
сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования

Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения укладки

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Форма выпуска (размер)	Кол-во, не менее
1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного крово- течения и перевязки ран		
1.1	Жгут кровоостанавливающий	резиновый	1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м × 10 см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м × 14 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м × 5 см	1 шт.
1.5	Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герме- тической оболочкой		1 шт.
1.6	Лейкопластырь бактерицидный	не менее 1,9 см × 7,2 см	10 шт.
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10	не менее 16 см × 14 см	1 уп.
2	Прочие изделия медицинского назначения		
2.1	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	не менее М	2 пары
2.2	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками		2 шт.
2.3	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподоб- ного материала стерильные спиртовые	не менее 12,5 × 11,0 см	3 шт.

3	Прочие средства		
3.1	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицин- ского назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного со- общения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования		1 шт.
3.2	Мешок полиэтиленовый с зажимом	не менее 20 см × 25 см	1 шт.
3.3	Футляр-контейнер		1 шт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------


Разработ.	Ягунов			
Проверил				
Нач. отд.				
Н. контр.				

Укладка для оказания первой помощи
пострадавшим на железнодорожном транспорте
при оказании услуг по перевозкам пассажиров
для оснащения пассажирских поездов
пригородного сообщения и вагонов пассажирских
поездов дальнего следования
Рекомендации с пиктограммами


Литера	Лист	Листов
А	2	6
ООО «КАПИТАЛ – Медицинские Технологии»		

Для подготовки изделия к работе необходимо открыть футляр и извлечь нужное средство первой помощи или необходимый предмет.

1.) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 2.1 Составы укладки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 2.2. Составы Укладки);

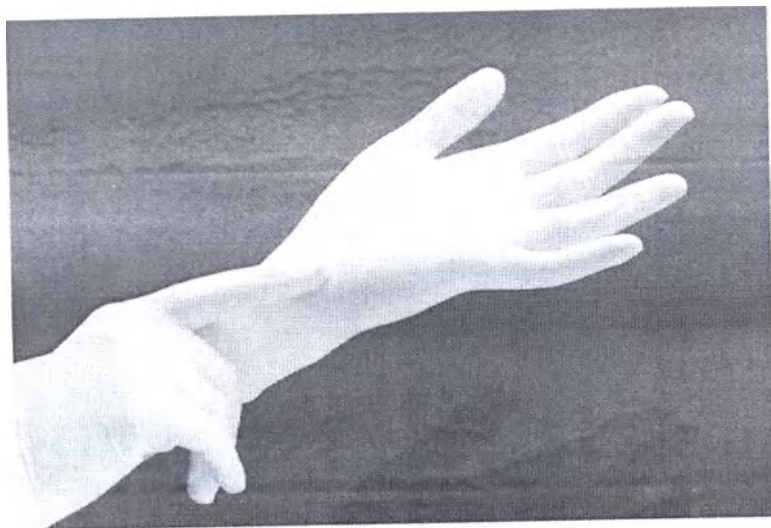

2) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Составы Укладки) выше места повреждения с указанием в записке наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.5 Составы Укладки);

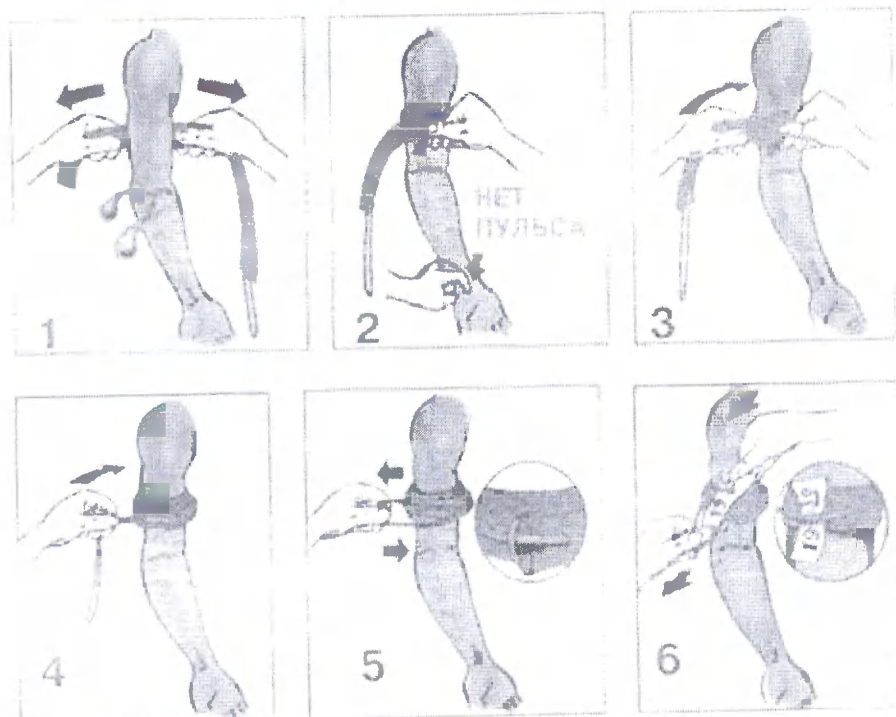

3) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.7 Составы Укладки) и бинты (п. 1.2 - 1.4 Составы Укладки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.5 Составы Укладки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.6 Составы укладки);



ТУ 9398-002-18341983-2012

Лист

4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата
Инв. № докл.
Взят. инв. №
Инв. № подл.
Полн. и дата

4) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 2.3. Составы Укладки);

Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 3.2 настоящих требований).

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 9398-002-18341983-2012

163

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего лис- тов в докум.	№ до- кум.	Входя- щий № сопрово- дительно- го до- кумента и дата	Под- пись	Дата
	изме- нён- ных	заме- нён- ных	новых	анну- лиро- ван- ных					

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
6 листов

Генеральный
Директор



[Handwritten signature]

Щестеркин П.