

APPROVED BY

President

Innobiosurg Co., Ltd

_____ Wang Je Won

« » _____ 2014



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Имплантаты дентальные IBS с принадлежностями
(Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Корея)

кости 4
по
резцу).
ных протезов.

APPROVED BY

President

Innobiosurg Co., Ltd

Wang Je Won



« » _____ 2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Имплантаты дентальные IBS с принадлежностями
(Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Корея)

2014

ные изделия

ты дентальные IBS с принадлежностями»

тель: Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.

по 10-ro, Youseong-gu, Daejeon, Republic of Korea.

изводства: Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.

по 10-ro, Youseong-gu, Daejeon, Republic of Korea.

оизводится в соответствии со стандартами ISO 13485:2003 (номер сертификата: Q1N 13 06, дата выдачи – 02/09/2013, дата истечения действия – 31/05/2016, нотифицированный SUD Product Service GmbH и имеет маркировку CE (номер сертификата: G1 13 06 73070 дачи – 05/08/2013, дата истечения действия – 22/06/2015, нотифицированный орган: TUV st Service GmbH.

я по Общероссийскому классификатору продукции ОК-005-93: 94 3800.

ависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в ии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом тва здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 26.

ация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, ьным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. 02 03 28.

кта с организмом человека – длительный (пожизненный) контакт с внутренней средой

рименения: лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения, только по о врача-специалиста.

рименения.

именяется для замещения функции зуба человека в стоматологии в условиях лечебно-ических учреждений.

истики изделия.

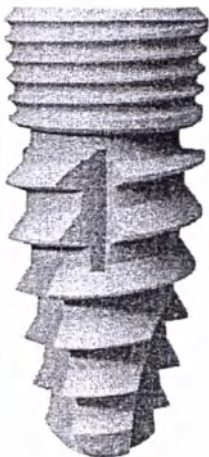
ты дентальные IBS применяются в хирургической имплантологии для создания опоры для еских конструкций на верхней и нижней челюстях. Они позволяют изготавливать : искусственные коронки с опорой на имплантат, мостовидные протезы с опорой на ы, а также проводить тотальное протезирование при полном отсутствии зубов, или ополнительными ретенционными элементами для съемных протезов. Вид контакта с м человека - длительный.

еские компоненты, как принадлежности к имплантатам, созданы для изготовления еских конструкций с опорой на имплантаты. Лабораторные компоненты используются для исков, изготовления моделей в зуботехнической лаборатории и создания ортопедических ий с опорой на имплантаты. При установке имплантатов, производства компании g Co., Ltd, рекомендуется использовать только оригинальные инструменты для установки ов IBS.

ты предназначены только для однократного применения. Принадлежности еские компоненты) предназначены только для однократного применения.

рименения медицинского изделия – стоматология.

Таблица 1. Описание и внешний вид изделия

наименование	Изображение	Особенности:
Имплантаты типа де ER-S		1. Конструкция совместимая со структурой альвеолярного гребня, разработанная для предотвращения появления микротрещин от чрезмерной нагрузки за счет охватывания большей части губчатой кости из нижней части между шагами резьбы по сравнению с верхней частью кортикальной кости. 2. Конструкция, которая гарантирует начальную стабильность имплантата, независимо от качества кости пациента: коническая форма, исполнения различного диаметра (позволяют специалисту выбрать диаметр на основе состояния кости пациента), больший диаметр резьбы в верхней части. 3. Конструктивное поддержание кости за счет увеличенной площади поверхности: форма и структура выдерживает вертикальное/горизонтальное давление для предотвращения чрезмерной нагрузки на естественную кость, паз между верхней и нижней частью имплантата для увеличения функциональной поверхности. 4. Конструкция имплантата предотвращает неправильное расположение (опускание) имплантата во время установки: нет необходимости использовать дополнительное давление во время установки, имплантат устанавливается путем вращения, это достигается за счет конструкции (шаг резьбы и форма имплантата). 5. Снижение риска распространения инфекции. Паз между верхней и нижней частью является барьером для патогенных микроорганизмов – естественной преградой между частью, которая находится внутри кости, и частью, которая контактирует с ортопедическими компонентами.
Имплантаты типа R.FIX		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может применяться только в случае, если ширина кости 4 мм или меньше (для нижней челюсти – измеряется по передней шестерке, для верхней – по боковому резцу). 6. Может быть применен для крепления съемных протезов.

ИД:

Наименование с указанием артикулов	Материал	Вид контакта
Импланты дентальные IBS Regular Fixture: IBS4009, IBS4011, IBS4013, IBS4015, IBS4509, IBS4511, IBS4513, IBS4515, IBS5009, IBS5011, IBS5013, IBS5015, IBS5509, IBS5511, IBS5513, IBS6007, IBS6009, IBS6011, IBS6013, IBS6507, IBS6509, IBS6511, IBS6513, Импланты дентальные IBS N.R.Fixture: IBS3013, IBS3509, IBS3511, IBS3513.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5). Основные составляющие вещества: Титан, ванадий, железо, водород, кислород, алюминий, углерод, азот.	Постоянный (пожизненный) контакт с внутренней средой организма
Импланты IBS: HISS4014, HISS4024, HISS4034, HISS4044, HISS4054, HISS4064, HISS4015, HISS4025, HISS4035, HISS4045, HISS4055, HISS4065, HISS4017, HISS4027, HISS4037, HISS4047, HISS4057, HISS4067, HISS4514, HISS4524, HISS4534, HISS4544, HISS4554, HISS4564, HISS4515, HISS4525, HISS4535, HISS4545, HISS4555, HISS4565, HISS4517, HISS4527, HISS4537, HISS4547, HISS4557, HISS4567, HISS5014, HISS5024, HISS5034, HISS5044, HISS5054, HISS5064, HISS5015, HISS5025, HISS5035, HISS5045, HISS5055, HISS5065, HISS5017, HISS5027, HISS5037, HISS5047, HISS5057, HISS5067, HISS5514, HISS5524, HISS5534, HISS5544, HISS5554, HISS5564, HISS5515, HISS5525, HISS5535, HISS5545, HISS5555, HISS5565, HISS5517, HISS5527, HISS5537, HISS5547, HISS5557, HISS5567, HISS6014, HISS6024, HISS6034, HISS6044, HISS6054, HISS6064, HISS6075, HISS6025, HISS6035, HISS6045, HISS6055, HISS6065, HISS6017, HISS6027, HISS6037, HISS6047, HISS6057, HISS6067, HISS6077, HISS6514, HISS6524, HISS6534, HISS6544, HISS6554, HISS6564, HISS6515, HISS6525, HISS6535, HISS6545, HISS6555, HISS6565, HISS6575, HISS6527, HISS6537, HISS6547, HISS6557, HISS6567. Имплант заживляющий IBS: HISH4001, HISH4002, HISH4003, HISH4004, HISH4501,	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5). Основные составляющие вещества: Титан, ванадий, железо, водород, кислород, алюминий, углерод, азот.	Постоянный (пожизненный) контакт с внутренней средой организма

Шпильки с указанием артикулов	Материал	Вид контакта
Шпильки с шестигранной формой IBS: 2, HISH4503, HISH4504, HISH5001, 2, HISH5003, HISH5004, HISH 5501, 2, HISH5503, HISH5504, HISH6001, 2, HISH6003, HISH6004.		
Шпильки с парным IBS: OSH4014, OSH4024, 4, OSH4044, OSH4514, OSH4524, 4, OSH4544, OSH5014, OSH5024, 4, OSH5044, OSH5514, OSH5524, 4, OSH5544, OSH6014, OSH6024, 4, OSH6044, OSH6514, OSH6524, 4, OSH6544, OSH4016, OSH4026, 5, OSH4046, OSH4516, OSH4526, 5, OSH4546, OSH5016, OSH5026, 5, OSH5046, OSH5516, OSH5526, 5, OSH5546, OSH6016, OSH6026, 5, OSH6046, OSH6516, OSH6526, 5, OSH6546, OSH4018, OSH4028, 5, OSH4048, OSH4518, OSH4528, 5, OSH4548, OSH5018, OSH5028, 5, OSH5048, OSH5518, 5, OSH5538, OSH5548, OSH6018, 5, OSH6038, OSH6048, OSH6518, 5, OSH6538, OSH6548.		
Шпильки с парным не шестигранной формы IBS: 5, OSN4026, OSN4036, OSN4046, 5, OSN4526, OSN4536, OSN4546, 5, OSN5026, OSN5036, OSN5046, 5, OSN5526, OSN5536, OSN5546, 6, OSN6026, OSN6036, OSN6046, 6, OSN6526, OSN6536, OSN6546.		
Шпильки с угловой IBS: HISA40115, HISA40215, 315, HISA40415, HISA40125, HISA40225, 325, HISA40425, HISA45115, HISA45215, 315, HISA45415, HISA45125, HISA45225, 325, HISA45425, HISA50115, HISA50215, 315, HISA50415, HISA50125, HISA50225, 325, HISA50425.		
Шпильки с угловой закрывающийся винтом IBS: 0.		
Шпильки с угловой не шестигранной формы IBS: 115, NHSA3215, NHSA3315, NHSA3415, 125, NHSA3225, NHSA3325, NHSA3425,		

оказания с указанием артикулов	Материал	Вид контакта
115, NHSA4215, NHSA4315, NHSA4415, 125, NHSA4225, NHSA4325, NHSA4425, 115, NHSA5215, NHSA5315, NHSA5415, 125, NHSA5225, NHSA 5325, NHSA5425. лабораторный IBS: HIAL. с винтом IBS: SAA45, SAA55, SAA65. S: MS15, MS25, MS35, MS45. сстанавливающий IBS: SAH4501, 12, SAH4503, SAH4504, SAH4505, 16, SAH5501, SAH5502, SAH5503, 14, SAH5505, SAH5506, SAH6501, 12, SAH6503, SAH6504, SAH6505, 16. крывающий IBS: HISC00. сепления абатмента IBS: SARS1.8. сепления слепочного трансфера IBS: , SAIT55, SAIT65. сепления трансфера Pick-Up IBS: SAIP45, , SAIP65. ок защитный IBS: SAPC45, SAPC55, 5. ок опоры абатмента IBS: MAC CAP4.5, AP5.5, MAC CAP6.5. абатмента IBS: MM2502, MM2504, 06, MM2508, MM5002, MM5004, MM5006, 08, MM7502, MM7504, MM7506, MM7508, 02, MM1004, MM1006, MM1008, 501S, MAC4502S, MAC4503S, MAC4505S, 507S, MAC4509S, MAC5501S, MAC5502S, 503S, MAC5505S, MAC5507S, MAC5509S, 501S, MAC6502S, MAC6503S, MAC6505S, 507S, MAC6509S.		
ент-копир IBS: 016PA, OSH4016TA, OSH4026PA, 026TA, OSH4036PA, OSH4036TA, 046PA, OSH4046TA, OSH4516PA, 516TA, OSH4526PA, OSH4526TA,	Нержавеющая сталь - SUS303F. Основные компоненты: углерод, марганец, кремний, фосфор, сера, хром,	Длительный контакт с внутренней средой организма.

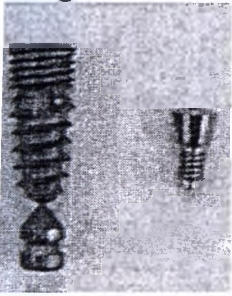
Наименования с указанием артикулов	Материал	Вид контакта
36PA, OSH4536TA, OSH4546PA, 46TA, OSH5016PA, OSH5016TA, 26PA, OSH5026TA, OSH5036PA, 36TA, OSH5046PA, OSH5046TA, 116PA, OSH5516TA, OSH5526PA, 526TA, OSH5536PA, OSH5536TA, 546PA, OSH5546TA, OSH6016PA, 016TA, OSH6026PA, OSH6026TA, 036PA, OSH6036TA, OSH6046PA, 046TA, OSH6516PA, OSH6516TA, 526PA, OSH6526TA, OSH6536PA, 536TA, OSH6546PA, OSH6546TA, 014PA, OSH4014TA, OSH4024PA, 024TA, OSH4034PA, OSH4034TA, 044PA, OSH4044TA, OSH4514PA, 514TA, OSH4524PA, OSH4524TA, 534PA, OSH4534TA, OSH4544PA, 544TA, OSH5014PA, OSH5014TA, 024PA, OSH5024TA, OSH5034PA, 034TA, OSH5044PA, OSH5044TA, 514PA, OSH5514TA, OSH5524PA, 524TA, OSH5534PA, OSH5534TA, 544PA, OSH5544TA, OSH6014PA, 014TA, OSH6024PA, OSH6024TA, 034PA, OSH6034TA, OSH6044PA, 044TA, OSH6514PA, OSH6514TA, 524PA, OSH6524TA, OSH6534PA, 534TA, OSH6544PA, OSH6544TA. рент-копир лабораторный IBS: ACSP, , ACHD12. г лабораторный IBS MAC: MACL4.5, 5.0, MACL5.5S, MACL6.0S, MACL6.5S, 7.0S.	никель.	
фер слепочный IBS: HICT40L, HICT40S, 45L, HICT45S, HICT50L, HICT50S, 55L, HICT55S, HICT60L, HICT60S. фер слепочный IBS Pick-Up: HICP40L, 40S, HICP45L, HICP45S, HICP50L, 50S, HICP55L, HICP55S, HICP60L, 60S.	Нержавеющая сталь - SUS303F. Основные компоненты: углерод, марганец, кремний, фосфор, сера, хром, никель.	Кратковременный контакт с внутренней средой организма.
фер слепочный IBS MAC: MACI4.5, 5.0, MACI5.5S, MACI6.0S, MACI6.5S,	Поликарбонат (PC- 3022IR - Продукт	Кратковременный контакт с

ания с указанием артикулов	Материал	Вид контакта
	полимеризации полибисфенол-А- карбоната)	внутренней средой организма.
с прокладкой IBS: MMRO.	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид), нержавеющая сталь - SUS303F. Основные компоненты: углерод, марганец, кремний, фосфор, сера, хром, никель.	Длительный контакт с внутренней средой организма.
выжигаемый IBS: SAC45, SAC55,	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид, CAS# 9002-81-7)	Длительный контакт с внутренней средой организма.

акта с организмом:

ый (пожизненный) контакт с внутренней средой организма..

Таблица 2. Технические характеристики изделия

именование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Материал
плантаты дентальные 3 Regular Fixture: 	IBS4007	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 7 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	IBS4009	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 9 мм.	
	IBS4011	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11 мм.	
	IBS4013	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 13 мм.	
	IBS4015	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 15 мм.	
	IBS4507	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 7 мм.	
	IBS4509	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 9 мм.	
	IBS4511	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11 мм.	
	IBS4513	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 13 мм.	
	IBS4515	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 15 мм.	
	IBS5007	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 7 мм.	
	IBS5009	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 9 мм.	
	IBS5011	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11 мм.	
	IBS5013	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 13 мм.	
	IBS5015	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 15 мм.	
	IBS5507	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 7 мм.	
	IBS5509	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 9 мм.	
	IBS5511	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11 мм.	
	IBS5513	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 13 мм.	
	IBS5515	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 15 мм.	
	IBS6007	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 7 мм.	
	IBS6009	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 9 мм.	
	IBS6011	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11 мм.	
	IBS6013	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 13 мм.	

Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Материал
		6,0 мм.	мм.	
	IBS6015	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 15 мм.	
	IBS6507	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 7 мм.	
	IBS6509	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 9 мм.	
	IBS6511	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 11 мм.	
	IBS6513	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 13 мм.	
	IBS6515	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 15 мм.	
Имплантаты дентальные IBS N.R.Fixture:	IBS3011	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 13 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	IBS3013	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 15 мм.	
	IBS3509	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 10 мм.	
	IBS3511	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 12 мм.	
	IBS3513	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 14 мм.	

Таблица 3. Технические характеристики принадлежностей

Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
Абатмент IBS:  Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации.	HISS4014	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 4мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	HISS4024	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 4мм.	
	HISS4034	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 4мм.	
	HISS4044	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 4мм.	
	HISS4054	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 4мм.	

Изображение. Изображение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
	HISS4064	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 4мм.	
	HISS4015	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 5.5мм.	
	HISS4025	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 5.5мм.	
	HISS4035	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 5.5мм.	
	HISS4045	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 5.5мм.	
	HISS4055	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 5.5мм.	
	HISS4065	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 5.5мм.	
	HISS4017	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4027	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4037	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4047	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4057	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина	

Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
			(L): 7 мм.	
	HISS4067	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4514	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS4524	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS4534	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS4544	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS4554	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS4564	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS4515	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS4525	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS4535	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS4545	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS4555	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):	

Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
			5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS4565	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS4517	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4527	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4537	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4547	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4557	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS4567	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5014	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5024	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5034	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5044	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5054	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем	

Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
			десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5064	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5015	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5025	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5035	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5045	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5055	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5065	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5017	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5027	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5037	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5047	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5057	Диаметр: 5,0	Высота над	

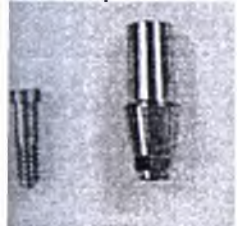
Наименование. Изображение. Изображение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.	уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5067	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5514	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5524	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5534	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5544	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5554	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5564	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS5515	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5525	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5535	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5545	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	

Наименование. Изображение. Изображение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
	HISS5555	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5565	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS5517	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5527	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5537	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5547	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5557	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS5567	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6014	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6024	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6034	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6044	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина	

Наименование. Изображение. Обозначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
			(L): 4 мм.	
	HISS6054	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6064	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6015	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6025	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6035	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6045	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6055	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6065	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6017	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6027	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6037	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6047	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4	

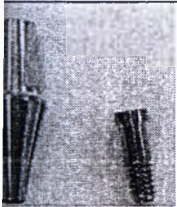
Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
			мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6057	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6067	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6514	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6524	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6534	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6544	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6554	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6564	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	
	HISS6515	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6525	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6535	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6545	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем	

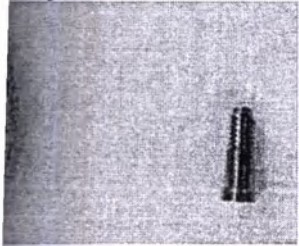
нование. Изображение. ение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
			десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6555	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6565	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	
	HISS6517	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6527	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6537	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6547	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6557	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	
	HISS6567	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	
мент заживляющий IBS:  ение предназначено для готовления одиночных коронок мостовидных ортопедических струкций. Соединяется с плантатом с помощью фиксирующего титанового винта и ортопедическими конструкциями помощи цементной фиксации.	HISH4001	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	HISH4002	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	HISH4003	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	HISH4004	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	HISH4501	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	HISH4502	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	HISH4503	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	HISH4504	Диаметр: 4,5	Высота: 4 мм.	

Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.		
	HISH5001	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	HISH5002	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	HISH5003	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	HISH5004	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	HISH5501	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	HISH5502	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	HISH5503	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	HISH5504	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	HISH6001	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	HISH6002	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	HISH6003	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	HISH6004	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	
 Абатмент парный IBS: изделие предназначено для изготовления одиночных коронок мостовидных ортопедических конструкций. Упаковка изделия держит абатмент угловой с фиксирующимся винтом (артикул: IBS400). Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего анкерного винта и с ортопедическими конструкциями с помощью цементной фиксации.	OSH4014	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	Ti-6Al-4V ELI (титанGr5)
	OSH4024	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH4034	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH4044	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH4514	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH4524	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH4534	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH4544	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH5014	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH5024	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH5034	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH5044	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH5514	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH5524	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH5534	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH5544	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH6014	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм.	

наименование. Изображение. назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6024	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH6034	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH6044	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH6514	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH6524	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH6534	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH6544	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH4016	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH4026	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH4036	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH4046	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH4516	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH4526	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH4536	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH4546	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH5016	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH5026	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH5036	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH5046	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH5516	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH5526	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH5536	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH5546	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH6016	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH6026	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH6036	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH6046	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH6516	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH6526	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм.	

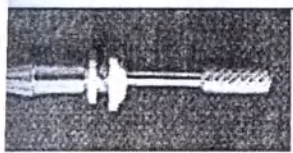
Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6536	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH6546	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH4018	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH4028	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH4038	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH4048	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH4518	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH4528	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH4538	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH4548	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH5018	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH5028	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH5038	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH5048	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH5518	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH5528	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH5538	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH5548	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH6018	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH6028	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH6038	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH6048	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSH6518	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSH6528	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSH6538	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSH6548	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	
Абтмент парный не шестигранной формы IBS:	OSN4016	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	OSN4026	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	

наименование. Изображение. назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
 Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и ортопедическими конструкциями помощи цементной фиксации. Каждая упаковка изделия содержит абатмент угловой сгибающийся винтом (артикул: OS400).			мм.	
	OSN4036	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSN4046	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSN4516	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSN4526	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSN4536	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSN4546	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSN5016	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSN5026	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSN5036	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSN5046	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSN5516	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSN5526	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSN5536	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSN5546	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSN6016	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	
	OSN6026	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSN6036	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSN6046	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	
	OSN6516	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	

Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
Элемент угловой IBS:  Элемент предназначен для вставки в одиночные коронки вставных ортопедических конструкций. Применяется в тех случаях, когда ортопедическая конструкция должна быть установлена под углом к анатому. Соединяется с анатомом с помощью фиксирующего титанового винта и ортопедическими конструкциями с помощью цементной фиксации.	OSN6526	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	
	OSN6536	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	
	OSN6546	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	
	HISA40115	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	Ti-6Al-4V ELI (титан Gr5)
	HISA40215	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	HISA40315	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	HISA40415	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	HISA40125	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	HISA40225	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	HISA40325	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	HISA40425	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	HISA45115	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	HISA45215	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	HISA45315	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	HISA45415	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	HISA45125	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	HISA45225	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	HISA45325	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	HISA45425	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	HISA50115	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	

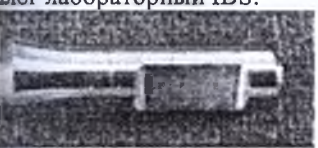
Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм, угол: 15,0 градусов.		
	HISA50215	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	HISA50315	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	HISA50415	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	HISA50125	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	HISA50225	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	HISA50325	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	HISA50425	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
Абатмент угловой закрывающийся модулем IBS:	OIAS400	Диаметр: 2,5 мм.	Длина: 7,6 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
 Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент угловой не шестигранной формы IBS:  Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации.	NHSA3115	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	NHSA3215	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	NHSA3315	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	NHSA3415	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	NHSA3125	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	NHSA3225	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	NHSA3325	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	

Наименование. Изображение. Значение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
	NHSA3425	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	NHSA4115	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	NHSA4215	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	NHSA4315	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	NHSA4415	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	NHSA4125	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	NHSA4225	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	NHSA4325	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	NHSA4425	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	NHSA5115	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	NHSA5215	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	NHSA5315	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	NHSA5415	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
	NHSA5125	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	
	NHSA5225	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	
	NHSA5325	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	
	NHSA5425	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	
Экземпляр-копир IBS:	OSH4016PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	SUS303F
Экземпляр-копир IBS:	OSH4016TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	
Экземпляр-копир IBS:	OSH4026PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	
Экземпляр-копир IBS:	OSH4026TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	

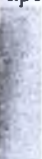
Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
 Н-ТА  предназначен для определения положения ортопедической конструкции (искусственного зуба) в ротовой полости пациента. Вживляется в имплантат.		мм.		
	OSH4036PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4036TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4046PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4046TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4516PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH4516TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH4526PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH4526TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH4536PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4536TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4546PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4546TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5016PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5016TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5026PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5026TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5036PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5036TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5046PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5046TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5516PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5516TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5526PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5526TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5536PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5536TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5546PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5546TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6016PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	

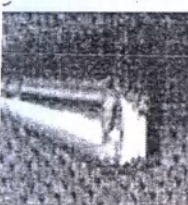
Наименование. Изображение. Чтение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.		
	OSH6016TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6026PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6026TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6036PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6036TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6046PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6046TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6516PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6516TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6526PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6526TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6536PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6536TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6546PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6546TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4014PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH4014TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH4024PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH4024TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH4034PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4034TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4044PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4044TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4514PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH4514TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH4524PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH4524TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH4534PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH4534TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	

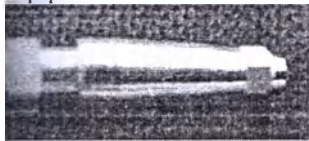
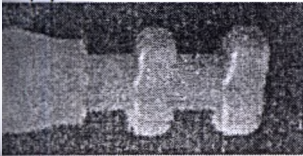
Наименование. Изображение. Изображение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.		
	OSH4544PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH4544TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5014PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5014TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5024PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5024TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5034PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5034TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5044PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5044TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5514PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5514TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH5524PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5524TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH5534PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5534TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH5544PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH5544TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6014PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6014TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6024PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6024TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6034PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6034TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6044PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6044TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6514PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6514TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	OSH6524PA	Диаметр: 6,5	Высота: 2 мм.	

Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.		
	OSH6524TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	OSH6534PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6534TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	OSH6544PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	
	OSH6544TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	
Элемент-копир лабораторный ACSP  ACST  ACHD12 	ACSP	Диаметр: 5,9 мм.	Длина: 7,3 мм.	SUS303F
	ACST	Диаметр: 5,477 мм.	Длина: 7,35 мм.	
	ACHD12	Диаметр: 1,6 мм.	Длина: 22,0 мм.	
Используется как основа для лепки, который снимается для окончательного формирования ортопедической конструкции.				
Аналог лабораторный IBS: 	HIAL	Диаметр: 4,8 мм.	Длина: 12,5 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
Применение: аналог имплантата помещается в гипсовую модель обычным техником при изготовлении модели по оттisku с овня имплантата, необходим для точной передачи расположения и наклона имплантата в полости рта пациента.				
Аналог лабораторный IBS MAC: 	MACL4.5	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 12,3 мм.	SUS303F
	MACL5.0	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 12,3 мм.	
	MACL5.5S	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 12,4 мм.	
	MACL6.0S	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 12,4 мм.	
	MACL6.5S	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 12,4 мм.	
Применение: аналог имплантата помещается в гипсовую модель обычным техником при изготовлении модели по оттisku,				

Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
Используется для точной передачи положения и наклона абатмента в полости рта пациента, обеспечивающей правильную ориентацию имплантата и анатомической конструкции искусственного зуба).	MACL7.0S	Диаметр: 7,0 мм.	Длина: 12,4 мм.	
Используется с винтом IBS:	SAA45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,4 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	SAA55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,4 мм.	
	SAA65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,4 мм.	
Используется абатмента предназначен для определения правильного положения абатмента с винтовой фиксацией. В комплект поставки входит винт закрывающий абатмент.	MS15	Высота конуса: 1,5 мм.	Длина: 1,5 мм	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	MS25	Высота конуса: 2,5 мм.	Длина: 2,5 мм	
	MS35	Высота конуса: 3,5 мм.	Длина: 3,5 мм	
	MS45	Высота конуса: 4,5 мм.	Длина: 4,5 мм	
Используется для восстановления IBS:  И предназначен для крепления абатмента.	SAH4501	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1,5 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	SAH4502	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2,5 мм.	
	SAH4503	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3,5 мм.	
	SAH4504	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4,5 мм.	
	SAH4505	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 5,5 мм.	
	SAH4506	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 6,5 мм.	
	SAH5501	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1,5 мм.	
	SAH5502	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2,5 мм.	
	SAH5503	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3,5 мм.	
	SAH5504	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4,5 мм.	
	SAH5505	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 5,5 мм.	
	SAH5506	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 6,5 мм.	
	SAH6501	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1,5 мм.	

Наименование. Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
		мм.	мм.	
	SAH6502	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2,5 мм.	
	SAH6503	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3,5 мм.	
	SAH6504	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4,5 мм.	
	SAH6505	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 5,5 мм.	
	SAH6506	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 6,5 мм.	
 закрывающий IBS: назначен для крепления абатмента к имплантату.	HISC00	Диаметр: 3,355 мм.	Длина: 5,65 мм	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
 назначен для крепления абатмента к имплантату.	SARS1.8	Диаметр: 2,5 мм.	Длина: 6,3 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
 назначен для крепления абатмента к имплантату.	SAIT45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	SAIT55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	
	SAIT65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	
 назначен для крепления абатмента к имплантату.	SAIP45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	SAIP55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	
	SAIP65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	
 назначен для механической фиксации уже установленного имплантата.	SAPC45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4,8 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	SAPC55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4,8 мм.	
	SAPC65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4,8 мм.	
 назначен для механической фиксации абатмента к имплантату.	MAC CAP4.5	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6,3 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	MAC CAP5.5	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 7,0 мм.	
	MAC CAP6.5	Диаметр: 7,0 мм.	Длина: 7,0 мм.	

нование. Изображение. чение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
ы опоры абатмента после вки.				
абатмента IBS:	MM2502	Угол: 2,5 град.	Высота: 2 мм.	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
	MM2504	Угол: 2,5 град.	Высота: 4 мм.	
	MM2506	Угол: 2,5 град.	Высота: 6 мм.	
	MM2508	Угол: 2,5 град.	Высота: 8 мм.	
	MM5002	Угол: 5,0 град.	Высота: 2 мм.	
	MM5004	Угол: 5,0 град.	Высота: 4 мм.	
	MM5006	Угол: 5,0 град.	Высота: 6 мм.	
	MM5008	Угол: 5,0 град.	Высота: 8 мм.	
а, которая устанавливается мплантатом, для дующей установки медицинской конструкции.	MM7502	Угол: 7,5 град.	Высота: 2 мм.	
	MM7504	Угол: 7,5 град.	Высота: 4 мм.	
	MM7506	Угол: 7,5 град.	Высота: 6 мм.	
	MM7508	Угол: 7,5 град.	Высота: 8 мм.	
	MM1002	Угол: 10,0 град.	Высота: 2 мм.	
	MM1004	Угол: 10,0 град.	Высота: 4 мм.	
	MM1006	Угол: 10,0 град.	Высота: 6 мм.	
	MM1008	Угол: 10,0 град.	Высота: 8 мм.	
	MAC4501S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	MAC4502S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	MAC4503S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	MAC4505S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 5 мм.	
	MAC4507S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 7 мм.	
	MAC4509S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 9 мм.	
	MAC5501S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	MAC5502S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	MAC5503S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	MAC5505S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 5 мм.	
	MAC5507S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 7 мм.	
	MAC5509S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 9 мм.	

Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
	MAC6501S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	
	MAC6502S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	
	MAC6503S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	
	MAC6505S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 5 мм.	
	MAC6507S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 7 мм.	
	MAC6509S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 9 мм.	
 Используется для снятия оттисков, фиксируется с имплантатом Pick-Up.	HICT40L	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	SUS303F
	HICT40S	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT45L	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT45S	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT50L	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT50S	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT55L	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT55S	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT60L	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICT60S	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
 Используется для снятия оттисков открытым и закрытым методом, предназначены для снятия оттисков открытой и закрытой модели. Фиксируется с имплантатом винтом, входящим в комплект.	MACI4.5	Диаметр: 4,8 мм.	Длина: 11,9 мм.	PC-3022IR
	MACI5.0	Диаметр: 5,3 мм.	Длина: 11,9 мм.	
	MACI5.5S	Диаметр: 5,8 мм.	Длина: 11,9 мм.	
	MACI6.0S	Диаметр: 6,3 мм.	Длина: 11,9 мм.	
	MACI6.5S	Диаметр: 6,8 мм.	Длина: 11,9 мм.	
	MACI7.0S	Диаметр: 7,3 мм.	Длина: 11,9 мм.	
Используется для снятия оттисков открытым и закрытым методом, предназначены для снятия оттисков открытой и закрытой модели. Фиксируется с имплантатом винтом, входящим в комплект.	HICP40L	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	SUS303F

Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Материал
используется для снятия оттисков и закрытом методом, предназначены для снятия открытой и закрытой	HICP40S	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP45L	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP45S	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP50L	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP50S	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP55L	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP55S	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP60L	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	
	HICP60S	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	
с прокладкой IBS:  предназначен для фиксации анатомической конструкции на зубе.	MMRO	Диаметр фиксатора: 5,95 мм. Диаметр прокладки: 4,5 мм.	Длина фиксатора: 2,7 мм. Длина прокладки: 1,5 мм.	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид), нержавеющая сталь -SUS303F.
для выжигаемый IBS:  предназначен для изготовления индивидуальных абатментов из воска или литья.	SAC45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид, CAS# 9002-81-7)
	SAC55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	
	SAC65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	

поставки:

аты дентальные IBS одного исполнения - 1 упаковка,
ежности* в индивидуальной упаковке
тво по эксплуатации – 1 шт.

ь принадлежностей выбирается врачом в зависимости от клинической ситуации.

ная обработка.

оставляется стерильным. Метод стерилизации – радиационный, значение поглощенной
кГр.

предназначено только для однократного применения, повторная стерилизация изделия
а. В случае нарушения целостности упаковки или механического повреждения во время
а, изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами, приведенными ниже.

хранения и транспортировки.

транспортирования и хранения: температура воздуха от +0°C до +35°C при относительной
ги от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

эксплуатации: температура воздуха от +5°C до +42°C при относительной влажности от 35%
неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников
прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на
каждого изделия.

дации врачу-специалисту.

ния:

вие у пациента одного зуба или нескольких.

показания:

точное количество кости в зоне имплантации, ее плохая структура, инфицирование,
етворительная гигиена полости рта, отсутствие кооперации с пациентом, курение,
вующие заболевания (ВИЧ, рак, диабет, остеопороз и т.д.).

мендуется применение у лиц моложе 18 лет.

иальные осложнения:

вие остеоинтеграции и неудовлетворительный результат имплантации.

предосторожности

Использовать изделие только по предусмотренному назначению.

К использованию изделия допускаются только лица, которые ознакомились с данной
инструкцией, имеют медицинское образование и все необходимые разрешения для работы.

Использование изделия в случае нарушения упаковки категорически запрещено, в этом
случае, изделие должно быть возвращено производителю.

Повторная стерилизация изделия запрещена.

Повторное применение изделия запрещено.

Допускается применение имплантатов только с ортопедическими компонентами,
производства компании Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.

Установка имплантатов и ортопедических компонентов производиться только при помощи
специальных инструментов, производства компании Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко.,
Лтд»), Республика Корея.

Использование инструментов и ортопедических компонентов других фирм категорически
запрещено.

о выборе принадлежностей к тому или иному имплантату

лист принимает решение о выборе принадлежностей на основании следующих

основании выбранного имплантата,
стояние соседнего зуба, десен и полости рта пациента,
ма зуба, которая будет восстановлена при помощи ортопедических компонентов,
ерхности зуба (челюсть закрыта в нормальном состоянии).

1 (Информация о применении для медицинского работника)

упаковка изделия не содержит латекса и поливинилхлорида (ПВХ). Ограничений по
сти материалов нет.

по применению

ой операцией имплантации у пациента должен быть собран анамнез, проведено
е и рентгенологическое исследования.

ацией врач-стоматолог должен освоить все хирургические навыки и пройти специальное
для правильного планирования лечения и успешного выполнения операции.
ные знания и практические навыки могут привести к неудовлетворительному результату
сутствие остеоинтеграции и неудовлетворительный результат имплантации могут быть
ы нарушением техники операции.

ия для пациентов.

должны быть предупреждены стоматологом обо всех рисках хирургической операции и
оконсультироваться со своим лечащим врачом перед операцией. Кроме того, пациенты
ть проинструктированы о необходимых регулярных профилактических осмотрах.

ия о проведении установки имплантата

ургическим вмешательством на этапе планирования необходимо убедиться, что для
выбранного имплантата достаточно пространства, а также есть условия для изготовления
лющей ортопедической конструкции. Перед подготовкой ложа имплантата необходимо
в надлежащем качестве необходимых инструментов и их стерильности. Должны быть
все меры для минимизации хирургической травмы тканей пациента. Необходимо
овать скорость вращения инструментов в соответствии с характеристиками костной ткани,
о постоянное охлаждение стерильным раствором во время формирования ложа
и для предупреждения повреждения окружающих тканей и нарушения остеоинтеграции
а. При использовании фрез необходимо соблюдать их последовательность (от малого
большему), совмещая небольшое давление на инструмент и движения вверх-вниз каждые
ы. Любая ошибка при выборе длины препарирования по данным рентгенологических
ий может привести к повреждению нервов и других анатомических образований у
После подготовки ложа имплантата необходимо проверить вид и размер имплантата по его
достать ампулу, содержащую имплантат, и ввести имплантат на необходимую глубину,
учивания в кость с помощью соответствующих инструментов для установки имплантатов
гом максимальное усилие должно составлять 25Нсм, это необходимо для предотвращения
ия имплантата или инструментов во время установки.

ановки имплантата необходимо оценить его первичную стабильность и качество костной
ед изготовлением ортопедической конструкции. Компания производитель не может
использование изделий и не несет ответственности за неудовлетворительные результаты
побочные реакции или повреждения, произошедшие по вине пациента или врача-
га на любом этапе лечения, при применении продукции Innobiosurg Co., Ltd
сердж Ко., Лтд»), Республика Корея.

осстановления после хирургического вмешательства зависит от клинического состояния
Для оценки результата лечения пациент должен пройти клинические и рентгенологические
ния.

ая информация по всем хирургическим манипуляциям представлена на сайте
зводителя.

ремонт и обслуживание.

ремонту и гарантийному обслуживанию не подлежит. В случае, если нарушена
паковки изделия, требуется сообщить компании-производителю для замены изделия.
рилизации запрещена.

изделия.

ие упаковано в герметичную упаковку из полиэтилена, и далее в картонную коробку (из
тона). Изделия и принадлежности поставляются стерильными.

ерилизация изделия запрещена. Повторное применения изделия запрещено. Маркировка
редусмотрена (поверхность имплантатов и принадлежностей не содержит надписей
методом лазерной гравировки или ярлыков).

упаковки изделия содержит следующую информацию:

- енование изделия,
- кул (код изделия),
- ер партии (LOT),
- овные размеры,
- ормация о производителе (название и адрес),
- а изготовления и дата истечения срока годности,
- жировка CE (подтверждающая соответствие требованиям Европейской директивы),
- ормация о компании-представителе на территории ЕС,
- ивол «перед применением ознакомьтесь с инструкцией»,
- ивол, запрещающий повторное применение,
- ивол, который обозначает температуру хранения.



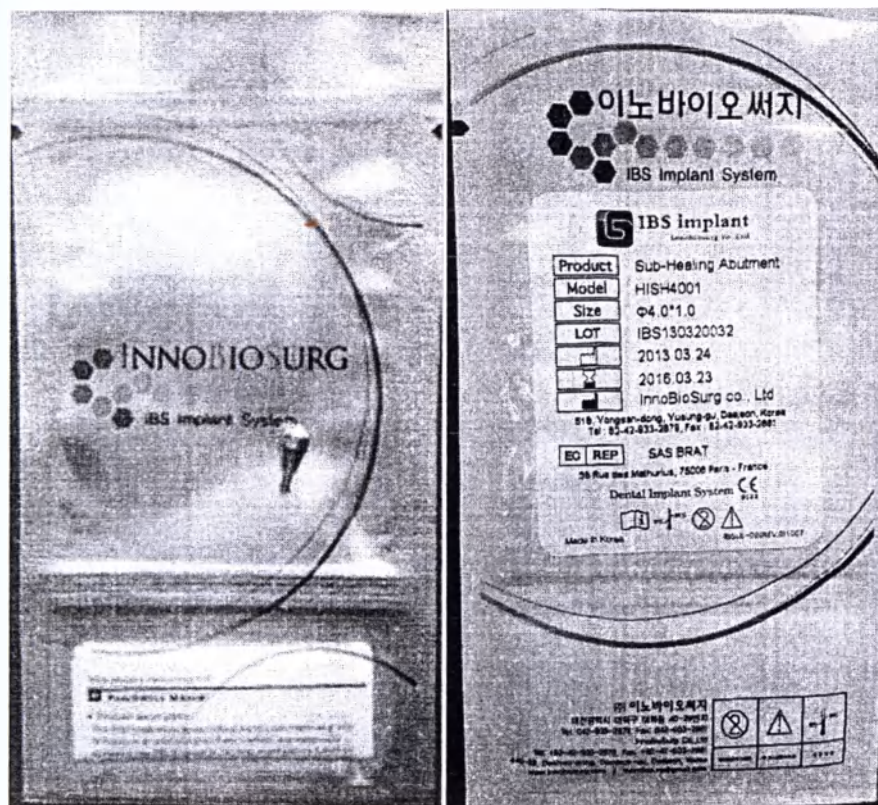
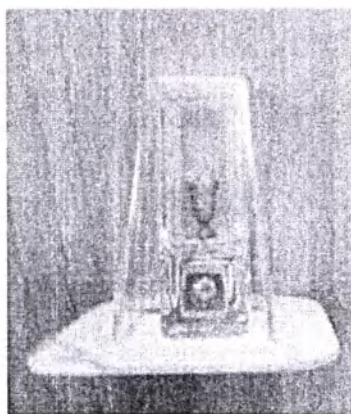
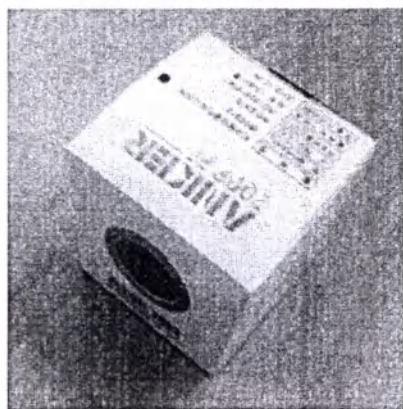


Рис.1 Маркировка и упаковка изделия

5 утилизации

изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (биологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, утилизироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (биологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о обеззараживании отходов.

Срок хранения – 3 года, срок сохранения стерильности – 3 года.

Прием рекламаций:

ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Элмас" (ООО "Элмас")

адрес: 141190, г. Фрязино, Заводской пр-д д. 4,
адрес: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 40, стр. 2а, оф. 103
59, КПП 505201001, ОКПО 31848333

., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.
10-ro, Youseong-gu, Daejeon, Republic of Korea.
33-2879, Факс: +82(042)933-2881.

Приложение 1. Ассортимент изделия

ы дентальные IBS, в следующих исполнениях:

ы дентальные IBS Regular Fixture:

34009, IBS4011, IBS4013, IBS4015, IBS4507, IBS4509, IBS4511, IBS4513, IBS4515,
35009, IBS5011, IBS5013, IBS5015, IBS5507, IBS5509, IBS5511, IBS5513,
6007, IBS6009, IBS6011, IBS6013, IBS6015, IBS6507, IBS6509, IBS6511, IBS6513,

ы дентальные IBS N.R.Fixture:

S3013, IBS3509, IBS3511, IBS3513.

жности:

IBS: HISS4014, HISS4024, HISS4034, HISS4044, HISS4054, HISS4064, HISS4015,
HISS4035, HISS4045, HISS4055, HISS4065, HISS4017, HISS4027, HISS4037, HISS4047,
HISS4067, HISS4514, HISS4524, HISS4534, HISS4544, HISS4554, HISS4564, HISS4515,
HISS4535, HISS4545, HISS4555, HISS4565, HISS4517, HISS4527, HISS4537, HISS4547,
HISS4567, HISS5014, HISS5024, HISS5034, HISS5044, HISS5054, HISS5064, HISS5015,
HISS5035, HISS5045, HISS5055, HISS5065, HISS5017, HISS5027, HISS5037, HISS5047,
HISS5067, HISS5514, HISS5524, HISS5534, HISS5544, HISS5554, HISS5564, HISS5515,
HISS5535, HISS5545, HISS5555, HISS5565, HISS5517, HISS5527, HISS5537, HISS5547,
HISS5567, HISS6014, HISS6024, HISS6034, HISS6044, HISS6054, HISS6064, HISS6015,
HISS6035, HISS6045, HISS6055, HISS6065, HISS6017, HISS6027, HISS6037, HISS6047,
HISS6067, HISS6514, HISS6524, HISS6534, HISS6544, HISS6554, HISS6564, HISS6515,
HISS6535, HISS6545, HISS6555, HISS6565, HISS6517, HISS6527, HISS6537, HISS6547,
HISS6567.

г заживляющий IBS: HISH4001, HISH4002, HISH4003, HISH4004, HISH4501, HISH4502,
HISH4504, HISH5001, HISH5002, HISH5003, HISH5004, HISH 5501, HISH5502, HISH5503,
HISH6001, HISH6002, HISH6003, HISH6004.

г парный IBS: OSH4014, OSH4024, OSH4034, OSH4044, OSH4514, OSH4524, OSH4534,
OSH5014, OSH5024, OSH5034, OSH5044, OSH5514, OSH5524, OSH5534, OSH5544,
OSH6024, OSH6034, OSH6044, OSH6514, OSH6524, OSH6534, OSH6544, OSH4016,
OSH4036, OSH4046, OSH4516, OSH4526, OSH4536, OSH4546, OSH5016, OSH5026,
OSH5046, OSH5516, OSH5526, OSH5536, OSH5546, OSH6016, OSH6026, OSH6036,
OSH6516, OSH6526, OSH6536, OSH6546, OSH4018, OSH4028, OSH4038, OSH4048,
OSH4528, OSH4538, OSH4548, OSH5018, OSH5028, OSH5038, OSH5048, OSH5518,
OSH5538, OSH5548, OSH6018, OSH6028, OSH6038, OSH6048, OSH6518, OSH6528,
OSH6548.

г парный не шестигранной формы IBS: OSN4016, OSN 4026, OSN4036, OSN4046,
OSN4526, OSN4536, OSN4546, OSN5016, OSN5026, OSN 5036, OSN5046, OSN5516,
OSN5536, OSN5546, OSN6016, OSN6026, OSN6036, OSN 6046, OSN 6516, OSN6526,
OSN6546.

г угловой IBS: HISA40115, HISA40215, HISA40315, HISA40415, HISA40125, HISA40225,
15, HISA40425(HISA40435X), HISA45115, HISA45215, HISA45315, HISA45415, HISA45125,
25, HISA45325, HISA45425, HISA50115, HISA50215, HISA50315, HISA50415, HISA50125,
25, HISA50325, HISA50425.

г угловой закрывающийся винтом IBS: OIAS400.

г угловой не шестигранной формы IBS: NHSA3115, NHSA3215, NHSA3315, NHSA3415,
25, NHSA3225, NHSA3325, NHSA 3425, NHSA4115, NHSA4215, NHSA4315, NHSA4415,
25, NHSA4225, NHSA4325, NHSA4425, NHSA5115, NHSA5215, NHSA5315, NHSA5415,
25, NHSA5225, NHSA 5325, NHSA5425.

г копир IBS:

5PA, OSH4016TA, OSH4026PA, OSH4026TA, OSH4036PA, OSH4036TA, OSH4046PA,
5TA, OSH4516PA, OSH4516TA, OSH4526PA, OSH4526TA, OSH4536PA, OSH4536TA,
5PA, OSH4546TA, OSH5016PA, OSH5016TA, OSH5026PA(OHS5026PAX), OSH5026TA,
5PA, OSH5036TA, OSH5046PA, OSH5046TA, OSH5516PA, OSH5516TA, OSH5526PA,

, OSH5536PA, OSH5536TA, OSH5546PA, OSH5546TA, OSH6016PA, OSH6016TA,
, OSH6026TA, OSH6036PA, OSH6036TA, OSH6046PA, OSH6046TA, OSH6516PA,
, OSH6526PA, OSH6526TA, OSH6536PA, OSH6536TA, OSH6546PA, OSH6546TA,
, OSH4014TA, OSH4024PA, OSH4024TA, OSH4034PA, OSH4034TA, OSH4044PA,
, OSH4514PA, OSH4514TA, OSH4524PA, OSH4524TA, OSH4534PA, OSH4534TA,
, OSH4544TA, OSH5014PA, OSH5014TA, OSH5024PA, OSH5024TA, OSH5034PA,
, OSH5044PA, OSH5044TA, OSH5514PA, OSH5514TA, OSH5524PA, OSH5524TA,
, OSH5534TA, OSH5544PA, OSH5544TA, OSH6014PA, OSH6014TA, OSH6024PA,
, OSH6034PA, OSH6034TA, OSH6044PA, OSH6044TA, OSH6514PA, OSH6514TA,
, OSH6524TA, OSH6534PA, OSH6534TA, OSH6544PA, OSH6544TA.

копир лабораторный IBS: ACSP, ACST, ACHD12.

лабораторный IBS MAC: MACL4.5, MACL5.0, MACL5.5S, MACL6.0S, MACL6.5S,

лабораторный IBS: HIAL.

винтом IBS: SAA45, SAA55, SAA65.

MS15, MS25, MS35, MS45.

станавливающий IBS: SAH4501, SAH4502, SAH4503, SAH4504, SAH4505, SAH4506,
AH5502, SAH5503, SAH5504, SAH5505, SAH5506, SAH6501, SAH6502, SAH6503,
AH6505, SAH6506.

рывающий IBS: HISC00.

пления абатмента IBS: SARS1.8.

пления слепочного трансфера IBS: SAIT45, SAIT55, SAIT65.

пления трансфера Pick-Up IBS: SAIP45, SAIP55, SAIP65.

к защитный IBS: SAPC45, SAPC55, SAPC65.

к опоры абатмента IBS: MAC CAP4.5, MAC CAP5.5, MAC CAP6.5.

батмента IBS: MM2502, MM2504, MM2506, MM2508, MM5002, MM5004, MM5006,
IM7502, MM7504, MM7506, MM7508, MM1002, MM1004, MM1006, MM1008, MAC4501S,
, MAC4503S, MAC4505S, MAC4507S, MAC4509S, MAC5501S, MAC5502S, MAC5503S,
, MAC5507S, MAC5509S, MAC6501S, MAC6502S, MAC6503S, MAC6505S, MAC6507S,

р слепочный IBS: HICT40L, HICT40S, HICT45L, HICT45S, HICT50L, HICT50S, HICT55L,
HICT60L, HICT60S.

р слепочный IBS Pick-Up: HICP40L, HICP40S, HICP45L, HICP45S, HICP50L, HICP50S,
HICP55S, HICP60L, HICP60S.

р слепочный IBS MAC: MACI4.5, MACI5.0, MACI5.5S, MACI6.0S, MACI6.5S, MACI7.0S.

р с прокладкой IBS: MMRO.

р выжигаемый IBS: SAC45, SAC55, SAC65.

등부 2014년 제 18062 호

Registered No. 2014 - 18062

인 증

Notarial Certificate

PARK SUNG-TAE

attorney - in - fact of

WANG JE WON/ PRESIDENT

INNOBIOSURG CO., LTD

appeared before me and
admitted said principal's
subscription to the attached

DOCUMENT

This is hereby attested on
this 16th day of December
2014 at this office.

문 서 에 기재된

탁인 주식회사 이노바이오퍼지

표이사 왕제원 의 대리인 박성태 는

공증인의 면전에서 위 촉탁인 본인이

1명날인 하였다고 자인하였다.

14 . 12 . 16 . 이 사무소에서

인증한다.

증 인 정 영 사 무 소

속 대전 지방 검찰청

전광역시 서구 둔산로 137번길 35(둔산동)

NOTARY PUBLIC CHUNG YOUNG OFFICE

Belongs to Daejeon District Prosecutor's Office

35, DUNSAN-RO, 137BEON-GIL, SEO-GU, DAEJEON 302-831 KOREA

인

Notary Public

Chung Young

This office has been authorize

by the Minister of Justice, the

Republic of Korea to act as

Notary Public since 1 st day of

September 2004

under Law No. 92

210mm×297mm

DLS(특급) 70g/m²

форма № 41]
истрационный номер 2014 - 18062

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

КОНТОРА НОТАРИУСА ЧУН ЮНГ
35, ДООНСАН-РО, 137 БЕОН-ГИЛ, СЕО-ГУ ТЭДЖОН 302-831 КОРЕЯ

Печать: КОНТОРА НОТАРИУСА ЧУН ЮНГ * ТЭДЖОН КОРЕЯ * НОТАРИУС

210мм X 297мм

РЖДАЮ

дент

биосердж Ко., Лтд» (Innobiosurg Co., Ltd)

ись/ Ванг Дже Вон

й штамп:

_____ 2014 г.

га № 43]

трационный номер: 2014 – 18062

риальное свидетельство

ящим заявляю, что г-н/г-жа ПАРК СУН КИОНГ, уполномоченный представитель
-жи ВАНГ ДЖЕ ВОН, ПРЕЗИДЕНТА компании «ИННОБИОСЕРДЖ КО., ЛТД»
BIOBURG CO., LTD) в моем присутствии подтвердил/а подлинность подписи
ного лица на приложенном ДОКУМЕНТЕ.

ено в моем офисе 16 декабря 2014 г.

ГОРА НОТАРИУСА ЧУН ЮНГ

прокурора района г. Тэджон

ООНСАН-РО, 137 БЕОН-ГИЛ, СЕО-ГУ ТЭДЖОН 302-831 КОРЕЯ

пись/

риус Чун Юнг

ип нотариуса Чун Юнг

анная контора уполномочена министром юстиции Республики Корея оказывать
ги нотариальной конторы с 01 сентября 2004 г. в соответствии с постановлением

210мм X 297мм
Плотность бумаги: 70г/м²

од с английского и корейского языков на русский язык выполнил переводчик
ов Арсений Дмитриевич. Достоверность перевода подтверждаю.

Москва, двадцатого января две тысячи пятнадцатого года.

Алфёров Арсений Дмитриевич

Москва, двадцатого

я две тысячи пятнадцатого года.

Дормидонтова Любовь Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую
инность подписи, сделанной переводчиком Алфёровым Арсением Дмитриевичем в
присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-66

Взыскано по тарифу: 100 руб 00

Нотариус г.Москвы

Л.Ю.Дормидонтова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 46 листов
Нотариус



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 47 листов
Нотариус



Город Москва.

Двадцатого января девятнадцатого года

Я, Дормидонтова Любовь Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую, что эта копия с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, вставок, слов и иных неговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 14-62

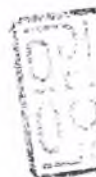
Взыскано госпошлины (по тарифу) 470 руб

Нотариус

Д

ва

stered No. 2014 - 18060



NOTARIAL CERTIFICATE

NOTARY PUBLIC CHUNG YOUNG OFFICE
35, DUNSAN-RO, 137BEON-GIL, SEO-GU, DAEJEON 302-83



210mm×297mm

1

гор. Моск-

APPROVED BY

President

Innobiosurg Co., Ltd

Wang Je Won

« » 2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (дополнения)

Имплантаты дентальные IBS с принадлежностями
(Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея)

2014

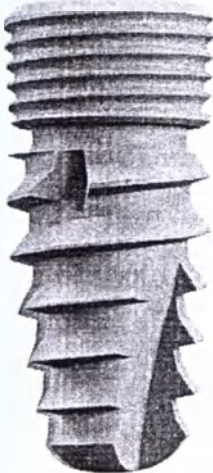
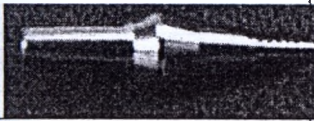
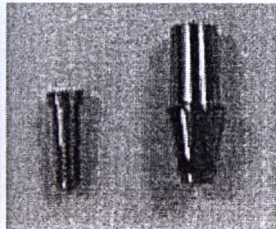
2

ть технический документ следующей информацией:

чение:
лие, предназначенное для хирургической имплантации в альвеолярную и/или базальную кость нижней юсти для установки и фиксации дентального протеза (например, моста, отдельного зуба, покрывного нокомпонентное изделие, которое состоит из опорной части (имплантата) в форме резьбового винта, тируется в кость, и держателя (абатмента), который выступает из тканей десны и удерживает протез.

/:
ия:

Таблица 1. Описание и внешний вид изделия

Изображение	Особенности:
	1. Конструкция совместима со структурой альвеолярного гребня, разработанная для предотвращения появления микротрещин от чрезмерной нагрузки за счет охватывания большей части губчатой кости из нижней части между шагами резьбы по сравнению с верхней частью кортикальной кости. 2. Конструкция, которая гарантирует начальную стабильность имплантата, независимо от качества кости пациента: коническая форма, исполнения различного диаметра (позволяют специалисту выбрать диаметр на основе состояния кости пациента), больший диаметр резьбы в верхней части. 3. Конструктивное поддержание кости за счет увеличенной площади поверхности: форма и структура выдерживает вертикальное/горизонтальное давление для предотвращения чрезмерной нагрузки на естественную кость, паз между верхней и нижней частью имплантата для увеличения функциональной поверхности. 4. Конструкция имплантата предотвращает неправильное расположение (опускание) имплантата во время установки: нет необходимости использовать дополнительное давление во время установки, имплантат устанавливается путем вращения, это достигается за счет конструкции (шаг резьбы и форма имплантата). 5. Снижение риска распространения инфекции. Паз между верхней и нижней частью является барьером для патогенных микроорганизмов – естественной преградой между частью, которая находится внутри кости, и частью, которая контактирует с ортопедическими компонентами. Данный тип принадлежностей совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
	1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может применяться только в случае, если ширина кости 4 мм или меньше (для нижней челюсти – измеряется по передней шестерке, для верхней – по боковому резцу). 6. Может быть применен для крепления съемных протезов. Данный тип принадлежностей совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
	Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации.
	Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент устанавливается на время заживления мягких тканей десны до установки постоянного имплантата.
	Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок на близлежащих имплантатах или мостовидных ортопедических конструкций. Каждая упаковка изделия содержит абатмент угловой закрывающийся винтом (артикул: OIAS400). Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент парный применяется в том случае, если необходимо установить два или более адатмента рядом, в непосредственной близости друг к другу.

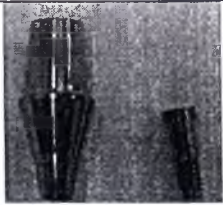
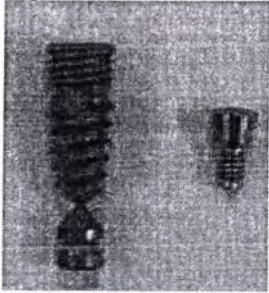
абатмент арный не естигранно формы IBS		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок на близлежащих имплантатах или мостовидных ортопедических конструкций. Каждая упаковка изделия содержит абатмент угловой закрывающийся винтом (артикул: OIAS400). Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент парный применяется в том случае, если необходимо установить два или более абатмента рядом, в непосредственной близости друг к другу. В отличие от предыдущей модели абатмента, данное исполнение имеет нижнюю часть в форме усеченного конуса (а не шестигранного основания).
абатмент головой IBS		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Применяется в случае, когда ортопедическая конструкция должна быть расположена под углом к имплантату. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации.
абатмент головой не естигранно формы IBS		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций, в случае, если ортопедическая конструкция располагается под углом к имплантату. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Имеет нижнюю часть в виде усеченного конуса, без шестигранного основания.

Таблица 2. Технические характеристики изделий

Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, (±0,05 г)
Имплантаты дентальные IBS Regular Fixture: 	IBS4007	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 7 мм.	0,21
	IBS4009	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 9 мм.	0,31
	IBS4011	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11 мм.	0,44
	IBS4013	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 13 мм.	0,51
	IBS4015	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 15 мм.	0,59
	IBS4507	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 7 мм.	0,35
	IBS4509	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 9 мм.	0,45
	IBS4511	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11 мм.	0,55
	IBS4513	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 13 мм.	0,65
	IBS4515	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 15 мм.	0,76
	IBS5007	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 7 мм.	0,44
	IBS5009	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 9 мм.	0,51
	IBS5011	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11 мм.	0,69
	IBS5013	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 13 мм.	0,81
	IBS5015	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 15 мм.	0,93
	IBS5507	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 7 мм.	1,31
	IBS5509	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 9 мм.	1,31
	IBS5511	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11 мм.	1,40
	IBS5513	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 13 мм.	1,41
	IBS5515	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 15 мм.	1,41
	IBS6007	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 7 мм.	1,64
	IBS6009	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 9 мм.	1,65
	IBS6011	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11 мм.	1,75
	IBS6013	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 13 мм.	1,75
	IBS6015	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 15 мм.	1,75
	IBS6507	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 7 мм.	1,77
	IBS6509	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 9 мм.	1,77
	IBS6511	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 11 мм.	1,78
	IBS6513	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 13 мм.	1,81
	IBS6515	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 15 мм.	1,84
Имплантаты дентальные IBS N.R.Fixture: 	IBS3011	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 13 мм.	0,47
	IBS3013	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 15 мм.	0,51
	IBS3509	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 10 мм.	0,36
	IBS3511	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 12 мм.	0,43
	IBS3513	Диаметр: 3,8 мм.	Длина: 14 мм.	0,50

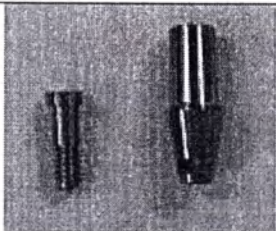
Назначение	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, г (±0,05 г)
IBS:  предназначено для иснения одиночных коронок завидных ческих конструкций. яется с имплантатом с ио внешней резьбы и с ическими конструкциями иоши цементной ии.	HISS4014	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 4мм.	0,47
	HISS4024	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 4мм.	0,51
	HISS4034	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 4мм.	0,55
	HISS4044	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 4мм.	0,59
	HISS4054	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 4мм.	0,63
	HISS4064	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 4мм.	0,67
	HISS4015	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 5.5мм.	0,53
	HISS4025	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 5.5мм.	0,57
	HISS4035	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 5.5мм.	0,61
	HISS4045	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 5.5мм.	0,65
	HISS4055	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 5.5мм.	0,69
	HISS4065	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 5.5мм.	0,73
	HISS4017	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 7 мм.	0,59
	HISS4027	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 7 мм.	0,63
	HISS4037	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 7 мм.	0,67
	HISS4047	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 7 мм.	0,71
	HISS4057	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 7 мм.	0,75
	HISS4067	Диаметр: 4,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 7 мм.	0,79
	HISS4514	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 4 мм.	0,59
	HISS4524	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 4 мм.	0,64
	HISS4534	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 4 мм.	0,69
	HISS4544	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 4 мм.	0,75
	HISS4554	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 4 мм.	0,79
	HISS4564	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 6 мм. Длина (L): 4 мм.	0,85
	HISS4515	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,67
	HISS4525	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,72
	HISS4535	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,78
	HISS4545	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,82
	HISS4555	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff): 5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,87
	HISS4565	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,92
	HISS4517	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	0,74
	HISS4527	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	0,80

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, (±0,05 г)
		HISS4537	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	0,85
		HISS4547	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	0,89
		HISS4557	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	0,95
		HISS4567	Диаметр: 4,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	1,00
		HISS5014	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	0,74
		HISS5024	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	0,80
		HISS5034	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	0,86
		HISS5044	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 4 мм.	0,92
		HISS5054	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	0,98
		HISS5064	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	1,05
		HISS5015	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,83
		HISS5025	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,89
		HISS5035	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	0,95
		HISS5045	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,01
		HISS5055	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,07
		HISS5065	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,14
		HISS5017	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	0,92
		HISS5027	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	0,98
		HISS5037	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	1,04
		HISS5047	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	1,11
		HISS5057	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	1,17
		HISS5067	Диаметр: 5,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	1,23
		HISS5514	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	0,89

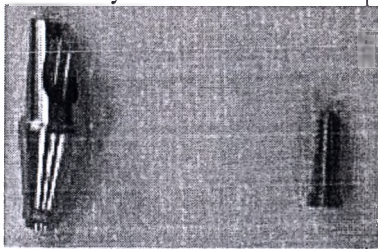
не	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, г (±0,05 г)
	HISS5524	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	0,96
	HISS5534	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	1,04
	HISS5544	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 4 мм.	1,12
	HISS5554	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	1,19
	HISS5564	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	1,27
	HISS5515	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,00
	HISS5525	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,08
	HISS5535	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,15
	HISS5545	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,23
	HISS5555	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,30
	HISS5565	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,38
	HISS5517	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	1,17
	HISS5527	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	1,19
	HISS5537	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	1,27
	HISS5547	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	1,34
	HISS5557	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	1,42
	HISS5567	Диаметр: 5,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	1,49
	HISS6014	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	1,06
	HISS6024	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	1,15
	HISS6034	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	1,24
	HISS6044	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 4 мм.	1,33
	HISS6054	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	1,42
	HISS6064	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4	1,51

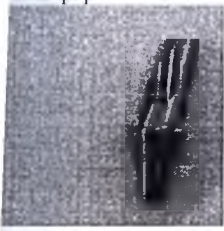
№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, (±0,05 г)
				мм.	
		HISS6015	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,19
		HISS6025	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,28
		HISS6035	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,37
		HISS6045	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,46
		HISS6055	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,55
		HISS6065	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,64
		HISS6017	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	1,33
		HISS6027	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	1,42
		HISS6037	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	1,51
		HISS6047	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	1,59
		HISS6057	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	1,68
		HISS6067	Диаметр: 6,0 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	1,79
		HISS6514	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 4 мм.	1,24
		HISS6524	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 4 мм.	1,35
		HISS6534	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 4 мм.	1,45
		HISS6544	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 4 мм.	1,56
		HISS6554	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 4 мм.	1,66
		HISS6564	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 4 мм.	1,77
		HISS6515	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,40
		HISS6525	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,50
		HISS6535	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,61
		HISS6545	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,72

Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, г (±0,05 г)
	HISS6555	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,82
	HISS6565	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 5.5 мм.	1,93
	HISS6517	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):1 мм. Длина (L): 7 мм.	1,56
	HISS6527	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):2 мм. Длина (L): 7 мм.	1,66
	HISS6537	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):3 мм. Длина (L): 7 мм.	1,77
	HISS6547	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):4 мм. Длина (L): 7 мм.	1,87
	HISS6557	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):5 мм. Длина (L): 7 мм.	1,98
	HISS6567	Диаметр: 6,5 мм.	Высота над уровнем десны(Cuff):6 мм. Длина (L): 7 мм.	2,09
IBS заживляющий IBS:  предназначено для установки одиночных коронок и мостовидных протезов. Подходит для использования с имплантатом с наружной резьбой и с использованием цементной связи. Абатмент устанавливается на время заживления мягких тканей десны после установки постоянного имплантата.	HISH4001	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,31
	HISH4002	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,35
	HISH4003	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,39
	HISH4004	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,43
	HISH4501	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,39
	HISH4502	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,44
	HISH4503	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,49
	HISH4504	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,54
	HISH5001	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,48
	HISH5002	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,55
	HISH5003	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,61
	HISH5004	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,67
	HISH5501	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,59
	HISH5502	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,66
	HISH5503	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,75
	HISH5504	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,82
	HISH6001	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,70
	HISH6002	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,79
	HISH6003	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,88
	HISH6004	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,97
IBS парный IBS:	OSH4014	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	0,19
	OSH4024	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	0,24
	OSH4034	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	0,28
	OSH4044	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, (±0,05 г)
	 Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок на близлежащих имплантатах или мостовидных ортопедических конструкций. Каждая упаковка изделия содержит абатмент угловой закрывающийся винтом (артикул: OIAS400). Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент парный применяется в том случае, если необходимо установить два или более адатмента рядом, в непосредственной близости друг к другу.	OSH4514	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	0,25
		OSH4524	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	0,30
		OSH4534	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	0,35
		OSH4544	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	0,40
		OSH5014	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	0,31
		OSH5024	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	0,37
		OSH5034	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	0,43
		OSH5044	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	0,49
		OSH5514	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	0,37
		OSH5524	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	0,45
		OSH5534	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	0,52
		OSH5544	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	0,60
		OSH6014	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	0,44
		OSH6024	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	0,54
		OSH6034	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	0,63
		OSH6044	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	0,72
		OSH6514	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 1 мм.	0,52
		OSH6524	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 2 мм.	0,63
		OSH6534	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 3 мм.	0,74
		OSH6544	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4 мм. Высота: 4 мм.	0,84
		OSH4016	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	0,28
		OSH4026	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	0,32
		OSH4036	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	0,36
		OSH4046	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	0,39
		OSH4516	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	0,35
		OSH4526	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	0,40
		OSH4536	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	0,45
		OSH4546	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	0,50
		OSH5016	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	0,44
		OSH5026	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	0,50
		OSH5036	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	0,56
		OSH5046	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	0,62
		OSH5516	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	0,53
		OSH5526	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	0,60
		OSH5536	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	0,68
		OSH5546	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	0,75
		OSH6016	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	0,63
		OSH6026	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	0,72

Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, г (±0,05 г)
	OSH6036	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	0,81
	OSH6046	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	0,90
	OSH6516	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 1 мм.	0,74
	OSH6526	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 2 мм.	0,85
	OSH6536	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 3 мм.	0,95
	OSH6546	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 6 мм. Высота: 4 мм.	1,05
	OSH4018	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	0,36
	OSH4028	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	0,39
	OSH4038	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	0,44
	OSH4048	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	0,48
	OSH4518	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	0,45
	OSH4528	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	0,50
	OSH4538	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	0,56
	OSH4548	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	0,61
	OSH5018	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	0,56
	OSH5028	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	0,62
	OSH5038	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	0,69
	OSH5048	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	0,75
	OSH5518	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	0,68
	OSH5528	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	0,75
	OSH5538	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	0,83
	OSH5548	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	0,90
	OSH6018	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	0,81
	OSH6028	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	0,89
	OSH6038	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	0,99
	OSH6048	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	1,08
	OSH6518	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 1 мм.	0,95
	OSH6528	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 2 мм.	1,05
	OSH6538	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 3 мм.	1,16
	OSH6548	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 8 мм. Высота: 4 мм.	1,26
Абтмент парный не с гранной формы IBS:  Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок на близлежащих имплантатах и мостовидных ортопедических конструкций.	OSN4016	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	0,39
	OSN4026	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	0,39
	OSN4036	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	0,39
	OSN4046	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	0,41
	OSN4516	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	0,65
	OSN4526	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	0,65
	OSN4536	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	0,65
	OSN4546	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	0,65

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса (±0,03 г)
	Каждая упаковка изделия содержит абатмент угловой закрывающийся винтом (артикул: OIAS400). Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент парный применяется в том случае, если необходимо установить два или более абатмента рядом, в непосредственной близости друг к другу. В отличие от предыдущей модели абатмента, данное исполнение имеет нижнюю часть в форме усеченного конуса (а не шестигранного основания).	OSN5016	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	0,65
		OSN5026	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	0,69
		OSN5036	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	0,69
		OSN5046	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	0,69
		OSN5516	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	0,69
		OSN5526	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	0,91
		OSN5536	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	0,91
		OSN5546	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	0,91
		OSN6016	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	1,07
		OSN6026	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	1,08
		OSN6036	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	1,08
		OSN6046	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	1,07
		OSN6516	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 9,8 мм. Высота: 1 мм.	1,08
		OSN6526	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 10,8 мм. Высота: 2 мм.	1,09
		OSN6536	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 11,8 мм. Высота: 3 мм.	1,09
		OSN6546	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 12,8 мм. Высота: 4 мм.	1,08
 Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Применяется в случае, когда ортопедическая конструкция должна быть расположена под углом к имплантату. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего титанового винта и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации.	Абатмент угловой IBS:	HISA40115	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,36
		HISA40215	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,36
		HISA40315	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,36
		HISA40415	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,36
		HISA40125	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,36
		HISA40225	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,36
		HISA40325	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,36
		HISA40425	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,36
		HISA45115	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,55
		HISA45215	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,55
		HISA45315	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,55
		HISA45415	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,55
		HISA45125	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,55
		HISA45225	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,55
		HISA45325	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,55
		HISA45425	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,55
		HISA50115	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,68
		HISA50215	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,69
		HISA50315	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,69

наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина, мм	Масса, г (±0,05 г)
угловой не иной формы IBS:  предназначено для зачисления одиночных коронок овидных ческих конструкций, в сли ортопедическая ция располагается под имплантату. Соединяется патом с помощью ющего титанового винта педическими кциями при помощи ой фиксации. ижнюю часть в виде ого конуса, без анного основания.	HISA50415	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,69
	HISA50125	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,69
	HISA50225	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,69
	HISA50325	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,69
	HISA50425	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,69
	NHSA3115	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,36
	NHSA3215	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,36
	NHSA3315	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,36
	NHSA3415	Диаметр: 4,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,36
	NHSA3125	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,36
	NHSA3225	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,36
	NHSA3325	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,36
	NHSA3425	Диаметр: 4,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,36
	NHSA4115	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,66
	NHSA4215	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,66
	NHSA4315	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,66
	NHSA4415	Диаметр: 4,5 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,66
	NHSA4125	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,66
	NHSA4225	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,66
	NHSA4325	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,66
	NHSA4425	Диаметр: 4,5 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,66
	NHSA5115	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,68
	NHSA5215	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,68
	NHSA5315	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,68
	NHSA5415	Диаметр: 5,0 мм, угол: 15,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,69
	NHSA5125	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 1 мм.	0,68
	NHSA5225	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 2 мм.	0,68
	NHSA5325	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 3 мм.	0,69
	NHSA5425	Диаметр: 5,0 мм, угол: 25,0 градусов.	Высота: 4 мм.	0,68

ы резьбы имплантатов и принадлежностей:

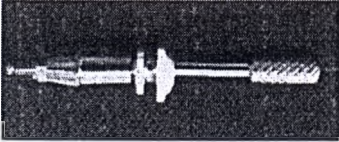
ы резьбы – внешняя резьба для абатментов (которые аваются без винтов) и внешняя резьба для винтов и я резьба для имплантатов	M2,0x0,4 (диаметр 2 мм, шаг 0,4 мм, метрическая правая резьба). Длина резьбы –
--	--

см. Приложение 3

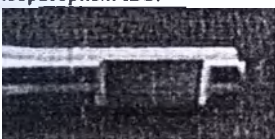
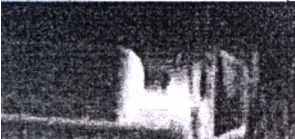
Параметры резьбы – внешняя резьба для имплантатов, размер под ключ (для винтов)

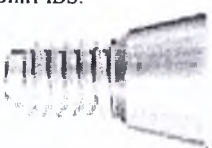
См. приложение 3.

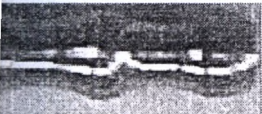
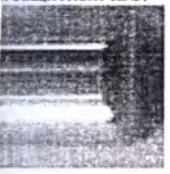
Таблица 3. Технические характеристики принадлеж

№	Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Масса, г (±0,05 г)
1.	Абатмент-копир IBS: - OSH-PA 	OSH4016PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,36
		OSH4016TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4026PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,36
		OSH4026TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4036PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,36
		OSH4036TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4046PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,36
		OSH4046TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4516PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,42
		OSH4516TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH4526PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,42
		OSH4526TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH4536PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,43
		OSH4536TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH4546PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,42
		OSH4546TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH5016PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,68
		OSH5016TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,68
	- OSH-PA	OSH5026PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,68
		OSH5026TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,68
	- OSH-PA	OSH5036PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,68
		OSH5036TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,68
	- OSH-PA	OSH5046PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,68
		OSH5046TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,69
	- OSH-PA	OSH5516PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,75
		OSH5516TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,75
	- OSH-PA	OSH5526PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,75
		OSH5526TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,75
	- OSH-PA	OSH5536PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,75
		OSH5536TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,75
	- OSH-PA	OSH5546PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,75
		OSH5546TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,75
	- OSH-PA	OSH6016PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,81
		OSH6016TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,81
	- OSH-PA	OSH6026PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,81
		OSH6026TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,81
	- OSH-PA	OSH6036PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,81
		OSH6036TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,81
	- OSH-PA	OSH6046PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,81
		OSH6046TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,81
	- OSH-PA	OSH6516PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	1,08
		OSH6516TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	1,08
	- OSH-PA	OSH6526PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	1,08
		OSH6526TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	1,08
	- OSH-PA	OSH6536PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	1,08
		OSH6536TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	1,08
	- OSH-PA	OSH6546PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	1,08
		OSH6546TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	1,08
	- OSH-PA	OSH4014PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,36
		OSH4014TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4024PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,36
		OSH4024TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4034PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,36
		OSH4034TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4044PA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,36
		OSH4044TA	Диаметр: 4,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,36
	- OSH-PA	OSH4514PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,42
		OSH4514TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH4524PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,42
		OSH4524TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH4534PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,42
		OSH4534TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH4544PA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,42
		OSH4544TA	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,42
	- OSH-PA	OSH5014PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,68
		OSH5014TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 1 мм.	0,68

Предназначен для определения расположения ортопедической конструкции (искусственного зуба) в ротовой полости пациента. Ввинчивается в имплантат.

Изображение. Описание.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Масса, г (±0,05 г)
	OSH5024PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,68
	OSH5024TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 2 мм.	0,68
	OSH5034PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,68
	OSH5034TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 3 мм.	0,68
	OSH5044PA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,68
	OSH5044TA	Диаметр: 5,0 мм.	Высота: 4 мм.	0,68
	OSH5514PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,75
	OSH5514TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,75
	OSH5524PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,75
	OSH5524TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,75
	OSH5534PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,75
	OSH5534TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,75
	OSH5544PA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,75
	OSH5544TA	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4 мм.	0,75
	OSH6014PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	1,16
	OSH6014TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 1 мм.	1,16
	OSH6024PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	1,16
	OSH6024TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 2 мм.	1,16
	OSH6034PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	1,16
	OSH6034TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 3 мм.	1,16
	OSH6044PA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	1,16
	OSH6044TA	Диаметр: 6,0 мм.	Высота: 4 мм.	1,16
	OSH6514PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	1,17
	OSH6514TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	1,17
	OSH6524PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	1,17
	OSH6524TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	1,17
	OSH6534PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	1,17
	OSH6534TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	1,17
	OSH6544PA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	1,17
	OSH6544TA	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4 мм.	1,17
  	ACSP	Диаметр: 5,9 мм.	Длина: 7,3 мм.	1,15
	ACST	Диаметр: 5,477мм.	Длина: 7,35 мм.	1,14
	ACHD12	Диаметр: 1,6 мм.	Длина: 22,0 мм.	0,10
	НИАЛ	Диаметр: 4,8 мм.	Длина: 12,5 мм.	0,77
	MACL4.5	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 12,3 мм.	0,60
	MACL5.0	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 12,3 мм.	0,73
	MACL5.5S	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 12,4 мм.	0,95
	MACL6.0S	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 12,4 мм.	1,10
	MACL6.5S	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 12,4 мм.	1,30
	MACL7.0S	Диаметр: 7,0 мм.	Длина: 12,4 мм.	1,51
	ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU			

№	Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Масса, г (±0,05)
	зубным техником при изготовлении модели по оттиску, необходим для точной передачи расположения и наклона имплантата в полости рта пациента для последующей правильной связи имплантата и ортопедической конструкции (искусственного зуба).				
5.	Аналог с винтом IBS:  Аналог абатмента предназначен для определения правильного положения абатмента с винтовой фиксацией. В комплект поставки входит винт закрывающий HISC00.	SAA45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,4 мм.	0,60
		SAA55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,4 мм.	0,71
		SAA65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,4 мм.	1,37
6.	Винт IBS:  Предназначен для крепления абатмента.	MS15	Высота конуса: 1,5 мм.	Длина: 1,5 мм	0,10
		MS25	Высота конуса: 2,5 мм.	Длина: 2,5 мм	0,11
		MS35	Высота конуса: 3,5 мм.	Длина: 3,5 мм	0,36
		MS45	Высота конуса: 4,5 мм.	Длина: 4,5 мм	0,79
7.	Винт абатмента  Изделие предназначено для крепления абатментов угловых и парных шестигранной и нестигранной формы.	OIAS400	Диаметр: 2,5 мм.	Длина: 7,6 мм.	0,10
8.	Винт восстанавливающий IBS:  Предназначен для крепления заживляющего абатмента.	SAH4501	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1,5 мм.	0,62
		SAH4502	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2,5 мм.	0,62
		SAH4503	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3,5 мм.	0,62
		SAH4504	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 4,5 мм.	0,62
		SAH4505	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 5,5 мм.	0,62
		SAH4506	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 6,5 мм.	0,62
		SAH5501	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1,5 мм.	0,70
		SAH5502	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2,5 мм.	0,70
		SAH5503	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3,5 мм.	0,70
		SAH5504	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 4,5 мм.	0,70
		SAH5505	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 5,5 мм.	0,70
		SAH5506	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 6,5 мм.	1,30
		SAH6501	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1,5 мм.	1,30
		SAH6502	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2,5 мм.	1,30
		SAH6503	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3,5 мм.	1,30
		SAH6504	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 4,5 мм.	1,30
		SAH6505	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 5,5 мм.	1,30
		SAH6506	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 6,5 мм.	1,30
9.	Винт закрывающий IBS:  Предназначен для крепления абатмента к имплантату.	HISC00	Диаметр: 3,355 мм.	Длина: 5,65 мм	0,36
10.	Винт крепления абатмента IBS:  Предназначен для крепления абатмента к имплантату.	SARS1.8	Диаметр: 2,5 мм.	Длина: 6,3 мм.	0,24

Изображение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Масса, г (±0,05 г)
для крепления слепочного трансфера  назначен для крепления трансфера IBS.	SAIT45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	0,42
	SAIT55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	0,59
	SAIT65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	1,37
для крепления трансфера Pick-Up  назначен для крепления трансфера Pick-Up IBS.	SAIP45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	0,42
	SAIP55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	0,59
	SAIP65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	1,37
защитный IBS:  назначен для механической фиксации установленного абатмента.	SAPC45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 4,8 мм.	0,42
	SAPC55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 4,8 мм.	0,69
	SAPC65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 4,8 мм.	1,41
опоры абатмента IBS:  назначен для механической фиксации абатмента после установки.	MAC CAP4.5	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 6,3 мм.	1,37
	MAC CAP5.5	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 7,0 мм.	1,37
	MAC CAP6.5	Диаметр: 7,0 мм.	Длина: 7,0 мм.	1,69
абатмента IBS:   абатмент, которая устанавливается над слепочным трансфером, для последующей фиксации ортопедической конструкции.	MM2502	Угол: 2,5 град.	Высота: 2 мм.	0,23
	MM2504	Угол: 2,5 град.	Высота: 4 мм.	0,33
	MM2506	Угол: 2,5 град.	Высота: 6 мм.	0,49
	MM2508	Угол: 2,5 град.	Высота: 8 мм.	0,48
	MM5002	Угол: 5,0 град.	Высота: 2 мм.	0,48
	MM5004	Угол: 5,0 град.	Высота: 4 мм.	0,48
	MM5006	Угол: 5,0 град.	Высота: 6 мм.	0,48
	MM5008	Угол: 5,0 град.	Высота: 8 мм.	0,48
	MM7502	Угол: 7,5 град.	Высота: 2 мм.	0,48
	MM7504	Угол: 7,5 град.	Высота: 4 мм.	0,48
	MM7506	Угол: 7,5 град.	Высота: 6 мм.	0,58
	MM7508	Угол: 7,5 град.	Высота: 8 мм.	0,58
	MM1002	Угол: 10,0 град.	Высота: 2 мм.	0,48
	MM1004	Угол: 10,0 град.	Высота: 4 мм.	0,71
	MM1006	Угол: 10,0 град.	Высота: 6 мм.	0,71
	MM1008	Угол: 10,0 град.	Высота: 8 мм.	0,71
	MAC4501S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,42
	MAC4502S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,42
	MAC4503S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,42
	MAC4505S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 5 мм.	0,42
	MAC4507S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 7 мм.	0,42
	MAC4509S	Диаметр: 4,5 мм.	Высота: 9 мм.	0,42
	MAC5501S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 1 мм.	0,65
	MAC5502S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 2 мм.	0,65
	MAC5503S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 3 мм.	0,66
	MAC5505S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 5 мм.	0,66
	MAC5507S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 7 мм.	0,66
	MAC5509S	Диаметр: 5,5 мм.	Высота: 9 мм.	0,66
	MAC6501S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 1 мм.	1,43
	MAC6502S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 2 мм.	1,43
	MAC6503S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 3 мм.	1,43
	MAC6505S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 5 мм.	1,43
	MAC6507S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 7 мм.	1,43
	MAC6509S	Диаметр: 6,5 мм.	Высота: 9 мм.	1,43
слепочный IBS:	НІСТ40L	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,42
	НІСТ40S	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,42
	НІСТ45L	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,52
	НІСТ45S	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,52

№	Наименование. Изображение. Назначение.	Артикул (код для заказа)	Диаметр, мм; угол, град.	Длина (L) – если не указано иного, все размеры в мм	Масса, г (±0,05 г)
	 Используется для снятия оттисков, соединяется с имплантатом винтом.	HICT50L	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,65
		HICT50S	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,62
		HICT55L	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,68
		HICT55S	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,69
		HICT60L	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	1,36
		HICT60S	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	1,36
17.	Трансфер слепочный IBS MAC:  Используется для снятия оттисков открытым и закрытым методом, предназначены для снятия оттисков открытой и закрытой ложкой. Фиксируется с имплантатом винтом, входящим в комплект.	MACI4.5	Диаметр: 4,8 мм.	Длина: 11,9 мм.	0,37
		MACI5.0	Диаметр: 5,3 мм.	Длина: 11,9 мм.	0,59
		MACI5.5S	Диаметр: 5,8 мм.	Длина: 11,9 мм.	0,61
		MACI6.0S	Диаметр: 6,3 мм.	Длина: 11,9 мм.	1,36
		MACI6.5S	Диаметр: 6,8 мм.	Длина: 11,9 мм.	1,45
		MACI7.0S	Диаметр: 7,3 мм.	Длина: 11,9 мм.	1,71
18.	Трансфер слепочный IBS Pick-Up:  Используется для снятия оттисков открытым и закрытым методом, предназначены для снятия оттисков открытой и закрытой ложкой.	HICP40L	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,37
		HICP40S	Диаметр: 4,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,36
		HICP45L	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,52
		HICP45S	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,52
		HICP50L	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,63
		HICP50S	Диаметр: 5,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,63
		HICP55L	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	0,69
		HICP55S	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	0,69
		HICP60L	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 14,9 мм. Высота: 4 мм.	1,33
		HICP60S	Диаметр: 6,0 мм.	Длина: 11,9 мм. Высота: 4 мм.	1,33
19.	Фиксатор с прокладкой IBS:  Предназначен для фиксации ортопедической конструкции на абатменте.	MMRO	Диаметр фиксатора: 5,95 мм. Диаметр прокладки: 4,5 мм.	Длина фиксатора: 2,7 мм. Длина прокладки: 1,5 мм.	1,26
20.	Цилиндр выжигаемый IBS:  Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов методом литья. Изготовлен из выжигаемого термопластика. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего винта.	SAC45	Диаметр: 4,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	0,52
		SAC55	Диаметр: 5,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	0,69
		SAC65	Диаметр: 6,5 мм.	Длина: 14,8 мм.	1,33

Рекомендации врачу-специалисту.

Показания:

Имплантаты дентальные предназначены для всех случаев косметической или функциональной реабилитации с использованием внутрикостных зубных имплантатов. Могут использоваться как на нижней, так на верхней дуге пациентов с частичной или полной адентией. В протезировании могут использоваться одинарные коронки, мостовидные или полные зубные протезы, выполняемые при помощи ортопедических конструкций.

Компания-производитель рекомендует оценивать качество костной ткани на этапе планирования, размер используемого имплантата в соответствии с положением в ротовой полости, изначальную стабильность в конце постановки, анатомическую зависимость между имплантатом и протезом во время планирования протезирования и составление программы периодических проверок.

Противопоказания:

Имплантаты дентальные противопоказаны пациентам с плохим общим состоянием здоровья или курящим, а также с системными патологиями или раком, с серьезными заболеваниями иммунной системы, кардиологическими, неврологическими или эндокринными расстройствами, хроническими или острыми инфекционными заболеваниями, серьезными васкулярными проблемами, хроническим челюстным остеоитом, несоответствующим и/или плохим качеством костной ткани, бруксизмом, плохой гигиеной полости рта, недостаточными умственными способностями, пациентам, употребляющим наркотики и алкоголь, беременным женщинам, пациентам с аллергией на титан или на другие металлы и часто подвергаемые радиационному облучению. Все проблемы пародонтоза должны быть устранены.

имплантатов.

е осложнения:

ния процедур с дентальными имплантатами пациенты могут испытывать некоторые побочные эффекты, , опухоли, гематомы, проблемы с речью и воспаление мягких тканей. Несмотря на высокий процент льтатов установки дентальных имплантатов и их стабильности, опасность неудачных операций не может о устранена. Долгосрочные риски, которые могут быть связаны с постановкой имплантатов, включает в о кости, отторжение, отек, хроническую боль и частичное обнажение. Успех имплантационной терапии правильною постановки медицинского диагноза, планированием терапии, используемой методики тезирования. Компания производитель собирает информацию обо всех случаях возникших осложнений в овки имплантатов и просит незамедлительно сообщать об этом.

о применении цилиндра выжигаемого IBS: предназначен для изготовления индивидуальных абатментов и. Изготовлен из выжигаемого термопластика. Соединяется с имплантатом с помощью фиксирующего

олжен обладать навыками изготовления индивидуальных абатментов методом литья.

Приложение 1. Ассортимент изделия

I. Имплантаты дентальные IBS, в следующих исполнениях:

1. Имплантаты дентальные IBS Regular Fixture:

IBS4007, IBS4009, IBS4011, IBS4013, IBS4015, IBS4507, IBS4509, IBS4511, IBS4513, IBS4515, IBS5007, IBS5009, IBS5011, IBS5013, IBS5015, IBS5507, IBS5509, IBS5511, IBS5513, IBS5515, IBS6007, IBS6009, IBS6011, IBS6013, IBS6015, IBS6507, IBS6509, IBS6511, IBS6513, IBS6515.

2. Имплантаты дентальные IBS N.R. Fixture:

IBS3011, IBS3013, IBS3509, IBS3511, IBS3513.

3. Абатмент IBS: HISS4014, HISS4024, HISS4034, HISS4044, HISS4054, HISS4064, HISS4015, HISS4025,

HISS4035, HISS4045, HISS4055, HISS4065, HISS4017, HISS4027, HISS4037, HISS4047, HISS4057, HISS4067, HISS4514, HISS4524, HISS4534, HISS4544, HISS4554, HISS4564, HISS4515, HISS4525, HISS4535, HISS4545, HISS4555, HISS4565, HISS4517, HISS4527, HISS4537, HISS4547, HISS4557, HISS4567, HISS5014, HISS5024, HISS5034, HISS5044, HISS5054, HISS5064, HISS5015, HISS5025, HISS5035, HISS5045, HISS5055, HISS5065, HISS5017, HISS5027, HISS5037, HISS5047, HISS5057, HISS5067, HISS5514, HISS5524, HISS5534, HISS5544, HISS5554, HISS5564, HISS5515, HISS5525, HISS5535, HISS5545, HISS5555, HISS5565, HISS5517, HISS5527, HISS5537, HISS5547, HISS5557, HISS5567, HISS6014, HISS6024, HISS6034, HISS6044, HISS6054, HISS6064, HISS6015, HISS6025, HISS6035, HISS6045, HISS6055, HISS6065, HISS6017, HISS6027, HISS6037, HISS6047, HISS6057, HISS6067, HISS6514, HISS6524, HISS6534, HISS6544, HISS6554, HISS6564, HISS6515, HISS6525, HISS6535, HISS6545, HISS6555, HISS6565, HISS6517, HISS6527, HISS6537, HISS6547, HISS6557, HISS6567.

4. Абатмент заживляющий IBS: HISH4001, HISH4002, HISH4003, HISH4004, HISH4501, HISH4502, HISH4503, HISH4504, HISH5001, HISH5002, HISH5003, HISH5004, HISH 5501, HISH5502, HISH5503, HISH5504, HISH6001, HISH6002, HISH6003, HISH6004.

5. Абатмент парный IBS: OSH4014, OSH4024, OSH4034, OSH4044, OSH4514, OSH4524, OSH4534, OSH4544, OSH5014, OSH5024, OSH5034, OSH5044, OSH5514, OSH5524, OSH5534, OSH5544, OSH6014, OSH6024, OSH6034, OSH6044, OSH6514, OSH6524, OSH6534, OSH6544, OSH4016, OSH4026, OSH4036, OSH4046, OSH4516, OSH4526, OSH4536, OSH4546, OSH5016, OSH5026, OSH5036, OSH5046, OSH5516, OSH5526, OSH5536, OSH5546, OSH6016, OSH6026, OSH6036, OSH6046, OSH6516, OSH6526, OSH6536, OSH6546, OSH4018, OSH4028, OSH4038, OSH4048, OSH4518, OSH4528, OSH4538, OSH4548, OSH5018, OSH5028, OSH5038, OSH5048, OSH5518, OSH5528, OSH5538, OSH5548, OSH6018, OSH6028, OSH6038, OSH6048, OSH6518, OSH6528, OSH6538, OSH6548.

6. Абатмент парный не шестигранной формы IBS: OSN4016, OSN 4026, OSN4036, OSN4046, OSN4516, OSN4526, OSN4536, OSN4546, OSN5016, OSN5026, OSN 5036, OSN5046, OSN5516, OSN5526, OSN5536, OSN5546, OSN6016, OSN6026, OSN6036, OSN 6046, OSN 6516, OSN6526, OSN6536, OSN6546.

7. Абатмент угловой IBS: HISA40115, HISA40215, HISA40315, HISA40415, HISA40125, HISA40225, HISA40325, HISA40425 (HISA40435X), HISA45115, HISA45215, HISA45315, HISA45415, HISA45125, HISA45225, HISA45325, HISA45425, HISA50115, HISA50215, HISA50315, HISA50415, HISA50125, HISA50225, HISA50325, HISA50425.

8. Абатмент угловой не шестигранной формы IBS: NHSA3115, NHSA3215, NHSA3315, NHSA3415, NHSA3125, NHSA3225, NHSA3325, NHSA 3425, NHSA4115, NHSA4215, NHSA4315, NHSA4415, NHSA4125, NHSA4225, NHSA4325, NHSA4425, HSA5115, NHSA5215, NHSA5315, NHSA5415, NHSA5125, NHSA5225, NHSA 5325, NHSA5425.

9. Принадлежности:

Абатмент-копир IBS: OSH4016PA, OSH4016TA, OSH4026PA, OSH4026TA, OSH4036PA, OSH4036TA, OSH4046PA, OSH4046TA, OSH4516PA, OSH4516TA, OSH4526PA, OSH4526TA, OSH4536PA, OSH4536TA, OSH4546PA, OSH4546TA, OSH5016PA, OSH5016TA, OSH5026PA (OSH5026PAX), OSH5026TA, OSH5036PA, OSH5036TA, OSH5046PA, OSH5046TA, OSH5516PA, OSH5516TA, OSH5526PA, OSH5526TA, OSH5536PA, OSH5536TA, OSH5546PA, OSH5546TA, OSH6016PA, OSH6016TA, OSH6026PA, OSH6026TA, OSH6036PA, OSH6036TA, OSH6046PA, OSH6046TA, OSH6516PA, OSH6516TA, OSH6526PA, OSH6526TA, OSH6536PA, OSH6536TA, OSH6546PA, OSH6546TA, OSH4014PA, OSH4014TA, OSH4024PA, OSH4024TA, OSH4034PA, OSH4034TA, OSH4044PA, OSH4044TA, OSH4514PA, OSH4514TA, OSH4524PA, OSH4524TA, OSH4534PA, OSH4534TA, OSH4544PA, OSH4544TA, OSH5014PA, OSH5014TA, OSH5024PA, OSH5024TA, OSH5034PA, OSH5034TA, OSH5044PA, OSH5044TA, OSH5514PA, OSH5514TA, OSH5524PA, OSH5524TA, OSH5534PA, OSH5534TA, OSH5544PA, OSH5544TA, OSH6014PA, OSH6014TA, OSH6024PA, OSH6024TA, OSH6034PA, OSH6034TA, OSH6044PA, OSH6044TA, OSH6514PA, OSH6514TA, OSH6524PA, OSH6524TA, OSH6534PA, OSH6534TA, OSH6544PA, OSH6544TA.

Абатмент-копир лабораторный IBS: ACSP, ACST, ACHD12.

Аналог лабораторный IBS MAC: MACL4.5, MACL5.0, MACL5.5S, MACL6.0S, MACL6.5S, MACL7.0S.

Аналог лабораторный IBS: HIAL.

Аналог с винтом IBS: SAA45, SAA55, SAA65.

Винт IBS: MS15, MS25, MS35, MS45.

Винт абатмента: OIAS400.

Винт восстанавливающий IBS: SAH4501, SAH4502, SAH4503, SAH4504, SAH4505, SAH4506, SAH5501, SAH5502, H5503, SAH5504, SAH5505, SAH5506, SAH6501, SAH6502, SAH6503, SAH6504, SAH6505, SAH6506.

Винт закрывающий IBS: HISC00.

Винт крепления абатмента IBS: SARS1.8.

Винт крепления слепочного трансфера IBS: SAIT45, SAIT55, SAIT65.

Винт крепления трансфера Pick-Up IBS: SAIP45, SAIP55, SAIP65.

Солпачок защитный IBS: SAPC45, SAPC55, SAPC65.

опоры абатмента IBS: MAC CAP4.5, MAC CAP5.5, MAC CAP6.5.
тмента IBS: MM2502, MM2504, MM2506, MM2508, MM5002, MM5004, MM5006, MM5008, MM7502,
MM7506, MM7508, MM1002, MM1004, MM1006, MM1008, MAC4501S, MAC4502S, MAC4503S, MAC4505S,
MAC4509S, MAC5501S, MAC5502S, MAC5503S, MAC5505S, MAC5507S, MAC5509S, MAC6501S,
MAC6503S, MAC6505S, MAC6507S, MAC6509S.
слепочный IBS: HICT40L, HICT40S, HICT45L, HICT45S, HICT50L, HICT50S, HICT55L, HICT55S, HICT60L,
р слепочный IBS Pick-Up: HICP40L, HICP40S, HICP45L, HICP45S, HICP50L, HICP50S, HICP55L, HICP55S,
HICP60S.
р слепочный IBS MAC: MACI4.5, MACI5.0, MACI5.5S, MACI6.0S, MACI6.5S, MACI7.0S.
р с прокладкой IBS: MMRO.
выжигаемый IBS: SAC45, SAC55, SAC65.



등부 2014년 제 18060 호

Registered No. 2014 - 18060

인 증

Notarial Certificate

PARK SUNG-TAE

attorney - in - fact of

WANG JE WON/ PRESIDENT

INNOBIOSURG CO., LTD

appeared before me and
admitted said principal's
subscription to the attached

DOCUMENT

This is hereby attested on
this 16th day of December
2014 at this office.

위 문 서 에 기재된
촉탁인 주식회사 이노바이오써지
대표이사 왕제원 의 대리인 박성태 는
본 공증인의 면전에서 위 촉탁인 본인이
기명날인 하였다고 자인하였다.
2014 . 12 . 16 . 이 사무소에서
위 인증한다.

공 증 인 정 영 사 무 소
소 속 대 전 지 방 검 찰 청
대전광역시 서구 둔산로 137번길 35(둔산동)

NOTARY PUBLIC CHUNG YOUNG OFFICE
Belongs to Daejeon District Prosecutor's Office
35, DUNSAN-RO, 137BEON-GIL, SEO-GU, DAEJEON 302-831 KOREA

공증인

Notary Public Chung Young

This office has been authorize
by the Minister of Justice, the
Republic of Korea to act as
Notary Public since 1 st day of
September 2004
under Law No. 92

210mm×297mm

DLS(특급) 70g/m²

[Форма № 41]

Регистрационный номер 2014 - 18060

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

КОНТОРА НОТАРИУСА ЧУН ЮНГ
35, ДООНСАН-РО, 137 БЕОН-ГИЛ, СЕО-ГУ ТЭДЖОН 302-831 КОРЕЯ

Печать: КОНТОРА НОТАРИУСА ЧУН ЮНГ * ТЭДЖОН КОРЕЯ * НОТАРИУС

210мм X 297мм

УТВЕРЖДАЮ

Президент

«Иннобиосердж Ко., Лтд» (Innobiosurg Co., Ltd)

/подпись/ Ванг Дже Вон

Личный штамп:

«» _____ 2014 г.

[Форма № 43]

Регистрационный номер: 2014 – 18060

Нотариальное свидетельство

Настоящим заявляю, что г-н/г-жа ПАРК СУН КИОНГ, уполномоченный представитель г-на/г-жи ВАНГ ДЖЕ ВОН, ПРЕЗИДЕНТА компании «ИННОБИОСЕРДЖ КО., ЛТД» (INNOBIOSURG CO., LTD) в моем присутствии подтвердил/а подлинность подписи указанного лица на приложенном ДОКУМЕНТЕ.

Заверено в моем офисе 16 декабря 2014 г.

КОНТОРА НОТАРИУСА ЧУН ЮНГ

Офис прокурора района г. Тэджон

35, ДООНСАН-РО, 137 БЕОН-ГИЛ, СЕО-ГУ ТЭДЖОН 302-831 КОРЕЯ

/подпись/

Нотариус Чун Юнг

Штамп нотариуса Чун Юнг

Указанная контора уполномочена министром юстиции Республики Корея оказывать услуги нотариальной конторы с 01 сентября 2004 г. в соответствии с постановлением № 92.

210мм X 297мм
Плотность бумаги: 70г/м²

перевод с английского и корейского языков на русский язык выполнил переводчик
Алфёров Арсений Дмитриевич. Достоверность перевода подтверждаю.
г. Москва, двадцатого января две тысячи пятнадцатого года.

Алфёров Арсений Дмитриевич

г. Москва, двадцатого
января две тысячи пятнадцатого года.

, Дормидонтова Любовь Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи, сделанной переводчиком Алфёровым Арсением Дмитриевичем в
моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-68

Взыскано по тарифу: 1000000

Нотариус г.Москвы



Л.Ю.Дормидонтова

[Handwritten signature]

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15
Нотариус *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



Город Москва

09 ИЮН 2015

Я, Филиппова Ирина Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре №

Выдано по тарифу

Нотариус



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16
Нотариус