

(ООО "Группа Цзянсийских Медицинских оборудований Хунда")

Add: NO.39 SOUTH SHENGLI RD JINXIAN COUNTY JIANGXI PROVINCE CHINA

КНР, Пров. Цзянси, г. Наньчан, уезд Цзиньсянь, улица южного шэнли № 39

Телефон: 86-791-5628828 Факс: 86-791-5628819

**Руководство по эксплуатации медицинского изделия
«Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические»**

Введение

Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические (далее по тексту - изделие) имеет варианты исполнения:

Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические неопудренные текстурированные размеров: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.

Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические неопудренные гладкие размеров: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.

Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические опудренные текстурированные размеров: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.

Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические опудренные гладкие размеров: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.

Конструкция перчаток – с изогнутыми пальцами.

Артикул	Тип	Размер	Ширина перчатки, мм	Длина перчатки, мм не менее
HMG1160	неопудренные, текстурированные	6	77±5	260
HMG1165	неопудренные, текстурированные	6,5	83±5	260
HMG1170	неопудренные, текстурированные	7	89±5	270
HMG1175	неопудренные, текстурированные	7,5	95±5	270
HMG1180	неопудренные, текстурированные	8	102±6	270
HMG1185	неопудренные, текстурированные	8,5	108±6	280
HMG1190	неопудренные, текстурированные	9	114±6	280
HMG1260	неопудренные, гладкие	6	77±5	260
HMG1265	неопудренные, гладкие	6,5	83±5	260
HMG1270	неопудренные, гладкие	7	89±5	270
HMG1275	неопудренные, гладкие	7,5	95±5	270
HMG1280	неопудренные, гладкие	8	102±6	270
HMG1285	неопудренные, гладкие	8,5	108±6	280
HMG1290	неопудренные, гладкие	9	114±6	280
HMG2160	опудренные, текстурированные	6	77±5	260
HMG2165	опудренные, текстурированные	6,5	83±5	260
HMG2170	опудренные, текстурированные	7	89±5	270
HMG2175	опудренные, текстурированные	7,5	95±5	270
HMG2180	опудренные, текстурированные	8	102±6	270
HMG2185	опудренные, текстурированные	8,5	108±6	280
HMG2190	опудренные, текстурированные	9	114±6	280
HMG2260	опудренные, гладкие	6	77±5	260
HMG2265	опудренные, гладкие	6,5	83±5	260
HMG2270	опудренные, гладкие	7	89±5	270
HMG2275	опудренные, гладкие	7,5	95±5	270
HMG2280	опудренные, гладкие	8	102±6	270
HMG2285	опудренные, гладкие	8,5	108±6	280
HMG2290	опудренные, гладкие	9	114±6	280

1 Показания к применению

Изделие рекомендуется использовать при:

- хирургических оперативных вмешательствах.
- инвазивных манипуляциях (внутривенные инфузии, отбор биопроб для исследований и т.д.);
- установке катетера или проводника через кожу;
- манипуляциях, связанных с контактом стерильного инструментария с интактными слизистыми оболочками (цистоскопия, катетеризация мочевого пузыря);
- вагинальном обследовании;
- бронхоскопии, эндоскопии желудочно-кишечного тракта, санации трахеи;
- контакте с эндотрахеальными отсосами и трахеостомами.

2 Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие

Изделие не требует специального обучения и навыков.

3 Описание и работа

Гигиена рук медицинского персонала включает гигиеническую обработку рук и обработку рук хирургов (а также других специалистов, участвующих в проведении оперативных вмешательств).

Гигиеническая обработка рук предусматривает два способа:

- мытье рук мылом и водой (гигиеническое мытье рук) для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов;
- обработка рук спиртосодержащим кожным антисептиком (гигиеническая обработка рук) для снижения количества микроорганизмов до безопасного уровня.

Изделие необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с кровью и другими биологическими субстратами, потенциально или явно загрязненными микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей.

Для снижения частоты проколов рекомендуется применять две надетые друг на друга перчатки, верхнюю перчатку заменять каждые 30 мин. в течение операции; рекомендуется также применять перчатки с индикатором перфорации, в которых повреждение перчатки быстро приводит к видимому изменению окраски в месте прокола;

При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе их снятия следует тампоном (салфеткой), смоченной раствором дезинфеканта или антисептика, убрать видимые загрязнения. Снять перчатки, погрузить их в раствор средства, затем утилизировать. Руки обработать антисептиком.

При уколах, порезах - с нарушением целостности перчаток и загрязнении рук кровью, выделениями и др.: вымыть руки, не снимая перчаток, мылом и водой; сбросить перчатки в отходы «Б», выдавить кровь, вымыть руки с мылом и обработать ранку 5%: спиртовой настойкой йода, заклеить поврежденные места лейкопластырем.

Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к другому, или от загрязненного микроорганизмами участка тела к чистому.

4 Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

Перчатку следует надевать на чистые и сухие руки, прошедшие гигиеническую обработку.

Возьмите перчатку за манжету, натяните до запястья. Удостоверьтесь, что она облегает пальцы полностью и сидит удобно.

Снимать одну перчатку следует, потянув за манжету. Затем другую. Не держите использованные перчатки голыми руками

После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук.

Перчатки – одноразовые! Повторное использование запрещено.

5 Условия хранения

5.1 Изделие хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85%. При хранении перчаток до двух месяцев с даты изготовления допускается хранить их при температуре до плюс 40 °С.

5.2 В процессе хранения перчатки должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей, находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина (других органических растворителей), а также иных веществ, разрушающих резину.

5.3 Гарантийный срок хранения перчаток - три года с даты изготовления.

5.4 "ООО "Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда" гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящего нормативного документа при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5.5 По вопросам, связанным с гарантийными обязательствами, обращаться в "ООО "Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда" по адресу: КНР, Пров. Цзянси, г. Наньчан, уезд Цзиньсянь, улица южного шэнли № 39

6 Условия транспортирования

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в климатических условиях 2С по ГОСТ 15150-69, при транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы - по ГОСТ 15846-79.

7 Порядок утилизации

Если перчатки загрязнены токсичными соединениями или биологическим материалом, следовательно, их нужно утилизировать в соответствии с правилами по уничтожению токсичных материалов.

Так как обычные аэробные или анаэробные процессы разложения в перчатках, не образует токсичные продукты, перчатки могут быть удалены на любой свалке. Процесс разрушения будет очень медленным, кроме изделий из натурального каучука. Сжигание - оптимальный выбор, но может привести к загрязнению воздуха.

Печатью
Генерального директора
Ван Хуй



Перевод печати с английского и китайского языков на русский язык

Круглая печать: / ООО «Группа Цзянсийских Медицинских оборудований Хунда» *
отделение по импорту и экспорту /

Перевод с английского и китайского языков на русский язык выполнил переводчик
Ишмухаметова Альбина Фаритовна.



Город Москва.

Двадцать третьего января две тысячи пятнадцатого года.

Я, Фарнасова Мария Ильинична, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Шлеина Никиты Викторовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком гр. Ишмухаметовой Альбиной Фаритовной, в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за N 8-289

Взыскано по тарифу: 100 руб.

ВРИО Нотариуса:



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 04 листа.
ВРИО Нотариуса: