

1

ИНСТРУКЦИЯ

по применению систем наркозно-дыхательных одноразового применения (Unomedical Inc. США, Unomedical S/A Мексика): 1. Контуры: Трубки, Клапаны, Влагосборники, Соединители (загубники); 2. Фильтры (тепловлагообменники); 3. Маски: Анестезиологические, Кислородные, Аэрозольные; 4. Мешки; 5. Увлажнители; 6. Носовые канюли; 7. Небулайзеры

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение кислородно-респираторной поддержки при проведении общей анестезии с искусственной вентиляцией легких на этапах индукции, поддержания анестезии, выхода из анестезии, экстубации пациентов и для обеспечения респираторной кислородной поддержки и ингаляционной терапии после окончания оперативных вмешательств и в любых других условиях при возникновении соответствующих клинических показаний.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал – медицинские полимерные материалы

Упаковка – индивидуальная

Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного изделия.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Отсутствуют

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Убедитесь в целостности упаковки системы. В случае повреждения и нарушения герметичности упаковки или изделия, использование изделия запрещается.

4.2. Наденьте перчатки.

4.3. Удалите защитную упаковку.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Соедините компоненты систем.

5.2. Присоедините системы к коннекторам аппарата искусственной вентиляции легких или наркозно-дыхательного аппарата и начните подачу дыхательной смеси из аппарата в систему.

5.3. Плотнo приложите анестезиологическую маску к лицу пациента или присоедините коннектор к эндотрахеальной трубке, если пациент уже интубирован.

5.4. Начните вспомогательную или принудительную вентиляцию легких. Всегда между эндотрахеальной, трахеостомической трубкой, либо маской с одной стороны и дыхательным контуром или мешком с другой стороны устанавливайте фильтр (тепловлагообменник).

5.5. Перед экстубацией пациента выньте кислородную маску и соединительную трубку для подачи кислорода из упаковки, присоедините соединительную трубку к выходу увлажнителя кислорода и начните подачу кислорода.

5.6. После экстубации присоедините кислородную маску к пациенту и проконтролируйте показатели пульсоксиметрии. При хорошей оксигенирующей функции легких замените кислородную маску на носовые канюли.

5.7. При необходимости замените кислородную маску средней концентрации на маску высокой концентрации, реверсивную или нереверсивную. Параллельно проводите



другие корректирующие мероприятия, направленные на улучшение оксигенирующей функции легких.

5.8. Если необходима аэрозольная ингаляция – заполните небулайзер, присоедините его к трубке для подачи кислорода, замените кислородную маску или носовые катетеры на аэрозольную маску, присоедините небулайзер к аэрозольной маске. Установите требуемую подачу кислорода и начните аэрозольную терапию. После окончания сеанса аэрозольной терапии вновь смените аэрозольную маску на кислородную.

5.10. Уничтожьте все составные части системы после использования.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. Не допускайте повторного использования систем наркозно-дыхательных одноразового применения после окончания их использования.

Руководитель отдела продаж
ЗАО «Уномедикал»

16 июля 2008 г.



Рославцева Т.А.