

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Инвестиционная Корпорация»

_____ Катышев А.А.

_____ 2013 г.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по применению медицинского изделия

Изделия противопротезные ортопедические

(ТУ 9396-001-77835672-2012)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия противопрлежневые ортопедические предназначены для использования лицами, вынужденно проводящими долгое время в неподвижном или малоподвижном состоянии. Применение изделий должно уменьшить вероятность появления прлежней и иных застойных явлений в тканях пациента (пользователя).

Область применения - клиники в послеоперационных палатах с лежачими больными (матрацы), в реабилитационных центрах (матрацы, подушки-сиденья).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия состоят из вспененного латекса (один или два слоя), гелевой прослойки и чехла (наматрасника).

- Матрас противопрлежневый ортопедический с наматрасником, модель МПГВ - 2000x850x80мм.

- Матрас противопрлежневый ортопедический с наматрасником, модель МПГД - 1600x850x80мм.

- Подушка-сидение противопрлежневая ортопедическая для инвалидной коляски, стула или кресла, модель ППГ - 400*400*40мм.

- Подушка-сидение противопрлежневая ортопедическая для инвалидной коляски, стула или кресла, модель - ППГ 370*370*40мм.

- Подушка-сидение противопрлежневая ортопедическая для инвалидной коляски, стула или кресла, модель - ППГ380*365*40мм.

-все используемые материалы имеют действующие сертификаты безопасности и Санитарно-эпидемиологические заключения.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

-В результате проведенных испытаний, противопоказаний к применению

изделий противопротезных ортопедических, выявлено не было.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Каждое изделие упаковано в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Перед использованием изделия по назначению, необходимо снять полиэтиленовую пленку с матраса и положить его на ровную поверхность гелевой прослойкой вверх.

Не рекомендуется размещать матрас в устройствах типа «гамак», в связи с уменьшением оздоровительного эффекта.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Противопротезный эффект образуется за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела и достигается за счет упругоперетекающих элементов, находящихся внутри гелевой прослойки.

Принципиальная особенность изделия, которая отличает его от других материалов, широко представленных на рынке, это трехмерное моделирование под действием давления тела: принимая вес тела, материал одновременно изменяет свою форму в 3х направлениях - «вверх-вниз», «вправо-влево» и «вперед-назад». В отличие от других материалов, которые прогибаются только «вверх-вниз», провоцируя концентрацию давления в зонах прямого контакта с телом. Таким образом, гелевая прослойка идеально распределяет давление, оказываемое телом.

- Гелевая прослойка снимает давление с участков тела, уменьшает боль и дискомфорт, улучшает кровообращение и насыщает кислородом поверхность кожи (противопротезный эффект).

- Обладает противоотечным свойством за счет гипотермии гелевого слоя.

Латекс - идеальный наполнитель для матраса, он гипоаллергенен, экологически чист и совершенно безопасен для человеческого здоровья.

Латексное основание матраса полностью подстраивается под строение человека и его формы тела, прогибается на тех участках, где это необходимо, и поддерживает те сегменты, которые нуждаются в поддержке;

Латекс - «дышащий» материал, в нем осуществляется хорошая циркуляция воздуха и обеспечивается массажный эффект, а также отсутствие среды для размножения микроорганизмов и бактерий, пылевых клещей.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделия перевозят любым видом транспорта, с предохранением их от атмосферных осадков, с соблюдением правил, действующих на соответствующем виде транспорта.

Изделия можно транспортировать в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения в течение 3 лет с момента покупки изделия.

Генеральный директор


ООО «Инвестиционная Корпорация»

А.А. Катышев



Внешний вид изделия.

Матрас противопротезный ортопедический с наматрасником.

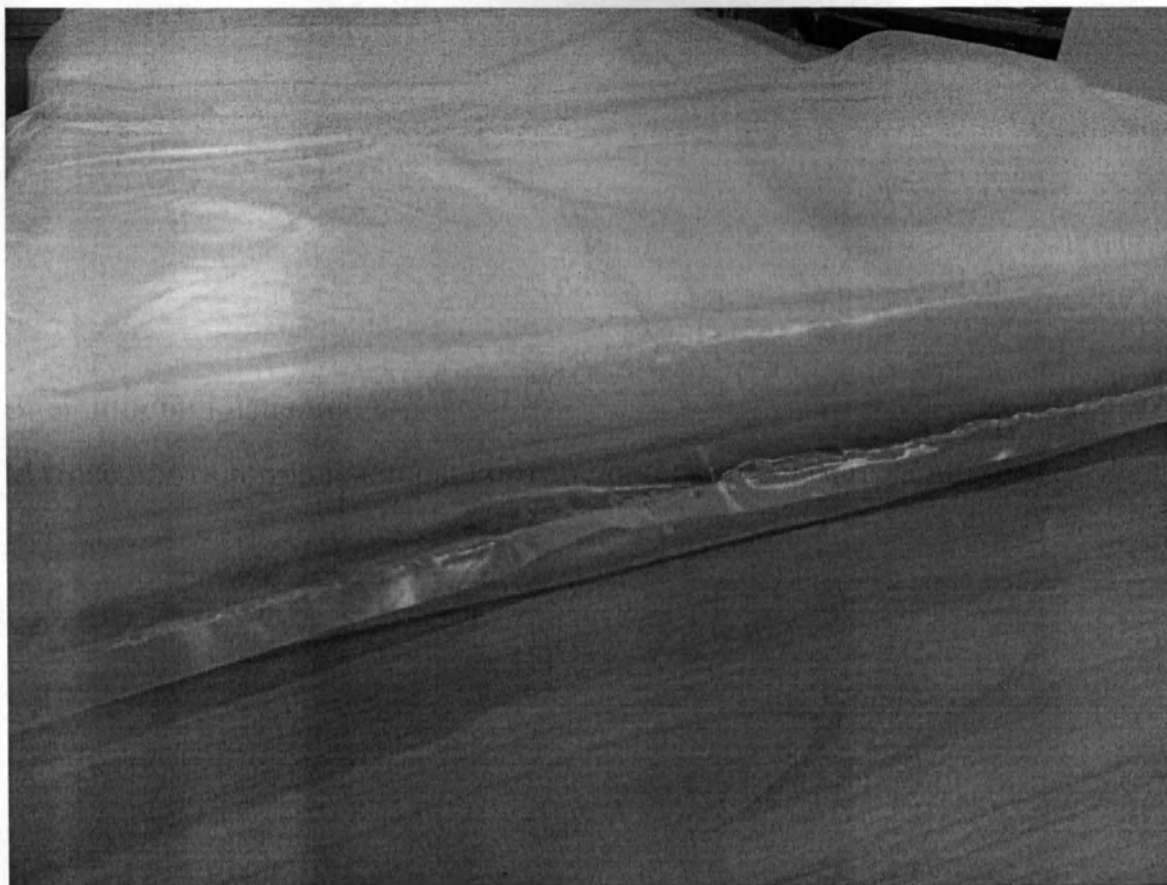

Генеральный директор

ООО «Инвестиционная Корпорация»



А.А. Катышев

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов

Ген. директор _____ А.А. Катышев

