



ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Покрытие антимикробное профилактическое «ДЕЗИТОЛ»

(ТУ 9398-001-99938243-2012)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Покрытие антимикробное профилактическое «ДЕЗИТОЛ» далее по тексту «ДЕЗИТОЛ», представляет собой отечественную разработку медицинских изделий.

«ДЕЗИТОЛ» применяется для получения надежного и эффективного покрытия толщиной от 1 до 100 микрон, обладающего антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, вирусов, грибов.

«ДЕЗИТОЛ» может быть использован в клинических, поликлинических, полевых условиях и в быту.

Нанесение покрытия на обрабатываемые поверхности может осуществляться с помощью тампона, распылительным методом или любым другим методом, позволяющим равномерно нанести «ДЕЗИТОЛ» на поверхность кожи.

«ДЕЗИТОЛ» устраняет недостатки, связанные с дезинфекцией с помощью обычных дезинфицирующих средств, используется в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических и клинических лабораториях, на станциях и пунктах переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в учреждениях санаторно-курортного лечения, детских дошкольных и школьных учреждений, в иных обоснованных местах.

«ДЕЗИТОЛ» легко наносится на различные участки тела, образуя тонкую пленку, которая обладает антимикробным действием.

«ДЕЗИТОЛ» является нетоксичным изделием, готовым к применению.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

«ДЕЗИТОЛ» предназначен для первичной обработки здоровой кожи перед хирургическими манипуляциями, в том числе перед косметическими операциями.

Перед наложением перевязочных средств проводят обработку поверхности кожи вокруг ран с помощью «ДЕЗИТОЛА».

При использовании для обработки вокруг ран наносят «ДЕЗИТОЛ» из расчета $0,011 \text{ г/см}^2$.

В большинстве случаев «ДЕЗИТОЛ» не требует специального удаления, при необходимости удаляется с поверхности кожи тампоном, смоченным водой.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Покрытие антимикробное профилактическое «ДЕЗИТОЛ» противопоказано пациентам с индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов «ДЕЗИТОЛА».

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование «ДЕЗИТОЛА» может производиться любым видом закрытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


Перевозочные средства хранят в сухих складских помещениях при температуре от +10°C до +35° С.

Гарантийный срок хранения «ДЕЗИТОЛ» - 1 год с момента изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Уральский центр нанотехнологий», РФ, 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова д. 74, помещение 387 (1607) тел. (343) 270 75 40, факс (343) 270 75 41.

Генеральный директор
ООО «Уральский центр нанотехнологий»

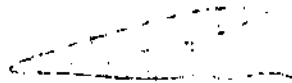

Н.А.Ткаченко