

Принтер	
Поддерживаемые принтеры	За подробным перечнем обратитесь к вашему представителю Roche

Описание основных частей и принадлежностей медицинского изделия:

1.Кабель питания для анализатора (Three pin Power Cable).

Специальный кабель для подсоединения анализатора к электросети.



2. Кабели сенсорные, 7 шт. (Sensor Cables, 7 pcs).

Сенсорные кабели в каждом канале передают сигнал от тестовой ячейки к анализатору. Поставляются в количестве 7 шт.



3."Мышь" компьютерная (PC Mouse).

Используется для ввода команд.




4. Держатель для реагентов (Reagent Holder).

Предназначен для удобного позиционирования реагентов. Держатель реагента можно снимать и хранить в холодильнике.



5. Держатель для пипетки (Pipette Holder).

Предназначен для удобного позиционирования пипетки.

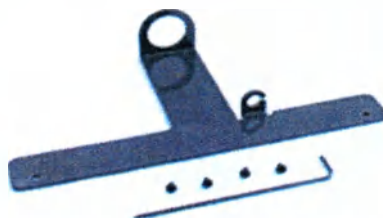


6. Пробирки для предварительного прогрева дилуэнта, 10 шт. x 1 уп. (Pre-heating tubes 10 pcs x 1 pack).

Используются для предварительного подогрева дилуэнта.


Функционирование и активность тромбоцитов снижается, если хранить кровь при температуре 37°C. Кровь должна нагреваться непосредственно в месте измерения во время 3 минутной инкубационной фазы.

Пипетки поставляются в количестве 10 шт. в 1 уп.

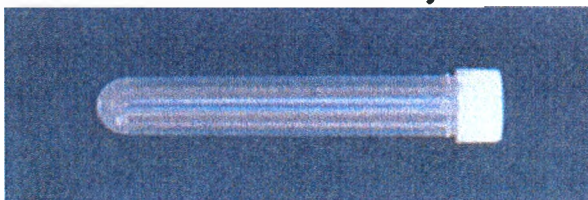

7. Руководство пользователя на английском языке (Multiplate Analyzer Operator's Manual).

Руководство пользователя на английском языке.

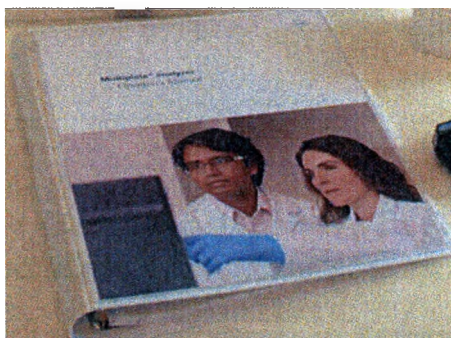

8. Монитор (Flat Screen) – служит для отображения хода и результатов исследования, с ним в комплекте:



- кабель питания (Three pin Power Cable);

Специальный кабель для подключения.




- кабель для подключения к анализатору/компьютеру (VGA Cable).

Специальный кабель для подключения к анализатору/компьютеру.



9. Пипетка электронная (Electronic Pipette e-line) - система электронной пипетки позволяет выполнять дозирование жидкостей под контролем программного обеспечения, с ней **в комплекте**:

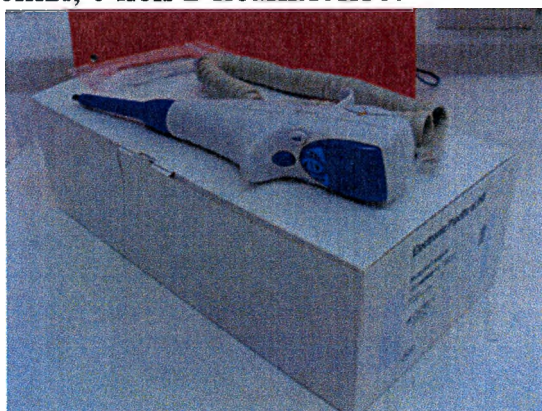

- кабель для подключения к анализатору (*Power cord*);
Специальный кабель для подключения к анализатору.



- фильтры для пипетки электронной, 5 шт., с держателем 1 шт.. (*Filters with forceps, 5 filters + 1 forceps*);

Используются для обеспечения точных уровней наполнения на наконечнике в электронной пипетке.


Поставляются в количестве 5 шт.



- наконечники для пипетки электронной, 1000 шт. (Pipette Tips, 1000 pcs);



- наконечники для пипетки электронной в штативе, 96 шт. (Pipette Tips, 96 pcs).

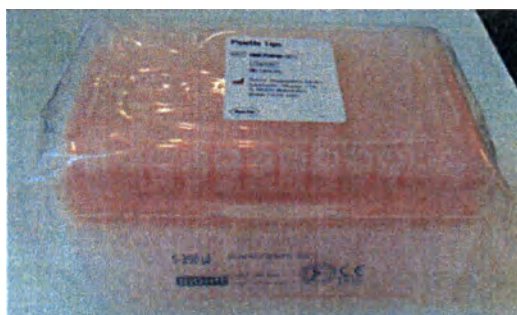

10. Принтер (Printer) - используется для вывода результатов анализа на печать, с ним в комплекте:



- *USB-кабель (USB-cable);*
Порт для подсоединения принтера.



- *кабель питания (Three pin Power Cable).*
Специальный кабель для подключения.



11. Мини-клавиатура на русском языке (Mini Keyboard).
Используется для ввода команд.




12. Защитное покрытие для мини-клавиатуры (Keyboard Cover).

Предназначено для защиты клавиатуры от попадания в нее жидкостей.



13. Адаптер USB/PS2 для клавиатуры (USB/).

Переходник для подключения клавиатуры с портами USB/PS2.

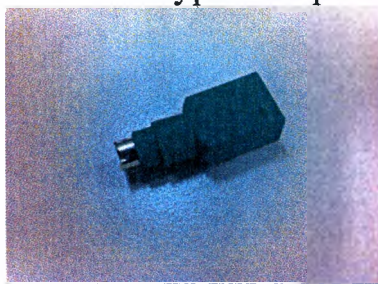

14. Переходник сетевой (Power socket).

Предназначен для подключения устройства к сети.

