

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест»,
производства компании «Контакэар Офталмикс энд Диагностикс (ЭПМ)»
(Contacare Ophthalmics and Diagnostics (EOU)), Индия



7 листов

Глава Представительства Фирмы
«Промед Экспорте Пвт. Лтд.» Индия



«04» июля 2012 г.
Платонова Е.Б.

Инструкция по применению

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» для пробы Ширмера

Описание

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» для пробы Ширмера: общая длина 60 мм. Впитывающая часть полоски: 5 × 40 мм. Конец впитывающей части полоски закруглён с радиусом 2,5 мм.

Впитывающая часть полоски произведена из бумаги Ватман №1 или эквивалентной. Полоска произведена из бумаги белого цвета, достаточно плотной для обеспечения удобства манипуляций.

Показания

Используется для определения снижения слёзопродукции, диагностики синдрома сухого глаза.

Полоса состоит из впитывающей бумаги, непропитанной красителем. Впитывающая часть имеет закруглённую форму для обеспечения пациенту комфорта при проведении теста. Полоска произведена из достаточно плотной бумаги, обеспечивающей удобство манипуляций.

Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Только для наружного применения.
- При возникновении стойкого раздражения или ощущения жжения необходимо прекратить использование полоски.
- Не использовать в случае нарушения целостности индивидуальной упаковки.
- Продукт предназначен для применения специалистами.

Отказ от ответственности

Производитель несёт ответственность только за потенциальные производственные дефекты. Повреждённый контейнер подлежит возврату в оригинальной упаковке, промаркированной серийным номером, вместе с контактной информацией и указанием причины возврата.


Использование и хранение

- Перед применением следует проверить дату окончания срока годности.
- Не применять после истечения срока годности.
- Не хранить во влажном помещении.
- Не применять полоску, если была нарушена целостность стерильной индивидуальной упаковки или обнаружены следы протекания.


Способ применения

1. Определите на просвет положение стерильной полоски в индивидуальной упаковке и согните её вдоль отмеченной линии.


Не повреждая стерильную полоску, надорвите индивидуальную упаковку посередине с двух сторон.

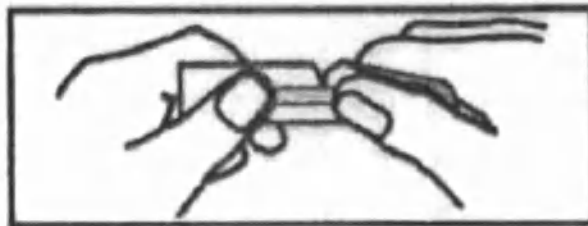

2. Удерживая индивидуальную упаковку за противоположные края, аккуратно потяните в разные стороны, чтобы разделить её на две половины.

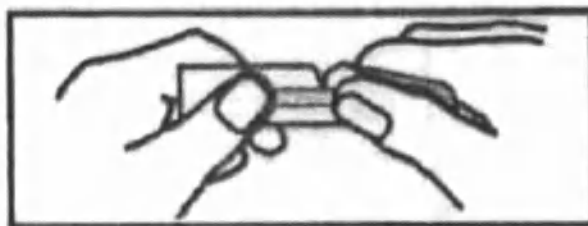

3. Освободите от упаковки немаркированную сторону полоски и, удерживая за неё полоску, удалите остальную часть упаковки.

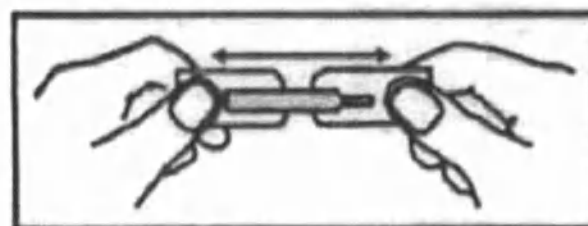

4. Удерживайте полоску за немаркированную часть.

До проведения теста не используйте лекарственные средства для местного применения и не проводите манипуляции на глазах. Тест следует проводить в комнате с приглушенным освещением, голова пациента должна быть комфортно расположена на подголовнике офтальмологического кресла.

Вскройте индивидуальную упаковку, не повреждая стерильную полоску.

Оттяните нижнее веко пациента немного вниз и одновременно аккуратно поместите короткий загнутый конец тестовой полоски за нижнее веко в латеральной трети глазной щели. При этом загнутая часть полоски своим концом должна достигать дна нижнего свода конъюнктивы, а перегиб - края века. Целесообразно одновременное проведение пробы на обоих глазах. Пациенту следует закрыть глаза. Через 5 минут извлеките полоску и измерьте длину увлажненного участка от линии сгиба.

Комплектация

В пачке картонной содержится 25, 50 или 100 стерильных полосок.

Возврат повреждённой пачки

Повреждённый контейнер подлежит возврату в оригинальной упаковке, промаркированной серийным номером, вместе с контактной информацией и указанием причины возврата.

Инструкция по применению

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» Лиссаминовый зеленый

Описание

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» Лиссаминовый зеленый, общая длина 60 мм. Неокрашенная часть полоски имеет 7 мм в ширину, впитывающая бумага с красителем расположена между двумя слоями невпитывающей бумаги, имеет размер 15 × 5 мм. Окрашенный конец полоски закруглён с радиусом 2,5 мм.

Впитывающая бумага, содержащая порцию красителя, произведена из бумаги Ватман№1 или эквивалентной. Полоска произведена из невпитывающей бумаги белого цвета, достаточно плотной для обеспечения удобства манипуляций.

Каждая полоска имеет индивидуальную упаковку из пергаментной бумаги плотностью не менее 40 GSM, обеспечивающей стерильность продукта.

Показания

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» Лиссаминовый зеленый – стерильные офтальмологические полоски, используемые в качестве диагностического средства для выявления аномалий роговицы. Краситель окрашивает коллагеновые волокна, позволяет отличить мёртвые и выродившиеся клетки от клеток с неповреждённой стенкой. Ядро клетки окрашивается интенсивнее цитоплазмы в синевато-зеленый цвет.

Каждая полоска содержит 1,5 мг Лиссаминового зелёного. Окрашенный конец полоски произведён из абсорбирующей бумаги, пропитанной красителем, и имеет закруглённую форму для обеспечения пациенту комфорта при применении. Полоска произведена из бумаги белого цвета, достаточно плотной для обеспечения удобства манипуляций.

Противопоказания

При использовании полосок необходимо снять газопроницаемые или мягкие контактные линзы, поскольку краситель может оставить на них следы.

Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Только для наружного применения.
- При возникновении стойкого раздражения или ощущения жжения необходимо прекратить использование полоски.
- Не использовать в случае нарушения целостности индивидуальной упаковки.
- Продукт предназначен для применения специалистами.

Отказ от ответственности


Производитель несёт ответственность только за потенциальные производственные дефекты. Повреждённый контейнер подлежит возврату в оригинальной упаковке, промаркированной серийным номером, вместе с контактной информацией и указанием причины возврата.

Использование и хранение


- Перед применением следует проверить дату окончания срока годности.
- Не применять после истечения срока годности.
- Не хранить во влажном помещении.
- Не применять полоску, если была нарушена целостность стерильной индивидуальной упаковки или обнаружены следы протекания.

Способ применения


1. Не повреждая стерильную полосу, надорвите индивидуальную упаковку посередине с двух сторон.

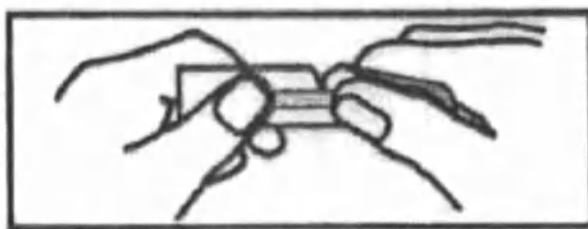

2. Удерживая индивидуальную упаковку за противоположные края, аккуратно потяните в разные стороны, чтобы разделить её на две половины.

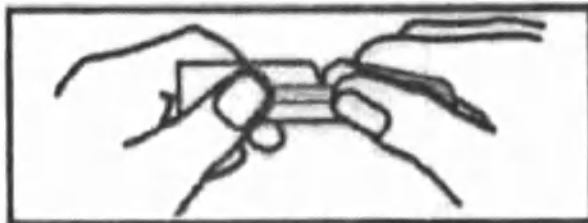

3. Освободите от упаковки неокрашенную часть полоски и, удерживая за неё полосу, снимите упаковку с окрашенной части.

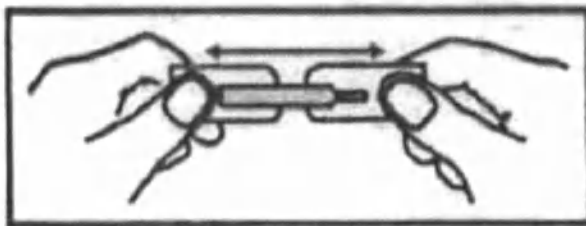

4. Удерживайте полосу за неокрашенную часть.

5. Для улучшения результативности теста и обеспечения комфорта пациента увлажните окрашенную часть полоски в физиологическом растворе. Попросите пациента посмотреть вверх и прикоснитесь увлажненной окрашенной частью полоски к конъюнктиве или роговице. Пациенту следует поморгать несколько раз после проведения теста.

При свете щелевой лампы изучают роговицу пациента на предмет выявления окрашенных клеток. Интенсивность окраски показывает повреждённые клетки.

Комплектация

В пачке картонной содержится 25, 50 или 100 стерильных полосок.

Возврат повреждённой пачки

Повреждённый контейнер подлежит возврату в оригинальной упаковке, промаркированной серийным номером, вместе с контактной информацией и указанием причины возврата.

Инструкция по применению

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» Флуоресцеин

Описание

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» Флуоресцеин, общая длина 60 мм. Неокрашенная часть полоски имеет 7 мм в ширину, впитывающая бумага с красителем расположена между двумя слоями невпитывающей бумаги, имеет размер 15 × 5 мм. Окрашенный конец полоски закруглён с радиусом 2,5 мм.

Впитывающая бумага, содержащая порцию красителя, произведена из бумаги Ватман№1 или эквивалентной. Полоска произведена из невпитывающей бумаги белого цвета, достаточно плотной для обеспечения удобства манипуляций.

Каждая полоска имеет индивидуальную упаковку из пергаментной бумаги плотностью не менее 40 GSM, обеспечивающей стерильность продукта.

Показания

Полоски офтальмологические диагностические «Офтолик®-тест» Флуоресцеин – стерильные офтальмологические полоски, используемые в качестве диагностического средства для диагностики эпителиальных повреждений роговицы и конъюнктивы глаза человека, синдрома сухого глаза, для окрашивания переднего отрезка глаза при подборе контактных линз.

Каждая полоска содержит 1,0 мг Флуоресцеина натрия. Окрашенный конец полоски произведён из абсорбирующей бумаги, пропитанной красителем, и имеет закруглённую форму для обеспечения пациенту комфорта при применении. Полоска произведена из бумаги белого цвета, достаточно плотной для обеспечения удобства манипуляций.

Противопоказания

При использовании полосок необходимо снять газопроницаемые или мягкие контактные линзы, поскольку краситель может оставить на них следы.

Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Только для наружного применения.
- При возникновении стойкого раздражения или ощущения жжения необходимо прекратить использование полоски.
- Не использовать в случае нарушения целостности индивидуальной упаковки.
- Продукт предназначен для применения специалистами.

Отказ от ответственности


Производитель несёт ответственность только за потенциальные производственные дефекты. Повреждённый контейнер подлежит возврату в оригинальной упаковке, промаркированной серийным номером, вместе с контактной информацией и указанием причины возврата.

Использование и хранение


- Перед применением следует проверить дату окончания срока годности.
- Не применять после истечения срока годности.
- Не хранить во влажном помещении.
- Не применять полоску, если была нарушена целостность стерильной индивидуальной упаковки или обнаружены следы протекания.

Способ применения


1. Не повреждая стерильную полосу, надорвите индивидуальную упаковку посередине с двух сторон.

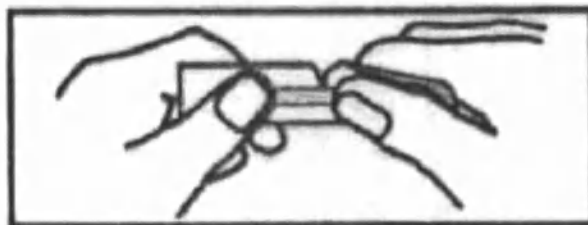

2. Удерживая индивидуальную упаковку за противоположные края, аккуратно потяните в разные стороны, чтобы разделить её на две половины.

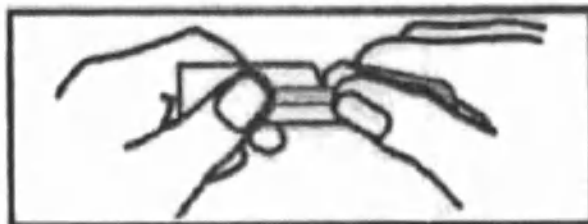

3. Освободите от упаковки неокрашенную часть полоски и, удерживая за неё полосу, снимите упаковку с окрашенной части.

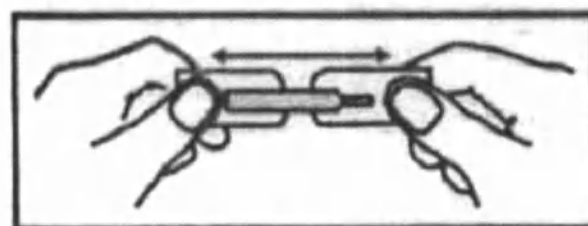

4. Удерживайте полосу за неокрашенную часть.

5. Для улучшения результативности теста и обеспечения комфорта пациента увлажните окрашенную часть полоски в физиологическом растворе. Попросите пациента посмотреть вверх и прикоснитесь увлажненной окрашенной частью полоски к конъюнктиве или роговице. Пациенту следует поморгать несколько раз после проведения теста.

Комплектация

В пачке картонной содержится 25, 50 или 100 стерильных полосок.

Возврат повреждённой пачки

Повреждённый контейнер подлежит возврату в оригинальной упаковке, промаркированной серийным номером, вместе с контактной информацией и указанием причины возврата.

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 7

листа(ов).

Глава Представительства Фирмы

Промед Экспортс Пвт. Лтд.,

Индия



Платонова Е.Б.

14.08.2012