

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации хлор-серебряных электродов на базе пористой
керамики многократного применения

1. Обезжирить кожу биообъекта в местах наложения электродов.

2. Смочить рабочую поверхность контактного элемента, пористой керамической прокладки и кожу биообъекта в местах наложения электродов электродным контактным веществом состава:

глицерин-48%, дистиллированная вода – 35%, хлористый калий – 17% либо физраствором.

3. С помощью специального клеящего кольца электрод ЭСЭк1 с прокладкой прикрепить к поверхности тела человека. Вместо клеящего кольца можно использовать полоски из лейкопластыря (5×5)см, в которых с помощью бритвенного лезвия в центре делается прорезь длиной 1 см.

При использовании электрода ЭСУ-2 к поверхности тела исследуемого приклеить одноразовую пористую прокладку, в углублении которой затем защелкивается электрод.

4. Для очистки рабочей поверхности пористого электрода почистить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой путем снятия микрослоя керамики, затем протереть спиртом.

При соответствующем уходе электроды будут иметь всегда белый цвет.

5. Для длительного хранения электроды необходимо уложить в полиэтиленовые пакеты с тампонами, в которых электроды поставляются потребителю.

Оберегайте электроды от попадания солнечного света, храните их в темном месте (шкафу либо закрытом столе).

***Примечание:**

Для приготовления электродного контактного вещества хлористый калий растворить в горячей (80-90)⁰С дистиллированной воде, в раствор добавить глицерин, смесь тщательно размешать.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

Верно:
Профессор по мр и инновациям
стечисного промышленного ун-та *В.А. Власов*

