


ООО "Амарант"

426057, Россия, Удмуртская Респ., г. Ижевск, проезд им. Дербябина, дом 4.
ИНН 1841003121, КПП 184101001, ОГРН 1091841002032
тел.: +7 (3412) 55-44-40
e-mail: amaran-igevsk@yandex.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО "Амарант"

Сильнова Н.Ю.

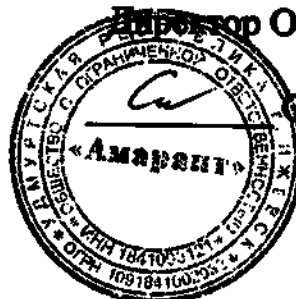

Руководство по эксплуатации

**Комплект белья и одежды медицинской одноразовой из
нетканых материалов, стерильный**

1. Назначение изделия.

Комплект белья и одежды медицинской одноразовой из нетканых материалов, стерильный (далее комплект), предназначен как средство индивидуальной защиты медперсонала и пациента в ЛПУ широкого профиля.

2. Основные технические характеристики:

Наименование, размеры, применяемые материалы, при производстве комплекта приведены в таблице 1. Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Длина/Ширина/Толщина (мм.)	Название материала и его содержание в %	Размеры
1.	Шапочка «Шарлотта»	530/530/0,02	Полипропилен 100%	-
2.	Шапочка «Берет»	530/530/0,02	Полипропилен 100%	-
3.	Шапочка «Колпак»	300/180/0,02	Полипропилен 100%	-
4.	Маска медицинская	175/95/1	Полипропилен 100%	-
5.	Бахилы (ПЭ, нетканые)	250/370/0,02	Полиэтилен 100%	-
6.	Нарукавники	400/200/0,04	Полипропилен 60%, Полиэтилен 40%	-
7.	Нагрудник стоматологический	700/700/0,04	Полипропилен 60%, Полиэтилен 40%	-
8.	Фартук	750/1200/0,04	Полипропилен 60%, Полиэтилен 40%	-
9.	Накидка для посетителя	700/1000/0,02	Полипропилен 100%	-
10.	Комбинезон	800/1600/0,02	Полипропилен 100%	56
11.	Халат	800/1700/0,02	Полипропилен 100%	50/52
12.	Куртка	700/1400/0,02	Полипропилен 100%	50/52
13.	Рубашки женские и мужские	500/600/0,02- 800/1000/0,02	Полипропилен 100%	46/48, 50/52
14.	Брюки	500/1400/0,02	Полипропилен 100%	50/52
15.	Трусы	300/180/0,02	Полипропилен 100%	50/52
16.	Салфетка впитывающая	400/600/1-600/900/1	Вискоза 70%, Полиэфир 30%	-
17.	Полотенце	350/600/0,02- 700/1000/0,02	Вискоза 70%, Полиэфир 30%	-
18.	Простыня гигиеническая	700/700/0,02- 3200/1600/0,02	Полипропилен 100%	-
19.	Пеленка впитывающая	400/700/1	Вискоза 70%, Полиэфир 30%	-
20.	Прокладка впитывающая (послеродовая)	140/300/2	Вискоза 70%, Полиэфир 30%	-
21.	Наволочка	300/300/0,02- 800/800/0,02	Полипропилен 100%	-
22.	Пододушечник	1000/1400/0,02- 1400/2400/0,02	Полипропилен 100%	-
23.	Накидка на кушетку	700/1500/0,02- 1100/2100/0,02	Полипропилен 100%	-
24.	Чехол на матрас	600/1100/0,02- 1400/2400/0,02	Полипропилен 100%	-
25.	Тапочки одноразовые	100/280/0,02	Полипропилен 100%	43

Таблица 2

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 10
2.	Разрывная нагрузка, 1 кгс	Не менее 1
3.	Водоупорность, мм. вод. ст.	Не менее 800
4.	Сорбционная стойкость, г/г	Не менее 3
5.	Паропроницаемость, мг/см ² /час	Не менее 4

3. Противопоказания к применению

Комплект противопоказаний не имеет.

4. Применение комплекта.

Комплекты применяются как средство индивидуальной защиты медперсонала и пациента в ЛПУ широкого профиля.

В зависимости от вида проводимого вида вмешательства, как мера защиты.

Смена комплекта производится после каждого выполненного вмешательства.

Используется в течение времени нахождения в ЛПУ.

5. Порядок хранения.


Комплекты должны храниться в специально выделенных помещениях (бельевых).

Комплекты и тара должны быть промаркированы, хранение в отделениях немаркированных комплектов не допускается.

6. Порядок утилизации.

После окончания операций использованный комплект собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

3 листов
Директор ООО "Амарант"

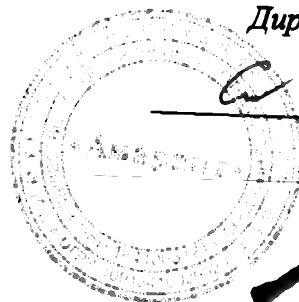

Сильнова Н.Ю. Сильнова Н.Ю.