

Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны

Соответствует приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 8 февраля 2013 г. N 61н г. Москва «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны»



Перечень вложений

1 Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок		3 Медицинские изделия для проведения иммобилизации	
1.1 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см	5 шт.	3.1 Повязка разгружающая для верхней конечности	4 шт.
1.2 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см	3 шт.	4 Медицинские изделия для местного охлаждения	
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	3 шт.	4.1 Пакет гипотермический	3 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный	2 шт.		
1.5 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	5 шт.	5 Прочие медицинские изделия	
1.6 Лейкопластырь рулонный не менее 2 см x 5 м	2 шт.	5.1 Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	5 шт.
1.7 Пакет перевязочный медицинский стерильный	5 шт.	5.2 Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок)	1 шт.
1.8 Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода (не менее 12,5см x 11,0 см)	5 шт.	5.3 Очки или экран защитный для глаз	1 шт.
1.9 Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, №10	2 шт.	5.4 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	20 пар
1.10 Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 45 см x 29 см, №5	1 шт.	5.5 Покрывало спасательное изотермическое не менее 150 см x 200 см	1 шт.
1.11 Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см)	3 шт.	5.6 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5см x 11,0см)	20 шт.
1.12 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)	3 шт.	5.7 Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака (не менее 12,5 см x 11,0 см)	3 шт.
1.13 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см)	3 шт.	6 Прочие средства	
2 Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации		6.1 Английская булавка стальная со спиралью	10 шт.
2.1 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное	2 шт.	6.2 Блок бумажных бланков	1 шт.
		6.3 Карандаш	1 шт.
		6.4 Маркер перманентный черного цвета	1 шт.
		6.5 Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см	5 шт.
		6.6 Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки	1 шт.
		6.7 Санитарная сумка	1 шт.

ТУ 9398-024-85335470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № _____
 Подпишется по мере истечения срока годности или расхождения комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°С до +25°С.
Внимание! Хранить в недоступном для детей месте! Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Сумки, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ. 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д. 2
 т/ф: +7 (812) 335-05-85. www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011.

Срок годности: 18 месяцев. Гарантийный срок службы сумки: 12 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке. Номер партии — 01.

Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны

Инструкция по применению





Бинт марлевый медицинский Жгут кровоостанавливающий материало-эластичный	перевязочное средство для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавления конечности фиксирующее, дезинфицирующее средство фиксирующее средство	Повязка разгрузочная для верхней конечности Пакет гипотермический Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	для фиксации верхней конечности охлаждающее средство для защиты от инфекций, передвижения воздушно- капельным путем
Лейкопластырь бактерицидный Лейкопластырь рулонный Пакет перевязочный медицинский стерильный Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода Салфетка марлевая медицинская Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием	перевязочное средство дезинфицирующее средство перевязочное средство перевязочное, антисептическое, местное обезболивающее ср-во	Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок) Очки или экран защитный для глаз Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	применить при перевязке для защиты глаз для защиты рук при обработке грозных ран
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе целлюлозы или алюмосиликата кальция и натрия или гидросиликата кальция	перевязочное, кровоостанавливающее ср-во	Покрывало спасательное изотермическое	защита от перегрева или переохлаждения, возможно использовать для переноски пострадавшего
Средство перевязочное гидрогелевое противопожарное стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием перевязочное средство	для первичного закрытия и лечения ожогов I-III степени	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака Аптекарская булавка стальная со спиралью Блок бумажных бланков Карандаш Маркер перманентный черного цвета Мешок полиэтиленовый с замком	дезинфицирующее средство для стимуляции дыхания применить при перевязке для записей для записей для утилизации отходов
Устройство для проведения искус- ственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное	для проведения сердечно- легочной реанимации		

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста.
Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.


Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки



а) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки, средства перевязочные (п. 1.9–1.13 состава аптечки) и бинты (п. 1.1–1.3 состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.7 состава аптечки).
При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку или перевязочное средство (п. 1.9–1.13 состава аптечки) и закрепить лейкопластырем (п. 1.6 состава аптечки).

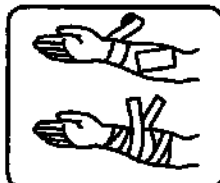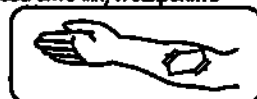

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.4 состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 6.1–6.4 состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.1–1.3, 1.7, 1.9–1.13 состава аптечки).

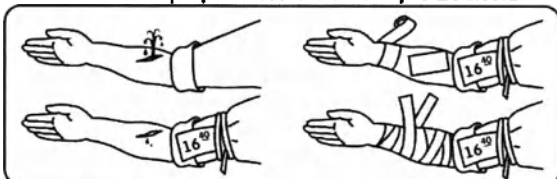

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового пленочного (п. 2.1 Состав аптечки).



д) при переломах и ушибах для иммобилизации поврежденной конечности повязку разгружающую для верхней конечности (п. 3.1 состава аптечки).



е) для наложения холодного компресса при ушибах и растяжениях мышц, для остановки кровотечения использовать пакет гипотермический (п. 4.1 состава аптечки).

ж) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 5.4 состава аптечки) и защитных очках (п. 5.3 состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 5.1 состава аптечки).



з) покрывало спасательное изотермическое (п. 5.5 состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева). Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.



и) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетку антисептическую из нетканого материала с перекисью водорода (п. 1.8 состава аптечки) или салфетку антисептическую из нетканого материала спиртовую (п. 5.6 Состав аптечки).



к) для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с замком (п. 6.5 Состав аптечки).