



Фотографические изображения медицинского изделия «Инструмент стоматологический механизированный DENSIM с принадлежностями» производства «ДИПЛОМАТ ДЕНТАЛ с.р.о.», Словакия («Diplomat Dental s.r.o.», Vrbovská cesta 17, 92101, Piešťany, Slovak Republic. Тел.: 00421-33-79-54-111. Факс: 00421-33-77-26-326. E-mail: info@diplomat-dental.com).



DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS



ВЕННА ВЕРОНА, МОНАКО ЛУК, МОНАКО С ЛУК, МОНТРЕАЛ ЛУК, МОНТРЕАЛ С ЛУК, ТОРОНТО ЛУК, ТОРОНТО С ЛУК

Важная информация


- Турбины DENSIM используются только для стоматологических операций, оснащены полным замком бора, турбины с лопастями LUX оснащены подставкой рабочего поля и быстрозаменимым соединением.
- соответствуют действующим государственным положениям о медицинских приборах.

Эти положения указывают, что:

- необходимо соблюдать применимые правила по предотвращению несчастных случаев и указания по безопасности.
- устройство может использовать только компетентный специалист в соответствии с инструкциями.
- устройство использовать только полностью исправное оборудование.
- следует избегать образования каких-либо загрязнений на устройстве.

Пользователи, пользователи и третьи лица должны быть защищены от возможных опасностей



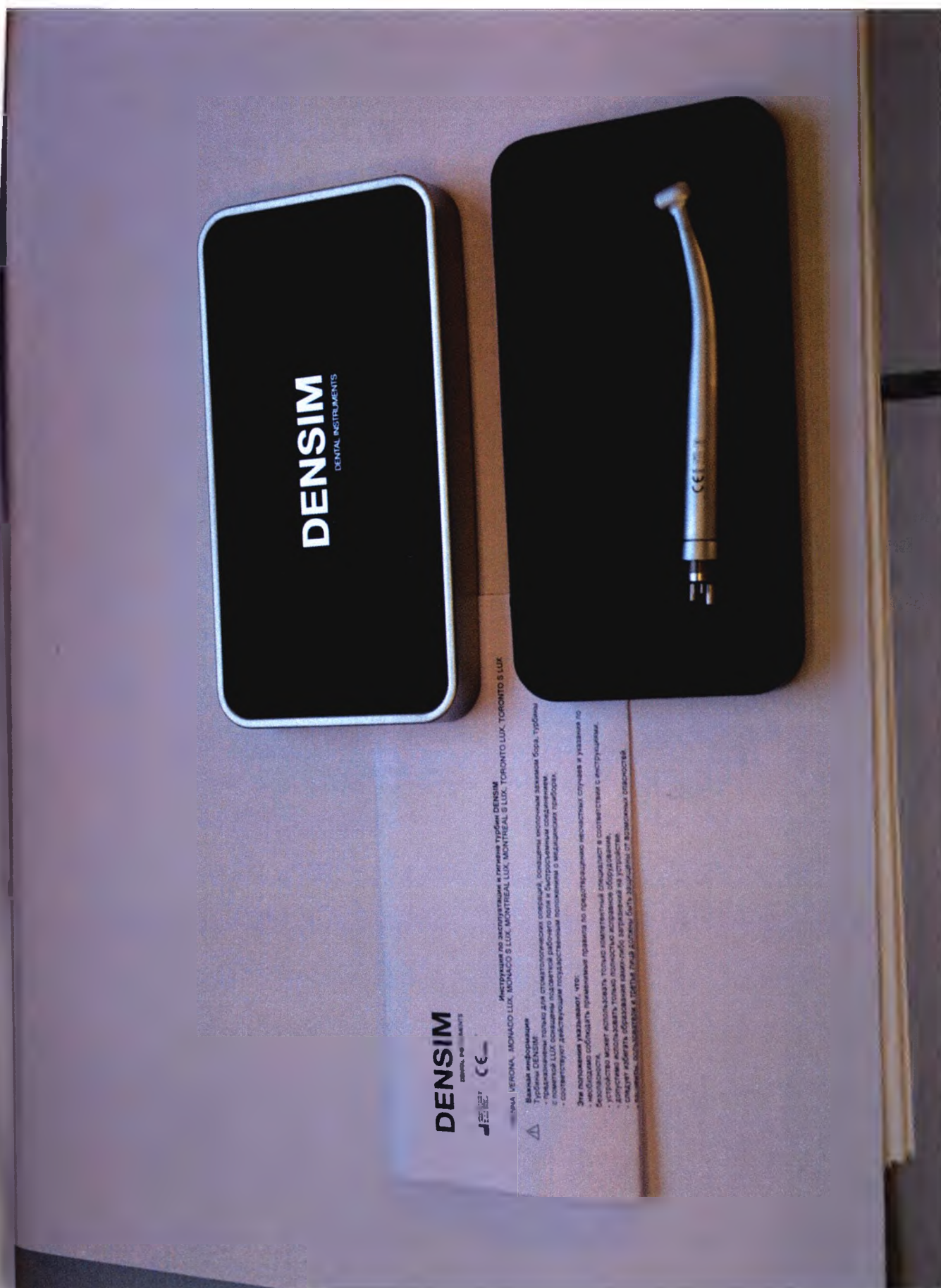



DENSIM

Handpiece, High Speed



VIENNA, VERONA, MONACO LUX, MONACO S LUX, MONTREAL LUX, MONTREAL S LUX, TORONTO LUX, TORONTO S LUX

Инструкция по эксплуатации и гигиене турбин DENSIM

Важная информация

Турбины DENSIM

- предназначены только для стоматологических операций, оснащены инерционным замком бора, турбин с планетой LUX оснащены подсветкой рабочего поля и высокоскоростным соединением
- соответствуют действующим государственным положениям о медицинских приборах

Эти положения указывают, что:

- необходимо соблюдать применяемые правила по предотвращению несчастных случаев и указаниям безопасности
- устройство может использовать только компетентный специалист в соответствии с инструкциями
- допустимо использовать только полностью исправное оборудование
- следует избегать образования каких-либо загрязнений на устройстве
- пользователи и третьи лица должны быть защищены от возможных опасностей

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS



DENSIM

Author's address: Department of Psychology,
University of California, San Diego,
La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: mjg@ucsd.edu

CE

© 2000

VENETA, VERONA, VERONICO

Важнейшие направления
Улучшение жилищных условий городского населения, развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие жилищно-коммунального хозяйства.

100. *См. также* 100.

THE NATIONAL UNIVERSITY, 1976

[illegible]

...the ... of ...

DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS



Инструкция по эксплуатации и гигиене турбин DENSIM
VIENNA, VERONA MONACO LUX, MONACO S LUX, MONTREAL LUX, MONTREAL S LUX, TORONTO LUX, TORONTO S LUX



Важная информация
Турбины DENSIM

- предназначены только для стоматологических операций, оснащены кнопочным зажимом бора, турбины с помпой LUX оснащены подсветкой рабочего поля и быстроразъемным соединением

Внимание!
- перед
- уполн

DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS





DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS



VIENNA, VIENNA, MONACO LUX, MONACO LUX, TORONTO LUX, TORONTO LUX

Инструкция по эксплуатации и ремонту турбин DENSIM

Турбины DENSIM предназначены для стоматологической практики, оснащены инновационным корпусом бора, турбины

с повышенной мощностью, позволяющей работать в более жестких условиях, обеспечивая высокую производительность и длительный срок службы.

Соответствуют действующим нормативным требованиям к медицинским приборам.

Эта инструкция указывает, что:

необходимо соблюдать при применении правил по предотвращению несчастных случаев в условиях

использования.

Безопасность.

Турбины имеют конструкцию, позволяющую использовать только полностью исправное оборудование.

Устройство имеет защиту от перегрева, предотвращая повреждение тканей пациента.

Долговечность работы оборудования обеспечивается использованием высококачественных материалов.

Следует избегать использования турбин в условиях, не соответствующих требованиям инструкции.

Информация, содержащаяся в этой инструкции, является конфиденциальной и предназначена для использования только в условиях, указанных в инструкции.



DENSIM

CENTRAL POSTER AGENTS



Инструкция по эксплуатации и гигиене турбин DENSIM
VENNA VERONA MONACO S LUX MONTREAL LUX MONTREAL S LUX TORONTO LUX TORONTO S LUX

Важная информация

TIDAK ADA

группы *DENSIM*.


the accounting value of stock

Эти положения указывают, что:
- необходимо соблюдать применимые правила по предотвращению несчастных случаев и указаний по безопасности.

устройство может использовать только компетентный специалист в соответствии с инструкциями.

допустима использовать только полностью исправное оборудование.

следует избегать образования каких-либо загрязнений на устройстве. Элементы, производители и торговлю, лица должны быть защищены от возможных повреждений.

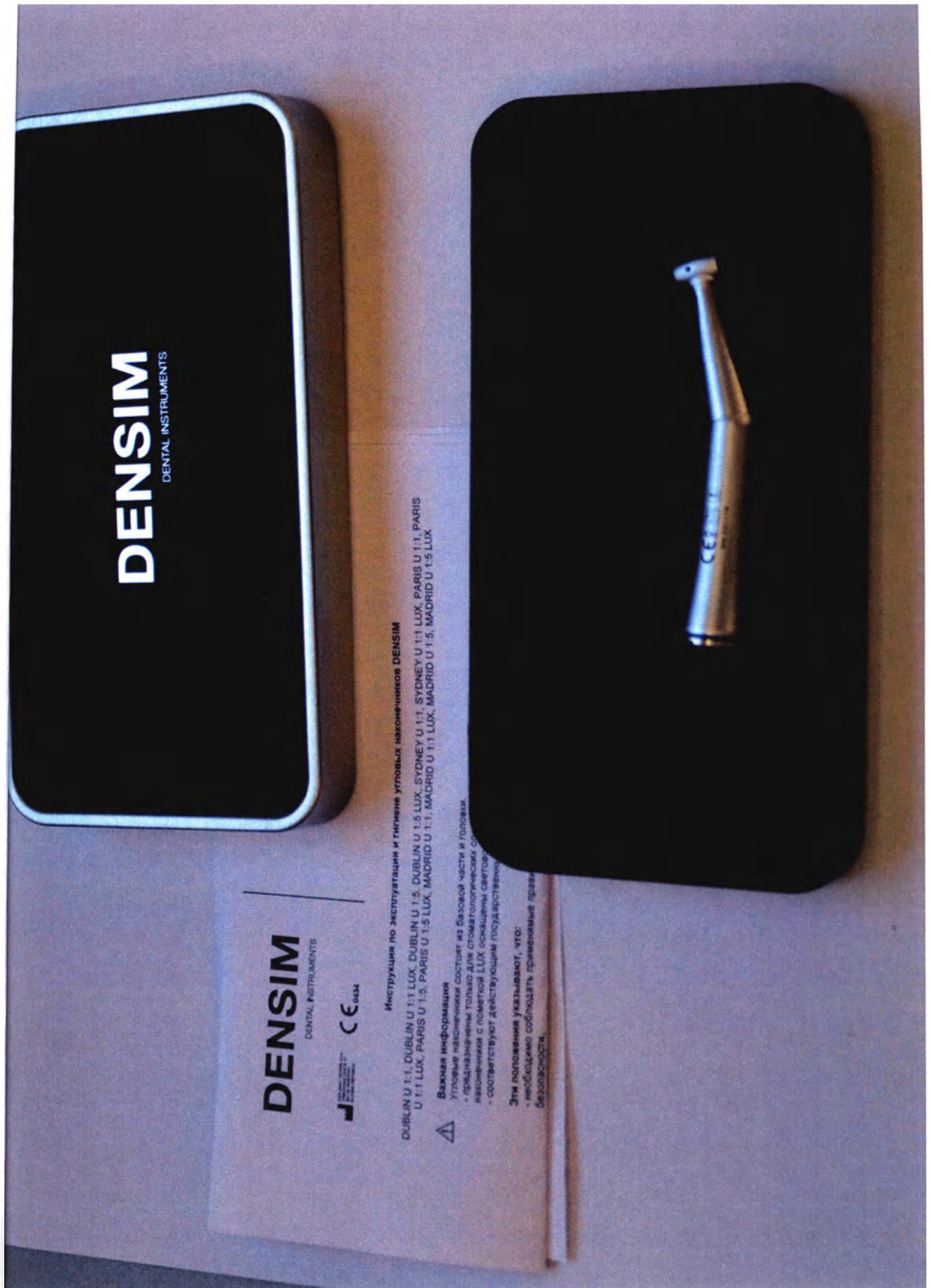



DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS



Инструкция по эксплуатации и гигиене угловых наконечников DENSIM

DUBLIN U 1:5 DUBLIN U 1:5 LUX DUBLIN U 1:5 LUX SYDNEY U 1:5 LUX PARIS U 1:5 LUX
MADRID U 1:5 LUX MADRID U 1:5 LUX MADRID U 1:5 LUX MADRID U 1:5 LUX

Важные инструкции:
Угловые наконечники используются только для фиксации и операции, головка оснащена кнопочным замком бора.
наконечники с пометкой LUX оснащены световодом для подсветки рабочего поля.
соответствуют действующим государственным положениям о медицинских приборах.

Эти положения указывают, что:
- необходимо соблюдать правила по предотвращению несчастных случаев и указания по безопасности.




PARIS U 1:1



DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

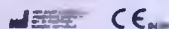

Инструкция по эксплуатации и гигиене угловых наконечников DENSIM

DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX, DUBLIN U 1:5, DUBLIN U 1:5 LUX, SYDNEY U 1:1, SYDNEY U 1:1 LUX, PARIS U 1:1, PARIS U 1:1 LUX, PARIS U 1:5, PARIS U 1:5 LUX, MADRID U 1:1, MADRID U 1:1 LUX, MADRID U 1:5, MADRID U 1:5 LUX



Важная информация


Угловые наконечники состоят из базовой части и головки

- предназначены только для стоматологических операций, головки оснащены кнопочным захватом бора,
- наконечники с пометкой LUX оснащены световодом для подсветки рабочего поля
- соответствуют действующим государственным положениям о медицинских приборах

Эти положения указывают, что:

- необходимо соблюдать применимые правила по предотвращению несчастных случаев и указания по безопасности.

MADRID U 1:1

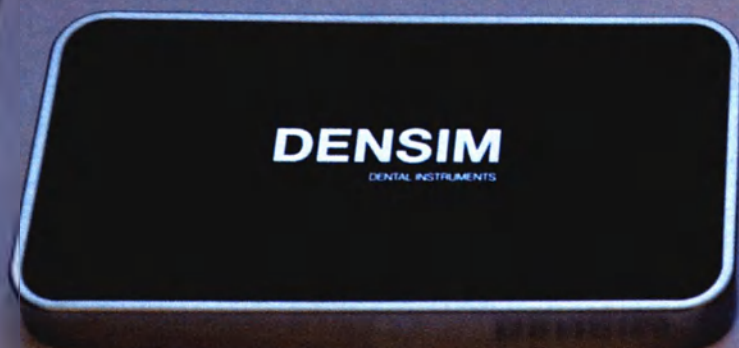

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS



Инструкция по эксплуатации и системе утилизации накопителей DENSIM

DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX, DUBLIN U 1:1 S, DUBLIN U 1:1 S LUX, SYDNEY U 1:1, SYDNEY U 1:1 LUX, PARIS U 1:1, PARIS U 1:1 LUX, PARIS U 1:1 S, PARIS U 1:1 S LUX, MADRID U 1:1, MADRID U 1:1 LUX, MADRID U 1:1 S, MADRID U 1:1 S LUX



Важная информация

- Устройство накопителей состоит из базовой части и головки.
- предназначены только для стоматологических операций, головки оснащены инклином датчиком бора.
- наконечники с полостью LUX оснащены световодом для подсветки рабочего поля.
- исполняют функцию государственных копировальных и медицинских приборов.

Эти положения указывают, что:

- необходимо соблюдать применимые правила по предотвращению несчастных случаев и указаний по безопасности.

MADRID U 1:5



DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS



Инструкция по эксплуатации и техническим характеристикам DEN-SIM

(DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX, DUBLIN U 1:5, DUBLIN U 1:5 LUX, SYDNEY U 1:1, SYDNEY U 1:1 LUX, PARIS U 1:1, PARIS U 1:1 LUX, PARIS U 1:5, PARIS U 1:5 LUX, MADRID U 1:1, MADRID U 1:1 LUX, MADRID U 1:5, MADRID U 1:5 LUX)



Важная информация

- Угловые наконечники состоят из базовой части и головки.
- Предназначены только для стоматологических операций, выполняемых инструментом с помощью ручки.
- Исполнены с защитой от коррозии.
- Соответствуют действующим государственным положениям о медицинских приборах.

Эти положения указывают, что:

- необходимо применять правила по предотвращению несчастных случаев и указания по безопасности.



DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS




Инструкция по эксплуатации и гигиене угловых наконечников DENSIM
DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1.5 LUX, DUBLIN U 1:5 LUX, DUBLIN U 1:1 SYDNEY U 1:1, SYDNEY U 1:1.5 LUX, PARIS U 1:1, PARIS U 1:1.5 LUX, MADRID U 1:1, MADRID U 1:1.5 LUX, MADRID U 1:5 LUX, MADRID U 1:5 LUX


Важная информация
Угловые наконечники состоят из базовой части и головки. Головка оснащена порочным захватом бора. Угловые наконечники предназначены только для стоматологических операций. Головка оснащена световодом для подсветки рабочего поля. Наконечники с пометкой LUX оснащены световодом для подсветки рабочего поля. Соответствуют действующим государственным требованиям к медицинским приборам.

Эти положения указывают, что:
- необходимо соблюдать применимые правила по предотвращению несчастных случаев в указания по безопасности.

SYDNEY U 1:1 Lux

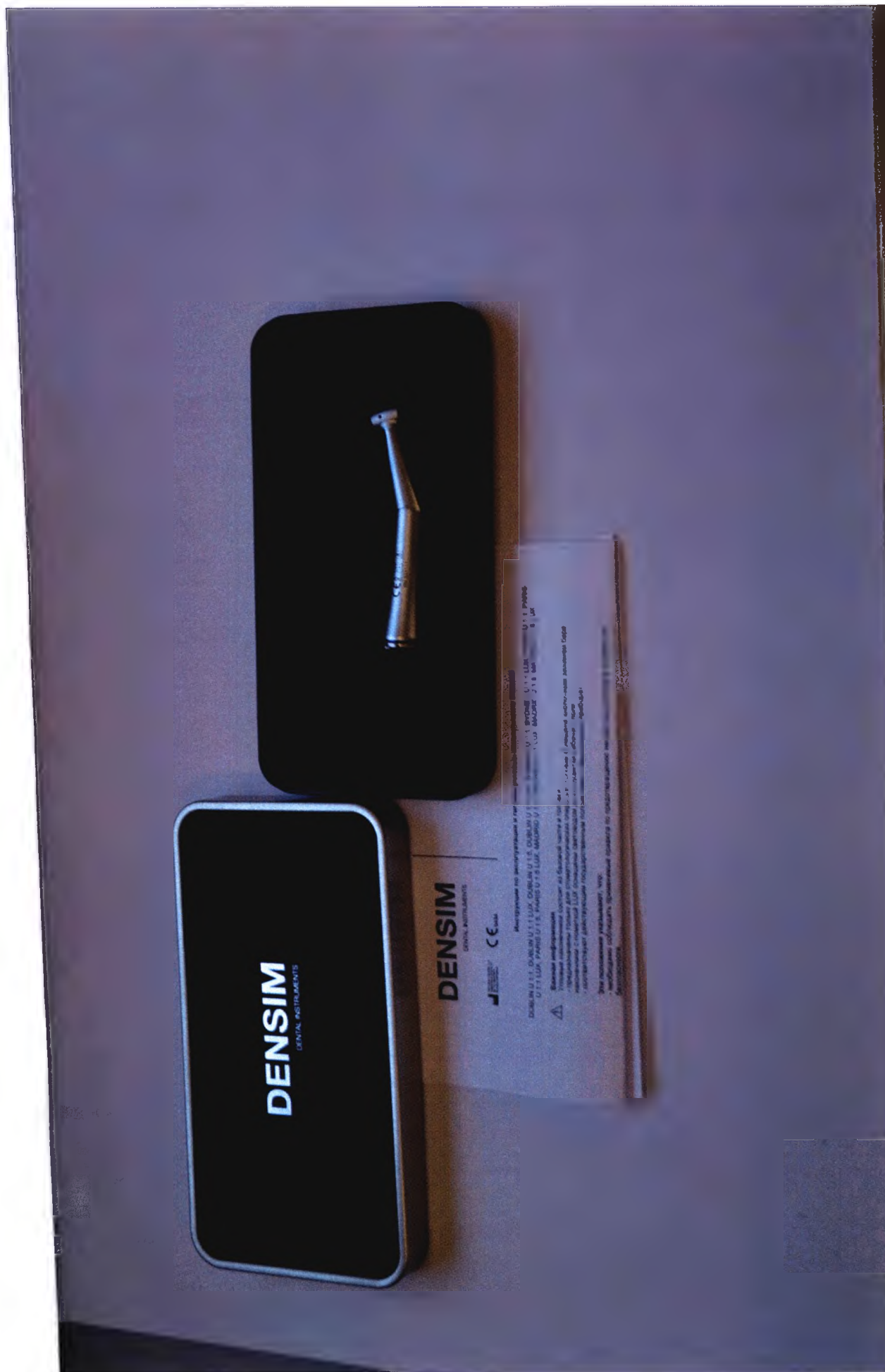



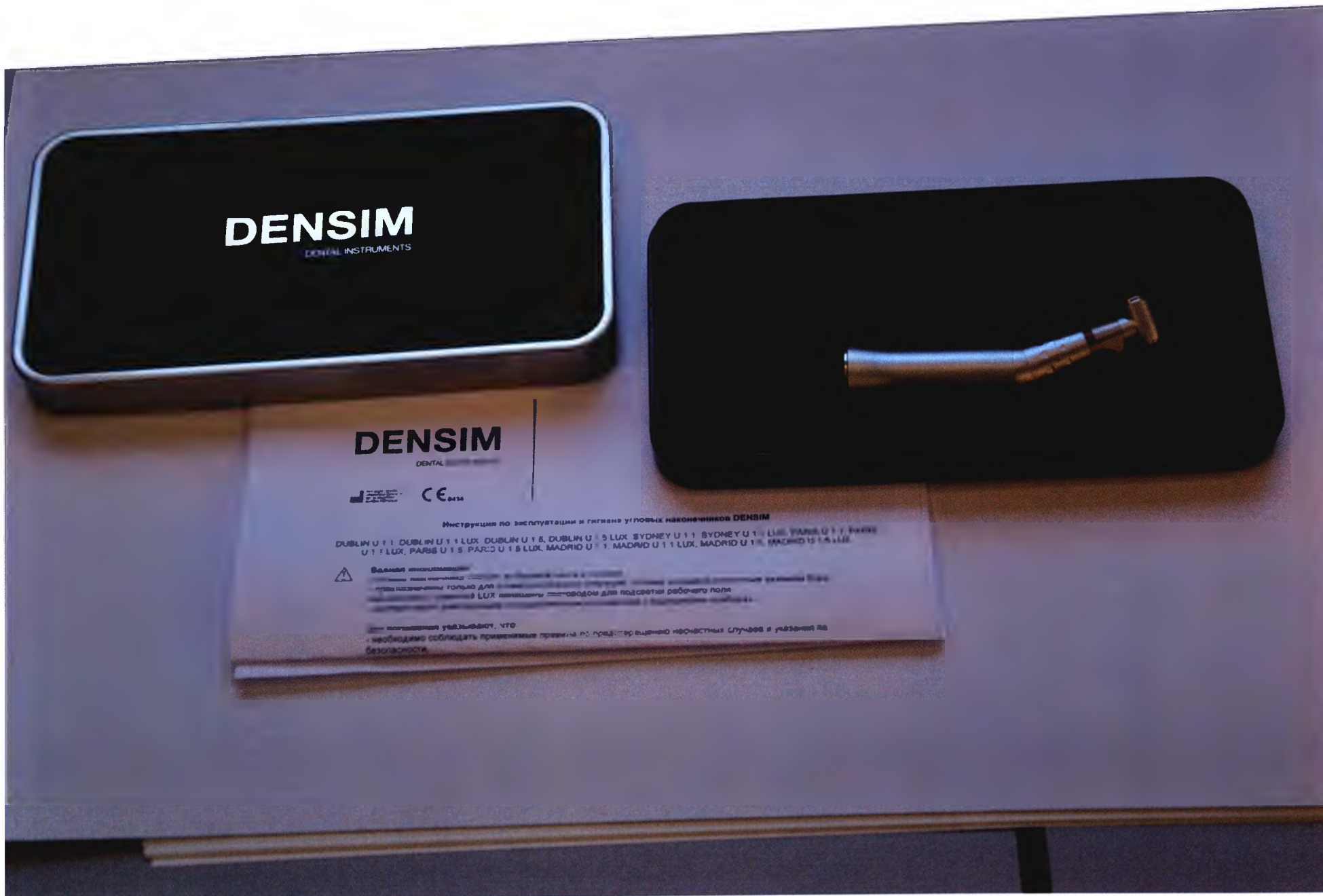

PARIS U 1:5 Lux

21
118





DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS



Инструкция по эксплуатации и гигиене угловых наконечников DENSIM
DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX, DUBLIN U 1:5, DUBLIN U 1:5 LUX, SYDNEY U 1:1, SYDNEY U 1:1 LUX, PARIS U 1:1, PARIS
U 1:1 LUX, PARIS U 1:5, PARIS U 1:5 LUX, MADRID U 1:1, MADRID U 1:1 LUX, MADRID U 1:5, MADRID U 1:5 LUX



Важная информация

- Угловые наконечники состоят из базовой части и головки.
- Головка предназначена только для стоматологических операций. Головка оснащена анодным замком бора.
- Наконечники с пометкой LUX оснащены световодом для подсветки рабочего поля.
- Соответствуют действующим государственным требованиям к медицинским приборам.

Эти положения указывают, что:

- необходимо соблюдать применимые правила по предотвращению несчастных случаев и указаний по безопасности.

Головка для наконечников стоматологических угловых: DUBLIN HEAD



SYDNEY HEAD



PARIS HEAD




MADRID HEAD





DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

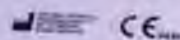

Инструкция по эксплуатации и гигиене угловых наконечников DENSIM

DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX, DUBLIN U 1:5, DUBLIN U 1:5 LUX, SYDNEY U 1:1, SYDNEY U 1:1 LUX, PARIS U 1:1, PARIS U 1:1 LUX, PARIS U 1:5, PARIS U 1:5 LUX, MADRID U 1:1, MADRID U 1:1 LUX, MADRID U 1:5, MADRID U 1:5 LUX

Важная информация

- Угловые наконечники состоят из базовой части и рукоятки.
- Предназначены только для ортодонтических целей.
- Наконечники с пометкой LUX.
- Соблюдать инструкции по эксплуатации.

Эти положения указывают, что:

- необходимо соблюдать применимые правила по применению.

SYDNEY P 1:1

PARIS P 1:1



DENSIM



DUBLIN / DUBLIN / DUBLIN / DUBLIN / SYDNEY / PARIS / PARIS
U.S. / U.S. / U.S. / U.S. / U.S. / U.S. / U.S.

 Важная информация

Угловые наконечники состоят из базовой части и головки.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

1999

Служба и условия по





Ротор сервисный








Кнопка сервисная



35
126

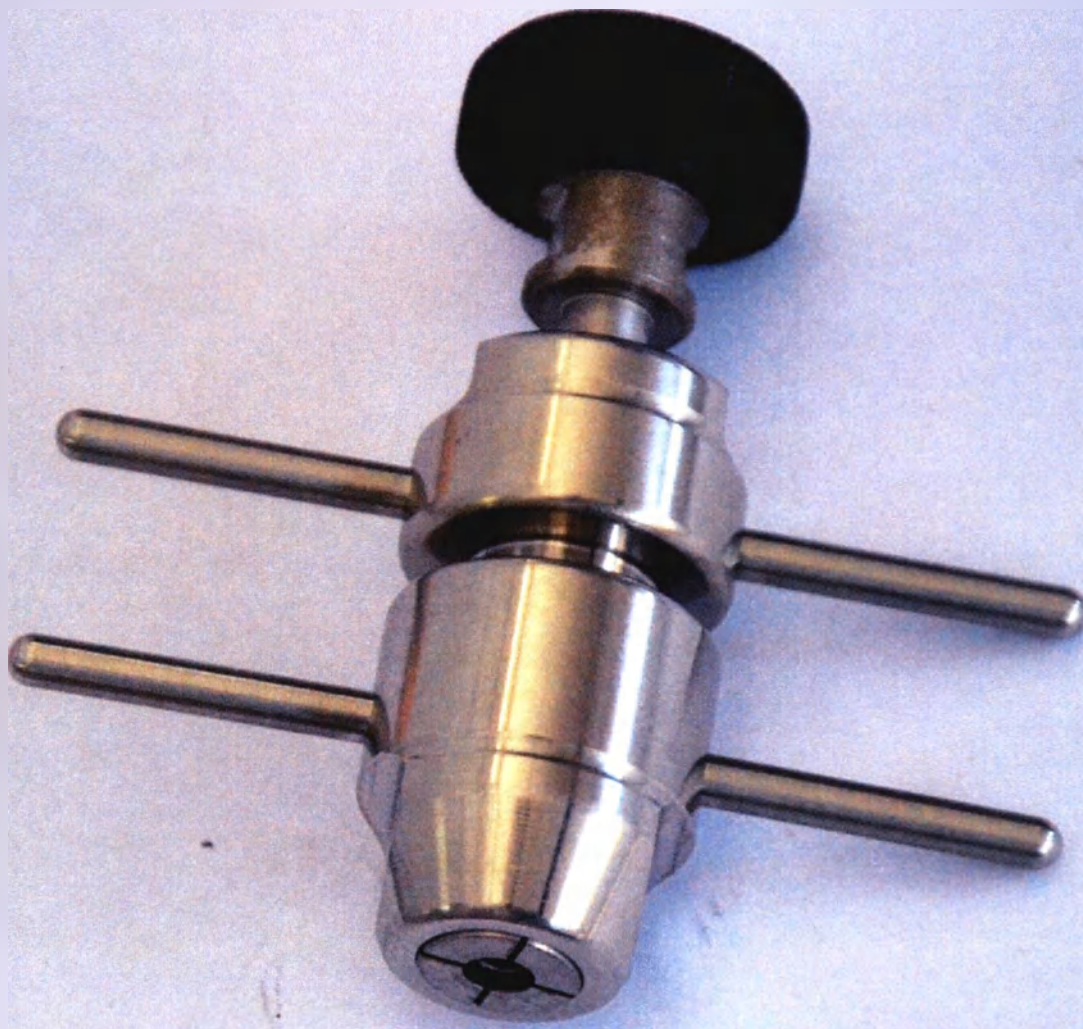

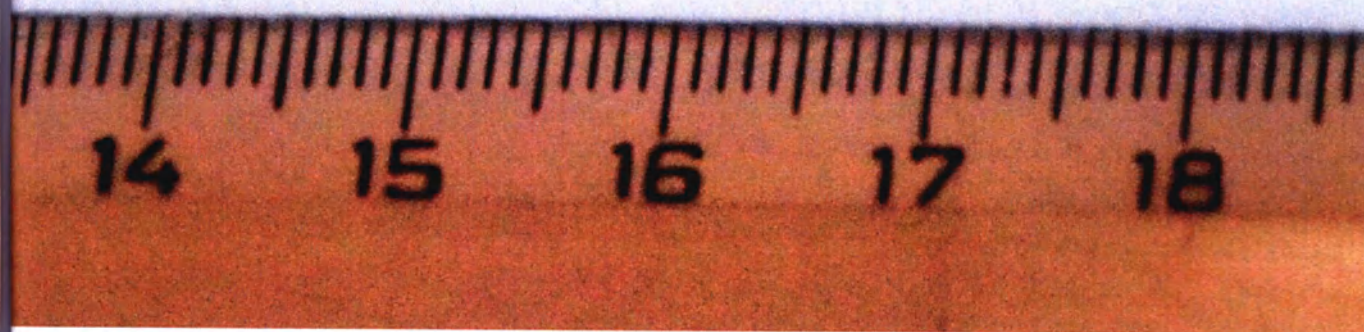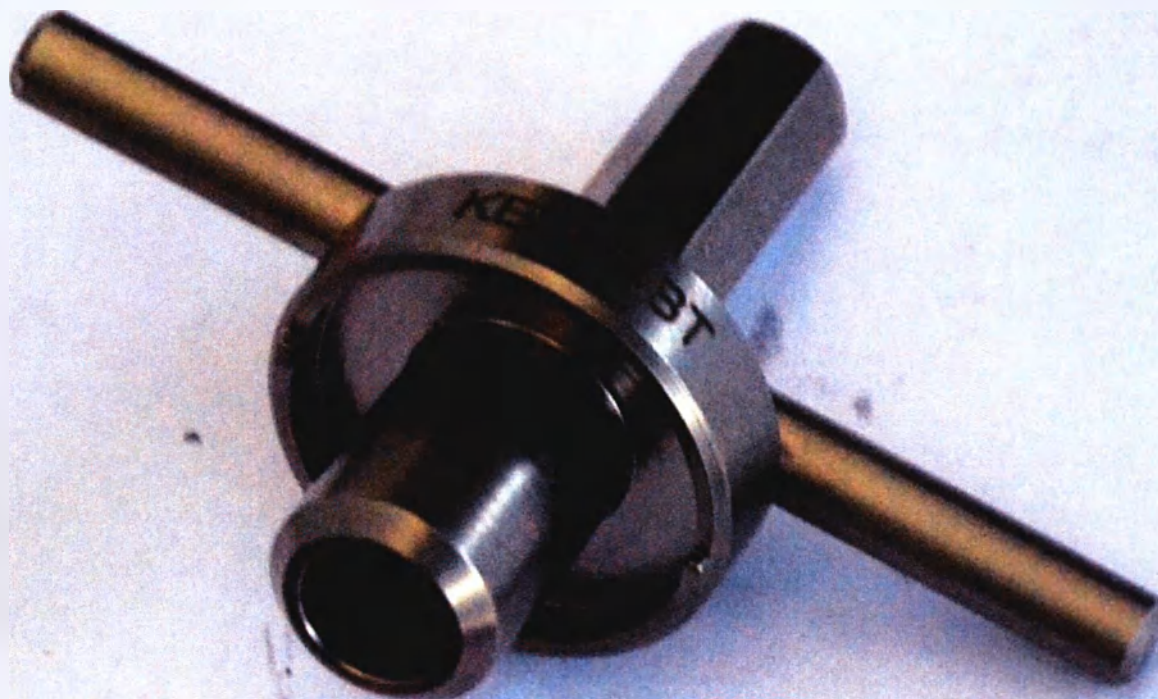





Источник света: светодиод




Источник света: лампочка

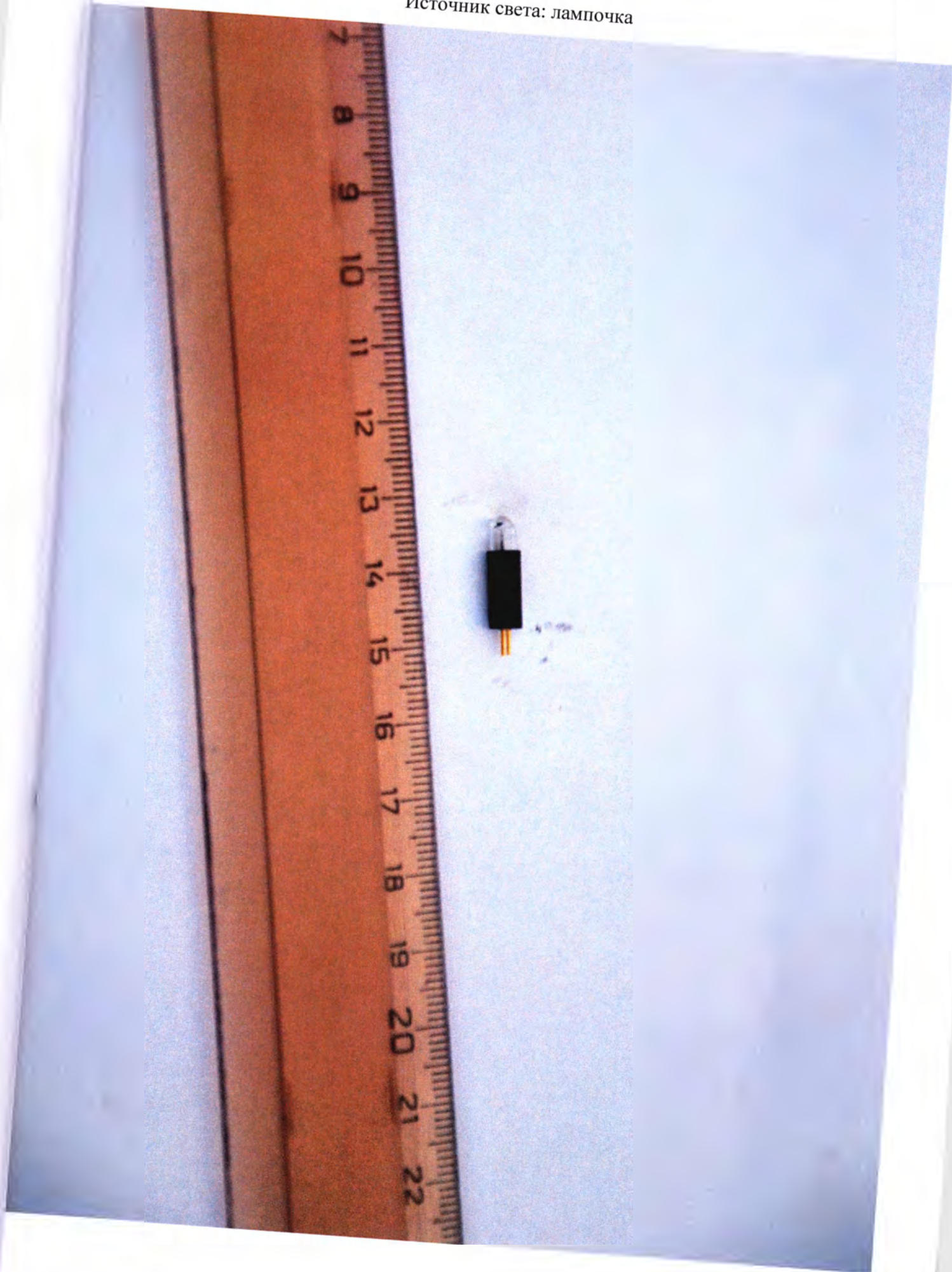




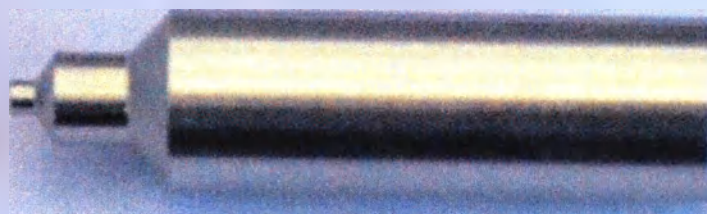

Смазка специальная: 100мл, 150 мл, 200мл, 250 мл, 300мл, 350мл, 400мл, 450мл, 500мл, картридж

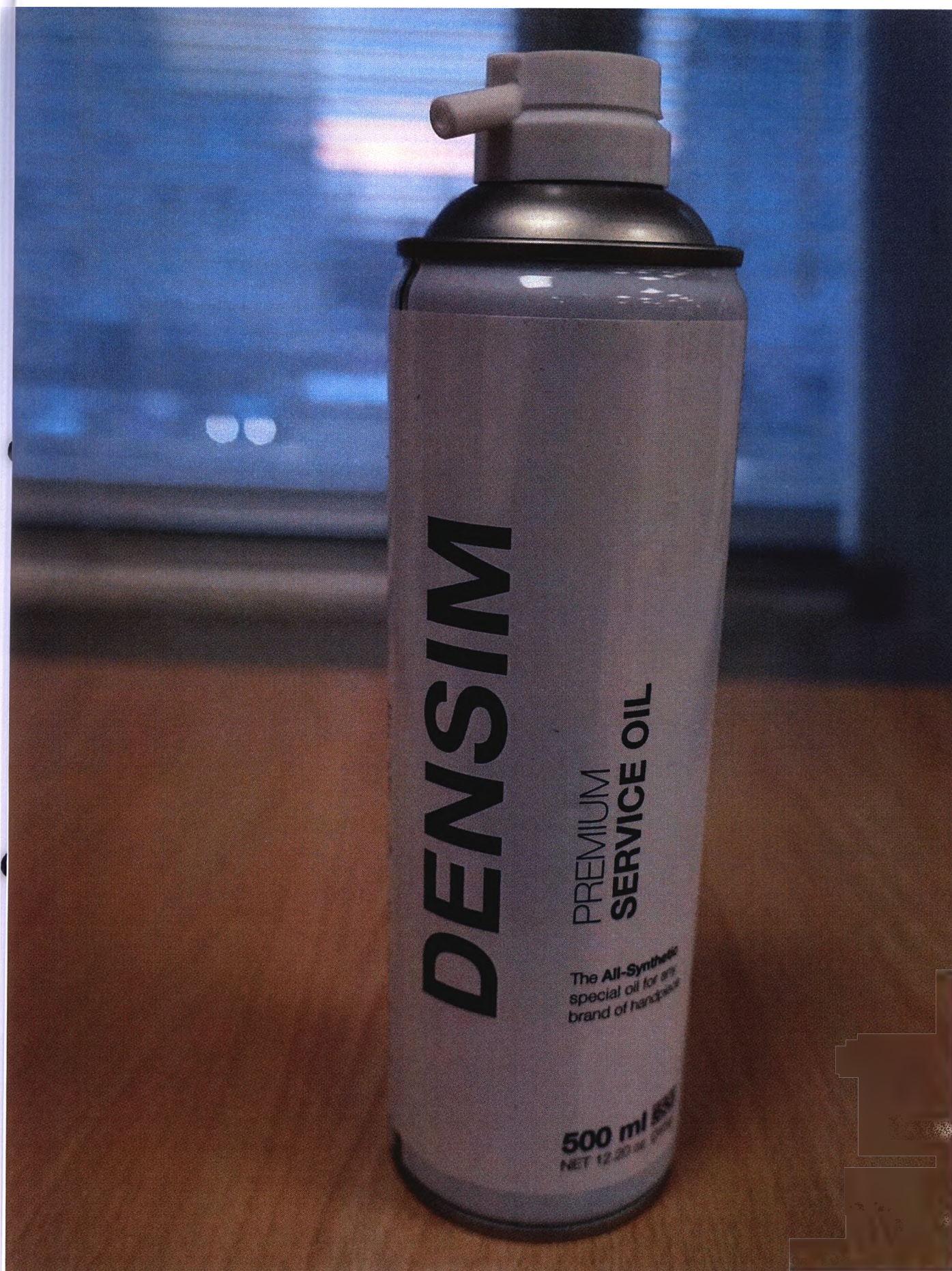

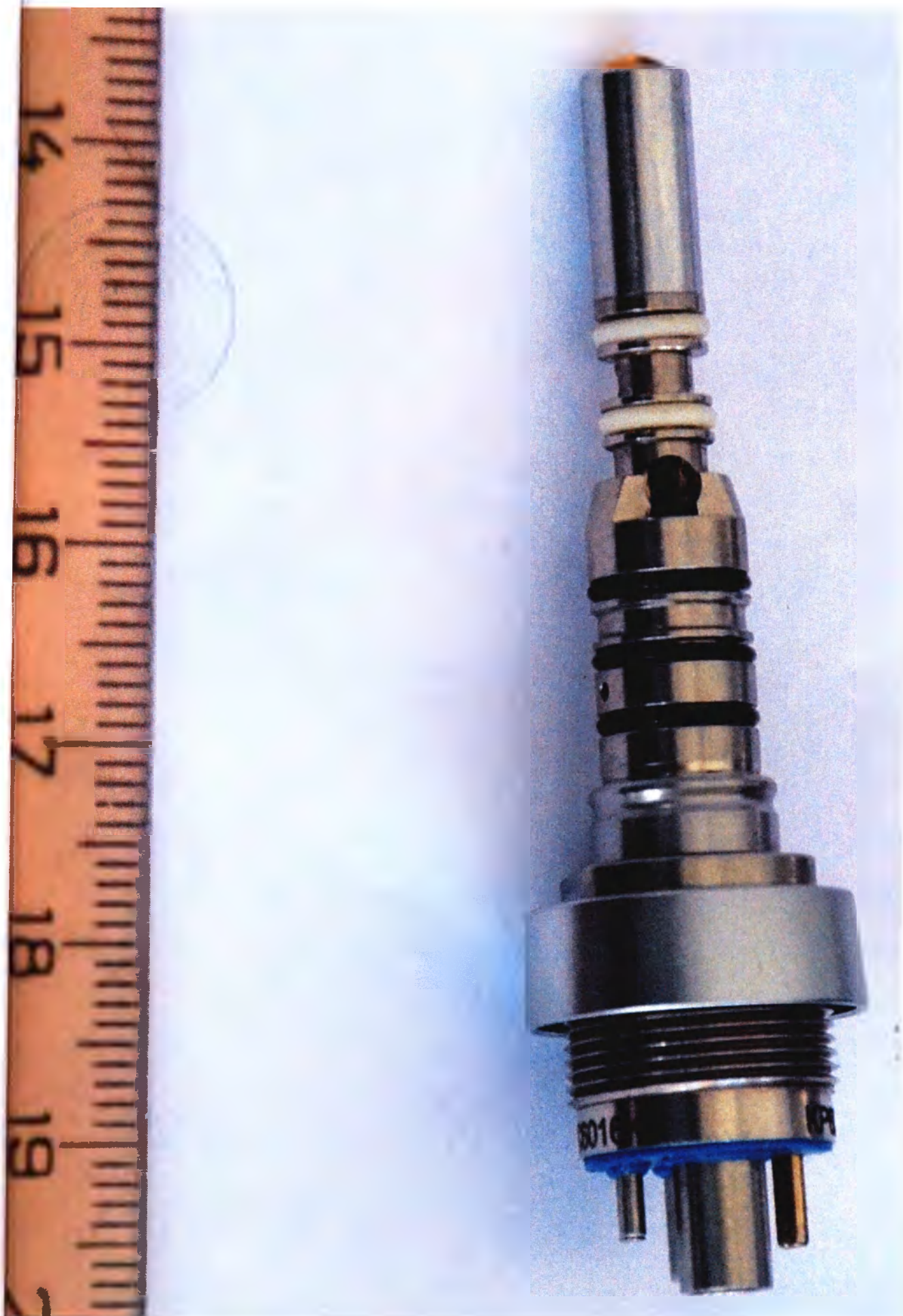

Главный врач

ФГБУЗ «Клинический центр стоматологии Федерального
медико-биологического агентства», д.м.н., профессор



В.Н. Олесова
В.Н. Олесова

29 марта 2016г.

Протокол пронумеровано 135 (сто тридцать пять) листов