

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава представительства в России
Компании «Фрезениус Каби Дойчланд
ГмбХ»



Александар Маглов

«24» июня 2010 г.

Инструкция по эксплуатации

«Система для вливаний Infudrop Air PP»

производства «Fresenius Kabi AG» («Фрезениус Каби АГ»), Германия

«Система для вливаний Infudrop Air PP»

Техническое описание.

Система для вливаний предназначена для вливания инфузионных растворов из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров. Система для вливаний обеспечивает гравитационную подачу лекарственных средств от флакона до инфузионной иглы. Скорость подачи лекарственного средства регулируется с помощью зажима или регулятора скорости.

Меры безопасности.

Визуальным осмотром определить целостность упаковки. При наличии повреждений потребительской упаковки использовать изделие запрещается.

Форма выпуска.

Система для вливаний выпускаются в потребительской упаковке, на которой указаны следующие данные:

Наименование и товарный знак изготовителя, контактная информация.

серийный номер / номер партии.

CE 0123.

смотри инструкцию на тарной упаковке.

для однократного использования.

дата изготовления.

срок годности.

стерилизовано этиленоксидом.

арная упаковка - полиэтилен.

Способ применения.

Вскрыть потребительскую упаковку, извлечь систему.

Снять защитный колпачок, вставить иглу.

Проколоть иглой пробку флакона с лекарственным средством (флакон должен

находиться пробкой вверх).

4. Перевернуть флакон пробкой вниз.

5. Дождаться начала поступления лекарственного средства в камеру.

6. Открыть заглушку.

7. Открыть роликовый зажим.

5. Хранение.

Температура рабочая $0 + 40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности 30-75%

Транспортировка и хранение: $-40^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности до 80%

Избегайте воздействия пыли, прямых солнечных лучей, влаги, механических воздействий.

Глава представительства в России

Компании «Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ», Германия

Александар Маглов

«24» июня 2010 г.



14.1
Посту
СТАТ
Уд
ПРОП
ЕН
СЕР

Госпа Триветавитиенка в России
Континент, Фригиде Кода Рейчманг Рай
Александр Иванович

