



**Набор реагентов Диагностикум сальмонеллезный Vi-антигенный для РПГА (СЭД-Vi).
внешний вид.**

Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный для РПГА» (СЭД-Vi) состав набора.



ФБУН ЦИМЭ эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера
Отдел Новых Технологий

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный для РПГА» (СЭД-Vi)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов предназначен для выявления антител к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа в сыворотках крови в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА).

ПРИНЦИП МЕТОДА

При наличии антител к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа происходит агглютинация куриных эритроцитов, sensibilizированных Vi-антигеном, которая проявляется на дне лунок планшета с U-образным дном в виде перевернутого «зонтика». При отсутствии антител к Vi-антигену осевшие эритроциты образуют «точку».

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Набор рассчитан на исследование 42 сывороток крови в варианте скрининга или 10 сывороток крови в варианте их раститровки.

Наименование реагента	Описание			Количество в наборе
Сальмонеллезный	Сухая	гигроскопичная	пористая масса	







**ПЛАНШЕТ ПОЛИМЕРНЫЙ
ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9398-057-00480230-2009

РН₀ ФС 416

РИЛЬНО

14 года с 01.01.2017

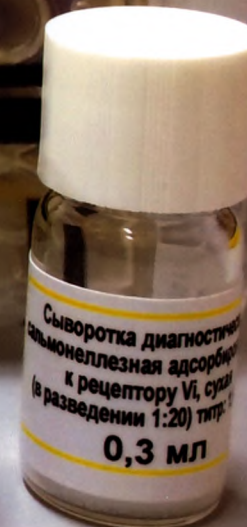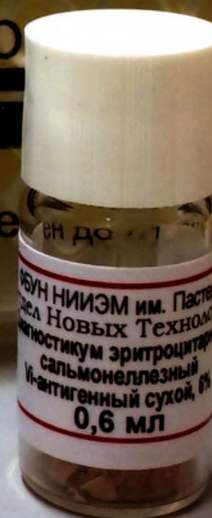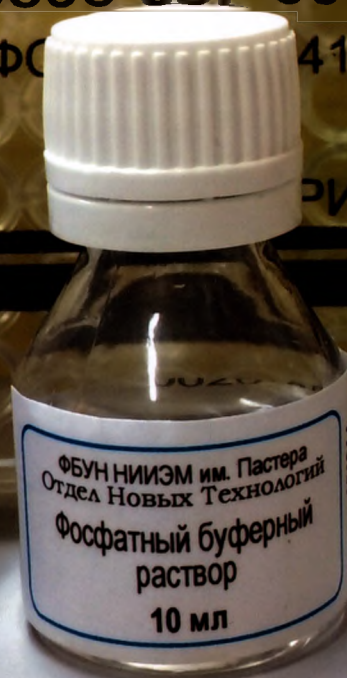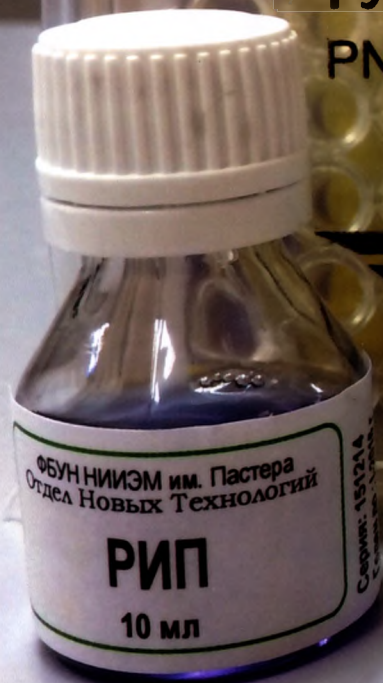

Набор СЭД-Vi.