


НАБОР МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА СО СМЕШАННЫМ ПРИЕМОМ НМС-"КПЗ"

Руководство по эксплуатации

КИУС.324653.001 РЭ



ИМ10

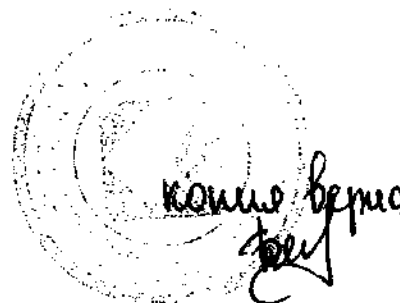

№ подл.	Подп. и дата	Взам. №	Инв. № дубл.	Подп и дата

Содержание

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
1.1 Назначение изделия	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Состав изделия	3
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9
2.1 Эксплуатационные ограничения	9
2.2 Подготовка изделия к использованию	9
3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	9
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10
5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	10
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	11
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11
Приложения:	
1. Порядок сборки столика стоматологического	12
2. Талоны на гарантийный ремонт №1, №2	14
3. Сертификат соответствия	15
4. Регистрационное удостоверение	16

Перв. примен.

Справа: №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

№ подл.

5	зам	КИУС.324653.001 РЭ	22.11.10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Байгужинова		
Пров.			
Соглас.			
Н. контр.	Опейник		

КИУС.324653.001 РЭ

Набор мебели для стоматологического кабинета со смешанным приемом
НМС – «КПЗ»
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
	2	17

продолжение таблицы 1

1	2	3	4
3. Стол-тумба медицинский с выдвижными ящиками:			
– с двумя ящиками	КИУС.942818.004-07 – CE 123	30,0	1
	КИУС.942818.021-07 – CE 123M	30,0	1
– с тремя ящиками;	КИУС.942818.004-06 – CE 122	32,5	1
	КИУС.942818.021-06 – CE 122M	32,5	1
– с четырьмя ящиками;	КИУС.942818.004-02 – CE 120	35,0	1
	КИУС.942818.021-02 – CE 120M	35,0	1
	КИУС.942818.004-03 – CE 121	34,5	1
	КИУС.942818.021-03 – CE 121M	34,5	1
– с пятью ящиками;	КИУС.942818.004 – CE 118	37,0	1
	КИУС.942818.021 – CE 118M	34,5	1
	КИУС.942818.004-01 – CE 119	37,5	1
	КИУС.942818.021-01 – CE 119M	37,5	1
– с шестью ящиками;	КИУС.942818.004-04 – CE 117	38,5	1
	КИУС.942818.021-04 – CE 117M	38,5	1
– с восемью ящиками	КИУС.942818.004-05 – CE 113	42,5	1
	КИУС.942818.021-05 – CE 113M	42,5	1
4 Стол-тумба медицинский с выдвижными ящиками передвижной *			
	КИУС.942818.001 – CE 103	44,0	1
	КИУС.942818.001 – 01 -//-	47,0	1
	КИУС.942818.009 – CE 103-1	41,0	1
	КИУС.942818.009-01 -//-	41,0	1
	КИУС.942818.020 – CE 103M	44,2	1
	КИУС.942818.028 – CE 103-2	43,0	1
	КИУС.942818.030 – CE 103-3	41,4	1
	КИУС.942818.019 – CE103Y	42,2	1
5 Стол-тумба медицинский с полкой и выдвижным ящиком			
	КИУС.942818.005 – CE 108	25,0	1
	КИУС.942818.029 – CE 108M	27,0	1
	КИУС.942818.005-01 – CE 109	24,5	1
	КИУС.942818.029 01 – CE 109M	24,5	1
	КИУС.942818.018 – CE 109-1	29,5	1
	КИУС.942818.016 – CE 108-1	30,5	1
	КИУС.942818.025 – CE 108-2	45,0	1
* В комплект поставки стола – тумбы (CE 103, CE 103-1, CE 103M, CE 103-2, CE 103-3, CE 103Y) входят: • Стекло • Колесо 1410 PH0 050 P30 - 2шт. • Колесо 1415 PH0 050 P30 - 2шт. • Винт ГОСТ 17473-80 - M10-6x25..36.019 – 4 шт. • Шайба ГОСТ 6402-70 - 10.65Г.019 – 4 шт.			

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

1	2	3	4
6 Шкаф медицинский на- весной для хранения стомато- логических материалов: – с металлическими дверями; – со стеклянными дверями	КИУС.942818.007 – L 032 КИУС.942818.007-01 -//- КИУС.324259.007 – L 032M КИУС.942818.006 – L 031 КИУС.942818.006-01 -//- КИУС.324259.006 – L031M	32 32 32,5 29,5 30,0 30,0	1 1 1 1 1 1
7 Шкаф-стойка медицинский со стеклянной и металлической дверями и двумя ящиками	КИУС.942818.027 – CE 207	63	1
8 Шкаф медицинский	КИУС.324259.003 – ШМ1/4 "ПЗ"	55,0	1
9 Шкаф медицинский	КИУС.324259.004 – ШМ2/4 "ПЗ"	70,0	1
10 Шкаф медицинский трехсек- ционный	КИУС.324259.005	55	1
11 Стол стоматологический сборный	КИУС.942813.002	9	1
12 Столешница*	КИУС.325542.001		
13 Столешница угловая*			
Эксплуатационная документа- ция Руководство по эксплуатации	КИУС.324653.001 РЭ		

*Поставляются по отдельному заказу

1.3.2 Набор мебели по заявке заказчика может состоять из различного количества, различных комбинаций и вариантов шкафов медицинских, столов-тумб медицинских.

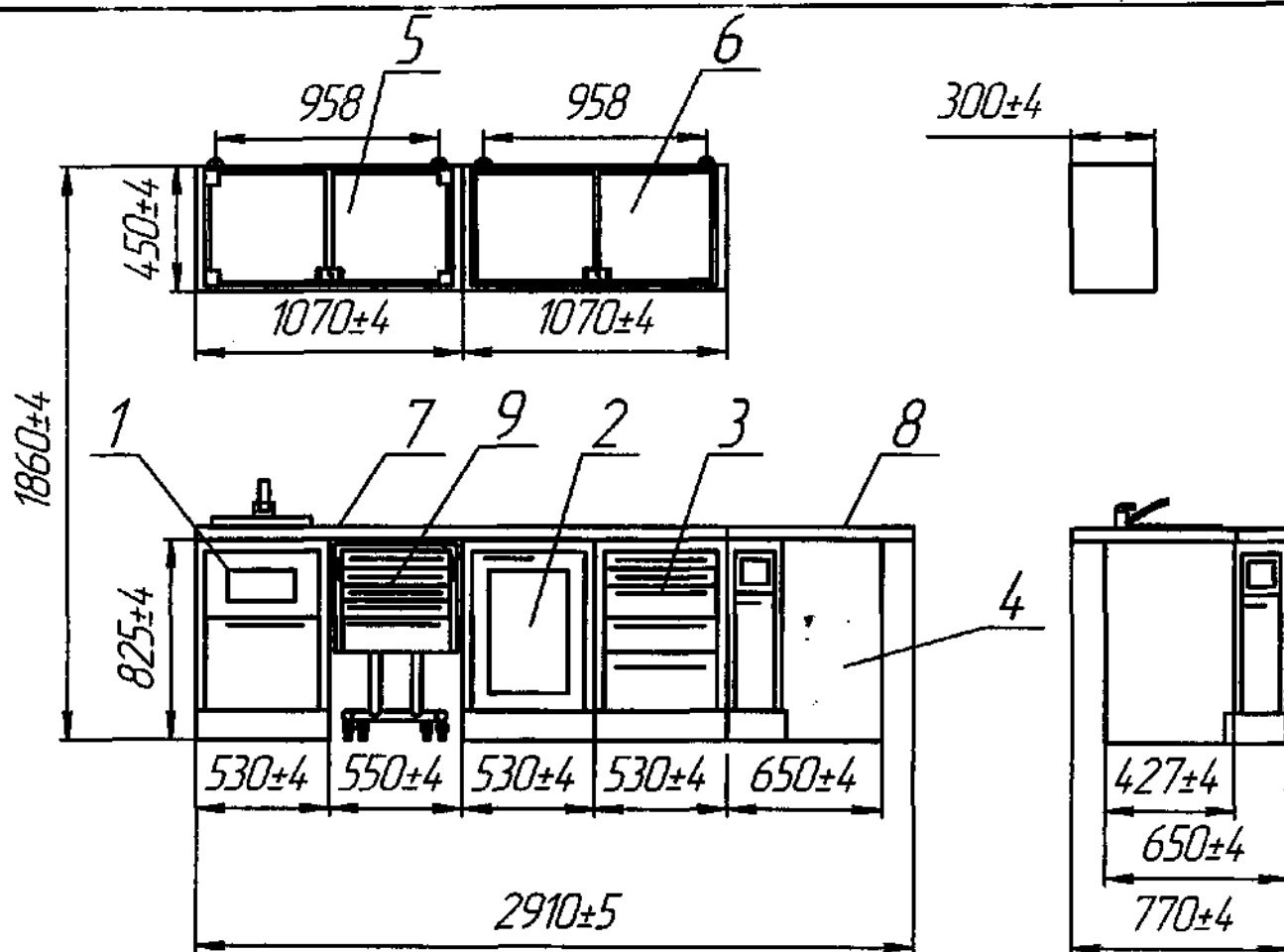


Рисунок 1


- 1 - стол-тумба под раковину (СЕ 104, СЕ 104М);
- 2 - стол-тумба с полками, (СЕ107, СЕ 107-1, СЕ 107-1М, СЕ 106, СЕ 106М, СЕ 108, СЕ 108-1, СЕ 108-2, СЕ 109, СЕ 109-1, СЕ110-2, СЕ110-2М);
- 3 - стол - тумба с выдвижными ящиками (СЕ 123, СЕ 123М, СЕ 122, СЕ 122М, СЕ 120, СЕ 120М, СЕ121, СЕ121М, СЕ 118, СЕ 118М, СЕ 119, СЕ 119М, СЕ 117, СЕ 117М, СЕ 113, СЕ 113М);
- 4 - стол тумба углового исполнения (СЕ 135, СЕ 137П, 137Л);
- 5 - шкаф навесной со стеклянными дверями(L 031, L 031М);
- 6 - шкаф навесной с металлическими дверями (L 032, L 032М);
- 7 - столешница;
- 8 - столешница угловая;
- 9 - стол-тумба передвижной (СЕ 103, СЕ 103-1, СЕ 103М, СЕ 103-2, СЕ 103-3 СЕ 103У).

Подп. и дата

Взам. инв. № дубл.

Подп. и дата

з. № подл.

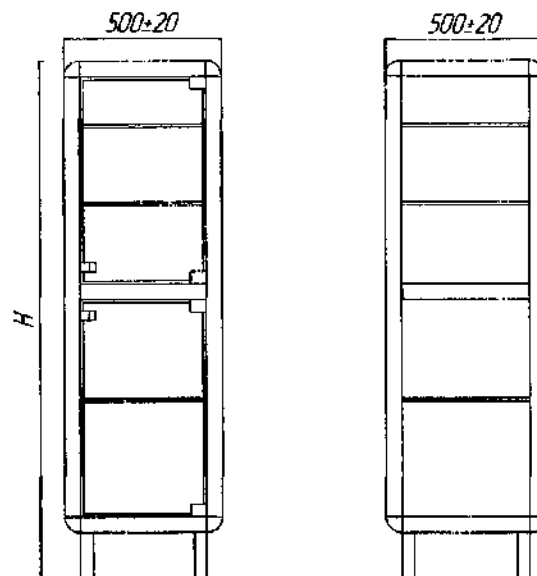

Обозначение	H, мм
КИУС.324259.003	1650±20
КИУС.324259.005	1860±20

Рисунок 2 Шкаф медицинский ШМ 1/4-"ПЗ" – КИУС.324259.003
Шкаф медицинский трехсекционный – КИУС.324259.005

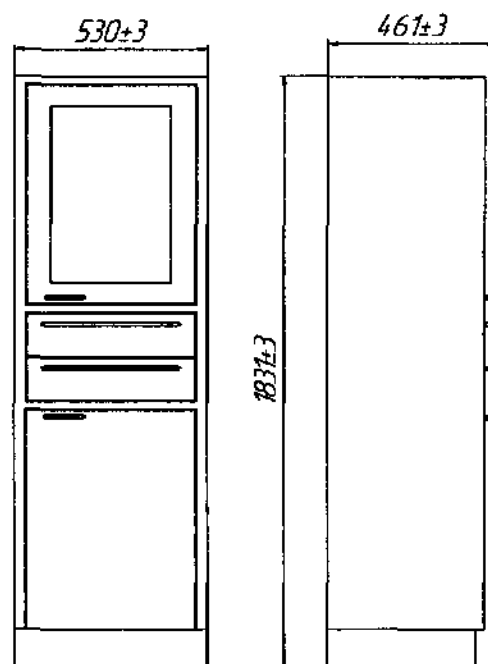


Рисунок 3 – Шкаф-стойка медицинский CE-207

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
5	30.04	КИУС.5.2776		

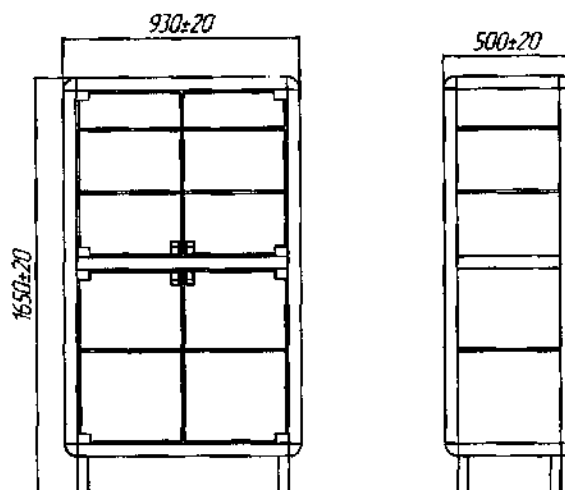


Рисунок 4 - Шкаф медицинский ШМ 2/4-"ПЗ"

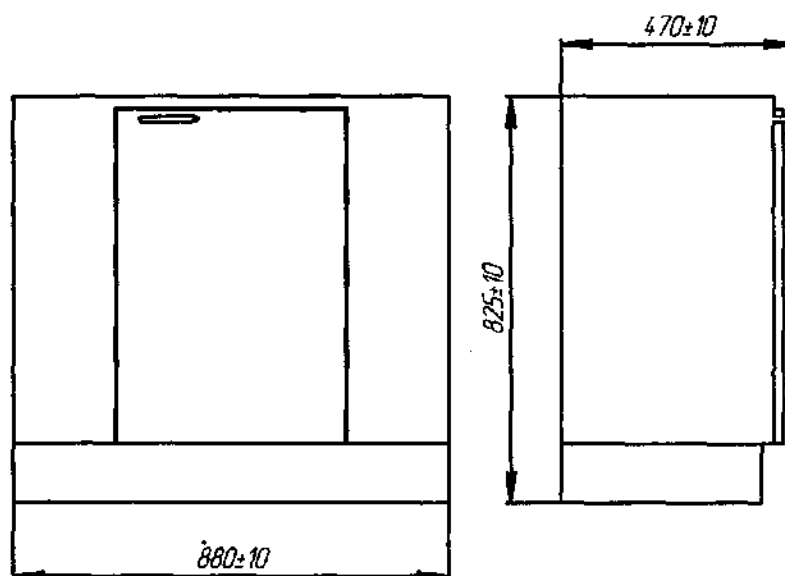


Рисунок 5 – Стол – тумба под раковину CE 307

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
5	30.07.2018	КИУС.5.2776		

5	30.07.2018	КИУС.5.2776		
---	------------	-------------	--	--

КИУС.324653.001РЭ

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Условия эксплуатации:

- температура помещения – от +10°C до +35°C
 - относительная влажность – не более 80% при температуре +25°C
- #### 2.1.2 Нагрузка на каждую стеклянную полку набора мебели – не более 3 кг.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 После транспортирования набора в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

2.2.2 Перед эксплуатацией набора провести дезинфекционную обработку рабочих поверхностей в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-98 раствором пищевой соды или моющими средствами (типа "Лотос", "Астра"), затем тщательно отмывают от остатков моющих средств питьевой водой. После этого рабочие поверхности набора протирают 6% раствором перекиси водорода и высушивают.

2.2.3 Порядок сборки набора мебели (см. рис.1)

Установить угловую столешницу поз.8, поставляемую по отдельному заказу, в соответствии с базовыми отверстиями крепежных кронштейнов стола-тумбы углового исполнения и закрепить их в горизонтальном положении.

Установить столешницу поз. 7, поставляемую по отдельному заказу, на стол-тумбу прямого исполнения поз. 1 и столы-тумбы поз. 2, 3 соответственно по базовым отверстиям крепежных кронштейнов столов-тумб, выдержав габаритные размеры 530 мм, 550 мм и 2140 мм. Расположение столов-тумб поз. 1, 2, 3 может быть изменено по желанию потребителя. Затем установить на стол-тумбу прямого исполнения поз.1 смеситель и раковину.

Установить стол-тумбу углового исполнения со столешницей в соответствии с примером установки, выдерживая размер 2910 мм. Установить на место стол-тумбу передвижной поз.9, при этом прикрепить колеса с помощью винтов М10-6х25.36.019, шайб 10.65Г.019 и зафиксировать тормозом. Закрепить шкафы навесные в соответствии с примером установки, выдерживая размер 1860 мм.

2.2.4 Порядок сборки стола стоматологического сборного приведен в приложении 1.

3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1 Упакованный набор должен храниться в помещении при температуре от минус 50°C до +40°C.

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха - 75% при 15°C, верхнее значение – 100% при 25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

3.2 Транспортирование набора производится всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Условия транспортирования набора в части воздействия климатических факторов:

- температура от минус 50 °C до + 50 °C;
- среднегодовое значение относительной влажности воздуха - 75% при 15°C, верхнее значение – 100% при 25°C

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие набора мебели требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в технических условиях и указанных в настоящем руководстве.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации набора мебели – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

4.3. Гарантийный ремонт набора мебели осуществляется ремонтными предприятиями, обслуживающими организацию потребителя в данной области, крае, республике за счет завода-изготовителя.

4.4 Набор мебели принимается на гарантийный ремонт только в неповрежденной упаковке завода-изготовителя, в противном случае гарантийный ремонт не производится.

4.5. Потребитель теряет право на гарантийный ремонт набора мебели, если набор мебели в период гарантийного срока вышел из строя в результате неправильной эксплуатации или в случае самостоятельного ремонта.

4.6. Изделие сертифицировано.

4.7 Адрес завода-изготовителя:

ФГУП ГРПЗ – филиал Касимовский приборный завод

Россия, 391300, г. Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, 3.

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1 Претензии в адрес завода-изготовителя представляются в случае невозможности ремонта набора (шкафа) на ремонтном предприятии.

5.2 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

5.3 Рекламация, полученная заводом-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

5.4 Для определения причин поломки необходимо составить акт.

5.5 К рекламации следует приложить:

- акт ввода шкафа в эксплуатацию;
- заполненный гарантийный талон;
- заключение комиссии, составившей акт о причине поломки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Участие в комиссии представителя ремонтной организации обязательно.

5.6 Если в течение гарантийного срока шкаф вышел из строя по вине потребителя, то претензии не принимаются.

5.7 Рекламации на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.

Подп. и дата	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Набор мебели НМС-"КПЗ"
наименование изделия

КИУС. 324653.001
обозначение

№
зав. номер

упакован ФГУП ГРПЗ – филиал Касимовский приборный завод
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мебели НМС-"КПЗ"
наименование изделия

КИУС. 324653.001
обозначение

№
зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным (ой) для эксплуатации

Начальник цеха 382

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Мастер цеха

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Подп. и дата

Взам. инв. № дубл.

Подп. и дата

№ подл.

КИУС.2776

INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Дата

КИУС.324653.001РЭ

Лис

11

Приложение 1

Порядок сборки стола стоматологического сборного

- 1 Прикрепить колеса к стойкам с помощью винтов М10х14, шайб 10 и зафиксировать тормозом.
- 2 Порядок дальнейшей сборки – в соответствии с рисунком 2, 3
- 3 Крепеж – в соответствии с комплектом поставки-таблица 1
- 4 Положить стекла на столешницы.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.(шт)
Столешница верхняя	P3.031.01.00	1
Столешница нижняя	P3.031.02.00	1
Стойка правая	P3.031.03.00	1
Стойка левая	P3.031.03.00-01	1
Полка верхняя	P3.031.04.00	1
Полка нижняя	P3.031.01.01	1
Стекло 5x394x594	P3.001.00.03	1
Стекло 5x244x538	P3.001.00.04	1
Опора	P3.031.00.11	1
Винт М6х8		28
Винт М10х14	КИУС.758121.006-01	4
Гайка М6 колпачковая		24
Шайба 10		4
Колесо "Tente" 1410 PH0 050 P30		2
Колесо "Tente" 1415 PH0 050 P30		2

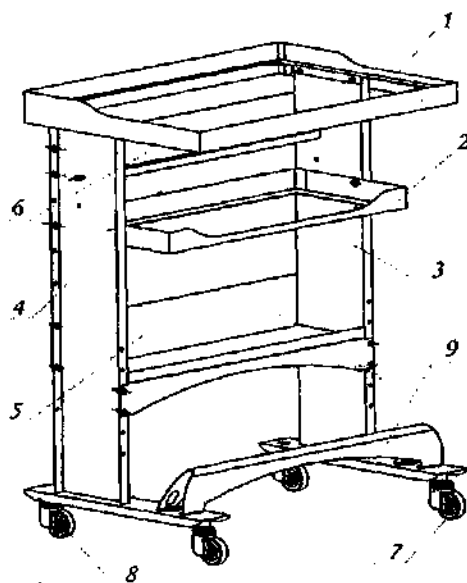


Рисунок 1

Габаритные размеры стола стоматологического сборного без колес (ШхГхВ) - (645х400х782)±10 мм

1-столешница верхняя, 2-столешница нижняя, 3-стойка правая, 4-стойка левая, 5-полка нижняя, 6-полка верхняя, 7-колесо с тормозом, 8-колесо, 9-опора.

Подп. и дата

Взам. инв. № дубл.

Подп. и дата

в. № подл.

КИУС.2776

КИУС.324653.001РЭ

Лис

12

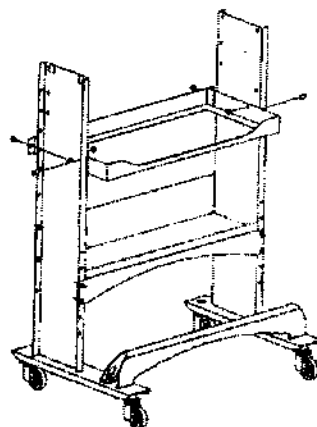
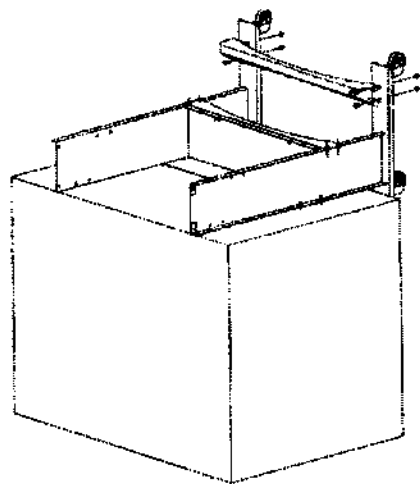


Рисунок 2

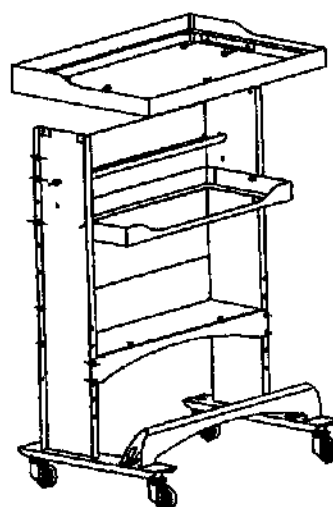
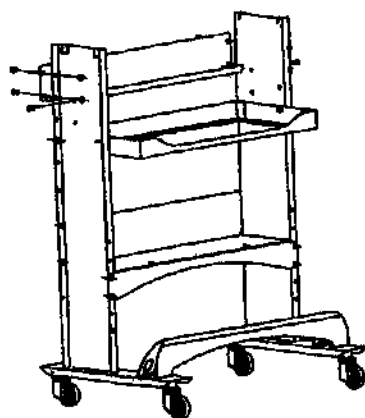


Рисунок 3

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Приложение 2

ФГУП ГРПЗ –филиал Касимовский приборный завод
РОССИЯ, 391300, г.Касимов, Рязанской обл., ул. Индустриальная, 3
ТАЛОН № 1
на бесплатный ремонт в течение гарантийного срока
НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
СО СМЕШАННЫМ ПРИЕМОМ НМС –"КПЗ".

№ _____ Дата выпуска _____ 20 г.

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____
М. П.

Подпись руководителя учреждения владельца _____
М. П.

ФГУП ГРПЗ –филиал Касимовский приборный завод
РОССИЯ, 391300, г.Касимов, Рязанской обл., ул. Индустриальная, 3
ТАЛОН № 2
на бесплатный ремонт в течение гарантийного срока
НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
СО СМЕШАННЫМ ПРИЕМОМ НМС –"КПЗ".

№ _____ Дата выпуска _____ 20 г.

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____
М. П.

Подпись руководителя учреждения владельца _____
М. П.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КИУС.5.2776

КИУС.324653.001РЭ

Лис

14

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФГУП ГРПЗ - филиал - «Касимовский приборный завод»
ИНН 6231034495
391300, г.Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, д. 3
тел. (49131) 2-48-73, факс (49131) 2-29-21

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ФГУП ГРПЗ - филиал - «Касимовский приборный завод»
ИНН 6231034495

391300, г.Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, д. 3
тел. (49131) 2-48-73, факс (49131) 2-29-21

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 898С/7009 от 22.09.2009г. испытательной лабораторией АНО «ЭНПЦ СР «МЕТЕОБЕЗУПРАВЛЕНИЕ-ТЕСТ» регистрационный номер в Государстве Росс. RI.0001.21NM15 от 29.01.2009г. и регистрационный №08106сертификат Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФФ.02013466/3681-06 от 24.07.2006г.

АПОДТЕКАРЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 в соответствии с товарным знаком



командир органа
Эксперт

В.Б. Цибиков

Б.А. Цибиков

С сертификатом имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

№9	КИУС.2776		
Из 1-ст	№ докум.	Подп.	Дата

КИУС.324653.001РЭ

Приложение 3
Сертификат соответствия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.РЕ.ПМ10.ВН898

Срок действия с 23 сентября 2009г. по 24 июля 2011г.

0102918

Орган по сертификации «РОСС.РЕ.ПМ10.ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РА-
ДИОЭЛЕКТРИКИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АНО «ИСТЕСТ» ИЛИ «МЕДБОРУ-
ДОВАНИЕ-ТЕСТ», 117246, г.Москва, Новочерный проезд, д.6, т.е/факс 727-21-58

ПРОДУКЦИЯ

Наборы мебелинской мебели для стоматологических кабинетов
с автоматизированным приемом ИМС-«КПЗ», выпускаться серийно
по ТУ 9452-027-41457390-2006

ИЗД. 1/06.005.1.00.10

945210

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267-0-92,
ГОСТ Р 50267.0.2-2005

г. Москва, ТП Р-24.10.00.00

Приложение 4
Регистрационное удостоверение



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФС 02013466/3481-06

от 24 июля 2006 года

Действительно до 24 июля 2011 года

ИЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Код ОКП 94 5210

Набор медицинской мебели для стоматологического кабинета со смешанным приемом НМС-"КПЗ".

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ТУ 9452-027-41457390-2006

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФГУП ГРПЗ-филиал-Касимовский приборный завод,
г.Касимов, Рязанская область, ОГТЮ 41457390

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ИЗДАНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Государственная регистрация предусмотрена надзор за промышленностью
в целях обеспечения безопасности, качества, эффективности,
церектрированных и лаской медицинского назначения и медицинской техники

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Г.В. Хабриева

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взм. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Изн.	№ докум.	Подп.	Дата
Изн.	КИУС.2776		
Изн.			

КИУС.324653.001РЭ

Лист регистрации изменений

[illegible]

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Прошито и скреплено печатью
17 (сорок семь) листов

Исп. Бородин И. С.

