

ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОЛИМЕРА TFE (ПТФЭ) НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА – СТЕРИЛЬНЫЙ –

ОПИСАНИЕ

Прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) изготовлены из политетрафторэтиленового войлока. Прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) состоят из простого войлока (мягкие прокладки) или войлока, пропитанного дисперсией полимера TFE (ПТФЭ) (твердые прокладки).

Прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) поставляются различных размеров и могут быть вырезаны до требуемого размера в соответствии с индивидуальным дефектом. Подробности содержатся в каталоге.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) предназначены для применения в сердечной хирургии, в качестве поддержки для затягиваемых швов в тех случаях, когда существует возможность разрыва рыхлой ткани. Примерами такого применения могут служить: зашивание сосудов, восстановление перегородки, зашивание миокарда и восстановление или замена клапана. Прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) можно также использовать и для других видов наложения швов в хирургии, таких как операции на печени или зашивание брюшной стенки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) поставляются различных размеров и, при необходимости, можно вырезать прокладку нужного размера, в соответствии с анатомическими требованиями. Прокладки из TFE (ПТФЭ) полимера пришиваются на месте. Во избежание вырывания шовного материала из прокладки, швы необходимо накладывать на расстоянии не менее 1 мм от обрезанного края прокладки.

ДЕЙСТВИЕ

Прокладки из TFE (ПТФЭ) полимера обычно используют в рыхлых тканях и паренхиме органов. Они защищают шов и ткань, позволяя избежать вырывания или разрезания ткани нитью шовного материала.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Из-за риска осыпания волокон не используйте мягкие прокладки из полимера TFE (ПТФЭ) в прямом контакте с кровотоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Пользователи должны быть знакомы с хирургическими процедурами и методами, в которых применяются прокладки из TFE (ПТФЭ) полимера.

Прокладки из TFE (ПТФЭ) полимера инфильтрируются соединительной тканью, что может помешать в том случае, если возникнет необходимость их удаления.

Прокладки следует выбирать и имплантировать, сообразуясь с состоянием пациента, а также с опытом хирурга и применяемым хирургическим методом. При работе с инфицированными или зараженными ранами следует использовать принятые в этих случаях хирургические методы.

Следует следить за тем, чтобы швы были наложены на расстоянии не менее 1 мм от обрезанного края прокладки. Если при зашивании нить порвалась, то прокладку следует выбросить.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, вызванные применением этого материала, включают временную воспалительную реакцию на инородное тело.

Как любое другое инородное тело, прокладки из TFE (ПТФЭ) полимера могут усилить уже имеющуюся инфекцию.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Прокладки из TFE (ПТФЭ) полимера стерилизованы окисью этилена. Не подвергать повторной стерилизации! Не использовать, если упаковка была вскрыта или повреждена! Выбрасывать вскрытые, но не использованные продукты!

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуемые условия хранения: при температуре ниже 25° С, беречь от влаги и прямого воздействия тепла. Не использовать после истечения срока годности.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ



= Не подлежит повторному использованию.



= Годен до: год, месяц.

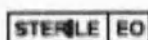

= Гарантия стерильности при наличии не вскрытой или неповрежденной наружной упаковки.

Метод стерилизации:

обработка оксидом этилена



= Торговый знак ЕС и регистрационный номер производителя. Продукция отвечает основным требованиям общеевропейского регламента 93/42/ЕЭС, предъявляемым к медицинским материалам и оборудованию.



= Номер производственной серии



= Внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию!

Менеджер

Иванов И.А.
Иванов И.А.
Иванов И.А.

