


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АЗИМУТ»

**СТОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ ПРИБОРНАЯ
СМП-01**

**П а с п о р т
НЖ.ТН.324545.003 ПС**

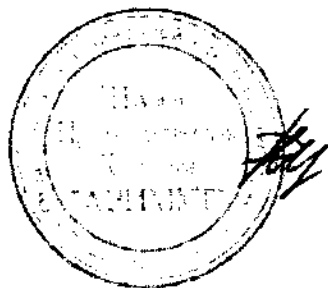

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплект поставки	3
4. Устройство и порядок подготовки к работе	4
5. Дезинфекция	5
6. Указания по безопасности	5
7. Техническое обслуживание	5
8. Правила хранения	6
9. Гарантии изготовителя	6
10. Сведения о рекламациях	6
11. Свидетельство о приемке	8
12. Свидетельство о консервации	8
13. Свидетельство об упаковке	8
14. Гарантийные талоны	9

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Стойка медицинская приборная СМП-01 (в дальнейшем – стойка) предназначена для размещения оборудования и приборов медицинского назначения, а также для формирования передвижных эндоскопических комплексов.
- 1.2 Область применения стойки – хирургические отделения больниц, а также в отделениях эндоскопической хирургии и диагностики.
- 1.3 Стойка изготавливается для работы в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 для работы в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°C, атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст. и относительной влажности не более 80% при температуре 25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Напряжение и частота питающей сети, В/Гц 220(±10%)/50
- 2.2 Нагрузка на полку, не более, кг.....30
- 2.3 Угол поворота панели верхней полки, градус.....±(20°±2°)
- 2.4 Шаг установки полок, мм.....(50±1,5)
- 2.5 Габаритные размеры стойки, (± 50) мм:
 - размеры стойки в плане.....660х650
 - размеры стойки в плане при развернутых колесах наружу.....660х800
 - размеры высоты стоек:
 - модель 420.....1050
 - модель 520.....1330
 - модель 620.....1630
- 2.6 Габаритные размеры полки, мм.....450х550
- 2.7 Диаметр колеса, мм.....125
- 2.8 Масса стойки в сборе, не более, кг.....80
- 2.9 Средний срок службы, лет.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 В комплект поставки стойки входят изделия и эксплуатационные документы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество, входящее в модели стойки СМП-01		
			Модель 420	Модель 520	Модель 620
1	Основание	ТИПЦ 301314.000	1	1	1
2	Полка	ТИПЦ 325724.000	1	2	3
3	Полка с ручкой	ТИПЦ 325724.002	1	1	1
4	Опора	ТИПЦ 301329.000	2	2	2

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество, входящее в модели стойки СМП-01		
			Модель 420	Модель 520	Модель 620
5	Контейнер	ТИПЦ 323278.001	1	1	1
6	Болт М8-6gx25.36.013	ГОСТ 7805-70	4	4	4
7	Болт ВМ6-6gx16.36.013	ГОСТ 50405-92	12	16	20
8	Винт ВМ5-6gx 10.58.046	ГОСТ 1491-80	4	4	4
9	Пластина	ТИПЦ 741138.000	2	2	2
10	Пластина	ТИПЦ 741138.000-01	2	2	2
11	Паспорт	ТИПЦ 324545.003ПС	1	1	1
	Дополнительное оборудование: ♦				
1	Полка выдвижная для клавиатуры				
2	Кронштейн для баллона				
3	Боковая полка				
4	Поворотная полка для TV- монитора				
5	Поворотный кронштейн для монитора				
6	Выдвижной штатив для крепления гибких эндоскопов				
7	Канал для укладки кабеля				

♦ Поставляется по согласованной спецификации Заказчика

4 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

4.1 Общие указания

- 4.1.1 Стойка представляет собой этажерчатую конструкцию, опирающуюся на четыре поворотных колеса с тормозными механизмами на двух передних колесах.
- 4.1.2 Стойка может легко перемещаться в любом направлении и надежно фиксироваться тормозами в выбранном положении.
- 4.1.3 В нижней части стойки расположен контейнер для хранения инструмента, расходного материала и пр.
- 4.1.4 На задней стороне стойки расположены: устройство для закрепления электропроводов, винт заземления, колодка с розетками для подключения аппаратуры.
- 4.1.5 Для подсоединения электропитания в стойке использованы розетки типа «Евро».

4.2 Подготовка к работе

- 4.2.1 Для обеспечения длительной работы стойки должны быть исключены ее удары и резкие встряхивания.
- 4.2.2 После пребывания при пониженных температурах стойка должна быть выдержана в упаковочной таре в течение не менее 6 часов при комнатной температуре.
- 4.3 Методика проверки
- 4.3.1 Извлеките составляющие стойки из упаковки, проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 4.3.2 Произведите сборку составляющих стойки как это указано в «Инструкции по монтажу».
- 4.3.2 Перед включение стойки в сеть произведите соединение кабеля заземления с заземляющим контуром.
- 4.3.3 При включении тумблера подачи напряжения питания загорается индикатор.



ВНИМАНИЕ! Перед включением питающего напряжения убедитесь в надежном заземлении стойки и наличии заземления в контакте евророзеток.

5 ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- 5.1 Дезинфекцию стойки проводят 2-3-х кратным протиранием 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или аналогичным ему или 1% раствором хлормина.
- 5.2 После дезинфекции протрите стойку сухим марлевым тампоном.
- 5.3 Допускается проведение дезинфекции методами, указанными в МУ 287-113.

6 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 К работе со стойкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по ТБ при эксплуатации электроустановок с рабочим напряжением до 1000 В.
- 6.2 В аварийных ситуациях необходимо отключать стойку от питающей сети.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 При соблюдении правил эксплуатации и транспортирования стойка не требует технического обслуживания.
- 7.2 Проведение ремонтных работ должны производиться на полностью обесточенной стойке.
- 7.3 Ремонтные работы на стойке должны выполняться в центре технического обслуживания и ремонта или на предприятии-изготовителе.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Стойка должна храниться в штатной упаковке по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 3 года.
- 8.2 Воздух в помещении, где хранится стойка, не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
- 8.3 Допускается транспортирование упакованных стоек в период эксплуатации всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, по ГОСТ Р 50444-92 в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. Условия транспортирования - температура воздуха от минус 50 до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25°C.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.2 Гарантийный срок эксплуатации стойки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения установлен 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 9.3 В случае выхода стойки из строя в результате неправильной эксплуатации, транспортирования или хранения в период гарантийного срока стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 10.1 В случае отказа в работе стойки в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец стойки должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:
- паспорт на изделие,
 - заявку на ремонт (замену),
 - дефектную ведомость,
 - справку о проведенной перед отправкой дезинфекции изделия, заверенную печатью медицинского учреждения.
- 10.2 Изделие направляется в ремонт в штатной упаковке предприятия-изготовителя.
- 10.3 Адрес предприятия-изготовителя: НПК «АЗИМУТ»:
Россия, 195299, Санкт-Петербург, ул. Лужская, д.4, корп.3, лит.А
195256, г. Санкт-Петербург, а/я 88 (для переписки)
Отдел сервиса тел. (812) 324-63-52
E-mail: SERVICE@AZIMUT.SPB.RU
Сайт: www.npkazimut.ru
- 10.4 Все представленные рекламации регистрируются потребителем по форме таблицы 2.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 11.1 Стойка медицинская приборная СМП-01 (модель _____)
заводской № _____ соответствует требованиям
технических условий ТУ 9452-017-49985421-2010 и признана годной к
эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Подпись представителя ОТК
предприятия-изготовителя _____

МП _____

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

- 12.1 Стойка медицинская приборная СМП-01 (модель _____) заводской
№ _____ подвергнута консервации согласно требованиям
технических условий.

Консервант – силикагель КГСМ

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____

МП _____

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

- 13.1 Стойка медицинская приборная СМП-01 (модель _____) заводской
№ _____ упакована согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

МП _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники - Стойка медицинская приборная СМП-01
(модель _____), заводской № _____, дата
выпуска _____ 201 г.

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата _____

Представитель
ремонтного предприятия

Руководитель учреждения,
владелец

Подпись _____

МП

МП

Сопроводительный талон

Учреждение.....

Адрес.....

Ответственный.....

Телефон..... Факс.....

Модель..... Серийный номер.....

Дата покупки.....

Описание неисправности.....

.....

.....

.....

Дата..... Подпись.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники - Стойка медицинская приборная СМП-01
(модель _____), заводской № _____, дата
выпуска _____ 201 г.

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата _____

Представитель
ремонтного предприятия

Руководитель учреждения,
владелец

Подпись _____

МП

МП

Сопроводительный талон

Учреждение.....

Адрес.....

Ответственный.....

Телефон..... Факс.....

Модель..... Серийный номер.....

Дата покупки.....

Описание неисправности.....

.....

.....

.....

Дата..... Подпись.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники - Стойка медицинская приборная СМП-01
(модель _____), заводской № _____, дата
выпуска _____ 201 г.

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата _____

Представитель
ремонтного предприятия

Руководитель учреждения,
владелец

Подпись _____

МП

МП

Сопроводительный талон

Учреждение _____

Адрес _____

Ответственный _____

Телефон _____ Факс _____

Модель _____ Серийный номер _____

Дата покупки _____

Описание неисправности _____

Дата _____ Подпись _____